

# Amplicomms

## PowerTel 30 Forstærkertelefon



**Brugervejledning**




**Vigtigt: Denne telefon kan forstærke lyden meget kraftigt, når "+30 dB"-knappen er aktiveret. Vær opmærksom på dette, hvis telefonen bruges af andre end Dem selv.**

**Æsken indeholder:**

- 1 telefonbase
- 1 telefonrør
- 1 spiralledning til røret
- 1 tilslutningskabel + telefonstik
- 1 holder til vægmontering
- 1 brugervejledning


**Tilslutning af telefonen:**

Det anbefales at indsætte 4 stk. AA 1,5 V batterier i batterikammeret under telefonbasen. Dette sikrer at indkodede data huskes, hvis telefonen skulle være uden forbindelse til telefonnettet i mere end 3 minutter. Vær opmærksom på at batterierne placeres korrekt:

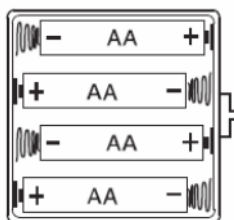


Telefonen bør ikke være tilsluttet telefonnettet, når batterierne isættes eller udskiftes.

Tilslut telefonen som illustreret:

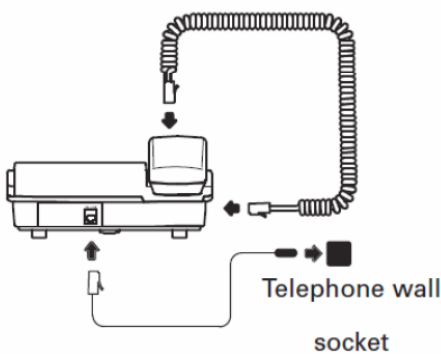

## Vægmontering:

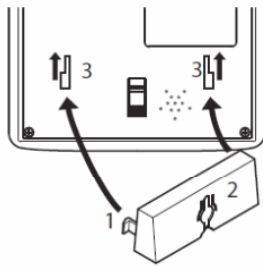

Telefonen kan monteres på væggen hvis det ønskes. Der skal bruges to skruer – én til hullet øverst på bagsiden af telefonen, og én til vægbeslaget.

Skub pallerne (1) på vægbeslaget ind i hullerne (3) på bagsiden af telefonen. Skub derefter vægbeslaget (2) 10 mm opad, indtil det klikker fast.

## Ikoner i displayet:



Indikator for batteri (udskift batteriet)

14:45

Tid

11/06

Dato



Telefonbogen er åben

**CID**

Opkaldslisten er åben

**NEW**

Opkaldet i listen er nyt



Indikerer et gentaget opkald

01

Positionsnummer på opkaldslisten

**I ALT**

Antal på opkaldslisten




**NYE**

Nye opkald på opkaldslisten



## Indstillinger:

Når du isætter batterier, eller tilslutter telefonen til telefonnettet første gang, skal du foretage nogle indstillinger.





I displayet blinker "English"(Fabriksindstilling).

Brug  eller  for at vælge det ønskede sprog (Dansk). Tryk på  for at bekræfte valget.




Displayet viser LCD Kontrast.

Brug  eller  for at vælge kontrast (1,2,3 eller4). Tryk på  for at bekræfte valget.




Displayet viser Indstil tid/dato.

Brug  eller  for at indstille timer, og bekræft med . Fortsæt derefter med minutter, dato og måned. Bekræft hver indstilling med .

Displayet viser Indstil pausetid.

Brug  eller  til at indstille pausetiden.  
NB! Dette har kun en funktion, når telefonen er tilsluttet et omstillingsanlæg. Ved privat brug bekræftes blot den værdi der blinker, ved at trykke .

Displayet viser Flash-tid.


Brug  eller  for at vælge. Normalindstillingen er 100 ms, så det er tilstrækkeligt at bekræfte ved at trykke .

Din telefon er nu indstillet og klar til brug.


## Foretag og modtag opkald

### Tast et telefonnummer:


Du kan enten løfte røret og indtaste nummeret, eller indtaste nummeret, og derefter hurtigt løfte røret.

Du har også mulighed for at indtaste nummeret og trykke . Den håndfri funktion er nu aktiveret. Under et opkald kan du se samtaletiden i displayet.


### Afslut en samtale:

Læg røret på, eller hvis du har brugt den håndfri funktion, tryk .  
(Du kan se at telefonen er på håndfri funktion, ved at den lille røde lampe på den sorte tast er tændt).

### Modtag et opkald:

Løft røret, eller tryk  .


Aktivering eller deaktivering af håndfri funktion:

Under en samtale kan du skifte til eller fra håndfri funktion, ved at trykke  .

Bemærk: Når du bruger den håndfri funktion, går din stemme gennem den lille mikrofon nederst på telefonen. Hvis du er for langt væk fra mikrofonen vil den du taler med have svært ved at høre dig.

### Forstærkning af lyden i telefonrøret:

Du kan forøge lyden til +30 dB. Tryk  . Den røde lampe nederst til venstre tændes  .

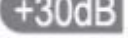For at slukke forstærkningen under en samtale, trykkes igen på  .  
Forstærkningen slukker automatisk, når røret lægges på.

### Indstilling af lydstyrken:

Du kan regulere forstærkningen på drejhjulet, der er placeret på telefonbasen, under røret. Der kan indstilles fra 0 – 9. Bemærk, at forstærkningen skal være tændt, når du skal indstille lydstyrken.

### Indstilling af tone:

Når forstærkningen er tilkoblet, kan du regulere tonen med den midterste skydeknop (21) på højre side af telefonen.

### Indstilling af håndfri lydstyrke:

Du kan indstille lydstyrken på håndfri funktion, på den nederste skydeknop (22) på højre side af telefonen.

### Genopkald:



Din telefon husker det sidste nummer du har ringet til. Ved genopkald løftes røret, eller håndfri funktion

aktiveres, og tryk derefter  .

### Ring til mistede opkald:





Telefonen gemmer de indkomne opkald i en opkaldsliste.

Løft røret, eller aktivér håndfri funktion. Vælg derefter det ønskede nummer ved hjælp af  eller

 og tryk  .

### Ring til et nummer fra din telefonbog:

(Se senere, hvordan du opretter kontakter i telefonbogen).

Løft røret, eller aktivér håndfri funktion. Tryk , vælg det ønskede nummer ved hjælp af   
eller  og tryk .

### Ring til et nummer med hurtigkaldstasterne:

(Se senere, hvordan du opretter telefonnumre på hurtigkaldstasterne).

Løft røret, eller aktivér håndfri funktion. Tryk  og derefter den ønskede hurtigkaldstast (0-9).

### Opkald via nødkaldstasterne M1 og M2:

(Se senere, hvordan du opretter telefonnumre på nødkaldstasterne).

Løft røret, eller aktivér håndfri funktion, og tryk den ønskede nødkaldstast M1, eller M2.

### Øvrige indstillinger:

#### Ringestyrke:


Du kan regulere ringestyrken på skydeknappen (20) øverst på højre side af telefonen.

#### Telefonbog:

Det er muligt at gemme 32 telefonnumre og navne i telefonens hukommelse. Navnene gemmes i alfabetisk rækkefølge.

#### Indtast navn:

Mellemrum indsættes ved hjælp af . Særlige tegn indsættes med  eller .


Du kan slette et indtastet bogstav eller tal ved hjælp af .


For at indtaste samme bogstav to gange efter hinanden, tryk først én gang og afvent derefter, at markøren flytter sig en plads fremad. Tryk derefter bogstavet igen.

### Opret en kontakt i telefonbogen:

Tryk  .


Tryk  og bekræft GEM, ved at trykke  .


Indtast telefonnummer og tryk  .

Indtast navn og tryk  .




### Redigér en kontakt i telefonbogen:

Tryk  og vælg kontakten ved hjælp af  eller  . Tryk og hold  i ca. 3


sekunder og bekræft ved at trykke  .

Indtast ændringen og bekræft med  .




### Slette én kontakt i telefonbogen:


Tryk  og vælg en kontakt ved hjælp af  eller  .

Tryk  . Displayet viser SLET?

Tryk og hold  i ca. 4 sekunder. Kontakten er nu slettet.

### Slet alle kontakter i telefonbogen:

Tryk  og vælg en kontakt ved hjælp af  eller  .

Tryk og hold  i ca. 4 sekunder. Displayet viser SLET ALT?

Tryk og hold  i ca. 4 sekunder igen.


Bemærk: Hvis du er i telefonbogen, men alligevel ikke vil foretage ændringer, så tryk **CID** , så kan du forlade telefonbogen uden ændring.




### Hurtigkald:

Du kan gemme op til 10 numre som hurtigkaldsnumre.

Tryk  .


Indtast telefonnummer og tryk  .

Indtast navn og tryk  .


Tryk den tast (0-9), som nummeret skal gemmes under.

### M1 og M2 (Nødkaldstaster):

På disse taster kan du gemme telefonnumre, som du enten ringer til meget ofte, eller som du gerne vil kunne bruge i særlige situationer.

For at gemme telefonnumre under M1 og M2, tryk  .

Indtast telefonnummer og tryk  .

Indtast navn og tryk  .

Tryk M1 eller M2, for at tilknytte nummeret til den pågældende tast.

### Opkaldsliste/Vis nummer:

Bemærk: Det er en forudsætning, at dit teleselskab understøtter vis-nummer funktionen.

Når telefonen ringer, vil nummeret på den der ringer blive vist (dog ikke hvis det er et hemmeligt nummer, eller hvis der ringes fra visse omstillingsanlæg).




Hvis det er en af kontakterne i din telefonbog, vil navnet også fremgå.

Der kan gemmes 32 opkald i listen, hvorefter det er nødvendigt at slette opkald.

Den blinkende røde lampe på højre side af telefonens display, viser når der er nye opkald på listen.



Displayet viser hvor mange opkald der er gemt, og hvor mange af dem, der er nye.

### Vis numrene i opkaldslisten:

Tryk  eller  , og vælg et nummer ved hjælp af  eller  .





### Gemme nummer fra opkaldslisten i telefonbogen:


Tryk  eller  , og vælg nummer ved hjælp af  eller  .


Tryk  og bekræft kopiering af nummer med  .

Nummeret er nu kopieret til telefonbogen, hvor du kan redigere kontakten, og tilføje et navn.





### Slet telefonnummer fra opkaldslisten én for én:


Tryk  eller , og vælg nummeret med  eller .

Tryk . Displayet viser SLET?.

Tryk og hold  i ca. 4 sekunder. Nummeret er nu slettet.

### Slet alle kontakter fra opkaldslisten:

Tryk  eller , og vælg et nummer ved hjælp af  eller .

Tryk og hold  i ca. 4 sekunder. Displayet viser SLET ALLE?

Tryk og hold  i ca. 4 sekunder igen.

### Brug med telespole i høreapparaterne:

Denne telefon har indbygget telespole, der gør det muligt for høreapparatbrugere, at høre telefonsamtalerne via telespolen i høreapparatet (T/MT).

### Rengøring:

Telefonen holdes støvfri, og kan lejlighedsvis rengøres med en hårdt opvredet klud. Brug ikke stærke rengøringsmidler eller opløsningsmidler på telefonen.

### Bortskaffelse:

Når telefonen skal kasseres, skal batterierne tages ud, og afleveres separat. Telefonen skal kasseres som elektronikaffald.





Scantone A/S, Stestrupvej 86B, 4360 Kirke Eskilstrup. Tlf. 46 19 51 00

[www.scantone.dk](http://www.scantone.dk)