

Brugsanvisning Gåstok med Anatomisk sort håndgreb

Indstilling:

Indstil gåstokken til den ønskede højde

- 1) Træk gåstokkens låseclips **A** ud
- 2) Træk/skub underrøret, indtil den ønskede længde nås
- 3) Sæt gåstokkens låseclips i igen - kontrollér at låseclipsen er forsvarligt og korrekt anbragt



Vedligeholdelse:

Kontrollér regelmæssigt gåstokken og dupsko **B** for skader - udskift hvis nødvendigt

Rengøring kan foretages med alle gængse- eller med ikke ætsende desinfektionsmidler såsom hospitalssprit og lignende

Maks. brugervægt: 127 kg.

