



Danish **CARE** Supply®

- fremtidens hjælpemidler

Instruktionsguide

DressOn® – Buksepåtagere



Specifikationer:

Længde: Varenr.: 4001/Hmi.nr: 74641 = 47,5 cm (personhøjde under 170 cm.) Varenr.: 4004/Hmi.nr: 77976 = 65,0 cm (personhøjde over 170 cm.)

Materiale: Aluminium og gule friktionskugler

Rengøring: Sæbe og varmt ved håndvasken

Anvendelse:



Læg bukserne ned foran dig som vist på billede



Sæt de gule kugler, så de sidder omkring bukse-kanten



Træk nu bukserne op på benet



Brug de gule kugler til at få bukserne rundt om foden



Sådan

Se instruktionsvideoen på vores hjemmeside eller Youtube:



HMI-Basen



YouTube-video



Danish **CARE** Supply®
- fremtidens hjælpemidler

Instruktionsguide

DressOn® - Påklædningspind



Påklædningspinden kan anvendes til mange forskellige behov:

- Jakke, trøjer – aftage, rette
- Retning af strømper
- Klø på ryggen

Specifikationer:

- Længde: 50 cm
- Materiale: Aluminium
- Rengøring: Sæbe og varmt vand ved håndvasken

Anvendelse: Eksempler



Jakke



Strømper



Klø på ryggen
Vask på ryggen – påsæt
en vaskeklud

**Se instruktionsvideoen på vores
hjemmeside eller Youtube:**



HMI-Basen



YouTube-video