

Brugsanvisning Pill-Out

"Pill Out" er et ergonomisk hjælpemiddel til udtrykning af tabletter / piller i blister- og foliepakker.

Tangen kan anvendes med og uden det medfølgende medicinbæger.

Tangen kan anvendes i både højre og venstre hånd.



1. Tangen holdes i en hånd
2. Medicinbægeret klemmes let sammen og fastgøres under den runde del af tangen, mellem de små "tapper".



3. Den runde del placeres under blisterpakken, med dækfolien nedad.
4. Håndtagene klemmes sammen og derved trykkes tabletten/pillen ud af emballagen.