



CARELINE



**BRUGERVEJLEDNING
CARELINE MOVER M. BENSPREDNING**

Art. No. 2124 / 2124A – CARELINE MOVER



Forord

Tak for dit valg af Careline Mover. Alle kendetegn ved dette produkt er et nemt og brugervenligt designet. Hvis du har ideer eller spørgsmål / problemer der ikke løses i brugervejledning så kontakt Faaborg Rehab Technic eller besøg os på internettet: www.faaborg-rehab.dk

Sikkerhed Instruktion

Før ibrugtagning af Careline Mover læs da venligst brugervejledning igennem. Den indeholder VIGTIGT anvisninger for korrekt anvendelse og vedligeholdelse af MOVER. Producenten hæfter ikke for skader, der udspringer af forkert brug.

Formål

Robust og rengøringsvenlig MOVER, med stel af stål og aluminium.

MOVER aktiverer og støtter samtidig personer med nedsat styrke i ben eller med nedsat balance i at rejse og sætte sig, og til sikker forflytning mellem stol, kørestol, toilet eller seng.

CE mærket

Følgende produkt er CE mærket i overensstemmelse med:

Product complies with the European Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices:

- Classified as Class I medical devices as set out in Annex VIII of Regulation (EU) 2017/745
- Complies with the provisions of Regulation (EU) 2017/745 “Medical Devices” and meets the essential requirements set out in Annex I of Regulation (EU) 2017/745
- The conformity for the purposes of the CE marking and conformity assessment according to the procedure from Annex IV of Regulation (EU) 2017/745


- Produkterne overholder også kravende i følgende standarder:

- DS / EN 12182:2012
- DS / EN ISO 15223-1:2017-02 (eq. EN ISO 15223-1:2016)
- DS / EN ISO 14971:2019

Garanti og ansvar

Hvis en fejl eller defekt er til stede ved modtagelse af Careline Mover, er det Faaborg Rehab Technic ApS ansvar at reparere eller erstatte enheden. Udskiftning af dele er Faaborg Rehab Technic ApS ejendom. Garanti periode er 2 år (5 år på stel) og starter ved modtagelse af produktet. Din faktura er garantibevis. Skulle din Mover kræve service kontakt da Faaborg Rehab Technic ApS. Garantien frafalder hvis der monteres andet end originale dele på Careline Mover. Erstatning vil ikke blive accepteret hvis fejlen er: Ukorrekt eller upassende brug, Ukorrekt installation af ejer eller 3 part, Ukorrekt brug af kemikalier eller fugtighed i enheden.

Produkt display

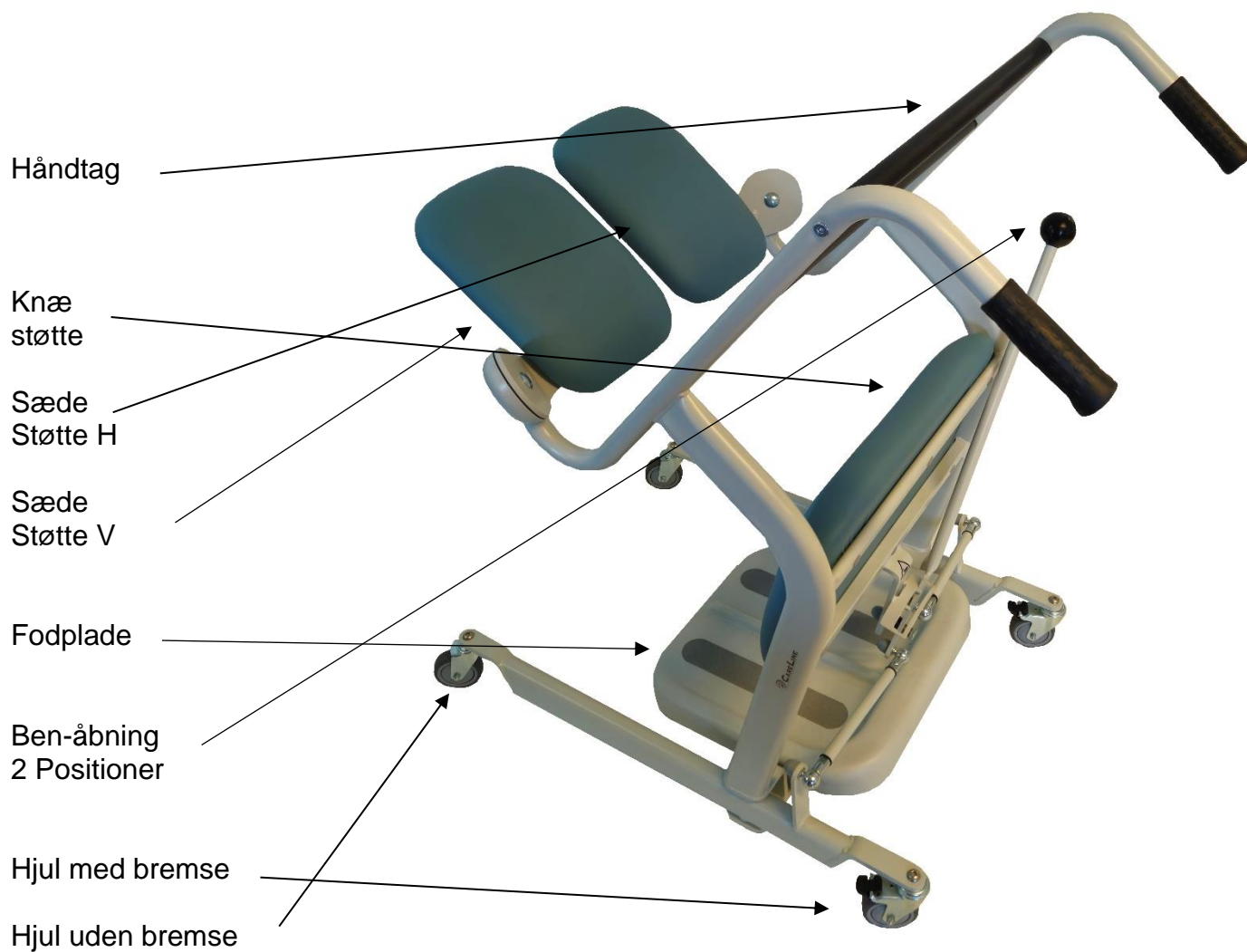

Teknisk information

Bredde:	63 cm
Længde:	81 cm
Højde:	106 cm
Vægt Mover:	31 kg
Max brugervægt	150 kg
Fodplade	41 cm
Hjul med bremse	7,5 cm
Hjul uden bremse	7,5 cm

Ekstra Tilbehør:

- Dobbeltjul
- Ekstra Tværstang
- Pur sæde
- Pur knæpude

Careline Mover kan fås i henholdsvis blå (2124) og brun (2124A).

2124A

Den brune Mover (2124A), Kan leveres i 3 forskellige størrelser:
Henholdsvis Junior, Universal standard og en høj udgave.

Derudover så kan den også leveres med fodpedal og aftagelig fodplade.

2124A + 2124

Både den brune og den blå Mover, kan som noget helt nyt leveres med en ekstra tværstang, som gør det nemmere for kortere personer at nå grebbet.
Som vist på billedet herunder:



Brug af MOVER:

Slå sædestøtterne til side og kør hen til brugeren.

Brugeren placerer fødderne på MOVER fodpladen og tager fat i håndtaget. Brugeren læner sig let fremover og trækker sig op i en stående stilling. Hjælperen slår sædestøtterne ned og brugeren kan sætte sig og dermed kan hjælperen flytte brugeren til en kørestol, toilet eller seng.

Se billeder under:



Advarsel

Husk at bruge bremsen.



Rengøring og vedligeholdelse

Knæ- og sædestøtter er lavet af et materiale, der er let at vedligeholde, kunstlæder testet i henhold til DIN 54020

Brug en tør eller fugtig fiberklud til rengøring af MOVER, hvis det er nødvendigt, kan milde rengøringsmidler anvendes, vi anbefaler Industri Rens fra Würth (Art no: 0893 140) (<https://ilk.dk/ia9y4s>), derefter skal der skylles med varmt vand.

Brug ikke opløsningsmidler, alkohol-baserede desinfektionsmidler, grove rensedmidler.

Service og teknisk kontrol

Skal foretages en gang om året.

Reparation, service og teknisk support

Ved problemer eller spørgsmål kontakt:

Faaborg Rehab Technic ApS
Smedemestervej 9,
DK-5600 Faaborg.
Tlf. + 45 70 20 55 53
E-mail: office@faaborg-rehab.dk
Web: www.faaborg-rehab.dk