

“Kvikguide”



Höhenanpassung der Kvikrampe wird mit dem **RampenKeil** gemacht.
(Atrikel nr. 12696-)

Der Keil kann in Höhenstufen von 2 mm geteilt werden, und wird unter der untersten Schicht der Kvikrampe montiert.




1

Um die Höhe des Keiles anzupassen, hält man die schräge Seite gegen der Kannte, und markiert die richtige Höhe.

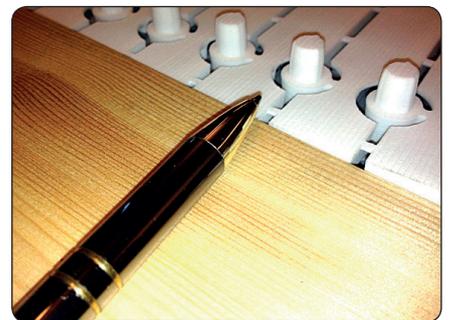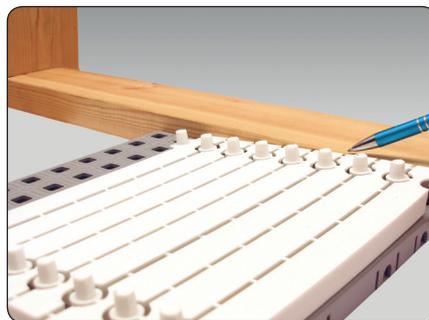

2


Wenn die richtige Höhe gefunden ist, entfernt man den übrigen Teil des Keils auf einer den 3 folgenden Weisen:

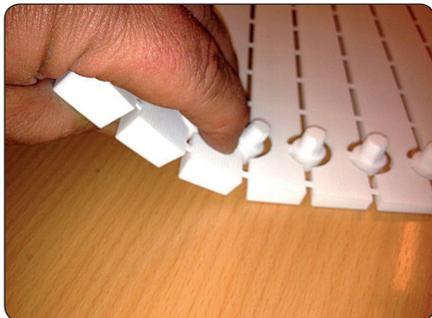

Mit der Hand abbrechen...




Mit einer Schere...

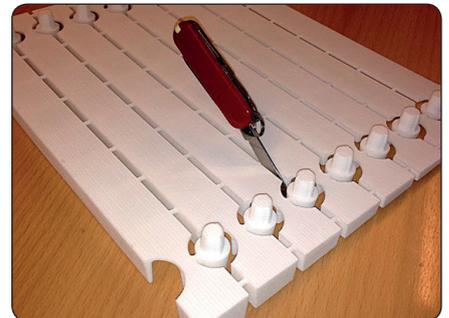

Oder mit einem Messer schneiden...

3

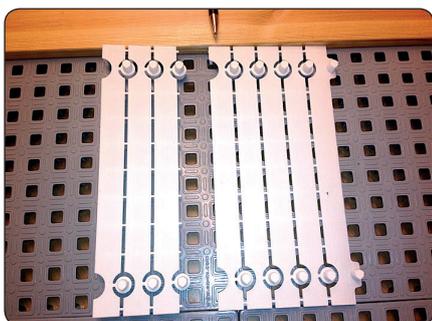

Der übrige Teil wird verworfen.



Die Kvikrampe wird auf dem Keil montiert.



Der Keil ist montiert, und die Höhe stimmt.