

Accent[®] 800, 1000, 1400

Brugervejledning

Accent – Integrerede og dedikerede enheder



19164-9
Version 1.03

Oplysninger om ophavsret og varemærker

© 2017-2023 PRC-Salttillo. Ikke-erhvervsmæssige genoptryksrettigheder til klinisk eller personlig brug gives med inklusion af meddelelse om ophavsret. Erhvervsmæssig brug er forbudt. Må ikke videresælges. Kontakt PRC-Salttillo vedrørende spørgsmål om tilladt brug.

AAC Coaching Corner™, AAC Language Lab®, AAC Learning Journey™, Accent®, AeroSwitch®, AeroText™, ChatEditor™, ChatFusion™, ChatPoint™, ChatSMS®, ChatWrap®, CoreScanner™, Dialogue®, Empower®, Engage®, Essence®, Freedom Switch™, iSharePRC®, LAMP™, LAMP Words for Life®, Look®, Minspeak®, NovaChat®, NuEye®, NuPoint®, NuVoice®, PASS™, PRIO®, Realize Language™, Semantic Compaction®, Timocco-on-Accent™, TouchChat®, UNIDAD®, Unity®, VersaChat™, VersaEye™, VersaSpeaker™, VersaWrap™, Via® og VocabPC™ er varemærker tilhørende PRC-Salttillo.

CAVIWIPES™ er et varemærke tilhørende Metrex Research LLC.

Intel®, Intel-logoet, Intel® Core™ og Celeron® er varemærker tilhørende Intel Corporation eller dennes associerede selskaber.

Microsoft® og Windows® er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Windex® er et registreret varemærke tilhørende S. C. Johnson & Son, Inc.

Kontaktoplysninger

Producent	EU-autoriseret repræsentant og importør	UK ansvarlig person og importør
	<input type="checkbox"/> EC <input type="checkbox"/> REP	<input type="checkbox"/> UK <input type="checkbox"/> REP
Prentke Romich Company 1022 Heyl Rd Wooster, OH 44691 USA Tlf.: (330) 262-1984 • (800) 262-1984 Fax: (330) 262-4829 E-mail: info@prentrom.com Web: www.prentrom.com	Prentke Romich Company Karthäuserstr. 3 D-34117 Kassel Tyskland Tlf.: (05 61) 7 85 59-0 Fax: (05 61) 7 85 59-29 E-mail: info@prentke-romich.de Web: www.prentke-romich.de	Liberator Ltd "Whitegates", 25-27 High Street Swinstead, Lincolnshire NG33 4PA Storbritannien Tlf.: +44 (0) 1733 370 470 Fax: +44 (0) 1476 552 473 E-mail: info@liberator.co.uk Web: www.liberator.co.uk

Dokumentversion

19164-9v1.03 · 18. januar 2023

Gælder for Accent 800-40, 1000-40, 1400-30

Microsofts slutbrugerlicensaftale

Du har anskaffet en PRC-enhed, som indeholder software, der er givet i licens til PRC-Salttillo af Microsoft Licensing Inc. eller dennes associerede virksomheder ("MS"). Disse installerede softwareprodukter, der stammer fra MS, samt tilknyttede medier, trykt materiale og "online" dokumentation eller elektronisk dokumentation (software) er beskyttet af internationale love og traktater om immaterialret.

HVIS DU IKKE ACCEPTERER DENNE SLUTBRUGERLICENS(AFTA) (EULA), MÅ DU IKKE BRUGE ENHEDEN ELLER KOPIERE SOFTWAREN. KONTAKT I STEDET FOR STRAKS PRC-SALTILLO FOR AT FÅ INSTRUKTIONER. ELLER RETURNÉR DEN/DE UBRUGTE ENHED(ER) FOR EN REFUSION. **ENHVER BRUG AF SOFTWAREN, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, BRUG PÅ ENHEDEN, OMFATTER DIN ACCEPT AF DENNE EULA (ELLER RATIFICERING AF ALLE TIDLIGERE SAMTYKKER).**

TILDELING AF SOFTWARELICENS.

Denne EULA tildeler dig følgende licens:

- Du må kun bruge SOFTWAREN på din PRC-enhed.
- IKKE FEJLTOLERANT.** SOFTWAREN ER IKKE FEJLTOLERANT. PRC-SALTILLO HAR UAFHÆNGIGT BESTEMT, HVORDAN SOFTWAREN SKAL ANVENDES, OG MS HAR OVERLADT DET TIL PRC-SALTILLO AT FORETAGE TILSTRÆKKELIG TESTNING TIL AT BESTEMME, AT SOFTWAREN ER EGNET TIL EN SÅDAN BRUG.
- SOFTWAREN ER UDEN GARANTIER. SOFTWAREN leveres "SOM DEN ER" og med eventuelle fejl. HELE RISIKOEN FOR TILFREDSSTILLENDE KVALITET, YDEEVNE, NØJAGTIGHED OG INDSATS (HERUNDER FORSØMMELIGHED) PÅHVILER DIG. DER ER HELLER INGEN GARANTI MOD FORSTYRRELSE AF DIN OPLEVELSE AF SOFTWAREN ELLER MOD OVERTRÆDELSE AF OPHAVSRETTIGHEDER. HVIS DU HAR MODTAGET GARANTIER VEDRØRENDE ENHEDEN ELLER SOFTWAREN, STAMMER DISSE GARANTIER IKKE FRA OG ER IKKE BUNDET AF MS.
- Bemærkninger om Java-understøttelse.** SOFTWAREN kan muligvis understøtte programmer, der er skrevet i Java. Java-teknologien tolererer ikke fejl og er ikke designet, fremstillet eller beregnet til brug eller videresalg som onlinestyringsudstyr i risikomiljøer, hvor der kræves fejlsikker ydeevne, f.eks. i forbindelse med driften af atomanlæg, flynavigerings- eller flykommunikationssystemer, styring af lufttrafik, hjerte-lungemaskiner eller våbensystemer, hvor et eventuelt svigt i Java-teknologien direkte ville kunne medføre dødsfald, personskade eller alvorlige fysiske eller miljømæssige skader. Sun Microsystems, Inc. har kontraktmæssigt pålagt MS at foretage denne ansvarsfraskrivelse.
Intet ansvar for visse skader. **MEDMINDRE DET ER FORBUDT VED LOV, HAR MS INTET ANSVAR FOR NOGEN INDIREKTE, FØLGEMÆSSIGE ELLER TILFÆLDIGE SKADER, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED BRUGEN ELLER YDEEVNEN AF SOFTWAREN. DENNE BEGRÆNSNING GÆLDER, SELVOM EVENTUELLE FORANSTALTNINGER FEJLER SINE TILTÆNKTE FORMÅL. MS VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIGE FOR NOGET BELØB, DER OVERSTIGER TO HUNDREDE OG HALVTREDS DOLLARS (250,00 USD).**
- Begrænsninger i forbindelse med reverse engineering, dekompilering og disassemblering. Du må ikke foretage reverse engineering, dekompilering eller disassemblering af SOFTWAREN, medmindre og kun i det omfang sådanne aktiviteter udtrykkeligt og uanset nærværende begrænsning er tilladt i henhold til gældende lovgivning.
- OVERFØRSEL AF SOFTWARE ER TILLADT, MEN MED BEGRÆNSNINGER.** Du må kun overføre permanente rettigheder under denne EULA som del af et permanent salg eller overdragelse af enheden, og kun hvis modtageren accepterer denne EULA. Hvis SOFTWAREN er en opgradering, skal overførslen omfatte alle tidligere versioner af SOFTWAREN.
- EKSपोर्टRESTRIKTIONER.** Du accepterer, at SOFTWAREN er omfattet af USA's eksportlovgivning. Du accepterer at overholde alle gældende internationale og nationale love, der gælder for SOFTWAREN, herunder USA's eksportadministrationsforordninger, samt de restriktioner for slutbruger, slutbrug og destinationer, der er udstedt af USA og andre regeringer. Du finder yderligere oplysninger på <http://www.microsoft.com/exporting/>.

Indhold

Accent® 800, 1000 og 1400 er talegenererende enheder, der tilbyder brugervenlige funktioner for at gøre det nemt og hurtigt at tale for personer med alvorlige talevanskeligheder. Denne brugervejledning beskriver, hvordan du bruger og vedligeholder din Accent-enhed.

Sikkerhedsoplysninger	5
Accent 800: Oversigt over funktioner	7
Brug af berøringsskærmen	10
Sådan tændes og slukkes for Accent 800-enhed/anbringes enheden i dvaletilstand	10
Sådan oplades batteriet	11
Placering af trådstativet	12
Sådan fjernes stativet	13
Sådan fjernes eller monteres håndtaget	14
Sådan fjernes eller udskiftes enhedsrammen	15
Sådan monteres, løftes og fjernes et tastaturskjold	17
Sådan monteres eller fjernes en TouchGuide	19
Sådan monteres et remhåndtag	20
Sådan fastgøres en QRM-monteringsplade	21
Accent 1000: Oversigt over funktioner	22
Brug af berøringsskærmen	25
Sådan tændes for Accent 1000 eller slukkes for/anbringes enheden i dvaletilstand	25
Sådan oplades batteriet	26
Placering af trådstativet	27
Sådan fjernes stativet	28
Sådan fjernes eller monteres håndtaget	29
Sådan fjernes eller udskiftes enhedsrammen	30
Sådan monteres, løftes og fjernes et tastaturskjold	32
Sådan monteres eller fjernes en TouchGuide	34
Sådan monteres et remhåndtag	35
Sådan fastgøres en QRM-monteringsplade	36
Accent 1400: Et hurtigt blik på enhedens funktioner	37
Sådan tændes for Accent 1400-enhed	40
Brug af berøringsskærmen	40
Sådan oplades batterierne	41
Sådan placeres eller fjernes stativet	42
Sådan fjernes eller monteres håndtaget	42
Sådan fjernes eller monteres enhedens ramme	43
Sådan fjernes QRM-monteringspladen	46
Yderligere hardwareoplysninger for alle Accent-enheder	47
Sådan fastgøres det øverste portdæksel	47
Sådan monteres IR-reflektoren på en integreret enhed	48
Anvendelse af skærmbeskyttelsesfilm	50

Sådan fastgøres en bærerem	51
Sådan rengøres og desinficeres enheden	52
Bortskaffelse af enheden eller batteriet	53
Fejlfinding	54
Bilag A: Oplysninger om Accent 800-overensstemmelse	55
Bilag B: Oplysninger om Accent 1000-overensstemmelse	59
Bilag C: Oplysninger om Accent 1400-overensstemmelse	63

Sikkerhedsoplysninger

Nødsituationer

- ⚠ Denne enhed er ikke beregnet som nødopkaldsenhed eller eneste kommunikationshjælpemiddel.

Rengøring, vedligeholdelse og service

- ⚠ Forsøg ikke at servicere eller udføre vedligeholdelse af enheden, mens den er i brug. Frakobl laderen, og sluk for enheden, før den rengøres eller desinficeres.
- ⚠ Kontakt service for at få hjælp, hvis enheden eller et tilbehør er beskadiget. Forsøg ikke selv at reparere enheden.

Tilbehør

- ⚠ Undgå brug af tilbehør, aftagelige dele eller materiale, som ikke er beskrevet i denne vejledning.
- ⚠ Du må ikke bruge tilbehør, aftagelige dele eller materiale på andre måder end dem, der er beskrevet i denne vejledning.

Montering og placering

- ⚠ Alle ophæng skal foretages af en kvalificeret person. Manglende installation af monteringssystemet i overensstemmelse med producentens anvisninger kan medføre personskeade på brugeren. Sørg for, at brugerens udsyn ikke forhindres af ophænget.
- ⚠ En kvalificeret person skal foretage analyse af placeringen for at undgå gentagne belastningsskader på brugeren.

Syn og hørelse

- ⚠ Kommunikationspartneren bør sikre, at brugeren holder hyppige pauser for at undgå belastning af øjnene.
- ⚠ Kontakt leverandøren af synsanordninger vedrørende overvejelser om placering for brugeren.
- ⚠ For kraftig lydstyrke eller for kraftigt lydtryk ved brug af øretelefoner eller hovedtelefoner kan medføre høreskader over længere tid. Indstil lydstyrken på et lavt niveau, og skru kun op for den, indtil det er komfortabelt at lytte.

Porte og stik

- ⚠ Hold enhedsportene og tilhørende kabelstik rene, så de får den bedst mulige kontakt og er i stand til at maksimere din enheds levetid. Snavsede kabelstik vil overføre forureningen til det tilhørende stik på enheden og kan forringe ydeevnen.
- ⚠ Hvis enheden udsættes for vand, skal alle USB-porte være fuldstændigt tørre, før der isættes et USB-kabel. Du kan fjerne fugt fra USB-portene ved at ryste enheden flere gange med USB-portene nedad og derefter bruge en mikrofiberklud til at tørre enheden af. Kontrollér derefter området omkring USB-porten igen. Hvis der stadig ses fugt i en af USB-portene, skal du gentage proceduren med at ryste og tørre enheden.
- ⚠ Forsøg ikke at tvinge et stik ind i en port. Sørg for, at du indsætter stikket i den rigtige port, og at du har stikket vendt, så det passer til portens retning.

Små dele, ledninger, kabler og remme

- ⚠ Ledninger, kabler og remme er potentielle årsager til indfiltrings- eller kvælningsfarer. Overvej dette, før du placerer disse genstande i nærheden af enhedens brugere.
- ⚠ Inspicér regelmæssigt kabler og stik visuelt for skader. Kontakt service for at få delene udskiftet, hvis et kabel eller stik er beskadiget.
- ⚠ Brug altid kabler i overensstemmelse med anvisningerne i denne vejledning – uanset om det drejer sig om opladning eller overførsel af ordforrådsfiler.
- ⚠ Små dele kan udgøre en kvælningsfare eller anden fare.
- ⚠ Hvis stativet fjernes, udgør det en potentiel fare for at komme i øjnene. Opbevar det et sikkert sted.
- ⚠ Brugeren kan klemme en finger, når stativet foldes sammen.
- ⚠ Pennen udgør en potentiel fare for at komme i øjnene.

Skærm

- ⚠ Enheden må ikke bruges, hvis skærmen er revnet eller defekt.

Interferens

- ⚠ Ved betjening af denne enhed i et medicinsk miljø, må den ikke anvendes med produkter, som ikke er medicinsk godkendt. Følg alle regler for korrekt brug af trådløse enheder.
- ⚠ Brug ikke denne enhed tæt på RF/RFID-strålingskilder. Ellers kan der forekomme interferens. Flyt om muligt enheden væk fra interferensilden.

Vand

- ⚠ Hvis enheden udsættes for vand, skal alle USB-porte være fuldstændigt tørre, før der sættes et USB-kabel. Du kan fjerne fugt fra USB-portene ved at ryste enheden flere gange med USB-portene nedad og derefter bruge en mikrofiberklud til at tørre enheden af. Kontrollér derefter området omkring USB-porten igen. Hvis der stadig ses fugt i en af USB-portene, skal du gentage proceduren med at ryste og tørre enheden.
- ⚠ Enheden er beregnet til brug i normale kommunikationssituationer. Den er ikke vandtæt, så udvis stor forsigtighed ved brug i nærheden af vand. Som med de fleste elektroniske enheder, må du *aldrig* bruge enheden, når du opholder dig i vandet (f.eks. i et bassin eller i badet).

Batterier og opladning

- ⚠ Brug kun den batterioplader, der fulgte med enheden.
- ⚠ Undgå at placere enheden, hvor det er vanskeligt at betjene den eller frakoble den fra opladeren.
- ⚠ Følg altid anvisningerne i denne vejledning, når enheden oplades.
- ⚠ Tilslut ikke andet end det godkendte opladningskabel i opladningsporten. I modsat fald kan porten blive beskadiget.
- ⚠ For at undgå elektrisk stød og beskadigelse af enheden må den ikke oplades, når den er våd, eller anbringes i et område, hvor den kan blive våd. Undgå at håndtere enheden, opladeren eller ledningerne med våde hænder.
- ⚠ Anbring enheden et sikkert og tørt sted, mens den oplades. Enheden må ikke oplades udendørs.
- ⚠ Hold opladeren væk fra vand, og undgå, at der spildes vand eller anden væske på den.
- ⚠ Kontakt service for eventuel udskiftning, hvis opladeren eller opladningsledningen er beskadiget.

Temperatur - varme

- ⚠ Undgå at placere enheden i husholdningsmaskiner såsom mikroovn, ovn, nær åben ild eller nær et komfur/varmeapparat.
- ⚠ Efterlad ikke enheden i en varm bil i længere tid.

Ilt-rige omgivelser

- ⚠ Medbring ikke enheden i et ilt-rigt miljø (f.eks. operationsrum, ilt-telt eller lign.).

Berøring af overfladen

- ⚠ Mens enheden oplades, kan berøring af enhedens overflade med ødelagt hud forværre et sår.
- ⚠ Mens enheden oplades, bør spædbørn eller højrisikogrupper ikke røre ved enhedens overflade, hvis der er risiko for at brænde huden.

Implanterbare medicinske anordninger

Der skal holdes en minimumsafstand på 15,24 cm (6") mellem en håndholdt mobilenhed og en implanterbar medicinsk anordning, som f.eks. en pacemaker, implanterbar kardioverterdefibrillator, vagusnervestimulator, shunt eller stent, for at undgå potentiel magnetisk interferens med den medicinske anordning. Personer, som har sådanne anordninger:

- Skal ALTID holde mobilenheden mindst 15,24 cm (6") væk fra deres implanterbare medicinske anordning.
- Må ikke bære mobilenheden i en brystlomme.
- Skal straks flytte mobilenheden væk fra sig, hvis der er mistanke om, at den forstyrrer den implanterbare medicinske anordning.
- Skal læse og følge anvisningerne fra producenten af den implanterbare medicinske anordning. Hvis du har spørgsmål vedrørende brug af din trådløse mobilenhed sammen med en implanterbar medicinsk anordning, bedes du *kontakte dit sundhedspersonale*.

Accent 800: Oversigt over funktioner

Set forfra



1	Håndtag	8	Lydstyrkeknop
2	Mikrofon	9	Mikrofon
3	Frontkamera	10	Batteri-/opladningslampe
4	Lyssensor	11	Strømindikator
5	Kameraindikator	12	Displayskærm
6	Tænd-/slukknop	13	Værktøjstast
7	Holdere til bærerem		

Set bagfra



1	Stativet	4	Monteringspunkt for håndtag eller NuPoint® head tracking-enhed
2	Håndtag	5	QRM-monteringspladeposition (plade er ekstraudstyr)
3	Mini USB-stik til NuPoint® head tracking-enhed (tilgængeligt, når håndtaget er fjernet)	6	Mikrofon

* Hvis du bruger én eller flere kontakter for at få adgang til din enhed, skal du indsætte dem i kontaktstik A og B. For at bruge et joystick skal du have en Y-adapter. Hvis du har tilsluttet et joystick, og det ikke reagerer normalt, kan du skifte den måde, det er tilsluttet (indsæt kontakt A i stik B og kontakt B i stik A).

Set fra venstre side



1	Ekstern mini-adgangsport	4	USB 3.0-port *
2	USB 2.0-port **	5	USB-C-port
3	USB 2.0-port **		

* USB 3.0-porten understøtter USB 3.0-, USB 2.0- og USB 1.0-tilbehør.

** USB 2.0-porten understøtter USB 2.0- og USB 1.0-tilbehør.

Set fra højre side



1	Opladningsport	4	Hovedtelefonstik
2	Kontaktstik A *	5	SD-kortplads
3	Kontaktstik B *		

* Hvis du bruger én eller flere kontakter for at få adgang til din enhed, skal du indsætte dem i kontaktstik A og B. For at bruge et joystick skal du have en Y-adapter. Hvis du har tilsluttet et joystick, og det ikke reagerer normalt, kan du skifte den måde, det er tilsluttet (indsæt kontakt A i stik B og kontakt B i stik A).

Brug af berøringsskærmen

Vigtigt! Du må ikke bruge skarpe eller spidse genstande på berøringsskærmen. Berøringsskærmen er designet til brug med fingeren eller den pen, der fulgte med enheden. Denne pen er fremstillet specifikt til en *kapacitiv* berøringsskærm. Alt andet vil beskadige berøringsskærmen og kan medføre, at enheden vil stoppe med at fungere.



Berøringsskærmen er en LCD-skærm (Liquid Crystal Display). Hvis skærmen går i stykker (usandsynligt, bortset fra meget ekstreme situationer), og du kommer i kontakt med de flydende krystaller, skal du vaske og skulle huden grundigt. Undgå kontakt med glasskår.

Sådan tændes og slukkes for Accent 800-enheden/anbringes enheden i dvaletilstand

Sådan slås enheden Til

Tryk på og hold tænd-/slukknappen øverst på enheden ned. Slip knappen, når der lyder et bip. Den grønne kontrollampe tændes. Kontrollampen forbliver tændt, mens enheden er aktiveret og er i dvaletilstand.

Sådan anbringes enheden i dvaletilstand og aktiveres

Anbring enheden i dvaletilstand om natten, når du er færdig med at bruge den om dagen. Tryk kortvarigt på og slip tænd-/slukknappen for at anbringe enheden i dvaletilstand. Hvis enheden er inaktiv i længere tid, skifter den automatisk til dvaletilstand. Den grønne kontrollampe forbliver tændt, mens enheden er i dvaletilstand. Enheden aktiveres ved enten at vælge værktøjstasten på forsiden af enheden eller hurtigt trykke på og slippe tænd-/slukknappen.

Bemærk: For at bevare opladningen om natten skal du enten tilslutte opladeren eller slukke for enheden. Hvis enheden transporteres i en bæretaske, kan den blive aktiveret. Sluk for enheden, hvis dette sker.

Sådan oplades batteriet

Vigtigt! Brug altid den batterioplader, der fulgte med enheden. Andre batteriopladere kan skade batterierne. Hvis du tror, at opladeren skal udskiftes, skal du ringe til PRC-serviceafdelingen på 800-262-1990. Uden for USA kontaktes distributøren. Serviceafdelingen kan fastslå, om opladeren skal udskiftes og oplyse om en korrekt oplader.

Batteriernes levetid afhænger af, hvordan du bruger enheden. Én opladning kan give op til 14 eller 15 timers brug, men efter kraftig brug af enheden vil en enkelt opladning muligvis kun vare i 8 timer. Opladningstiden til fuld opladning af batteriet afhænger af opladningsniveauet, når opladningen starter. Når enheden skal oplades, skal du lokalisere opladningsporten på bagsiden af enheden og tilslutte batteriopladeren.

Sådan oplades et kritisk lavt eller dødt batteri

En fuld opladning af et kritisk lavt batteri tager ca. 10 timer. Hvis batteriet er helt dødt, kan det være nødvendigt med yderligere to timer. Hvis du skal bruge enheden med det samme, skal du tilslutte batteriopladeren og lade den være tilsluttet, mens du bruger enheden.

Bedste praksis

Tilslut batteriopladeren hver aften, når du går i seng, og når advarselslampen for lavt batteriniveau lyser. Hvis du ikke kan tilslutte opladeren om natten, er det bedst at slukke for enheden for at spare batteristrøm.

Batteri-/opladningslampe

Når enheden er tændt, og opladeren IKKE er tilsluttet til enheden:

- Batteri-/opladningslampen tændes ikke.
- Når batteriet har mindre end 15 % strøm tilbage (ca. tre timer), lyser batteri-/opladningslampen rødt.

Når enheden er tilsluttet til opladeren:

- *Hvis enheden er tændt:* Batteri-/opladningslampen lyser gult. Når enheden er fuldt opladet, lyser kontrollampen grønt.
- *Hvis enheden er slukket:* Batteri-/opladningslampen lyser gult. Når enheden er fuldt opladet, slukkes kontrollampen.

Placering af trådstativet



Enheden må ikke bæres ved at holde i stativet. Brug håndtaget eller bæreremmen til at transportere enheden.

Stativet giver mulighed for to visningspositioner. Når stativet er låst mod bagsiden af enheden, sørger stativet for en let vinklet skærmvisning, når enheden anbringes på en plan flade. Hvis du har brug for en større vinkel, kan du trække benene på stativet ud fra bagsiden af enheden på følgende måde:

1. Anbring enheden med forsiden nedad på en plan flade.
2. Drej stativet væk fra bagsiden af enheden.
3. Lås stativet fast i fuld udtrukket position.



Sådan fjernes stativet

Hvis du ikke ønsker at bruge stativet, kan du fjerne det fra enhedens bagside. Du kan til enhver tid sætte det på igen.



Løse holdere, skruer og spændeskiver kan udgøre en kvælningfare.



Anbring først enheden med forsiden nedad på en flad overflade.

Sådan fjernes stativet:

- Brug en stjerneskruetrækker til at fjerne de to skruer fra **hver** side, der holder stativet fast på bagsiden af enheden.
- Træk stativet af og opbevar det på et sikkert sted til senere brug.


Sådan monteres en stopklods (fx hvis den går i stykker):

- Fjern de to skruer fra stativarmen.
- Skub enden af stativarmen væk. (Eller fjern stativet helt, hvis du foretrækker det.)
- Fjern skruen, der holder stopklodsens fast på bagsiden af enheden.
- Fjern den gamle stopklods, udskift den med en ny stopklods, indsæt skruen og genmonter stativet.

Sådan fjernes eller monteres håndtaget

Sådan fjernes håndtaget fra enheden:

1. Fjern de to skruer, som holder håndtaget på plads, ved hjælp af en stjerneskruetrækker.

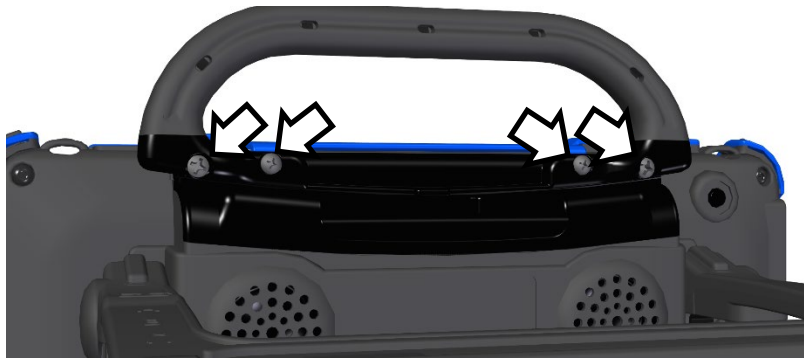

2. Træk håndtaget væk fra enheden.
3. Hvis du ikke skal montere et NuPoint-modul, er det vigtigt at montere portdækslet for at beskytte mini USB-stikket. Se "Sådan fastgøres det øverste portdæksel" på side 47.

Sådan sættes håndtaget på igen:


Fjern portdækslet eller NuPoint-modulet, ret hullerne i håndtaget ind efter hullerne på bagsiden af enheden, og indsæt de to skruer.

Sådan fjernes eller udskiftes enhedsrammen


Enheden blev leveret med en påmonteret ramme. Hvis du får brug for at fjerne eller udskifte rammen, følg disse instruktioner.

Sådan fjernes rammen

1. Hvis du bruger et tastaturcover eller TouchGuide, skal den fjernes fra rammen.
2. Brug en stjerneskruetrækker til at fjerne skrueene, der fastgør rammen til enheden.

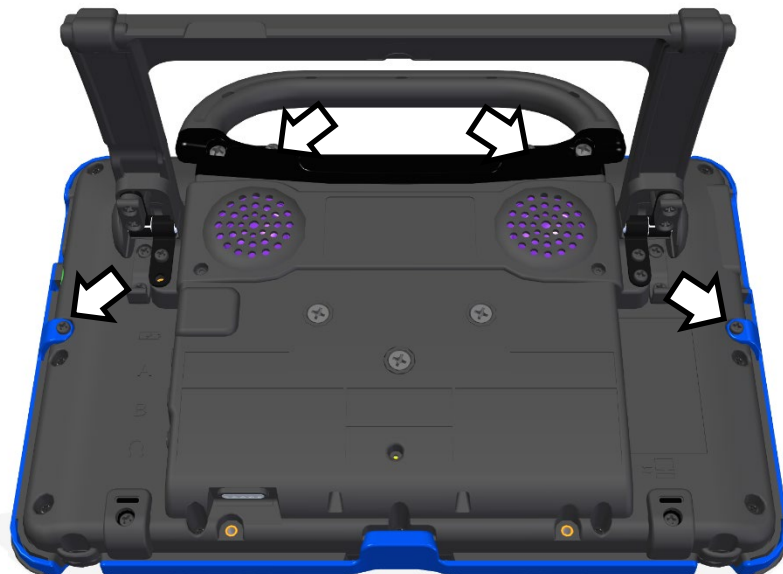

Vigtigt! Hvis du udskifter rammen, skal skrueene sættes til side. De skal bruges til at fastgøre den nye ramme. Hvis rammen ikke skal udskiftes, skal skrueene opbevares på et sikkert sted, hvis du senere beslutter dig for at fastgøre rammen igen.

 Løse skrueer kan udgøre en kvælningfare.

3. Tag fat i den ene side af rammen og træk den af enheden.

Tip: Du kan eventuelt bruge en flad skrue-trækker eller et lignende værktøj til forsigtigt at løfte side- og bundtapperne på bagsiden af enheden.

4. Tag fat i den anden side af rammen og træk den af enheden.

Bemærk: Når du trækker den anden side løs, kan de øverste eller nederste tapper (trin 5 og 6) løsne sig samtidigt.

5. Træk tapperne øverst på rammen ud af åbningerne på enheden.
6. Træk tappen i bunden af rammen ud af åbningen på enheden.
7. Forsæt til næste afsnit, "Sådan fastgøres den nye ramme".

Sådan fastgøres den nye ramme


Enhedsrammen skal fastgøres, før et tastaturcover eller TouchGuide kan monteres oven på skærmen.

1. Tryk den ene side af rammen fast på kanten af enheden.
2. Træk den anden side på plads.
Bemærk: De øverste tapper klikker eventuelt på plads, når du trækker i siden.
3. Tryk de øverste tapper på plads, om nødvendigt.
4. Træk den nederste flap på plads, om nødvendigt.
5. Kig langs rammens indvendige kant langs toppen, bunden og siderne for at sikre, at gummibagsiden ikke samler sig mellem rammen og kanten af enheden.
Løft eventuelt den indvendige kant lidt op og tryk, indtil gummibagsiden sidder som den skal mellem rammen og enheden.
6. For at fastgøre enheden med skruer, fortsæt til næste afsnit, "Sådan fastgøres rammen korrekt".

Sådan fastgøres rammen korrekt

Hvis du ikke forventer at fjerne og genmontere rammen til enheden ofte, kan du med fordel indsætte de originale skruer i hullerne øverst og på siden af rammen. Hvis du forventer at fjerne og genmontere rammen til enheden ofte, vil du måske ikke bruge skruerne.

1. Anbring enheden med forsiden nedad på en flad overflade.
2. Indsæt de skruer, du fjernede tidligere, gennem hullerne øverst på rammen og ind i de tilsvarende huller øverst på enheden.
3. Indsæt de andre skruer, du fjernede tidligere, gennem hullerne i hver side af rammen og ind i de tilsvarende huller i enhedens sider.
4. Spænd skruerne fast med en stjerneskruetrækker.

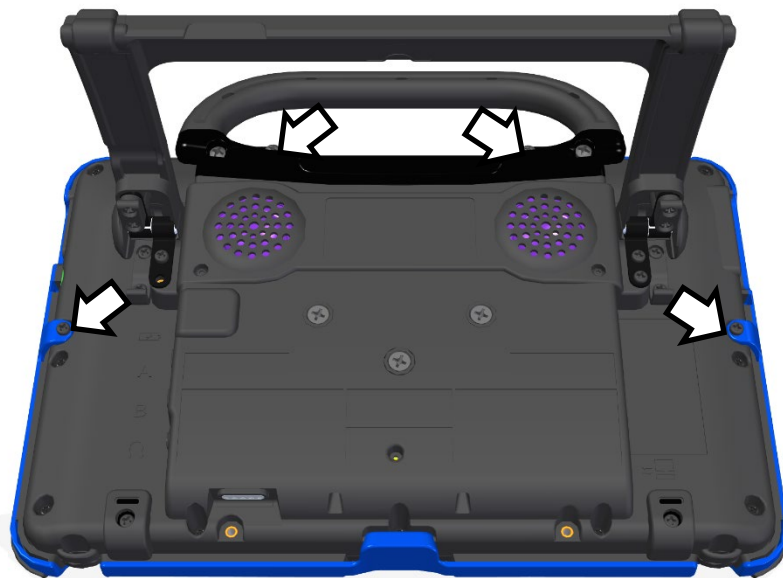

Når enhedsrammen er fastgjort korrekt:

Når du har fastgjort rammen korrekt til enheden, kan du fastgøre et tastaturcover eller TouchGuide til rammen.


Sådan monteres, løftes og fjernes et tastaturskjold

Enheden leveres med en påmonteret ramme. Tastaturskjoldet monteres på rammen. Hvis du har fjernet rammen, skal du først montere den igen.

Sådan monteres tastaturskjoldet

1. Hold tastaturskjoldet over skærmen med benene mod det øverste af skærmen og tappene mod bunden.

Vigtigt! Anbring tastaturskjoldet, så tappene er nederst. Tappene skal kunne ligge fladt mod skærmen, så tastaturskjoldet kan klikke på plads.

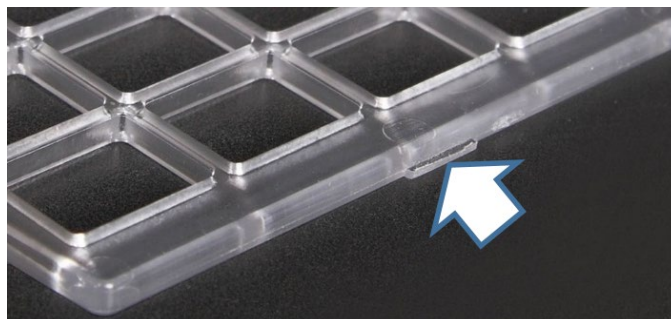

2. Indsæt ét af benene på tastaturskjoldet i åbningen tæt på toppen af rammen til enheden.



3. Hold benet på plads, og løft opad med fingrene for at bøje midten af tastaturskjoldet en smule opad. Indsæt det andet ben i åbningen på den anden side af rammen til enheden.



4. Tryk nedad på den nederste del af tastaturskjoldet for at klikke tappene på plads.

Bemærk: Hvis tastaturtappene i bunden ikke klikker på plads, skal du kontrollere, at tastaturskjoldet ikke vender omvendt. (Se trin 1).

Sådan løftes tastaturskjoldet

Hvis du får brug for midlertidig adgang til skærmen – f.eks. til programmering, ændring af enhedsindstillinger, rengøring af skærmen osv. – kan du løfte tastaturskjoldet uden at fjerne det helt. Se "Sådan fjernes tastaturskjoldet" nedenfor, hvis du vil fjerne tastaturskjoldet fra enheden helt.

1. Hold fast i den nederste kant af enheden med den ene hånd, og brug tommelfingeren på den anden hånd til at tage fat om den nederste kant på tastaturskjoldet midtpå.
2. Træk opad for at frigøre de nederste tappe.
3. Lad benene forblive indsat øverst på rammen til enheden, og løft blot bunden af tastaturskjoldet op for at blottlægge skærmen. Tastaturskjoldet forbliver i øverste position og giver dig nem adgang til skærmen.



Sådan fjernes tastaturskjoldet

1. Hold fast i den nederste kant af enheden med den ene hånd, og brug tommelfingeren på den anden hånd til at tage fat om den nederste kant på tastaturskjoldet midtpå.
2. Træk opad for at frigøre de nederste tappe.
3. Løft opad med fingrene for at bøje den øverste og midterste del af tastaturskjoldet en smule opad.



De nederste tappe er allerede trukket fri af enheden.

4. Træk benene ud af åbningerne øverst på rammen til enheden.

Sådan monteres eller fjernes en TouchGuide

Enheden leveres med en påmonteret ramme. TouchGuide monteres på rammen. Hvis du har fjernet rammen, skal du først montere den igen.

Sådan monteres TouchGuide

1. Anbring TouchGuide, så de to firkanter øverst er placeret ved det øverste højre hjørne af displayet.
2. Med de nederste tappe på plads løftes opad med fingrene for at bøje det øverste højre hjørne af TouchGuide en smule og indsætte tappen i åbningen øverst til højre på rammen.



Indsæt derefter de nederste tappe på TouchGuide i åbningerne på rammens nederste kant.



Bemærk: Plastikken i TouchGuide er stiv og kan kræve lidt kraft for at bøje.

3. Indsæt den venstre tap i åbningen øverst til venstre på rammen ved hjælp af samme metode som i trin 2.
4. For at sikre, at TouchGuide ligger fladt mod skærmen, skal du trykke ned på TouchGuide i alle fire hjørner, så den fastgøres helt til gummiet.

Tip: Træk en smule op i hjørnerne på rammen, når du trykker ned på hjørnerne af TouchGuide for at gøre det nemmere at sætte TouchGuide fast på gummiet.

Sådan fjernes TouchGuide


1. Tag fat i plastikken over den første række af tastehuller.
2. Træk ud og ned i TouchGuide, indtil de øverste tappe løsnes.



Sådan monteres et remhåndtag

Ved hjælp af remhåndtaget kan du bære Accent-enheden bekvemt med én hånd.

Tilslutninger i håndtagets ender monteres på holderne øverst (eller nederst) på enheden.

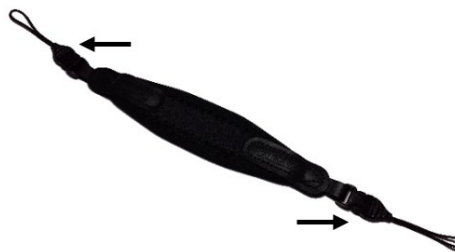

1. Hvis standardhåndtaget er monteret på enheden, afmonteres dette ved at fjerne skruerne.
2. Monter portdækslet, der fulgte med enheden, for at beskytte mini USB-stikket øverst på enheden.
3. Fastgør remhåndtaget på samme måde, som du ville fastgøre en bærerem.

Remhåndtaget kan også monteres på tværs på enhedens bagside, så enheden kan bæres og betjenes med én hånd. Fastgør remhåndtaget fra den øverste venstre remholder til den nederste højre remholder eller fra den øverste højre remholder til den nederste venstre remholder.



Hvis du bruger remhåndtaget på tværs af enhedens bagsiden, skal du være meget forsigtig og sørge for at have godt fast i enheden.


Sådan fastgøres en QRM-monteringsplade

Enheden kan monteres på et bordstativ eller et kørestolsbeslag. Hvis du købte QRM-monteringspladen sammen med din enhed, er pladen allerede monteret på bagsiden af enheden. Hvis du købte QRM-monteringspladen separat, eller hvis du har brug for at udskifte den, skal du følge disse anvisninger.

Vigtigt! Skruerne i monteringspladen holdes på plads med spændskiver. *Fjern ikke skiverne.*

Sådan fastgøres QRM-monteringspladen på enheden:

1. Anbring enheden med forsiden nedad på en plan flade. Pas på ikke at ridse displayet.
2. Fjern de tre skruer, der allerede er i monteringshullerne, ved hjælp af en stjerneskrueetrækker.

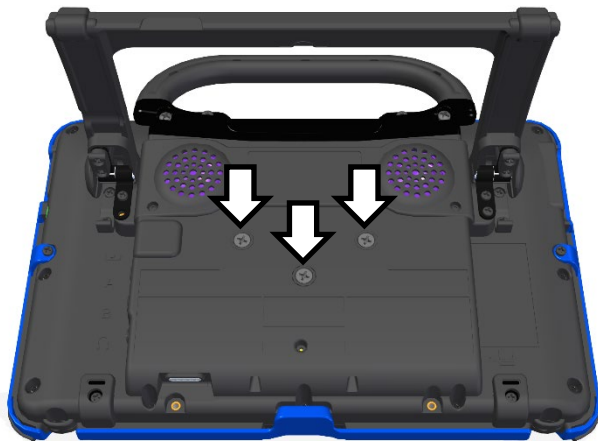

3. Indsæt skruerne i monteringspladen i de tilsvarende gevindhuller på enhedens bagside.
4. Spænd skruerne.

Sådan fjernes QRM-monteringspladen fra enheden:

1. Løsn skruerne en smule, så du kan trække pladen væk fra enhedens bagside.
2. Lad skruerne blive på plads med skiverne.
3. Opbevar pladen (med skruerne i hullerne) et sikkert sted til eventuel senere brug.

Accent 1000: Oversigt over funktioner

Set forfra



1	Håndtag	8	Mikrofon
2	Lyssensor	9	Batteri-/opladningslampe
3	Kameraindikator	10	Strømindikator
4	Frontkamera	11	Displayskærm
5	Tænd-/slukknep	12	Værktøjstast
6	Holdere til bærerem	13	Mikrofon
7	Lydstyrkeknep		

Set bagfra



1	Stativet	10	Miniport til ekstern computeradgang (<i>integrerede enheder</i>)
2	Håndtag	11	QRM-monteringspladeposition (plade er ekstraudstyr)
3	Mini USB-stik til NuPoint® head tracking-enhed	12	USB 2.0-port til eye tracking-modul
4	Monteringspunkt for håndtag eller NuPoint head tracking-enhed	13	Fastgørelsespunkter til eye tracking-modul
5	Bagkamera	14	Hovedtelefonstik
6	Højtalere	15	Kontaktstik B *
7	USB-C-port	16	Kontaktstik A *
8	USB 3.0-port	17	Opladningsport
9	USB 2.0-porte	18	SD-kortplads

* Hvis du bruger én eller flere kontakter for at få adgang til din enhed, skal du indsætte dem i kontaktstik A og B. For at bruge et joystick skal du have en Y-adapter. Hvis du har tilsluttet et joystick, og det ikke reagerer normalt, kan du skifte den måde, det er tilsluttet (indsæt kontakt A i stik B og kontakt B i stik A).

Set fra venstre side




1	Miniport til ekstern computeradgang (<i>integrede enheder</i>)	3	USB 2.0-port **
		4	USB 3.0-port *
2	USB 2.0-port **	5	USB-C -port

* USB 3.0-porten understøtter USB 3.0-, USB 2.0- og USB 1.0-tilbehør.

** USB 2.0-porten understøtter USB 2.0- og USB 1.0-tilbehør.

Set fra højre side

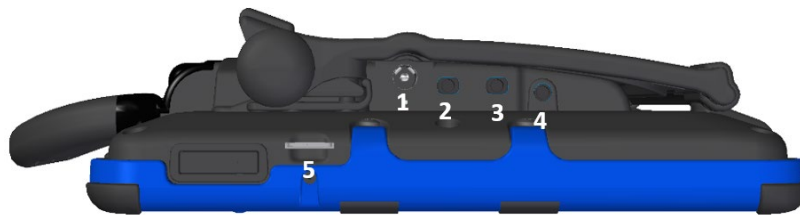

1	Opladningsport	4	Hovedtelefonstik
2	Kontaktstik A *	5	SD-kortplads
3	Kontaktstik B *		

* Hvis du bruger én eller flere kontakter for at få adgang til din enhed, skal du indsætte dem i kontaktstik A og B. For at bruge et joystick skal du have en Y-adapter. Hvis du har tilsluttet et joystick, og det ikke reagerer normalt, kan du skifte den måde, det er tilsluttet (indsæt kontakt A i stik B og kontakt B i stik A).

Brug af berøringsskærmen

Vigtigt! Du må ikke bruge skarpe eller spidse genstande på berøringsskærmen. Berøringsskærmen er designet til brug med fingeren eller den pen, der fulgte med enheden. Denne pen er fremstillet specifik til en *kapacitiv* berøringsskærm. Alt andet vil beskadige berøringsskærmen og kan medføre, at enheden vil stoppe med at fungere.



Berøringsskærmen er en LCD-skærm (Liquid Crystal Display). Hvis skærmen går i stykker (usandsynligt, bortset fra meget ekstreme situationer), og du kommer i kontakt med de flydende krystaller, skal du vaske og skulle huden grundigt. Undgå kontakt med glasskår.

Sådan tændes for Accent 1000 eller slukkes for/anbringes enheden i dvaletilstand

Sådan slås enheden Til

Tryk på og hold tænd-/slukknappen øverst på enheden ned. Slip knappen, når der lyder et bip. Den grønne kontrollampe tændes. Kontrollampen forbliver tændt, mens enheden er aktiveret og er i dvaletilstand.

Sådan anbringes enheden i dvaletilstand og aktiveres

Anbring enheden i dvaletilstand om natten, når du er færdig med at bruge den om dagen. Tryk kortvarigt på og slip tænd-/slukknappen for at anbringe enheden i dvaletilstand.

Hvis enheden er inaktiv i længere tid, skifter den automatisk til dvaletilstand. Den grønne kontrollampe forbliver tændt, mens enheden er i dvaletilstand. Enheden aktiveres ved enten at vælge værktøjstasten på forsiden af enheden eller hurtigt trykke på og slippe tænd-/slukknappen.

Enheden kan blive aktiveret, hvis der er monteret et eye tracking-modul. For at bevare opladningen om natten skal du enten tilslutte opladeren eller slukke for enheden. Hvis enheden transporteres i en bæretaske, kan den også blive aktiveret. Sluk for enheden, hvis dette sker.

Sådan oplades batteriet

Vigtigt! Brug altid den batterioplader, der fulgte med enheden. Andre batteriopladere kan skade batterierne. Hvis du tror, at opladeren skal udskiftes, skal du ringe til PRC-serviceafdelingen på 800262-1990. Uden for USA kontaktes distributøren. Serviceafdelingen kan fastslå, om opladeren skal udskiftes og oplyse om en korrekt oplader.

Batteriernes levetid afhænger af, hvordan du bruger enheden. Én opladning kan give op til 14 eller 15 timers brug, men efter kraftig brug af enheden vil en enkelt opladning muligvis kun vare i 8 timer.

Opladningstiden til fuld opladning af batteriet afhænger af opladningsniveauet, når opladningen starter. Når enheden skal oplades, skal du lokalisere opladningsporten på bagsiden af enheden og tilslutte batteriopladeren.

Sådan oplades et kritisk lavt eller dødt batteri

En fuld opladning af et kritisk lavt batteri tager ca. 10 timer. Hvis batteriet er helt dødt, kan det være nødvendigt med yderligere to timer.

Bemærk: Hvis du skal bruge enheden med det samme, skal du tilslutte batteriopladeren og lade den være tilsluttet, mens du bruger enheden.

Bedste praksis

Tilslut batteriopladeren hver aften, når du går i seng, og når advarselslampen for lavt batteriniveau lyser.

Hvis du ikke kan tilslutte opladeren om natten, er det bedst at slukke for enheden for at spare batteristrøm.

Batteri-/opladningslampe

Når enheden er tændt, og opladeren IKKE er tilsluttet til enheden:

- Batteri-/opladningslampen tændes ikke.
- Når batteriet har mindre end 15 % strøm tilbage (ca. tre timer), lyser batteri-/opladningslampen rødt.

Når enheden er tilsluttet til opladeren:

- *Hvis enheden er tændt:* Batteri-/opladningslampen lyser gult. Når enheden er fuldt opladet, lyser kontrollampen grønt.
- *Hvis enheden er slukket:* Batteri-/opladningslampen lyser gult. Når enheden er fuldt opladet, slukkes kontrollampen.

Placering af trådstativet



Enheden må ikke bæres ved at holde i stativet. Brug håndtaget eller bæreremmen til at transportere enheden.

Stativet giver mulighed for to visningspositioner. Når stativet er låst mod bagsiden af enheden, sørger stativet for en let vinklet skærmvisning, når enheden anbringes på en plan flade. Hvis du har brug for en større vinkel, kan du trække benene på stativet ud fra bagsiden af enheden på følgende måde:

1. Anbring enheden med forsiden nedad på en plan flade.
2. Drej stativet væk fra bagsiden af enheden.
3. Lås stativet fast i fuld udtrukket position.




Sådan fjernes stativet

Hvis du ikke ønsker at bruge stativet, kan du fjerne det fra enhedens bagside. Du kan til enhver tid sætte det på igen.



Løse holdere, skruer og spændeskiver kan udgøre en kvælningfare.

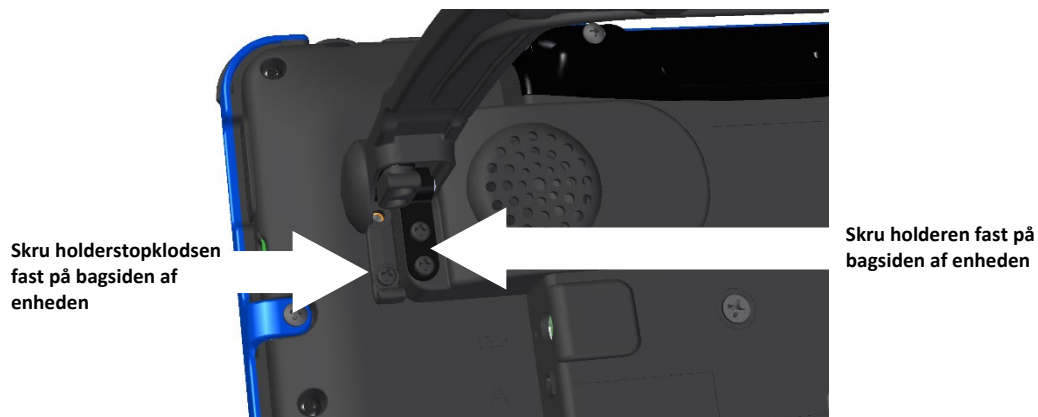

Anbring først enheden med forsiden nedad på en flad overflade.

Sådan fjernes stativet:

- Brug en stjerneskruetrækker til at fjerne de to skruer fra **hver** side, der holder stativet fast på bagsiden af enheden.
- Træk stativet af og opbevar det på et sikkert sted til senere brug.


Sådan monteres en stopklods (fx hvis den går i stykker):

- Fjern de to skruer fra stativarmen.
- Skub enden af stativarmen væk. (Eller fjern stativet helt, hvis du foretrækker det.)
- Fjern skruen, der holder stopklodsens fast på bagsiden af enheden.
- Fjern den gamle stopklods, udskift den med en ny stopklods, indsæt skruen og genmonter stativet.

Sådan fjernes eller monteres håndtaget

Sådan fjernes håndtaget fra enheden:

1. Fjern de skruer, som holder håndtaget på plads, ved hjælp af en stjerneskruetrækker.

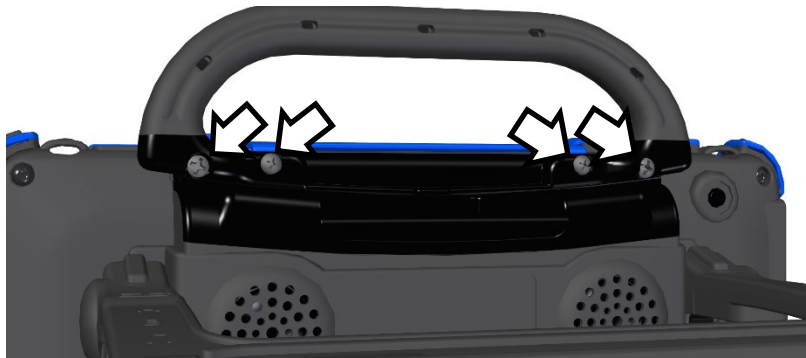

2. Træk håndtaget væk fra enheden.
3. Hvis du ikke skal montere et NuPoint-modul, er det vigtigt at montere portdækslet for at beskytte mini USB-stikket. Se "Sådan fastgøres det øverste portdæksel" på side 47.

Sådan sættes håndtaget på igen:

Fjern portdækslet eller NuPoint-modulet, ret hullerne i håndtaget ind efter hullerne på bagsiden af enheden, og indsæt de to skruer.

Sådan fjernes eller udskiftes enhedsrammen


Enheden blev leveret med en påmonteret ramme. Hvis du får brug for at fjerne eller udskifte rammen, følg disse instruktioner.

Sådan fjernes rammen

1. Hvis du bruger et tastaturcover eller TouchGuide, skal den fjernes fra rammen.
2. Brug en stjerneskruetrækker til at fjerne skrueene, der fastgør rammen til enheden.



Vigtigt! Hvis du udskifter rammen, skal skrueene sættes til side. De skal bruges til at fastgøre den nye ramme. Hvis rammen ikke skal udskiftes, skal skrueene opbevares på et sikkert sted, hvis du senere beslutter dig for at fastgøre rammen igen.

 Løse skrueer kan udgøre en kvælningsfare.

3. Tag fat i den ene side af rammen og træk den af enheden.

Tip: Du kan eventuelt bruge en flad skrue-trækker eller et lignende værktøj til forsigtigt at løfte side- og bundtapperne på bagsiden af enheden.

4. Tag fat i den anden side af rammen og træk den af enheden.

Bemærk: Når du trækker den anden side løs, kan de øverste eller nederste tapper (trin 5 og 6) løsne sig samtidigt.

5. Træk tapperne øverst på rammen ud af åbningerne på enheden.
6. Træk tappen i bunden af rammen ud af åbningen på enheden.
7. Forsæt til næste afsnit, "Sådan fastgøres den nye ramme".

Sådan fastgøres den nye ramme

Enhedsrammen skal fastgøres, før et tastaturcover eller TouchGuide kan monteres oven på skærmen.

1. Tryk den ene side af rammen fast på kanten af enheden.
2. Træk den anden side på plads.
Bemærk: De øverste tapper klikker eventuelt på plads, når du trækker i siden.
3. Tryk de øverste tapper på plads, om nødvendigt.
4. Træk den nederste flap på plads, om nødvendigt.
5. Kig langs rammens indvendige kant langs toppen, bunden og siderne for at sikre, at gummibagsiden ikke samler sig mellem rammen og kanten af enheden.
Løft eventuelt den indvendige kant lidt op og tryk, indtil gummibagsiden sidder som den skal mellem rammen og enheden.
6. For at fastgøre enheden med skruer, fortsæt til næste afsnit, "Sådan fastgøres rammen korrekt".

Sådan fastgøres rammen korrekt

Hvis du ikke forventer at fjerne og genmontere rammen til enheden ofte, kan du med fordel indsætte de originale skruer i hullerne øverst og på siden af rammen. Hvis du forventer at fjerne og genmontere rammen til enheden ofte, vil du måske ikke bruge skruerne.

1. Anbring enheden med forsiden nedad på en flad overflade.
2. Indsæt de skruer, du fjernede tidligere, gennem hullerne øverst på rammen og ind i de tilsvarende huller øverst på enheden.
3. Indsæt de andre skruer, du fjernede tidligere, gennem hullerne i hver side af rammen og ind i de tilsvarende huller i enhedens sider.
4. Spænd skruerne fast med en stjerneskruetrækker.



Når enhedsrammen er fastgjort korrekt:

Når du har fastgjort rammen korrekt til enheden, kan du fastgøre et tastaturcover eller TouchGuide til rammen.


Sådan monteres, løftes og fjernes et tastaturskjold

Enheden leveres med en påmonteret ramme. Tastaturskjoldet monteres på rammen. Hvis du har fjernet rammen, skal du først montere den igen.

Sådan monteres tastaturskjoldet

1. Hold tastaturskjoldet over skærmen med benene mod det øverste af skærmen og tappene mod bunden.

Vigtigt! Anbring tastaturskjoldet, så tappene er nederst. Tappene skal kunne ligge fladt mod skærmen, så tastaturskjoldet kan klikke på plads.

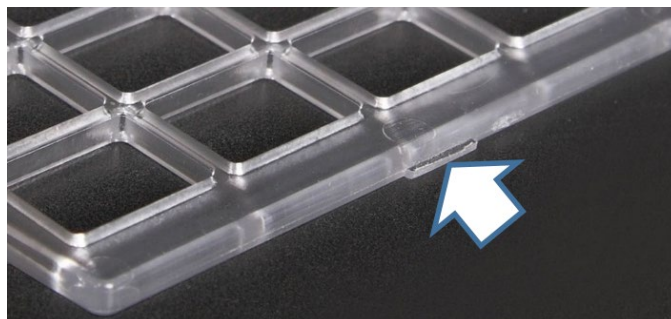

2. Indsæt ét af benene på tastaturskjoldet i åbningen tæt på toppen af rammen til enheden.
3. Hold benet på plads, og løft opad med fingrene for at bøje midten af tastaturskjoldet en smule opad. Indsæt det andet ben i åbningen på den anden side af rammen til enheden.



4. Tryk nedad på den nederste del af tastaturskjoldet for at klikke tappene på plads.

Bemærk: Hvis tastaturtappene i bunden ikke klikker på plads, skal du kontrollere, at tastaturskjoldet ikke vender omvendt. (Se trin 1).

Sådan løftes tastaturskjoldet

Hvis du får brug for midlertidig adgang til skærmen – f.eks. til programmering, ændring af enhedsindstillinger, rengøring af skærmen osv. – kan du løfte tastaturskjoldet uden at fjerne det helt. Se "Sådan fjernes tastaturskjoldet" nedenfor, hvis du vil fjerne tastaturskjoldet fra enheden helt.

1. Hold fast i den nederste kant af enheden med den ene hånd, og brug tommelfingeren på den anden hånd til at tage fat om den nederste kant på tastaturskjoldet midtpå.
2. Træk opad for at frigøre de nederste tappe.
3. Lad benene forblive indsat øverst på rammen til enheden, og løft blot bunden af tastaturskjoldet op for at blotlægge skærmen. Tastaturskjoldet forbliver i øverste position og giver dig nem adgang til skærmen.



Sådan fjernes tastaturskjoldet

1. Hold fast i den nederste kant af enheden med den ene hånd, og brug tommelfingeren på den anden hånd til at tage fat om den nederste kant på tastaturskjoldet midtpå.
2. Træk opad for at frigøre de nederste tappe.
3. Løft opad med fingrene for at bøje den øverste og midterste del af tastaturskjoldet en smule opad.



De nederste tappe er allerede trukket fri af enheden.

4. Træk benene ud af åbningerne øverst på rammen til enheden.

Sådan monteres eller fjernes en TouchGuide

Enheden leveres med en påmonteret ramme. TouchGuide monteres på rammen. Hvis du har fjernet rammen, skal du først montere den igen.

Sådan monteres TouchGuide

1. Anbring TouchGuide, så de to firkanter øverst er placeret ved det øverste højre hjørne af displayet.
2. Med de nederste tappe på plads løftes opad med fingrene for at bøje det øverste højre hjørne af TouchGuide en smule og indsætte tappen i åbningen øverst til højre på rammen.



Indsæt derefter de nederste tappe på TouchGuide i åbningerne på rammens nederste kant.



Bemærk: Plastikken i TouchGuide er stiv og kan kræve lidt kraft for at bøje.

3. Indsæt den venstre tap i åbningen øverst til venstre på rammen ved hjælp af samme metode som i trin 2.
4. For at sikre, at TouchGuide ligger fladt mod skærmen, skal du trykke ned på TouchGuide i alle fire hjørner, så den fastgøres helt til gummiet.

Tip: Træk en smule op i hjørnerne på rammen, når du trykker ned på hjørnerne af TouchGuide for at gøre det nemmere at sætte TouchGuide fast på gummiet.

Sådan fjernes TouchGuide


1. Tag fat i plastikken over den første række af tastehuller.
2. Træk ud og ned i TouchGuide, indtil de øverste tappe løsnes.



Sådan monteres et remhåndtag

Ved hjælp af remhåndtaget kan du bære Accent-enheden bekvemt med én hånd.


Tilslutninger i håndtagets ender monteres på holderne øverst (eller nederst) på enheden.

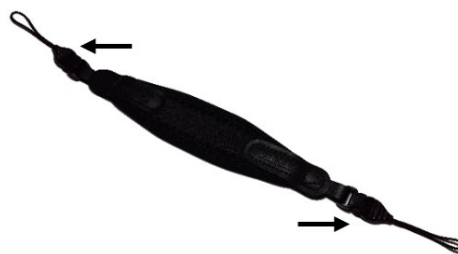

1. Hvis standardhåndtaget er monteret på enheden, afmonteres dette ved at fjerne skrueerne.
2. Monter portdækslet, der fulgte med enheden, for at beskytte mini USB-stikket øverst på enheden.
3. Fastgør remhåndtaget på samme måde, som du ville fastgøre en bærerem.

Remhåndtaget kan også monteres på tværs på enhedens bagside, så enheden kan bæres og betjenes med én hånd. Fastgør remhåndtaget fra den øverste venstre remholder til den nederste højre remholder eller fra den øverste højre remholder til den nederste venstre remholder.



 Hvis du bruger remhåndtaget på tværs af enhedens bagsiden, skal du være meget forsigtig og sørge for at have godt fast i enheden.


Sådan fastgøres en QRM-monteringsplade

Enheden kan monteres på et bordstativ eller et kørestolsbeslag. Hvis du købte QRM-monteringspladen sammen med din enhed, er pladen allerede monteret på bagsiden af enheden. Hvis du købte QRM-monteringspladen separat, eller hvis du har brug for at udskifte den, skal du følge disse anvisninger.

Vigtigt! Skruerne i monteringspladen holdes på plads med spændskiver. *Fjern ikke skiverne.*

Sådan fastgøres QRM-monteringspladen på enheden:

1. Anbring enheden med forsiden nedad på en plan flade. Pas på ikke at ridse displayet.
2. Fjern de tre skruer, der allerede er i monteringshullerne, ved hjælp af en stjerneskruetrækker.

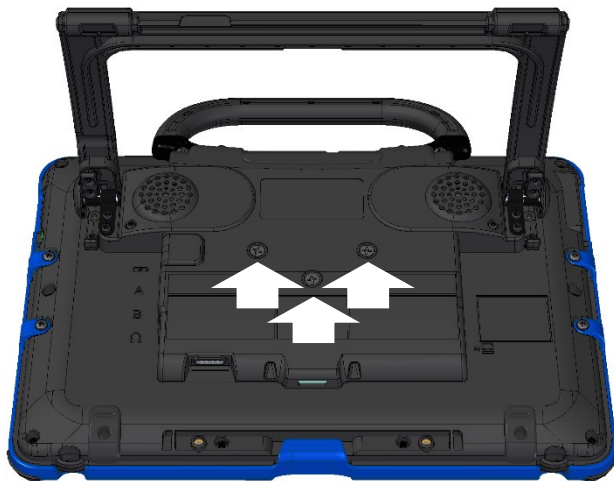

3. Indsæt skruerne i monteringspladen i de tilsvarende gevindhuller på enhedens bagside.
4. Spænd skruerne.

Sådan fjernes QRM-monteringspladen:

1. Løsn skruerne en smule, så du kan trække pladen væk fra enhedens bagside.
2. Lad skruerne blive på plads med skiverne.
3. Opbevar pladen (med skruerne i hullerne) et sikkert sted til eventuel senere brug.


Accent 1400: Et hurtigt blik på enhedens funktioner

Set forfra



1	Mikrofoner
2	Holdere til bæreren
3	Håndtag
4	Lyssensor
5	Kamera
6	Kameraindikator
7	Tænd-/slukknop
8	Batteri-/opladningslampe
9	Strømindikator
10	Lydstyrkeknop
11	Berøringsskærm/display

Set bagfra

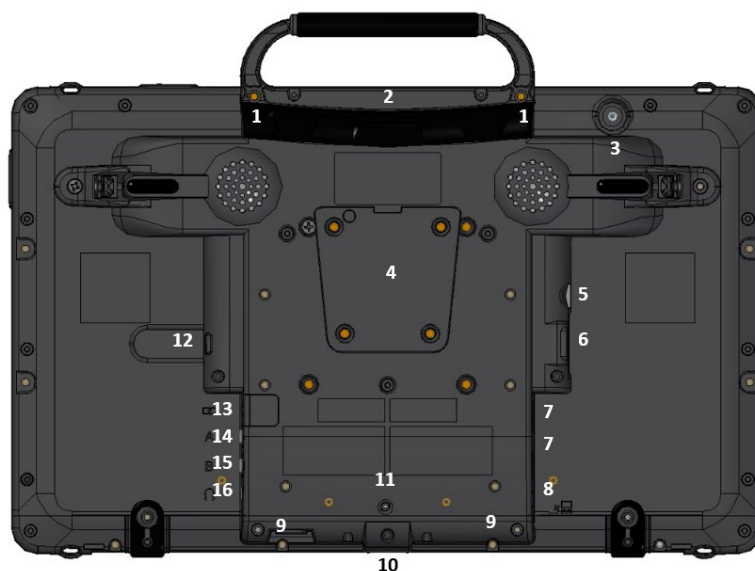

1	Monteringspunkter for håndtag eller NuPoint® eye tracking-enhed	9	Monteringspunkt for enhedens ramme eller Look®-modul
2	Mini USB-stik til NuPoint® eye tracking-enhed	10	USB-stik til Look-modul
3	Bagkamera ¹	11	Mikrofon
4	QRM-monteringsplade	12	HDMI-port ³
5	SD-kortplads	13	Opladningsport
6	USB 3.0-port	14	Kontaktstik A ⁴
7	USB 2.0-porte	15	Kontaktstik B ⁴
8	Ekstern mini-adgangsport ²	16	Hovedtelefonstik

¹ Enheden leveres med en tynd beskyttelsesfilm over objektivet på bagkameraet.

Beskyttelsesfilmen fjernes ved *forsigtigt* at skubbe en fingernegl under kanten af filmen og trække den væk fra objektivet. Pas på ikke at ridse objektivet.

² *Fungerer kun med køb af den integrerede funktionspakke (IFP).* Den eksterne mini-adgangsport giver dig mulighed for at oprette forbindelse til en ekstern enhed, hvis du har IFP.

³ Ved hjælp af HDMI-porten kan du tilslutte en ekstra skærm til enheden for visuelt udfordrede kommunikationer.


⁴ Hvis du bruger én eller flere kontakter for at få adgang til din enhed, skal du indsætte dem i kontaktstik A og B. For at bruge et joystick skal du have en Y-adapter. Hvis du har tilsluttet et joystick, og det ikke reagerer normalt, kan du skifte den måde, det er tilsluttet (indsæt kontakt A i stik B og kontakt B i stik A).

Venstre side
(Set fra enhedens bagside)



1	Mikrofon
2	HDMI-port ¹
3	Opladningsport
4	Kontaktstik A ²
5	Kontaktstik B ²
6	Hovedtelefonstik

Højre side
(Set fra enhedens bagside)

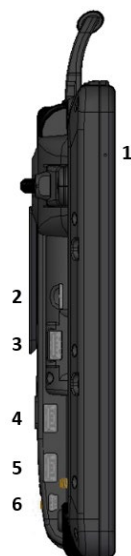

1	Mikrofon
2	SD-kortplads
3	USB 3.0-port
4	USB 2.0-port
5	USB 2.0-port
6	Ekstern mini-adgangsport ³

¹ Ved hjælp af HDMI-porten kan du tilslutte en ekstra skærm til enheden for visuelt udfordrede kommunikationer.

² Hvis du bruger én eller flere kontakter for at få adgang til din enhed, skal du indsætte dem i kontaktstik A og B. For at bruge et joystick skal du have en Y-adapter. Hvis du har tilsluttet et joystick, og det ikke reagerer normalt, kan du skifte den måde, det er tilsluttet (indsæt kontakt A i stik B og kontakt B i stik A).

³ *Fungerer kun med køb af den integrerede funktionspakke.* Den eksterne mini-adgangsport giver dig mulighed for at oprette forbindelse til en ekstern enhed, hvis du har den integrerede funktionspakke.

Sådan tændes for Accent 1400-enheden

1. Tryk på og hold tænd-/slukknappen øverst på enheden ned.
2. Slip knappen, når der lyder et bip. Den grønne kontrollampe tændes.
3. Vent på, at softwaren indlæses.
 - Kontrollampen lyser, mens enheden er tændt.
 - LED-lampen vil lyse, selvom enheden er i indstillingen "sov".
 - LED-lampen vil slukkes, når enheden går i indstillingen "slumre".
 - LED-lampen slukker, når du slukker enheden helt.

Brug af berøringsskærmen

Vigtigt! Du må ikke bruge skarpe eller spidse genstande på berøringsskærmen. Berøringsskærmen er designet til brug med fingeren eller den pen, der fulgte med enheden. Denne pen er fremstillet specifikt til en *kapacitiv* berøringsskærm. Alt andet vil beskadige berøringsskærmen og kan medføre, at enheden vil stoppe med at fungere.



Berøringsskærmen er en LCD-skærm (Liquid Crystal Display). Hvis skærmen går i stykker (usandsynligt, bortset fra meget ekstreme situationer), og du kommer i kontakt med de flydende krystaller, skal du vaske og skulle huden grundigt. Undgå kontakt med glasskår.

Berøringsskærmen er meget følsom. Udtværede fingeraftryk, støv, spyt osv. påvirker skærmens ydeevne. Skærmen er også følsom over for regndråber og ekstreme temperaturer (kondens).

Brug en blød, fnugfri klud til at aftørre berøringsskærmen. Ved kraftigere rengøring anvendes en let fugtig, fnugfri klud, hvorefter skærmen tørres af med en anden blød, fnugfri klud.

Sådan oplades batterierne

Batteriernes levetid afhænger af, hvordan du bruger enheden. Opladningstiden til fuld opladning af batteriet afhænger af opladningsniveauet, når opladningen starter. Når enheden skal oplades, skal du lokalisere opladningsporten på bagsiden af enheden og tilslutte batteriopladeren.

Sådan oplades kritisk lave eller døde batterier

En fuld opladning af batterier med kritisk lavt niveau tager ca. 10 timer. Hvis batterierne er helt døde, kan det være nødvendigt med yderligere to timer.

Bemærk: Hvis du skal bruge enheden med det samme, skal du tilslutte batteriopladeren og lade den være tilsluttet, mens du bruger enheden.

Bedste praksis

Tilslut batteriopladeren hver aften, når du går i seng, og når advarselslampen for lavt batteriniveau lyser. Hvis du ikke kan tilslutte opladeren om natten, er det bedst at slukke for enheden for at spare batteristrøm.

Sådan tilsluttes opladeren

Vigtigt! Brug altid den batterioplader, der fulgte med enheden. Andre batteriopladere kan skade batterierne.

 Anbring enheden et sikkert sted, mens den oplades.

1. Tilslut opladeren til en elektrisk stikkontakt – det anbefales at bruge en overspændingsbeskytter
2. Løft dækslet til opladningsporten på enheden.




3. Sæt opladningsstikket i opladningsporten.


Batteri-/opladningslampe

Hvis enheden er tændt: Batteri-/opladningslampen tændes ikke. Når batteriet har mindre end 15 % strøm tilbage (ca. tre timer), blinker batteri-/opladningslampen gult.

Når enheden er tilsluttet til opladeren: Batteri-/opladningslampen lyser gult. Når enheden er fuldt opladet, lyser kontrollampen grønt og forbliver tændt, indtil opladeren frakobles.

Bortskaffelse af enheden og batterierne

 **Bortskaffelse af enheden:** Bortskaf enheden i overensstemmelse med den lokale, og/eller nationale lovgivning for genbrug af elektronik.

 **Bortskaffelse af batteriet:** Hvis batterierne i din enhed skal udskiftes, skal du bortskaffe de gamle batterier i overensstemmelse med de lokale og/eller nationale bestemmelser.

Sådan placeres eller fjernes stativet



Enheden må ikke bæres ved at holde i stativet. Brug håndtaget eller bæreremmen til at transportere enheden.

Du kan bruge stativet i enten lukket eller åben stilling, eller du kan vælge at fjerne det helt.

Sådan åbnes stativet

Stativet i låst position sørger for en let vinklet skærmvisning, når enheden anbringes på en plan flade. Hvis brugeren har brug for en større vinkel, kan benene på stativet trækkes ud fra bagsiden af enheden på følgende måde:

1. Anbring enheden med forsiden nedad på en plan flade.
2. Træk stativets nederste støtte fri fra låsene på bagsiden af enheden.
3. Drej stativet væk fra bagsiden af enheden, indtil benene låses på plads.

Sådan fjernes stativet

Hvis du ikke ønsker at bruge stativet, kan du fjerne det fra enhedens bagside. Du kan altid montere det igen.

1. Anbring enheden med forsiden nedad på en plan flade.
2. Fjern skruerne fra holderne i enden af hvert ben på stativet.
3. Træk holderne fri, og opbevar dem et sikkert sted til eventuel senere brug.



Løse holdere kan udgøre en kvælningfare.

4. Spred benene for at trække dem ud af hullerne på bagsiden af enheden.
5. Træk stativet ud, og opbevar det et sikkert sted til eventuel senere brug.

Vigtigt! Hvis du monterer stativet igen, skal du sørge for at sikre benene med holderne for at undgå, at det trækkes løst ved et uheld.

Sådan fjernes eller monteres håndtaget

Hvis du vil fjerne håndtaget fra enheden, skal du blot fjerne de to skruer, der holder det på plads.



Bemærk: Hvis du ikke skal montere et NuPoint®-modul, skal du montere portdækslet for at beskytte mini USB-stikket. Se "Sådan fastgøres det øverste portdæksel" på side 47.

Sådan sættes håndtaget på igen:

Fjern portdækslet, og ret hullerne i håndtaget ind efter hullerne på bagsiden af enheden. Tryk håndtaget på plads, og indsæt de to skruer.

Sådan fjernes eller monteres enhedens ramme

Enheden leveres med en påmonteret ramme. Følg disse anvisninger, hvis du har brug for at fjerne eller montere rammen.

Sådan fjernes eller monteres rammen


Enheden leveres med en påmonteret ramme. Følg disse anvisninger, hvis du har brug for at fjerne rammen.

Bemærk: Dette er et forslag til, hvordan rammen fjernes. Du kan eventuelt finde en metode, som er nemmere for dig.


1. Hvis du bruger et tastaturskjold eller TouchGuide, skal du fjerne det fra rammen.
2. Fjern de seks skruer, der holder rammen fast på enheden – to øverst og to i hver side.



Vigtigt! Læg disse skruer til side, hvis du udskifter rammen. Du skal bruge dem senere for at montere den nye ramme. Hvis du ikke udskifter rammen, skal du opbevare skruerne et sikkert sted, i tilfælde af at du senere vil montere rammen igen.

 Løse skruer kan udgøre en kvælningsfare.

3. Træk tappene på toppen af rammen ud af åbningerne på enheden.

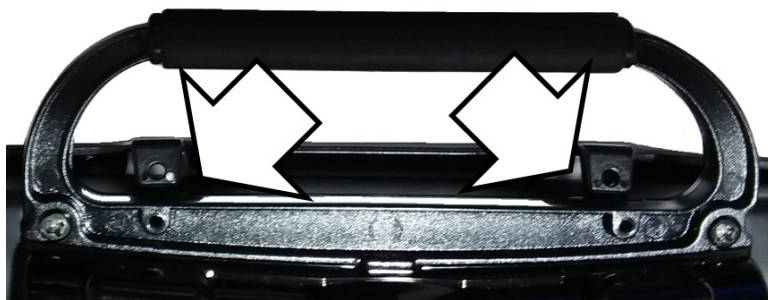

Tip: Du kan eventuelt bruge en skruetrækker med fladt hoved eller lignende.

4. Start i et hjørne øverst, arbejd ned langs den ene side, og træk rammen løs fra siden af enheden.



Tip: Du kan bruge en skruetrækker med fladt hoved eller tilsvarende værktøj, når du bevæger dig ned langs tappene, der holder rammen fast på siden af enheden.

5. Træk rammen løs fra den anden side af enheden.
6. Træk i de nederste tappe for at trække rammen fri fra enheden.



Tip: Hvis rammen er helt fri fra toppen og siderne, kan du sandsynligvis trække bunden af rammen fri fra enheden uden at trække i tappene.

7. Løft rammen fri af enheden.

Sådan monteres den nye ramme

Du skal fastgøre rammen på enheden, før du kan montere et tastaturskjold eller TouchGuide på skærmen.

1. Anbring rammen over forsiden af enheden.




2. Tryk tappene på toppen af rammen ind i åbningerne øverst på enheden.
3. Træk siderne af rammen ud, og anbring dem over kanten på enheden.
4. Træk tappene nederst på rammen ud af rammen, og anbring dem over den nederste kant på enheden.
5. Tryk hårdt i hver side, indtil alle sider af rammen hviler tæt mod enheden.

Sådan fastgøres rammen på enheden mere sikkert

Hvis du ikke forventer at fjerne og montere rammen på enheden ofte, kan det være en idé at indsætte de oprindelige skruer øverst og på siderne af rammen. Hvis du forventer at fjerne og montere rammen på enheden ofte, er det muligvis bedre ikke at bruge skruerne.

1. Anbring enheden med forsiden nedad på en plan flade.
2. Indsæt de to skruer med trælignende gevind igennem hullerne i toppen af rammen og ind i de tilsvarende huller på i toppen af enheden.

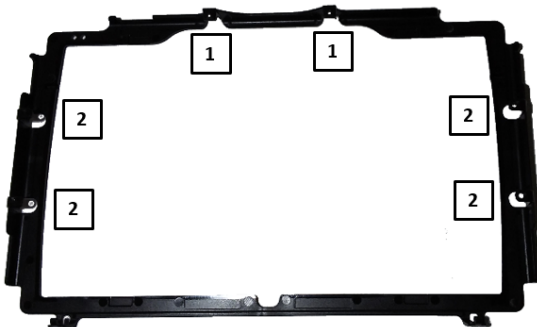


- 1 Indsæt de to skruer med trælignende gevind
- 2 Indsæt de resterende fire skruer
3. Indsæt de resterende fire skruer igennem hullerne i siderne på rammen og i de tilsvarende huller på enheden.
4. Stram alle seks skruer med en stjerneskruestrækker.

Når du har fastgjort rammen sikkert på rammen, kan du montere et tastaturskjold eller TouchGuide på rammen.

Sådan fjernes QRM-monteringspladen

En QRM-monteringsplade fastgøres på bagsiden af enheden. Det giver mulighed for at montere enheden på et bordstativ eller et kørestolsbeslag. Pladen er fastgjort med fire skruer.

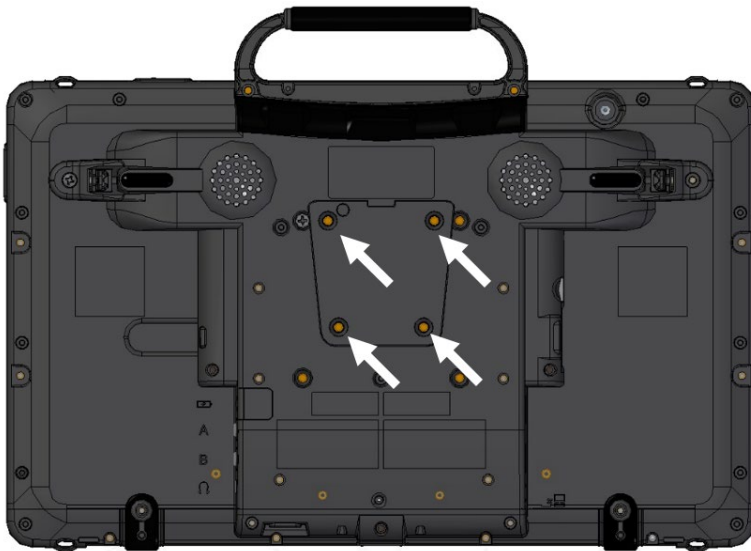

Sådan fjernes QRM-monteringspladen:

1. Anbring enheden med forsiden nedad på en plan flade. Pas på ikke at ridse displayet.
2. Fjern skruerne.
Vigtigt: Sørg for, at du ikke taber de skiver, der sidder sammen med de to øverste skruer.
3. Opbevar pladen, skruerne og skiverne et sikkert sted til eventuel senere brug.

Sådan fastgøres QRM-monteringspladen igen:

1. Anbring enheden med forsiden nedad på en plan flade. Pas på ikke at ridse displayet.
2. Anbring monteringspladen over de fire huller på enhedens bagside.
3. Anbring skiver på to af skruerne, og indsæt dem igennem hullerne øverst på pladen.
4. Indsæt de resterende to skruer igennem de nederste huller på pladen.
5. Spænd skruerne.

Yderligere hardwareoplysninger for alle Accent-enheder

Oplysningerne i dette afsnit gælder for Accent 800, Accent 1000 og Accent 1400.


Sådan fastgøres det øverste portdæksel

Hvis du fjernede håndtaget og ikke skal montere et NuPoint-modul, er det vigtigt at montere portdækslet for at beskytte mini USB-stikket øverst på enheden.

1. Ret hullerne i håndtaget ind efter hullerne på bagsiden af enheden.



2. Indsæt og spænd de to skruer, som tidligere holdt håndtaget fast.

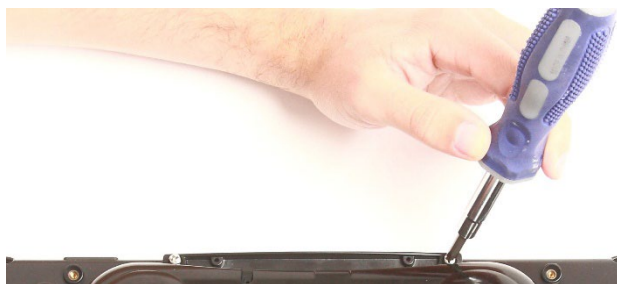

Sådan fjernes portdækslet:

Fjern de to skruer, som holdt portdækslet på plads. Brug skruerne til at montere NuPoint-modulet eller fastgøre håndtaget igen.

Bemærk: Opbevar portdækslet til eventuel senere brug.

Sådan monteres IR-reflektoren på en integreret enhed

Enheden udsender infrarøde signaler fra et IR-område på bagsiden af enheden. Den valgfri IR-reflektor gør det nemmere for brugeren at "ramme" disse signaler fra alle positioner. Hvis du har en IR-reflektor, skal du følge disse anvisninger for at montere den på enheden.

IR-reflektoren kan monteres på enhedens håndtag, portdækslet eller NuPoint-modulet, afhængigt af hvad der allerede er monteret på enheden. Reflektorsættet indeholder reflektoren, to korte skruer og to lange skruer.

1. Fjern de relevante skruer som vist.

Håndtag: Hvis håndtaget er monteret på enheden, og rammen på forsiden af enheden holdes fast med skruer, skal du fjerne skruerne øverst på rammen.



NuPoint-modul: Hvis der er monteret et NuPoint-modul på enheden, skal du fjerne de to inderste skruer fra modulet.



Portdæksel: Hvis der er monteret et portdæksel på enheden, og rammen på forsiden af enheden holdes fast med skruer, skal du fjerne skruerne øverst på rammen.




2. Ret hullerne på reflektoren ind efter de tomme huller i håndtaget, portdækslet eller NuPoint-modulet.

Vigtigt! Sørg for, at reflektorskjoldet rettes nedad mod bagsiden af enheden som vist i trin 3 på næste side.

3. Indsæt de relevante skruer i hullerne som vist.


Håndtag

Reflektorsiden peger nedad

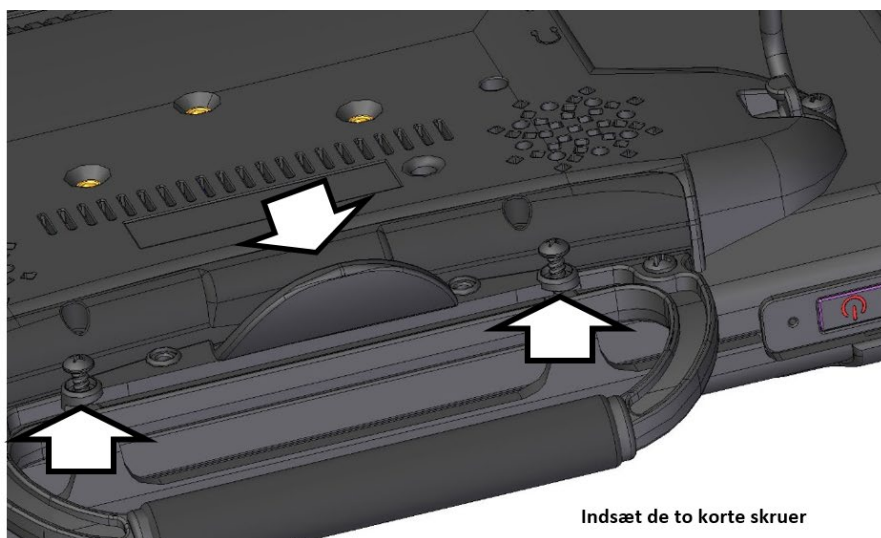


NuPoint-modul

Reflektorsiden peger nedad

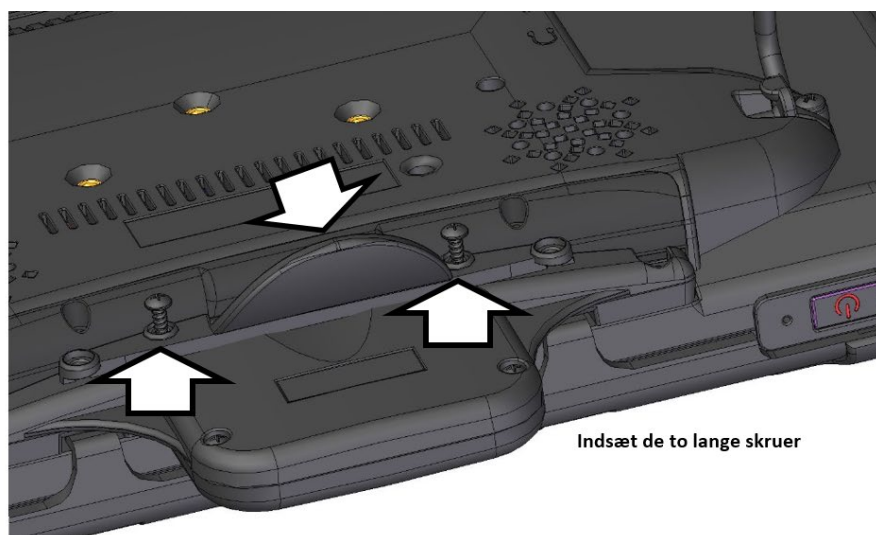

Portdæksel

Reflektorsiden peger nedad

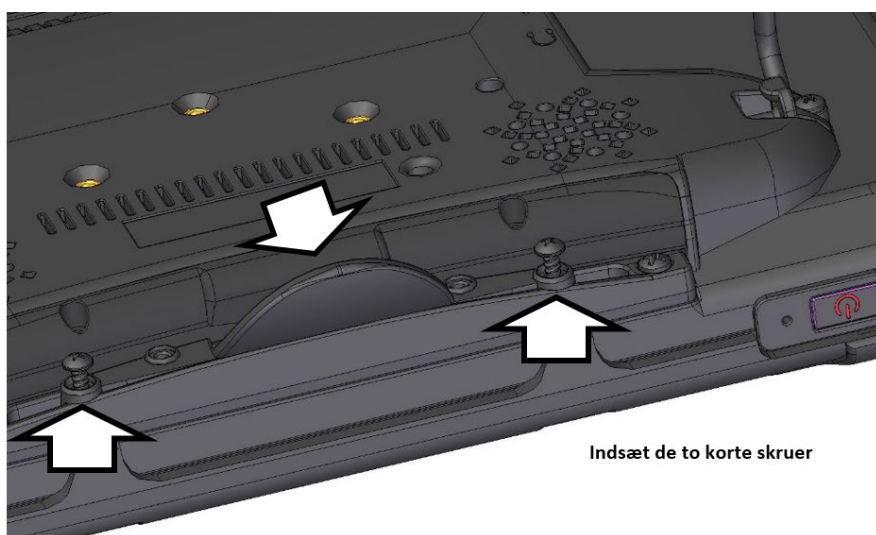

4. Spænd skruerne.

Anvendelse af skærmbeskyttelsesfilm

Hvis du vil bruge en skærmbeskyttelsesfilm, skal du først fjerne enhedens ramme. Der medfølger seks skærmbeskyttelsesfilm. Tre har en mat overflade, mens tre har en skinnende overflade. Den matte overflade er mest blændingsfri. Matte skærmbeskyttelsesfilm kan kendes på den lille røde firkant på bagsiden.

1. Sluk for enheden, og læg den fladt ned på et bord.
2. Fjern støv og fingeraftryk fra skærmen ved hjælp af en fnugfri klud, der er fugtet med vand eller rensmiddel til fladskærme.

Tip: Tør ikke skærmen af, før du monterer skærmbeskyttelsesfilmen. Det kan være lettere at glatte beskyttelsesfilmen ud og fjerne luftbobler (trin 7 nedenfor), hvis skærmen er en smule fugtig.

3. Træk en skærmbeskyttelsesfilm væk fra bagsiden.
4. Hold beskyttelsesfilmen i kanten, så siden, der var mod bagsiden, nu vender mod skærmen.
5. Anbring kanten af beskyttelsesfilmen langs med én af kanterne på skærmen.
6. Tryk beskyttelsesfilmen ned på skærmen, og justér beskyttelsesfilmen, indtil den dækker skærmen langs alle kanter.
7. Brug den medfølgende skraber til at glatte beskyttelsesfilmen ud og fjerne luftbobler og folder.



8. Tør beskyttelsesfilmen af med en fnugfri klud for at fjerne eventuelle fingeraftryk.

Tip: Tør regelmæssigt beskyttelsesfilmen af med en fugtig, fnugfri klud for at fjerne fingeraftryk, snavs osv. Hvis beskyttelsesfilmen bliver for snavset, kan du trække den af og udskifte den med en ny beskyttelsesfilm.

Sådan fastgøres en bærerem

PRC tilbyder to størrelser af bæreremme til din enhed. Den ene rem kan justeres fra 71,12-91,44 cm (28-36"). Den anden rem kan justeres fra 96,52-152,4 cm (38-60").

I hver ende af remmen er der et løkkestik med en hurtigudløser på remsiden. Enhedens remholdere er placeret i toppen og bunden af enheden.

1. Beslut dig for, om bæreremmen skal fastgøres på de øverste eller nederste holdere på enheden.
2. Frigør løkkesticket fra remmen ved at trykke i siden på hurtigudløseren.



3. Træk løkken igennem en remholder på enheden. Brug eventuelt en lille lige genstand, f.eks. en nål, til at trække løkken igennem holderen.
4. Træk løkkesticket igennem løkken.



5. Træk i sticket, indtil det er bundet fast på enheden.
6. Indsæt løkkesticket i remsticket, indtil de klikker sammen.



7. Gentag disse trin for at fastgøre den anden ende af remmen til enheden.

Sådan rengøres og desinficeres enheden

Hvis enheden kun skal bruges af én person, vil rutinemæssig rengøring og desinfektion være tilstrækkelig. Hvis enheden imidlertid skal bruges af flere personer, skal der træffes yderligere foranstaltninger for at rengøre og desinficere enheden, når den er blevet brugt af én person, før den tages i brug af den næste.



Frakobl laderen, og sluk for enheden, før den rengøres eller desinficeres.

Rutinemæssig rengøring og desinfektion

Vigtigt! Der må ikke anvendes opløsningsmidler eller slibemidler eller sprøjtes vand eller rengøringsmiddel på skærmen eller kabinettet.

Sådan rengøres kabinettet

Sluk for enheden, før kabinettet eller skærmen rengøres. Rengør kabinettet med en let fugtig, fnugfri klud. Tør kabinettet grundigt af med en anden fnugfri klud, før du tænder for enheden.

Sådan rengøres berøringsskærmen

Berøringsskærmen er meget følsom. Udtværede fingeraftryk, støv, spyt osv. påvirker skærmens ydeevne. Skærmen er også følsom over for regndråber og ekstreme temperaturer (kondens).

Brug en blød, fnugfri klud til at aftørre berøringsskærmen. Ved kraftigere rengøring anvendes en let fugtig, fnugfri klud, hvorefter skærmen tørres af med en anden blød, fnugfri klud.

Sådan rammen på tastaturskjoldet, tastaturskjoldet og TouchGuides

Alt dette tilbehør kan fjernes fra kabinettet og vaskes i varmt sæbevand. Tør det **grundigt**, før det igen monteres på enheden. Bedste praksis for regelmæssig rengøring er at aftørre tilbehøret i hånden, lægge det på et tørt håndklæde og lade det lufttørre i ca. 5 minutter, før det igen monteres på enheden.

Desinfektion

Til desinfektion af alle genstande, bortset fra skærmen, anvendes en opløsning af eddike og vand (¼ kop eddike til 1 kop vand). Aftør kabinettet (ikke skærmen) med en klud, der er fugtet med denne opløsning.

Vask tastaturskjoldets ramme, tastaturskjoldet og TouchGuide separat med opløsningen af eddike og vand. Lad udstyret lufttørre. **Brug ikke eddike og vand på skærmen!**

Hvad med savl/spyt?

Eventuelt spyt skal straks tørres af, især på berøringsskærmen og rundt om stikkene. Brug en let fugtet, fnugfri klud til at aftørre enheden.

Hvad med spild, regn eller utilsigtet nedsænkning i væske?

Hvis du spilder væske eller løbende substans på enheden, hvis du fanges i regnvej, eller hvis enheden ved et uheld tabes i væske, skal du straks tørre enheden af så grundigt som muligt. Prøv at bruge enheden. Kontakt serviceleverandøren, hvis den ikke fungerer, og fortæl dem, hvad der er sket. De kan eventuelt bede dig om at sende enheden til service.

Sådan desinficeres en enhed og tilbehør for flere brugere

Bemærk: Dette afsnit er kun relevant, hvis den samme enhed skal bruges af mere end én person. Er det tilfældet, er det vigtigt at foretage en effektiv desinfektion af enheden og tilbehøret, når delene er blevet brugt af én person, før de tages i brug af den næste.

Første trin: Tag beskyttelsehandsker på

Næste trin: Rengør enheden og tilbehøret

1. Tør enheden og tilbehøret af med desinficerende servietter (virusdræbende, bakteriedræbende, pseudomonasdræbende, tuberkulosedræbende, svampedræbende) – Metrex CaviWipes™. Følg anvisningerne fra producenten af desinfektionsmidlet for *rengøring*.
2. Brug en vatpind med rengøringsmiddel (f.eks. Windex® eller et andet kommercielt rengøringsmiddel), og rengør indersiden af alle revner og fordybninger. Du kan eventuelt bruge en tandbørste eller lignende børste.
3. Tør enheden med komprimeret luft, eller tør den af.

Vigtigt! Kontrollér, at al jord er fjernet fra enheden og tilbehøret. Dette er vigtigt, før der fortsættes til desinfektionen af udstyret.

Næste trin: Desinficér enheden og tilbehøret

1. Tør enheden og tilbehøret af med en ny desinficerende serviet (virusdræbende, bakteriedræbende, pseudomonasdræbende, tuberkulosedræbende, svampedræbende) – Metrex CaviWipes™. Følg anvisningerne fra producenten af desinfektionsmidlet for *desinfektion*.
2. Sørg for at rengøre indersiden af alle revner og fordybninger, og aftør om nødvendigt mere end én gang for at holde enheden våd i mindst tre (3) minutter.
3. Lad enheden og tilbehøret tørre.

Sidste trin: Aftør berøringsskærmen

1. Når enheden og tilbehøret er tørt, skal du aftørre visningsområdet (enhedens berøringsskærm, TouchGuide, tastaturskjold) med glasrens, så skærmen ikke misfarves.
2. Lad udstyret tørre.

Bortskaffelse af enheden eller batteriet



Bortskaffelse af enheden

Bortskaf enheden i overensstemmelse med den nationale lovgivning for genbrug af elektronik.



Bortskaffelse af batteriet

Hvis batteriet i din enhed skal udskiftes, skal du bortskaffe det gamle batteri i overensstemmelse med de lokale og/eller nationale bestemmelser.

Fejlfinding


Batteriet eller batterierne døde, mens softwaren kørte

Batteriopladerlampen og opladningslampen på forsiden af enheden begynder at blinke. Tilslut batteriopladeren for at fortsætte med at bruge enheden. Hvis du ikke tilslutter batteriopladeren, lukker softwaren og/eller operativsystemet ned, kontrollampen stopper med at blinke, og enheden slukkes.

For at genstarte enheden skal du tilslutte batteriopladeren, trykke på og holde tænd-/slukknappen nede i nogle sekunder og holde øje med displayskærmen. Hvis batteriet var helt dødt, kan du lade det oplade et stykke tid, før du tænder for enheden.

Du tror, at enhedens batteri eller batterier skal udskiftes

Batteriet eller batterierne i din enhed kan udskiftes. Ring til PRC-serviceafdelingen, før du udskifter batteriet, hvis det ikke kan oplades eller ikke holder opladningen: 800-262-1990. I lande uden for USA skal du ringe til den lokale distributør.

 Der er lille risiko for eksplosion, hvis du udskifter batteriet med en forkert type.

Du tror, at batteriopladeren skal udskiftes

Brug kun den batterioplader, der fulgte med enheden. Andre batteriopladere kan skade batterierne. Hvis du tror, at opladeren skal udskiftes, skal du ringe til the PRC-serviceafdelingen på 800-262-1990. Uden for USA kontaktes distributøren. Serviceafdelingen kan fastslå, om opladeren skal udskiftes og oplyse om en korrekt oplader.

Integrerede enheder: Lysstofrør med høj effektivitet og brug af infrarød


Der er ofte et kompatibilitetsproblem mellem mange infrarøde fjernbetjening og lysstofrør med høj effektivitet.

Hvis enheden bruges i et rum med lysstofrør med høj effektivitet, fungerer det infrarøde udstyr, herunder head tracking, computeradgang, fjernbetjeningskommandoer osv., muligvis ikke. Sluk for lysstofrørene, og IR-udstyret fungerer korrekt.

Enheden er gået i baglås

Vigtigt! Du bør kun nulstille enheden som allersidste udvej, hvis den er gået i baglås, og alt andet er afprøvet. Normalt vil du kun nulstille din enhed, hvis du får det at vide af PRC tekniske support.

Hvis du får brug for at nulstille enheden, tryk på nulstil-knappen. Enheden og LED-lyset vil slukkes.

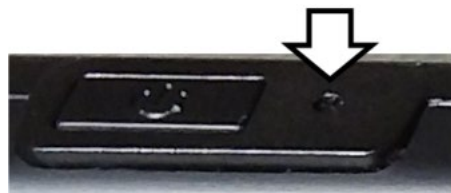

Accent 1400 knappen vises her som eksempel.

Tip: Knappen er let undersænket ifht rammen. *Accent 800 og 1000:* Anvend den spidse ende af en papirklips til at trykke på knappen. *Accent 1400:* Brug spidsen af en blyant til at trykke på knappen. Her må **du ikke** bruge en skarp spids såsom en nål eller enden af en klips, det vil ødelægge knappen.

Bilag A: Oplysninger om Accent 800-overensstemmelse

Federal Communications Commission (FCC) Advarsel

Denne anordning overholder del 15 i FCC-reglerne. Betjeningen er underlagt to betingelser: (1) denne anordning må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) anordningen skal acceptere enhver modtagen interferens, herunder interferens, der kan medføre uønsket funktion.

Ændringer af dette produkt, som ikke er udtrykkeligt godkendt af PRC-Salttillo, kan overskride FCC-grænserne og ugyldiggøre din autorisation til at bruge dette produkt.

Bemærk: Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for en digital anordning i klasse A i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er beregnet til at yde en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens, når udstyret anvendes i beboelsesområder. Dette udstyr genererer, anvender og kan udstråle radiofrekvensenergi, som, hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med brugervejledningen, kan forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i den enkelte installation. Hvis dette udstyr forårsager interferens i radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan bestemmes ved at tænde og slukke for udstyret, opfordres brugeren til at udbedre interferensen ved en eller flere af følgende metoder:

- Drej eller flyt modtagerantennen.
- Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp.

Industry Canada (IC) Warning

Denne enhed overholder licens-fritagede standarder i Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Betjeningen af denne er underlagt følgende to forbehold: (1) Denne enhed må ikke skabe interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver interferens, der kan forårsage uønsket betjening af enheden.

Trådløst kommunikationsudstyr

Trådløst kommunikationsudstyr, f.eks. trådløse netværksenheder i hjemmet, mobiltelefoner, trådløse telefoner og deres basestationer samt walkie-talkies, kan påvirke denne enhed og skal holdes i en afstand af mindst 15,24 cm (6") fra enheden.

Begrænsning af tilsigtet anvendelse, tredjeparter og tab af data

- PRC-Salttillo giver ingen garanti for funktionalitet af denne talegenererende enhed ud over vilkårene for den udtrykkelige garanti vedrørende den tilsigtede brug af talegenerering. PRC-Salttillo giver ingen garanti for nogen tredjepartssoftware og er ikke ansvarlig for nogen personskade, skade eller krav, som måtte opstå som følge af funktion eller manglende funktion af nogen teknologi, websteder, produkter og software fra tredjeparter. Yderligere brug kan kræve yderligere kliniske bestemmelser, som ligger uden for området af evaluering af talegenererende enheder.
- PRC-Salttillo påtager sig intet ansvar for eventuelt tab eller krav fra tredjeparter, som måtte opstå som følge af brugen af dette produkt.
- PRC-Salttillo påtager sig intet ansvar for eventuelle skader eller tab, der skyldes sletning af data som følge af mislykkede reparationer eller udskiftning af batterier. Sørg for at sikkerhedskopiere alle vigtige data på et andet medie (computer) for at beskytte mod tab.

Enhedens tiltænkte anvendelse

Accent 800 er en talegenererende enhed, der forbedrer kommunikationen for en person med tale-/sprogsvækkelse. Denne enhed og de tilhørende sprogprogrammer giver brugeren mulighed for at starte en samtale, søge oplysninger, give udtryk for meninger og dele følelser. Den kan holdes i hånden, bruges med et bordstativ eller monteres på en kørestol. Den betjenes ved hjælp af berøringsskærmen, et tilgængeligt head tracking-system eller forskelligt tilgængeligt kontakttilbehør. Enheden indeholder ikke på nogen måde lægemidler, menneskeblod eller afledte plasmaproducter, og den er ikke fremstillet ved hjælp af væv af animalsk oprindelse.

Indikationer og kontraindikationer

Indikation: Accent 800 er en talegenererende enhed, der forbedrer kommunikationen for en person med tale-/sprogsvækkelse.

Kontraindikation: Denne enhed er ikke beregnet til at være en nødopkaldsenhed eller eneste kommunikationshjælp.

Eksisterende applikationsrisici

Der kendes ingen eksisterende anvendelsesrisici.

Forventet levetid

Enhedens forventede levetid er fem år. Hvis du bortskaffer enheden, skal det ske i overensstemmelse med den lokale, og/eller nationale lovgivning for genbrug af elektronik.

Tiltænkte operatører

Personer, som bruger enheden til kommunikation, personens kommunikationspartner og/eller personen, som ændrer enhedens indstillinger, vedligeholder softwarefiler osv., er de tiltænkte operatører af enheden. Billederne og teksten i dette dokument hjælper disse operatører med at opnå den tiltænkte anvendelse af enheden.

Forventet placering af operatører

Under normal brug forventes enheden at være inden for 30,48-35,56 cm (12-14") afstand af personens krop. Afstanden vil variere alt efter, om enheden holdes i hånden eller er monteret på en kørestol eller et bord. Hvis enheden bruges sammen med et eye tracking-modul eller head tracking-modul, vil afstanden være større.

Specielle færdigheder, træning eller viden påkrævet

Ingen specielle færdigheder eller træning kræves for at betjene eller vedligeholde denne enhed. Billeder og tekst i dette dokument vil hjælpe med at udføre den korrekte betjening af enheden.

Brugsanvisning

- Alle enhedens funktioner er sikre at anvende for brugeren. Følg anvisningerne i denne vejledning for at opnå de bedste resultater.
- Det er ikke nødvendigt at slukke for enheden eller forstærkeren, hvis enheden bruges dagligt. Det anbefales at genstarte enheden én gang om ugen og sætte den i dvaletilstand dagligt.
- Kontakt PRC-Salttillo eller din distributør og de nationale myndigheder for at rapportere eventuelle alvorlige hændelser i forbindelse med enheden.
- Se "Sådan rengøres og desinficeres enheden" for at få oplysninger om rengøring af enheden.

Kontaktinformation for hjælp

Hvis du har brug for hjælp til opsætning, brug eller vedligehold af din enhed, eller hvis der opstår en uventet handling eller begivenhed på enheden, bedes du kontakte distributøren.

Opbevaringsanvisninger












Sluk for enheden, hvis du vil opbevare den på et lager i længere tid. Enheder på lager skal oplades hver 6. måned.



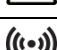



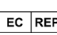

Integreret funktionspakke

Ofte kræver en bevilling, at Accent enheden bliver levret som et dedikeret kommunikationshjælpemiddel. Dette betyder, at adgangen til nogle af de avancerede funktioner er begrænset. For at få adgang og bruge alle avancerede funktioner, skal enheden oplåses ved at købe en såkaldt Integrated Feature Pack (IFP). Kontakt din distributør for yderligere information.

Symbolforklaring

Dette afsnit indeholder forklaring på de symboler, der optræder på Accent 800-enheder, tilbehøret eller emballagen.

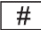Symbol	Forklaring
	Enheden overholder FCC-reglerne (Federal Communications Commission)
	Enheden overholder EU's sundheds-, sikkerheds- og miljøstandarder.
	Enheden overholder kravene i UK MDR 2002.
	Hele enheden, bortset fra adapteren og signalindgangs-/udgangsporte er en type BF anvendt del. "Anvendt del" refererer til den del af enheden, som brugeren kommer i fysisk kontakt med, når den anvendes til sit tiltænkte formål.
	Enheden overholder gældende ACMA tekniske standarder for telekommunikation, radiokommunikation, EMC og EME.
	Forsigtighed er nødvendig, når du bruger enheden tæt på det sted, hvor symbolet er placeret for at undgå uønskede konsekvenser.
	Enheden udsender generelt forhøjede, potentielt farlige niveauer af ikke-ioniserende, elektromagnetisk stråling.
	Elektronisk udstyr til genbrug. Enheden må ikke bortskaffes med almindeligt affald.
IP22	Enheden er beskyttet mod faste fremmedlegemer på 12,5 mm eller større og lodret faldende vanddråber, når den vippes op til 15°.
	Temperaturområdet, som enheden må udsættes for under brug, er 0-40 °C (32-104 °F). Temperaturområdet, som enheden må udsættes for under opbevaring eller transport, er -20-60 °C (-4-140 °F). Se også "Temperaturforhold for direkte kontakt" nedenfor. <i>Advarsel:</i> Hvis enheden opbevares i omgivelser, som er uden for det anbefalede temperaturområde, "temperaturområdet, som enheden må udsættes for under brug", så lad enheden stå og akklimatisere i min. 30 min. før forsøg på anvendelse.
	Fugtighedsområdet, som enheden må udsættes for under brug eller opbevaring, er 10-90 %.
	Atmosfærisk tryk under brug, opbevaring eller transport er 80 kPa til 106 kPa.

Symbol	Forklaring
	Suivre le mode d'emploi. Consulter le manuel d'utilisation.
	Følg brugsanvisningen. Se betjeningsvejledningen.
	Enhedens modelnummer.
	Enhedens serienummer.
	Navn og adresse på producenten af enheden.
	Angiver et medicinsk udstyr.
	Autoriseret repræsentant i EU.
	Den ansvarlige person i Det Forenede Kongerige.

Oplader

Følgende oplader er kompatibel med enheden: Megmeet MANGO60S-18BB-PRC (fås hos PRC eller din distributør). Brug kun denne oplader til opladning af enheden.

Klassifikationer

Beskyttelse mod elektrisk stød	Klasse II/internt strømforsynet
Beskyttelse mod skadelig indtrængning af vand og partikler	IP22
Driftsfunktion	Kontinuerlig
Type B anvendt del	BF

Specifikationer

Vægt	1,13 kg (2,5 lbs.)
Mål	22,86 cm x 14,99 x 3,81 cm (9" x 5,9" x 1,5")
Display	20,32 cm (8") diagonalt, skærmopløsning 1920 x 1200 dpi med LCD IPS
Batterilevetid	Varierer fra 8-9 timer afhængigt af individuel brug og strømindstillinger.
Lager/udvidelsesmuligheder	8 GB RAM, 256 GB lager
Operativsystem	Microsoft® Windows® 11 Pro
Processor	Intel® Celeron® N4500
Systemkomponenter	En ramme, et håndtag, et trådstativ, en batterioplader, front- og bagkameraer, et USB-flashdrev, en pen
Tilbehør	Bæretaske, standard- og deluxebæreremme, skærmbeskyttelsesfilm, ekstern strømpakke, QRM-monteringsplade, monteringsbeslag til enheden, tastaturskjold, TouchGuides, udskiftningsramme, et ekstra kraftigt Xtreme™-kabinet, NuPoint® head tracking-modul

Driftsmiljø

Omgivelsestemperatur	0°C til 40°C (32°F til 104°F)
Relativ luftfugtighed	10% til 90%
Atmosfærisk tryk	80 kPa til 106 kPa
Enheden skal beskyttes mod fugt under brug.	

Transport og lagermiljø

Under transport eller opbevaring er området af temperaturer, som enheden kan udsættes for -20°C til 60°C (-4°F til 140°F), med et atmosfærisk trykkræde på 80 kPa til 106 kPa.

Temperaturforhold for direkte kontakt

Forhold for sikker kontakt – tid

Tilgængelig del	Tidsgrænse for kontakt
Berøringsskærm	Mindre end 10 minutter
Enhedens plastikkabinet	Mindre end 10 minutter
Knap	Mindre end 10 minutter

Forhold for sikker kontakt – temperatur

Tilgængelig del	Maksimumstemperatur, når enheden er i brug (omgivende temperatur på 40 °C eller 104 °F)
Berøringsskærm	46,1 °C (114,98 °F)
Enhedens plastikkabinet	47,0 °C (116,60 °F)
Knap	42,3 °C (108,14 °F)

- ⚠ Mens enheden oplades, kan berøring af enhedens overflade med ødelagt hud forværre et sår.
- ⚠ Mens enheden oplades, bør spædbørn eller højrisikogrupper ikke røre ved enhedens overflade, hvis der er risiko for at brænde huden.

Bilag B: Oplysninger om Accent 1000-overensstemmelse

Federal Communications Commission (FCC) Advarsel

Denne anordning overholder del 15 i FCC-reglerne. Betjeningen er underlagt to betingelser: (1) denne anordning må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) anordningen skal acceptere enhver modtagen interferens, herunder interferens, der kan medføre uønsket funktion.

Ændringer af dette produkt, som ikke er udtrykkeligt godkendt af PRC-Salttillo, kan overskride FCC-grænserne og ugyldiggøre din autorisation til at bruge dette produkt.

Bemærk: Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for en digital anordning i klasse A i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er beregnet til at yde en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens, når udstyret anvendes i beboelsesområder. Dette udstyr genererer, anvender og kan udstråle radiofrekvensenergi, som, hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med brugervejledningen, kan forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i den enkelte installation. Hvis dette udstyr forårsager interferens i radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan bestemmes ved at tænde og slukke for udstyret, opfordres brugeren til at udbedre interferensen ved en eller flere af følgende metoder:

- Drej eller flyt modtagerantennen.
- Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp.

Industry Canada (IC) Advarsel

Denne enhed overholder Industry Canada licensfritagne RSS standard(er). Betjening er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage interferens, og (2) Denne enhed skal acceptere enhver interferens, herunder interferens, som kan forårsage uønsket drift af enheden.

Trådløst kommunikationsudstyr

Trådløst kommunikationsudstyr, f.eks. trådløse netværksenheder i hjemmet, mobiltelefoner, trådløse telefoner og deres basestationer samt walkie-talkies, kan påvirke denne enhed og skal holdes i en afstand af mindst 15,24 cm (6") fra enheden.

Begrænsning af tilsigtet anvendelse, tredjeparter og tab af data

- PRC-Salttillo giver ingen garanti for funktionalitet af denne talegenererende enhed ud over vilkårene for den udtrykkelige garanti vedrørende den tilsigtede brug af talegenerering. PRC-Salttillo giver ingen garanti for nogen tredjepartssoftware og er ikke ansvarlig for nogen personskade, skade eller krav, som måtte opstå som følge af funktion eller manglende funktion af nogen teknologi, websteder, produkter og software fra tredjeparter. Yderligere brug kan kræve yderligere kliniske bestemmelser, som ligger uden for området af evaluering af talegenererende enheder.
- PRC-Salttillo påtager sig intet ansvar for eventuelt tab eller krav fra tredjeparter, som måtte opstå som følge af brugen af dette produkt.
- PRC-Salttillo påtager sig intet ansvar for eventuelle skader eller tab, der skyldes sletning af data som følge af mislykkede reparationer eller udskiftning af batterier. Sørg for at sikkerhedskopiere alle vigtige data på et andet medie (computer) for at beskytte mod tab.

Enhedens tiltænkte anvendelse

Accent 1000 er en talegenererende enhed, der forbedrer kommunikationen for en person med tale-/sprogsvækkelse. Denne enhed og de tilhørende sprogprogrammer giver brugeren mulighed for at starte en samtale, søge oplysninger, give udtryk for meninger og dele følelser. Den kan holdes i hånden, bruges med et bordstativ eller monteres på en kørestol. Den betjenes ved hjælp af berøringskærmen, et tilgængeligt eye tracking- eller head tracking-system eller forskelligt tilgængeligt kontaktilbehør. Enheden indeholder ikke på nogen måde lægemidler, menneskeblod eller afledte plasmaprodukter, og den er ikke fremstillet ved hjælp af væv af animalsk oprindelse.

Indikationer og kontraindikationer

Indikation: Accent 1000 er en talegenererende enhed, der forbedrer kommunikationen for en person med tale-/sprogsvækkelse.

Kontraindikation: Denne enhed er ikke beregnet til at være en nødopkaldsenhed eller eneste kommunikationshjælp.

Eksisterende applikationsrisici

Der kendes ingen eksisterende anvendelsesrisici.

Forventet levetid

Enhedens forventede levetid er fem år. Hvis du bortskaffer enheden, skal det ske i overensstemmelse med den lokale, og/eller nationale lovgivning for genbrug af elektronik.

Tiltænkte operatører

Personer, som bruger enheden til kommunikation, personens kommunikationspartner og/eller personen, som ændrer enhedens indstillinger, vedligeholder softwarefiler osv., er de tiltænkte operatører af enheden. Billederne og teksten i dette dokument hjælper disse operatører med at opnå den tiltænkte anvendelse af enheden.

Forventet placering af operatører

Under normal brug forventes enheden at være inden for 30,48-35,56 cm (12-14") afstand af personens krop. Afstanden vil variere alt efter, om enheden holdes i hånden eller er monteret på en kørestol eller et bord. Hvis enheden bruges sammen med et eye tracking-modul eller head tracking-modul, vil afstanden være større.

Specielle færdigheder, træning eller viden påkrævet

Ingen specielle færdigheder eller træning kræves for at betjene eller vedligeholde denne enhed. Billeder og tekst i dette dokument vil hjælpe med at udføre den korrekte betjening af enheden.

Brugsanvisning

- Alle enhedens funktioner er sikre at anvende for brugeren. Følg anvisningerne i denne vejledning for at opnå de bedste resultater.
- Det er ikke nødvendigt at slukke for enheden eller forstærkeren, hvis enheden bruges dagligt. Det anbefales at genstarte enheden én gang om ugen og sætte den i dvaletilstand dagligt.
- Kontakt PRC-Salttillo eller din distributør og de nationale myndigheder for at rapportere eventuelle alvorlige hændelser i forbindelse med enheden.
- Se "Sådan rengøres og desinficeres enheden" for at få oplysninger om rengøring af enheden.

Kontaktinformation for hjælp

Hvis du har brug for hjælp til opsætning, brug eller vedligehold af din enhed, eller hvis der opstår en uventet handling eller begivenhed på enheden, bedes du kontakte distributøren.

Opbevaringsanvisninger












Sluk for enheden, hvis du vil opbevare den på et lager i længere tid. Enheder på lager skal oplades hver 6. måned.





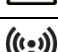



Integreret funktionspakke

Ofte kræver en bevilling, at Accent enheden bliver levret som et dedikeret kommunikationshjælpemiddel. Dette betyder, at adgangen til nogle af de avancerede funktioner er begrænset. For at få adgang og bruge alle avancerede funktioner, skal enheden oplåses ved at købe en såkaldt Integrated Feature Pack (IFP). Kontakt din distributør for yderligere information.

Symbolforklaring

Dette afsnit indeholder forklaring på de symboler, der optræder på Accent 1000-enheder, tilbehøret eller emballagen.

Symbol	Forklaring
	Enheden overholder FCC-reglerne (Federal Communications Commission)
	Enheden overholder EU's sundheds-, sikkerheds- og miljøstandarder.
	Enheden overholder kravene i UK MDR 2002.
	Hele enheden, bortset fra adapteren og signalindgangs-/udgangsporte er en type BF anvendt del. "Anvendt del" refererer til den del af enheden, som brugeren kommer i fysisk kontakt med, når den anvendes til sit tiltænkte formål.
	Enheden overholder gældende ACMA tekniske standarder for telekommunikation, radiokommunikation, EMC og EME.
	Forsigtighed er nødvendig, når du bruger enheden tæt på det sted, hvor symbolet er placeret for at undgå uønskede konsekvenser.
	Enheden udsender generelt forhøjede, potentielt farlige niveauer af ikke-ioniserende, elektromagnetisk stråling.
	Elektronisk udstyr til genbrug. Enheden må ikke bortskaffes med almindeligt affald.
IP22	Enheden er beskyttet mod faste fremmedlegemer på 12,5 mm eller større og lodret faldende vanddråber, når den vippes op til 15°.
	Temperaturområdet, som enheden må udsættes for under brug, er 0-40 °C (32-104 °F). Temperaturområdet, som enheden må udsættes for under opbevaring eller transport, er -20-60 °C (-4-140 °F). Se også "Temperaturforhold for direkte kontakt" nedenfor. <i>Advarsel:</i> Hvis enheden opbevares i omgivelser, som er uden for det anbefalede temperaturområde, "temperaturområdet, som enheden må udsættes for under brug", så lad enheden stå og akklimatisere i min. 30 min. før forsøg på anvendelse.
	Fugtighedsområdet, som enheden må udsættes for under brug eller opbevaring, er 10-90 %.
	Atmosfærisk tryk under brug, opbevaring eller transport er 80 kPa til 106 kPa.

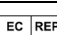Symbol	Forklaring
	Suivre le mode d'emploi. Consulter le manuel d'utilisation.
	Følg brugsanvisningen. Se betjeningsvejledningen.
	Enhedens modelnummer.
	Enhedens serienummer.
	Navn og adresse på producenten af enheden.
	Angiver et medicinsk udstyr.
	Autoriseret repræsentant i EU.
	Den ansvarlige person i Det Forenede Kongerige.

Oplader

Følgende oplader er kompatibel med enheden: Megmeet MANGO60S-18BB-PRC (fås hos PRC eller din distributør). Brug kun denne oplader til opladning af enheden.

Klassifikationer

Beskyttelse mod elektrisk stød	Klasse II/internt strømforsynet
Beskyttelse mod skadelig indtrængning af væske	Kun IP52 til frontpanel og øverste kant, bortset fra nulstillingshullet og det øverste mikrofonhul.
Driftsfunktion	Kontinuerlig
Type B anvendt del	BF

Specifikationer

Vægt	1,497 kg (3,3 lbs.)
Mål	26,16 cm x 17,78 cm x 3,30 cm (10,3" x 7,0" x 1,3")
Display	25,65 cm (10,1") diagonalt, skærmopløsning 1920 x 1200 dpi med LCD IPS
Batterilevetid	Varierer fra 8-10 timer afhængigt af individuel brug og strømindstillinger.
Lager/udvidelsesmuligheder	8 GB RAM, 256 GB lager
Operativsystem	Microsoft® Windows® 11 Pro
Processor	Intel® Celeron® N4500
Systemkomponenter	Ramme, støddæmpere, håndtag, trådstativ, batterioplader, USB-flashdrev, pen
Tilbehør	Bæretaske, standard- og deluxebæreremme, skærmbeskyttelsesfilm, ekstern strømpakke, QRM-monteringsplade, monteringsbeslag til enheden, tastaturskjold, TouchGuides, udskiftningsramme, et ekstra kraftigt Xtreme™-kabinet, Look® eye tracking-modul, NuPoint® head tracking-modul

Driftsmiljø

Omgivelsestemperatur	0°C til 40°C (32°F til 104°F)
Relativ luftfugtighed	10% til 90%
Atmosfærisk tryk	80 kPa til 106 kPa
Enheden skal beskyttes mod fugt under brug.	

Transport og lagermiljø

Under transport eller opbevaring er området af temperaturer, som enheden kan udsættes for -20°C til 60°C (-4°F til 140°F), med et atmosfærisk trykkræde på 80 kPa til 106 kPa.

Temperaturforhold for direkte kontakt

Forhold for sikker kontakt – tid

Tilgængelig del	Tidsgrænse for kontakt
Berøringsskærm	Mindre end 1 minut
Tænd-/slukknop	Mindre end 1 minut
Lydstyrkeknop	Mindre end 1 minut

Forhold for sikker kontakt – temperatur

Tilgængelig del	Maksimumstemperatur, når enheden er i brug (omgivende temperatur på 40 °C eller 104 °F)
Berøringsskærm	54,3 °C (129,74 °F)
Tænd-/slukknop	50,5 °C (122,9 °F)
Lydstyrkeknop	41,2 °C (106,16 °F)

- ⚠ Mens enheden oplades, kan berøring af enhedens overflade med ødelagt hud forværre et sår.
- ⚠ Mens enheden oplades, bør spædbørn eller højrisikogrupper ikke røre ved enhedens overflade, hvis der er risiko for at brænde huden.

Bilag C: Oplysninger om Accent 1400-overensstemmelse

Federal Communications Commission (FCC) Advarsel

Denne anordning overholder del 15 i FCC-reglerne. Betjeningen er underlagt to betingelser: (1) denne anordning må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) anordningen skal acceptere enhver modtagen interferens, herunder interferens, der kan medføre uønsket funktion.

Ændringer af dette produkt, som ikke er autoriseret af PRC-Salttillo, kan overskride FCC-grænserne og ugyldiggøre din autorisation til at bruge dette produkt.

Bemærk: Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for en digital anordning i klasse A i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er beregnet til at yde en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens, når udstyret anvendes i beboelsesområder. Dette udstyr genererer, anvender og kan udstråle radiofrekvensenergi, som, hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med brugervejledningen, kan forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i den enkelte installation. Hvis dette udstyr forårsager interferens i radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan bestemmes ved at tænde og slukke for udstyret, opfordres brugeren til at udbedre interferensen ved en eller flere af følgende metoder:

- Drej eller flyt modtagerantennen.
- Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp.

Dette udstyr overholder FCC-grænserne for strålingseksponering, der er angivet for et ukontrolleret miljø.

Dette udstyr skal installeres og betjenes med en afstand på mindst 20 cm (7,9 tommer) mellem radiatoren og din krop.

Funktioner i 5.15-5.25GHz-båndet er begrænset til kun indendørs brug.

Indeholder FCC ID:SSSBC127-X

Indeholder FCC ID:QOQ11

Industry Canada (IC) Advarsel

Denne enhed overholder Industry Canada licensfritagne RSS standard(er). Betjening er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage interferens, og (2) Denne enhed skal acceptere enhver interferens, herunder interferens, som kan forårsage uønsket drift af enheden.

Dette udstyr overholder de begrænsninger for RSS-strålingseksponering, der er angivet for et ukontrolleret miljø. Dette udstyr skal installeres og betjenes med en afstand på mindst 20 cm mellem radiatoren og din krop.

Funktioner i 5.15-5.25GHz-båndet er kun begrænset til indendørs brug.

Indeholder IC:11012A-BC127

Indeholder IC:5123A-11

Trådløst kommunikationsudstyr

Trådløst kommunikationsudstyr, f.eks. trådløse netværksenheder i hjemmet, mobiltelefoner, trådløse telefoner og deres basestationer samt walkie-talkies kan påvirke denne enhed og skal holdes i en afstand af mindst 15,24 cm (6") fra enheden.

Begrænsning af tilsigtet anvendelse, tredjeparter og tab af data

- PRC-Salttillo giver ingen garanti for funktionalitet af denne talegenererende enhed ud over vilkårene for den udtrykkelige garanti vedrørende den tilsigtede brug af talegenerering. PRC-Salttillo giver ingen garanti for nogen tredjepartssoftware og er ikke ansvarlig for nogen personskade, skade eller krav, som måtte opstå som følge af funktion eller manglende funktion af nogen teknologi, websteder, produkter og software fra tredjeparter. Yderligere brug kan kræve yderligere kliniske bestemmelser, som ligger uden for området af evaluering af talegenererende enheder.
- PRC-Salttillo påtager sig intet ansvar for eventuelt tab eller krav fra tredjeparter, som måtte opstå som følge af brugen af dette produkt.
- PRC-Salttillo påtager sig intet ansvar for eventuelle skader eller tab, der skyldes sletning af data som følge af mislykkede reparationer eller udskiftning af batterier. Sørg for at sikkerhedskopiere alle vigtige data på et andet medie (computer) for at beskytte mod tab.

Enhedens tiltænkte anvendelse

Accent 1400 er en talegenererende enhed, der forbedrer kommunikationen for en person med tale-/sprogsvækkelse. Denne enhed og de tilhørende sprogprogrammer giver brugeren mulighed for at starte en samtale, søge oplysninger, give udtryk for meninger og dele følelser. Den kan holdes i hånden, bruges med et bordstativ eller monteres på en kørestol. Den betjenes ved hjælp af berøringsskærmen, et tilgængeligt eye tracking- eller head tracking-system eller forskelligt tilgængeligt kontaktilbehør. Enheden indeholder ikke på nogen måde lægemidler, menneskeblod eller afledte plasmaproducter, og den er ikke fremstillet ved hjælp af væv af animalsk oprindelse.

Indikationer og kontraindikationer

Indikation: Accent 1400 er en talegenererende enhed, der forbedrer kommunikationen for en person med tale-/sprogsvækkelse.

Kontraindikation: Denne enhed er ikke beregnet til at være en nødopkaldsenhed eller eneste kommunikationshjælp.

Eksisterende applikationsrisici

Der kendes ingen eksisterende anvendelsesrisici.

Forventet levetid

Enhedens forventede levetid er fem år. Hvis du bortskaffer enheden, skal det ske i overensstemmelse med den lokale, og/eller nationale lovgivning for genbrug af elektronik.

Tiltænkte operatører

Personer, som bruger enheden til kommunikation, personens kommunikationspartner og/eller personen, som ændrer enhedens indstillinger, vedligeholder softwarefiler osv., er de tiltænkte operatører af enheden. Billederne og teksten i dette dokument hjælper disse operatører med at opnå den tiltænkte anvendelse af enheden.

Forventet placering af operatører

Under normal brug forventes enheden at være inden for 30,48-35,56 cm (12-14") afstand af personens krop. Afstanden vil variere alt efter, om enheden holdes i hånden eller er monteret på en kørestol eller et bord. Hvis enheden bruges sammen med et eye tracking-modul eller head tracking-modul, vil afstanden være større.

Specielle færdigheder, træning eller viden påkrævet

Ingen specielle færdigheder eller træning kræves for at betjene eller vedligeholde denne enhed. Billeder og tekst i dette dokument vil hjælpe med at udføre den korrekte betjening af enheden.

Brugsanvisning

- Alle enhedens funktioner er sikre at anvende for brugeren. Følg anvisningerne i denne vejledning for at opnå de bedste resultater.
- Det er ikke nødvendigt at slukke for enheden eller forstærkeren, hvis enheden bruges dagligt. Det anbefales at genstarte enheden én gang om ugen og sætte den i dvaletilstand dagligt.
- Kontakt PRC-Salttillo eller din distributør og de nationale myndigheder for at rapportere eventuelle alvorlige hændelser i forbindelse med enheden.
- Se "Sådan rengøres og desinficeres enheden" for at få oplysninger om rengøring af enheden.

Kontaktinformation for hjælp

Hvis du har brug for hjælp til opsætning, brug eller vedligehold af din enhed, eller hvis der opstår en uventet handling eller begivenhed på enheden, bedes du kontakte distributøren.

Opbevaringsanvisninger










Sluk for enheden, hvis du vil opbevare den på et lager i længere tid. Enheder på lager skal oplades hver 6. måned.









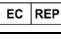

Integreret funktionspakke

Ofte kræver en bevilling, at Accent enheden bliver levret som et dedikeret kommunikationshjælpemiddel. Dette betyder, at adgangen til nogle af de avancerede funktioner er begrænset. For at få adgang og bruge alle avancerede funktioner, skal enheden oplåses ved at købe en såkaldt Integrated Feature Pack (IFP). Kontakt din distributør for yderligere information.

Symbolforklaring

Dette afsnit indeholder forklaring på de symboler, der optræder på Accent 1400-enheder, tilbehøret eller emballagen.

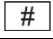Symbol	Forklaring
	Enheden overholder FCC-reglerne (Federal Communications Commission)
	Enheden overholder EU's sundheds-, sikkerheds- og miljøstandarder.
	Enheden overholder kravene i UK MDR 2002.
	Hele enheden, bortset fra adapteren og signalindgangs-/udgangsporte er en type BF anvendt del. "Anvendt del" refererer til den del af enheden, som brugeren kommer i fysisk kontakt med, når den anvendes til sit tiltænkte formål.
	Enheden overholder gældende ACMA tekniske standarder for telekommunikation, radiokommunikation, EMC og EME.
	Forsigtighed er nødvendig, når du bruger enheden tæt på det sted, hvor symbolet er placeret for at undgå uønskede konsekvenser.
	Enheden udsender generelt forhøjede, potentielt farlige niveauer af ikke-ioniserende, elektromagnetisk stråling.
	Elektronisk udstyr til genbrug. Enheden må ikke bortskaffes med almindeligt affald.
IP22	Enheden er beskyttet mod faste fremmedlegemer på 12,5 mm eller større og lodret faldende vanddråber, når den vippes op til 15°.
	Temperaturområdet, som enheden må udsættes for under brug, er 0-40 °C (32-104 °F). Temperaturområdet, som enheden må udsættes for under opbevaring eller transport, er -20-60 °C (-4-140 °F). Se også "Temperaturforhold for direkte kontakt" nedenfor.

Symbol	Forklaring
	<i>Advarsel:</i> Hvis enheden opbevares i omgivelser, som er uden for det anbefalede temperaturområde, "temperaturområdet, som enheden må udsættes for under brug", så lad enheden stå og akklimatisere i min. 30 min. før forsøg på anvendelse.
	Fugtighedsområdet, som enheden må udsættes for under brug eller opbevaring, er 10-90 %.
	Atmosfærisk tryk under brug, opbevaring eller transport er 80 kPa til 106 kPa.
	Suivre le mode d'emploi. Consulter le manuel d'utilisation.
	Følg brugsanvisningen. Se betjeningsvejledningen.
	Enhedens modelnummer.
	Enhedens serienummer.
	Navn og adresse på producenten af enheden.
	Angiver et medicinsk udstyr.
	Autoriseret repræsentant i EU.
	Den ansvarlige person i Det Forenede Kongerige.

Klassifikationer

Beskyttelse mod elektrisk stød	Klasse II/internt strømforsynet
Beskyttelse mod skadelig indtrængning af væske og partikler	IP22
Driftsfunktion	Kontinuerlig
Type B anvendt del	BF

Specifikationer

Vægt	2,68 kg (5,9") med håndtag, stativ og ramme til enhed
Mål	35,81 cm x 22,61 cm x 4,57 cm (14,1" bred x 8,9" høj x 1,8" dyb)
Display	35,56 cm (14") diagonalt, skærmopløsning 1920 x 1080 dpi, visningsvinkel på 170 grader eller derover, mulighed for lysstyrke på 300 nits eller derover
Batterilevetid	Varierer fra 18-10 timer afhængigt af individuel brug og strømindstillinger. 10-12 timer med eye tracking
Lager/udvidelsesmuligheder	8 GB RAM, 16 GB internt hukommelseskort, 128 GB ekstern micro SD-kortplads, 256 GB harddisk
Operativsystem	Microsoft® Windows® 10 Pro 64 bit
Processor	Intel® Core™ i5-7Y54-processor
Standardkomponenter	Ramme, håndtag, trådstativ, batterioplader, USB-flashdrev, pen
Tilbehør	Bæretaske, bæreremme, skærmbeskyttelsesfilm, ekstern strømpakke, QRM-monteringsplade, monteringsbeslag til enhed, tastaturskjold, TouchGuides, udskiftningsramme, Look® eye tracking-modul, NuPoint® head tracking-modul

Driftsmiljø

Omgivelsestemperatur	0°C til 40°C (32°F til 104°F)
Relativ luftfugtighed	10% til 90%
Atmosfærisk tryk	80 kPa til 106 kPa
Enheden skal beskyttes mod fugt under brug.	

Transport og lagermiljø

Under transport eller opbevaring er området af temperaturer, som enheden kan udsættes for -20°C til 60°C (-4°F til 140°F), med et atmosfærisk trykområde på 80 kPa til 106 kPa.

Temperaturforhold for direkte kontakt

Forhold for sikker kontakt – tid

Tilgængelig del	Tidsgrænse for kontakt
Berøringsskærm	Mindre end 1 minut
Tænd-/slukknop	Mindre end 1 minut
Lydstyrkeknop	Mindre end 1 minut

Forhold for sikker kontakt – temperatur

Tilgængelig del	Maksimumstemperatur, når enheden er i brug (omgivende temperatur på 40 °C eller 104 °F)
Berøringsskærm	54,3 °C (129,74 °F)
Tænd-/slukknop	50,5 °C (122,9 °F)
Lydstyrkeknop	41,2 °C (106,16 °F)

- ⚠ Mens enheden oplades, kan berøring af enhedens overflade med ødelagt hud forværre et sår.
- ⚠ Mens enheden oplades, bør spædbørn eller højrisikogrupper ikke røre ved enhedens overflade, hvis der er risiko for at brænde huden.