



## Brugervejledning

### Toiletsæde i blødt skum



#### 1. FORMÅL

Dette toiletsæde er beregnet til montering oven på et almindeligt toiletsæde, og passer til alle standard-sæder. Det er udformet i blødt skum med hvid polstring. Den bløde polstring gør, at sædet føles lunere og mere komfortabelt.

Polstringen giver en trykafastende effekt, som er særligt hensigtsmæssig for personer med siddesår eller lignende lidelser.

#### 2. SÅDAN BRUGES TOILETSÆDET

Polstringen trækkes udover det normale toiletbræt. På undersiden er det udformet med to "modhagere", som bruges til at fastgøre det på toiletbrættet med. Hele forkanten har ligeledes en modhager.

Sørg for, at det sidder godt og forsvarligt fast før det tages i brug.

#### 3. RENGØRING

Polstringen er fremstillet af polyurethan. Det kan rengøres med varmt vand og gængse rengøringsmidler eller med desinficerende alkogel.