



Pain Gone Pen



Pain Gone pen er en special designet plastikenhed, hvori der er placeret elektronik og krystaller. Ved at trykke på den røde knap på toppen af pennen, aktiveres den indbyggede generator, der frembringer et højvolts stød i et kort øjeblik. Derpå aktiveres Pain Gone. De 15.000 volt (0,000006 ampere), der er tale om, starter smertelindringsprocessen, hvor morphiner (endorphiner) sendes ud i blodet. Med andre ord sker der det, at elektroimpulser sendes gennem kroppen for at give hjernen besked om at stimulere kroppens egen produktion af endorphiner (kroppens eget naturlige forsvar mod smerte).

Sådan bruger du Pain Gone:

Det er vigtigt, at pegefingern sluttes tæt omkring metalringen. Placer spidsen vinkelret på smertepunktet, og aktiver trykknappen. "Klik" nu 30-40 gange. Du kan ikke overdosere, da det er dit naturlige smertelindrings system, du aktiverer. Pain Gone virker også gennem let tøj.

Hvilke smerter kan du lindre med Pain Gone?

Pain Gone er baseret på TNS, som er effektiv til lindring af smerter i forbindelse med flere former for kroniske samt akutte skader.

Smertelindring uden brug af medicin!

Pain Gone er baseret på en 30 år gammel medicinsk teknik, der hedder Transcutan Nervestimulering (TNS), som er kendt for at give betydelig lindring ved stimulering og i en længere periode efter stimuleringen. Man kan gentage brugen, så ofte man vil, uden at bekymre sig om bivirkninger.

Hvor og af hvem bør Pain Gone ikke benyttes?

Af personer med pacemaker.
Lige over indopererede metaldele (f.eks. kunstig hofte).
I eller tæt omkring øjnene.
Af gravide. I de første 16 uger (god i forbindelse med fødsler).
På våd eller fugtig krop eller i fugtige omgivelser.
I nærheden af iltapparater eller brandfarlige væsker.
Af børn under 8 år- uden opsyn af en voksen.

Pain Gone er klinisk testet. Holder til ca. 100.000 klik eller 2-3 år ved daglig brug

Pain Gone Pen – Pris: kr. 239,00 ekskl. moms

T: 8661 3611 / F: + 8661 3911 / E-mail: chiroform@chiroform.dk
Chiroform ApS / Industrivej 23 / 8800 Viborg / www.chiroform.dk