



# LivetSomSenior

Hjælpemidler til en lettere hverdag

## Brugervejledning til badestol med buet sæde og håndtag

Badestolen er udviklet som et hjælpemiddel, der yder siddehjælp under badning. Stolen er fremstillet med en aluminiumsramme, hvorpå benene kan højdejusteres.

Indstillingen af benene sker ved hjælp af en simpel kliklås. Der er indgraveret tal på hvert ben, som gør det nemt at justere dem til den samme højde. **Af sikkerhedsmæssige årsager må stolen kun benyttes når alle tre ben er indstillet til den samme højde.**

### Samling og montering af stolen

Badestolen leveres i adskilte dele. Kassen indeholder to ben samt de nødvendige skruer. Benene monteres over kryds på undersiden af sædet og spændes forsvarligt fast med de medfølgende skruer/møtrikker.

Det er vigtigt løbende at sikre, at alle skruer og møtrikker er tilstrækkeligt spændt.

### Rengøring

Badestolen er lavet i rengøringsvenlige materialer. Snavs kan normalt aftørres med en fugtig klud, eventuelt ved brug af sæbe.