


Svea Gåbord

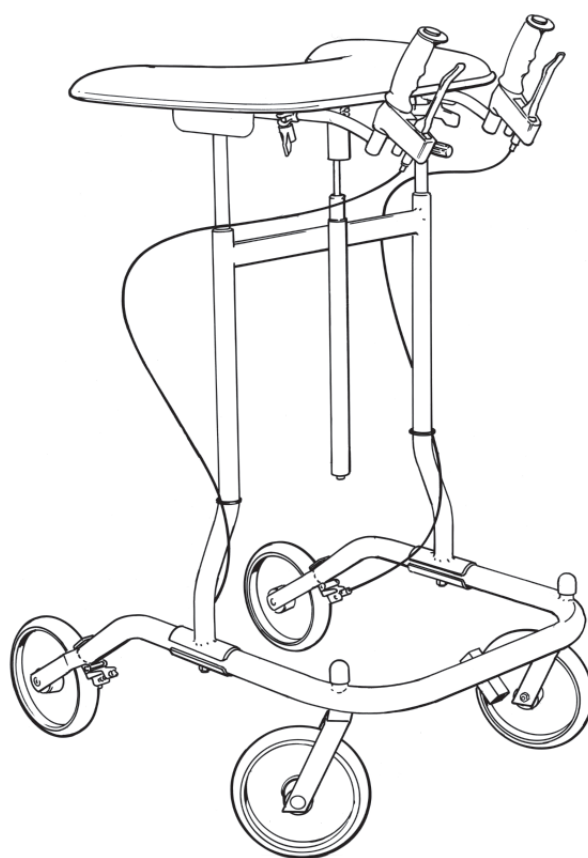

Bruksanvisning

Svenska

**HUMAN[™]
CARE**

Freedom to move!

Innehållsförteckning

Om våra produkter.....	4
Avsedd användning.....	6
Teknisk data.....	7
Tillbehör.....	7
Brukarinformation	8
Garanti.....	10

Om våra produkter

Leveransk kontroll

Kontrollera följande innan Du använder Din nya produkt.

- 1 Kontrollera att det inte är någon transportskada. Om så är fallet ska Du omedelbart kontakta transportören.
- 2 Kontrollera att antal och produkter på följesedeln stämmer med det Du fått levererat.
- 3 Kontrollera att det är rätt modell och typ av produkt.

Vid leveransproblem kontakta oss omgående.

Retur eller reklamation

Vid retur eller reklamation, kontakta oss för att få ett avvikelenummer och instruktioner om hur varan ska returneras.

Varan ska skickas tillbaka i komplett skick i oskadad originalförpackning.

Följande uppgifter ska följa med produkten vid retur/reklamation. Produktens ID-nummer, leveransdatum, datum då hjälpmedlet lämnades ut till brukaren, datum för senaste service, kontaktperson hos avsändare och felbeskrivning.

Human Care HC Sweden AB förbehåller sig rätten till produktkontroll av returgoods och i de fall inget fel kan hittas returneras varan till avsändaren. Fraktkostnad kan debiteras.

CE-märkning

Gåborderna är CE-märkta enligt de direktiv som gäller för medicintekniska hjälpmedel. CE-märkningen är placerad på chassit och innehåller följande information.



Gåborderna är testade enligt 120612 i enlighet med ISO 9999 (gåbordsstandard) på SINTEF i Norge.

Säkerhet

I bruksanvisningen används tre grader av uppmärksamhetstexter.

Varning!

Risk för personskador eller allvarliga funktionsfel.

Viktigt!

Risk för skador på material eller funktionsfel.

OBS!

Viktig information som underlättar arbetsprocesser eller handhavande.

Återvinning av uttjänt produkt

Vid återvinning separeras produktchassit från övriga detaljer. Separationen innebär att man genom att skruva isär och borra upp nitar kan sortera delarna efter material. Delarna sorteras efter metall, plast och blandmaterial.

Produkterna består till största del av stålrör och andra metalledetaljer.

Exempel på delar som består av blandmaterial är plastframgafflar (med lager i), hjul med lager.

OBS!

Eftersom olika kommuner/återvinningsföretag hanterar återvinningsmaterial på olika sätt är det lämpligast att i tveksamma fall kontakta Din kommun.


Miljövänlighet

Human Cares hjälpmedel är tillverkade så att de ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt under sin livscykel. Detta medför att när hjälpmedlen har tjänat ut, kan de skrotas och delarna tillverkas för att återgå i kretsloppet. Produkter med lång livscykel värnar om vår ömtåliga miljö och är lika med produkter med miljötanke!



Human Care HC Sweden AB är anslutet till REPA, som är ett rikstäckande system för återvinning av förpackningar.

Avsedd användning

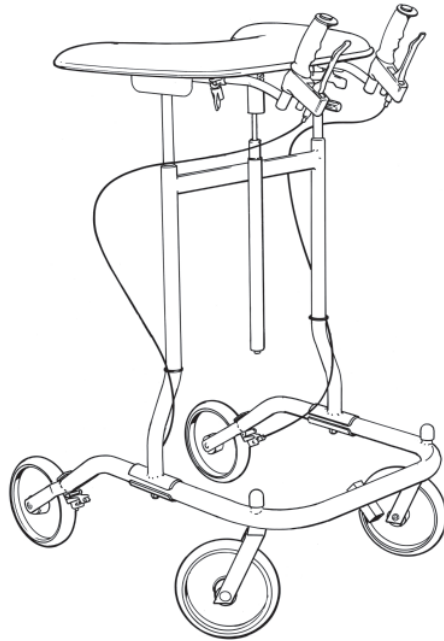

Svea är ett stabilt gåbord som är lämpad för användning både inomhus och utomhus.

Gåborden finns i två höjder och två bredder.

Varning!

Gåbordet får endast användas som gångstöd och får inte användas för patientlyft eller uppresningsstöd.


Tekniska data

(Alla mått anges i mm)

Gåbord Artikel nr			Bredd	Längd	Hjul- storlek	Vikt (kg)	Brukarens maxvikt
	Min.	Max.					Standard (kg)
Svea gåbord							
53211, Låg 59 cm	820	1070	590	850	200x40	14,9	150
53221, Hög 59 cm	1010	1260	590	850	200x40	15,1	150
53411, Låg 68 cm	820	1070	680	850	200x40	15,1	150
53421, Hög 68 cm	1010	1260	680	850	200x40	15,3	150

Tillbehör


Tillbehör	Art. nr
Enhandsbroms	10653
Stödhjul	50609-SVEA

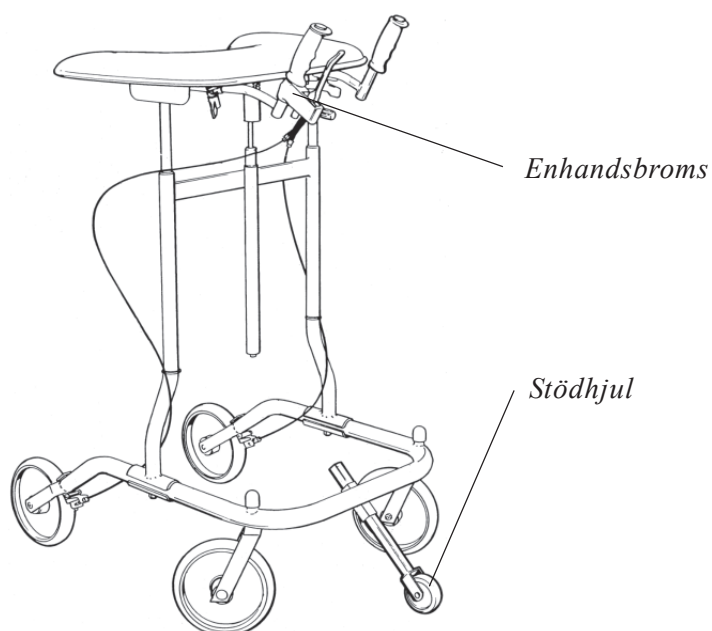

Brukarinformation, gåbord


Justering av höjd

Steglös höjdinställning. Justering görs lätt med gasreglering. Se figur till höger. Drag upp manöverhandtaget och med hjälp av den andra handen för du upp bordet respektive ner. När man släpper manöverhandtaget låses gasfjädern automatiskt.

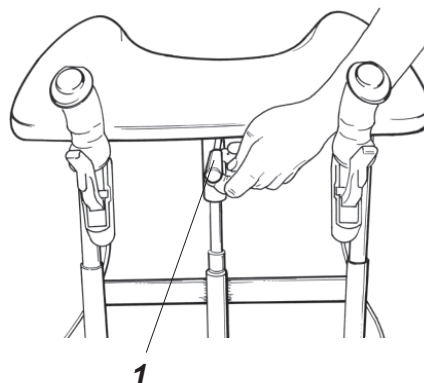


Justering av körhandtag

Körhandtagen går att justera i längdled genom att lossa vingmuttrarna. Ställ in önskat läge och dra sedan åt skruvarna.

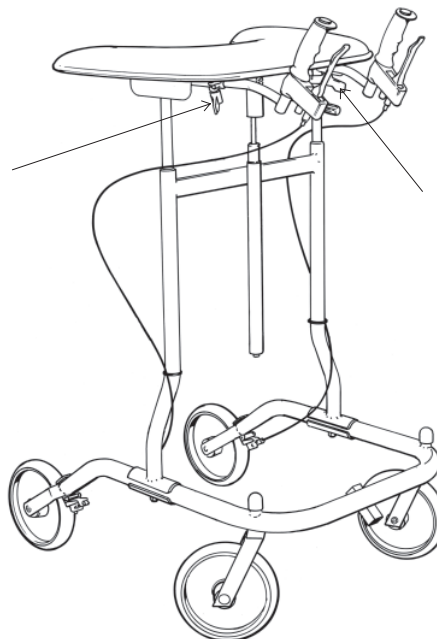

Bromsjustering

Vid dålig bromsverkan justera bromsvajern genom att skruva utåt.

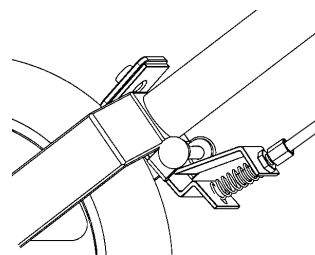


OBS! Kontinuerlig bromsning leder till onormalt slitage på hjul och broms.

Brukarinformation, gåbord


Färdbroms

Dra bromshandtaget
uppåt för färdbroms.

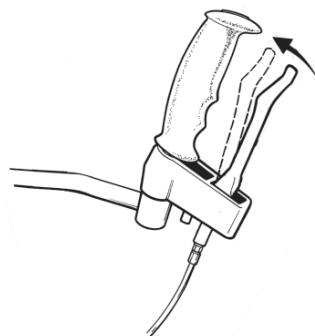

Parkeringsbroms

Tryck bromshandtaget
nedåt för parkeringsläge.

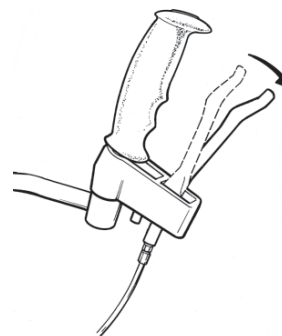

Rengöring och service

Viktigt!

Vid byte av delar på rollatorn ska endast originaldelar användas för att CE-märkningen ska gälla.

Viktigt!

Utför regelbunden översyn av utrustningen för att den ska fungera tryggt och säkert för brukaren.

Viktigt!

Egna ingrepp på gåbordet är inte tillåtet.

Översyn bör genomföras regelbundet enligt rekonditioneringsanvisning, art. nr. 99202-SWE.

Rollatorn rengörs med rengöringsmedel utan lösningsmedel. Efter rengöring bör alla leder och trånga utrymmen blåsas torra och sprejas med tunnflytande olja.

För mer information om service, rekonditionering och reservdelar, se Human Care HC Swedens hemsida: www.humancarerollators.com

Garanti

Human Care HC Sweden AB:s garanti omfattar material- och tillverkningsfel på gånghjälpmedlet. Förslitning på hjul, bromsdelar och handtag omfattas ej. Ytbehandlingsskador uppkomna efter leverans omfattas ej. Garantin förutsätter att produkten har använts på avsett sätt samt att den rekonditionerats regelbundet och enligt vår rekonditioneringsanvisning. Produktens IDnr måste också gå att identifiera. Produkten får ej heller ha modifierats eller specialanpassats av annan än Human Care HC Sweden AB. Garantitiden är 1 år eller enligt avtal.

Vid reklamation, kontakta oss för instruktioner om åtgärd.

Följande uppgifter skall anges vid reklamation: Produktens ID-nummer, datum för senaste rekonditionering, kontaktperson hos avsändare och felbeskrivning.

Återförsäljare

Human Care HC Sweden AB

Ilabäcksvägen 5
342 32 Alvesta
+46 (0) 472-447 70
Fax +46 (0) 472-122 04

www.humancarerollators.com
teknik@ahlbergleber.com



7331599991060