

Take Off

Benyttes af pårørende og personale som hjælpemiddel til afgang af kompressionsstrømper.



Take Off

Andre produkter i On & Off serien



On & Off AKKU



On & Off ”manuel”

Se mere: www.on-offstock.com (engelsk)

Eller: www.bjorn-nielsen.dk (dansk)

Bjørn Nielsen Rehab & Hospitalsartikler A/S | Sønderbyen 7 | 9510 Arden
www.bjorn-nielsen.dk | mail@bjorn-nielsen.dk | tlf.: +45 8692 7955



WWW.ON-OFFSTOCK.COM

Manual og brugsanvisning

Take Off

Aftagning af kompressionsstrømper



Øvrige produkter i On & Off serien

On & Off ”manuel”

Benyttes til både på/- og aftagning.
For brugere med mindre eller uden væsentlige funktionsnedsættelse.
Til benstørrelse: Medium & large
Til kompressionsklasse: 1 & 2

Hurtigt at pakke sammen, og kan medbringes overalt. Taske medfølger



On & Off AKKU

Er grundlæggende en benstøtte med en mekanisk hjælpende hånd.

Kan anvendes i kombination med On & Off manuel, OBS på ben størrelse og kompressionsklasse.

De fleste brugere, bl.a. personer med enhåndsfunktion, kan selv aftage strømpen med On & Off AKKU.

Kan anvendes både fra stol og i sengeleje.

Et unikt APV hjælpemiddel, der aflaster personalet, og samtidig giver brugeren en blid, skånsom og kontrolleret på/ og aftagning.

Alle 3 On & Off produkter kan nedpakkes, og medbringes i On & Off hånd/rejsetaske.



Aftrækning af kompressionsstrømpe med Take Off

Hurtigt og enkelt i et ”snuptag”

Placere benet på en skammel, ombuk strømpækanten, og fastgøre strømpelåsene på hver side af benet.



Tag fat i håndtaget, og træk væk fra personen.
OBS på at åbningen på strømpen kommer ”rundt” og ned om hælen.



Træk herefter indtil strømpen er af.



Take Off anvendes i hjemmet med hjælp af ægtefælle/pårørende, eller af hjemmeplejen, samt på plejecentre/hospitaler.

For en mindre gruppe, er det også muligt for brugeren selv at aftage strømpen med Take Off.