


BRUGSANVISNING COMBIBORD (SENGE-LÆSEBORD)

Bord beregnet til at aflaste i en læse situation. Sideplade, hvis tilkøbt, kan benyttes til at sætte kopper o.lign. på. Bordstellet kan køres ind under stol, seng eller lign., så pladerne går ind over stol, seng o.lign., det giver dermed en mulighed for at støtte blade, bøger o.lign..

BORDET SAMLES PÅ FØLGENDE MÅDE:

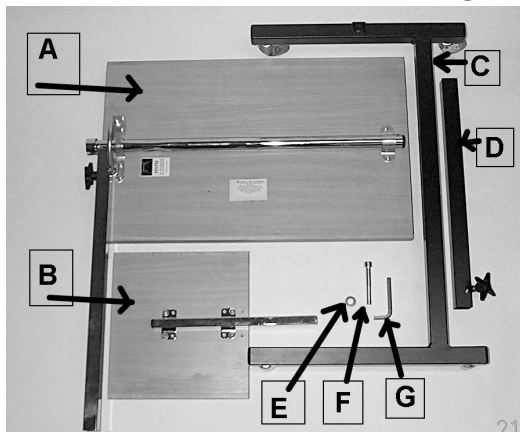



ET BORD BESTÅR AF FØLGENDE DELE:

- A) TOPPLADE MED MONTERET STELDEL
- B) LILLE SIDEPLADE MED MONTERET STELDEL
- C) UNDERSTEL
- D) MELLESTANG
- E) SPÆNDESKIVE
- F) BOLT
- G) UMBRACONØGLE

STANG D MONTERES PÅ UNDERSTEL C

- 1) SPÆNDESKIVE E SÆTTES PÅ BOLT F
- 2) BOLT F SKRUES OP I STANG D MED DEN MEDFØLGENDE UMBRACO-NØGLE G

STRAM GODT EFTER

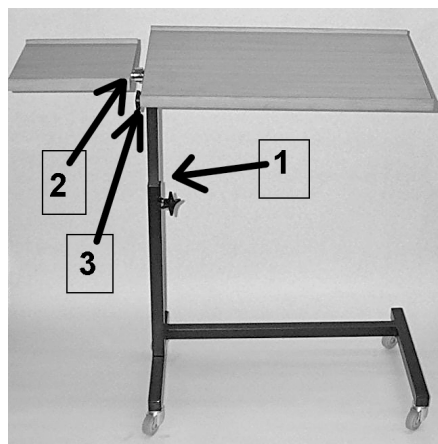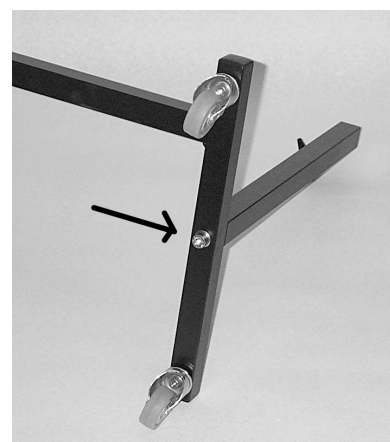

- 1) TOPPLADE MED MONTERET STELDEL A MONTERES I MELLESTANG VED PUNKT 1, STRAM FINGERSKRUE SÅ BORDET HAR DEN ØNSKEDE HØJDE
- 2) DEN LILLE SIDEPLADE B SKUBBES I BUND VED PUNKT 2
- 3) VINKLEN PÅ TOPPLADEN JUSTERES VED HJÆLPE AF FINGERSKRUE VED PUNKT 3

Varenr. 131006

Max. belastning på plader 7 kg
NB! STRAM FINGERSKRUE GODET FØR BRUG

2 års reklamationsret mod fabriktionsfejl
 (og rust reklamationsret).

FORVENTET LEVETID: 10-15 ÅR

Rengøring:

Alm. forekommende ikke-alkoholiske
 rengøringsmidler ved max. 80 grader

CE

04.01.19

Reserve dele til Combibord

Varenr:		Varenr:	
131017	Bakke melamin lille	131054	Hjul combibord
131051	Bakke melamin stor	131055	Bolt for hjul combibord
131052	Dupsko 30x30 mm	131056	Bolt for søjle combibord
131053	Søjlerør 30 mm med bolt og fingerskrue	131057	Fingerskrue til mellemrør

HMN a/s

Midtager 22, 2605 Brøndby, Danmark

Tlf.: +45 43 96 24 00 E-mail info@hmn.dk

www.hmn.dk

