



JYSK HANDI

hjælpemidler til børn og voksne siden 1990

HS Stolen Air Comfort



Brugervejledning (DK)

Rev.01 – November 2018

Brugervejledningen kan downloades på www.jyskhandi.dk

CE



Indholdsfortegnelse

1. Generelt	3
1.1. Produktbeskrivelse	3
1.2. Model oversigt	3
1.2.1. HS Stolen Air Comfort	3
1.2.2. HS Stolen Air Comfort	4
1.2.3. Identifikation	4
1.3. Produktformål	5
1.3.1. Formål	5
1.3.2. Målgruppe	5
1.3.3. Anvendelse	5
1.4. Produktafgrænsning	5
1.4.1. Sikkerhedsadvarsler	5
2. Produkt oversigt	6
3. Produktanvendelse	7
3.1. Betjening af HS Stolen Air Comfort	7
3.1.1. Hjul	7
3.1.2. Justering af sæde og ryglæn	8
3.1.3. Indstilling af armlæn	9
3.1.4. Indstilling af ryglænsstøtte	10
3.1.5. Justering af benstøtte	11
3.1.6. Skubbehåndtag	12
3.2. Luft System	13
3.2.1. Udtømning og oppustning af Luftpuder	13
3.2.2. Hurtig punktering af luftpude	14
3.2.3. Luftpuder	14
3.3. Transport	15
4. Vedligeholdelse	16
4.1. Vedligehold	16
4.2. Rengøring	17
5. Fejlsøgning	17
6. Reservedele	17
7. Tilbehør	18
8. Tekniske data	19
9. Bortskaffelse	20
10. Garanti	20





1. Generelt

Du har valgt **HS Stolen Air Comfort** fra Jysk Handi.

Læs hele brugervejledningen, så du får størst mulig glæde af din HS Stol Air Comfort og opbevar brugervejledningen et sted, hvor den er tilgængelig for alle personer, der skal håndtere og anvende produktet. Brugervejledningen kan også downloades på vores hjemmeside **www.jyskhandi.dk** under produktet.



Dette ikon finder du de steder i brugervejledningen, hvor der er forholdsregler og informationer som har sikkerhedsmæssig betydning.



Her skal brugervejledningen læses omhyggeligt for, at opnå korrekt og sikker brug af produktet.

1.1. Produktbeskrivelse

HS Stolen Air Comfort er udviklet til brugere med diagnosen Huntingtons Sygdom, ALS og andre neurologiske lidelser, hvor der er behov for utrolig stor komfort, trykaflastning og sikkerhed under hvile/søvn samt let adgang ved forflytning.

HS Stolen Air Comfort findes i 2 modeller: Lille og Standard

1.2. Model oversigt

1.2.1. HS Stolen Air Comfort



Beskrivelse:	HS Stolen Air Comfort er fuld polstret og har i ryggen et lufttrykssystem der kan indstilles, hvilket gør den yderst komfortabel både at sidde- og ligge i.
---------------------	---

Vare nr.:	38 10 04
------------------	----------

HMI nr.:	102 065
-----------------	---------



HS Stolen Air Comfort



Brugervejledning

1.2.2. HS Stolen Air Comfort



Beskrivelse:	HS Stolen Air Comfort Rygdæl Sidestøtte
Vare nr.:	38 10 14
HMI nr.:	112 633

1.2.3. Identifikation

HS Stolen Air Comfort er forsynet med et serienummer, der er placeret bagpå stole som vist på illustration.





1.3. Produktformål

HS Stolen Air Comfort er designet og fremstillet med sikkerhed, funktion og komfort i tankerne for både bruger og plejepersonale.

HS Stolen Air Comfort er designet så det er nemt at bruge både gulv- og loftlift.

1.3.1. Formål

HS Stolen Air Comfort er udviklet til brugere med neurologiske skader, hvor der er behov for optimal trykaflastning, komfort og sikkerhed under hvile, søvn og ved forflytning.

1.3.2. Målgruppe

Voksne med følgende diagnoser og problematikker:
Huntingtons Sygdom, ALS og lignende neurologiske lidelser samt medfødte og erhvervede hjerneskader.

1.3.3. Anvendelse

HS Stolen Air Comfort er udelukkende beregnet til at opholde sig i under hvile og søvn samt kun til indendørs brug (ikke inklusiv våde områder).

1.4. Produktafgrænsning

HS Stolen Air Comfort må kun anvendes af personer med en vægt på **max. 180 kg.**

1.4.1. Sikkerhedsadvarsler


	Lås altid ALLE hjul når HS Stolen Air Comfort er stationær.
	Sørg for, at brugeren sidder i sædet før betjening af sædetilt eller rygkip funktioner.
	Sørg for, at brugeren er fuldt understøttet på alle tidspunkter, når sædes vippefunktioner betjenes.
	Hvis der bruges lift, bør brugeren fortsat understøttes af sejlet, indtil stolen er justeret fra fremad sædetilt til fladt eller tilbagelænet stilling.
	Følg vedligeholdelse og rengøring instruktioner for, at forlænge levetiden på HS Stolen Air Comfort.





2. Produkt oversigt

De forskellige dele af HS Stolen Air Comfort har følgende benævnelser:

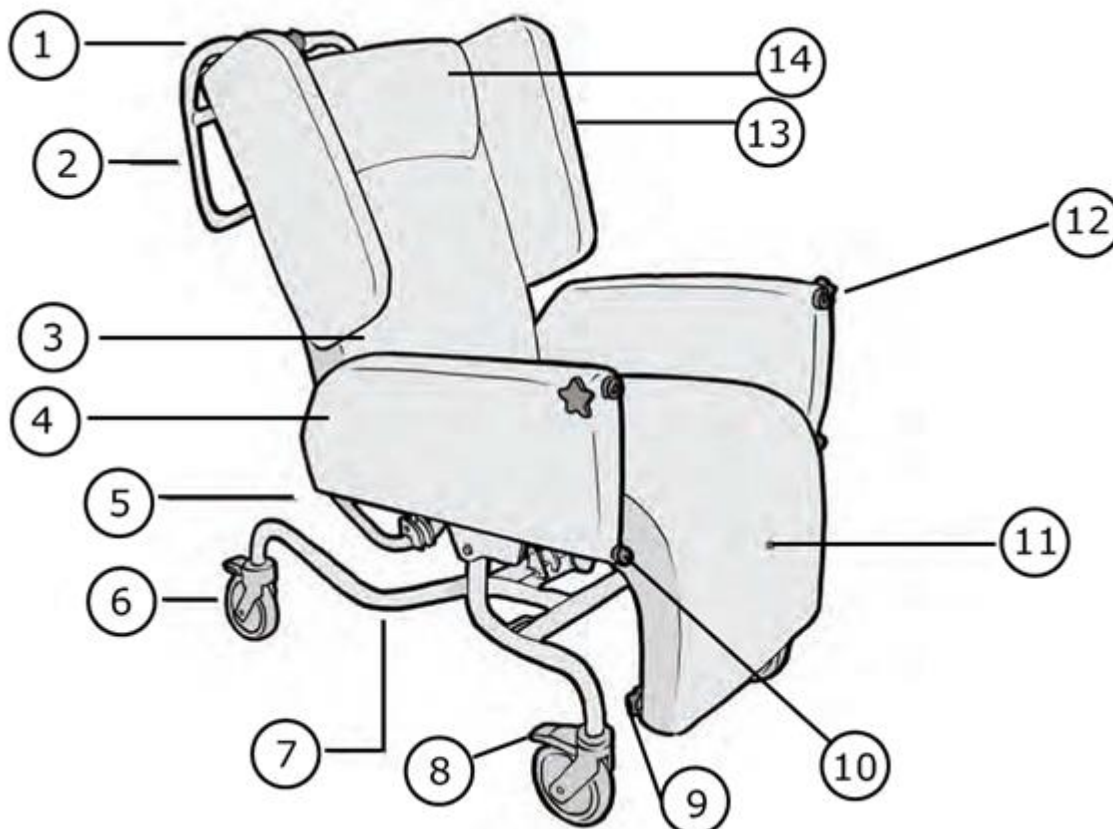

1. Justeringsgreb Sæde / Ryglæn
2. Skubbehåndtag
3. Rygstøtte luftpude
4. Armlæn
5. Gasfjedre
6. Lås hjul
7. Stoleramme
8. Bremsegreb
9. Håndtag benstøtte
10. Positionslås
11. Benstøtte luftpude
12. Låseskrue til måltidsbakke
13. Rygstøtte luftpude
14. Nakkestøtte luftpude





3. Produktanvendelse

Dette afsnit beskriver betjeningen af HS Stolen Air Comfort

3.1. Betjening af HS Stolen Air Comfort

3.1.1. Hjul

	Alle tre af de samlede 4 hjul på HS Stolen Air Comfort SKAL bremses, når stolen står stille.
	Før det retningsbestemt hjul sættes i position, skubbes HS Stolen Air Comfort fremad så hjulene er indstillet korrekt og derefter bremses den retningsbestemte hjul.
	Hjulene bør inspiceres dagligt og alle fremmedlegemer (hår, fnug ect.) bør fjernes fra hjulene så hurtigt som muligt, således der er fri bevægelighed på alle hjul.

De samlede lås hjul har et RØD bremsegreb ved den bageste ende af hjulet, mens det retningsbestemte lås hjul har GRØN låsearm på den bageste ende af hjulet.

Det retningsbestemte lås hjul skal være u-bremset for, at HS Stolen Air Comfort kan flyttes sidelæns og skal bremses igen for at forbedre den lineære spring af stolen, når den bliver skubbet.

For at BREMSE Pres låsearmen nedad med din fod	
For at LÅSE OP Pres øverst på låsearmen med din fod	







3.1.2. Justering af sæde og ryglæn



Sørg for at armlæn er oppe, når der indstilles på sæde eller ryglæn.


Træk i håndtaget og indstil sædet og/eller ryglænet efter behov.


Slip håndtaget for at sætte stolen i position.


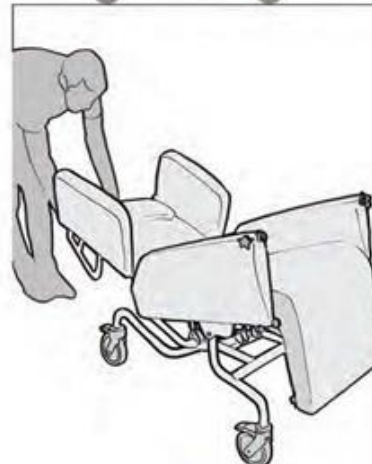
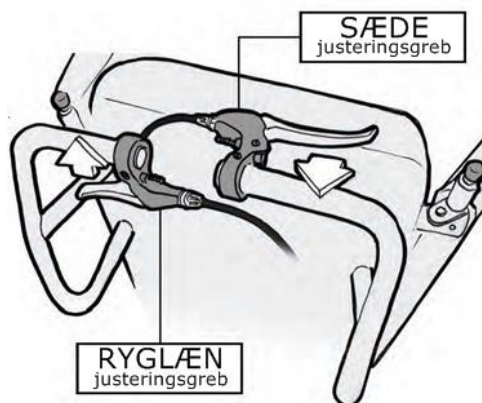

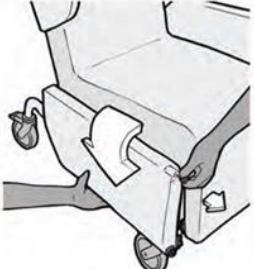




3.1.3. Indstilling af armlæn

 Brug altid den ene hånd til at trække positionslåsen og den anden hånd til at guide armlænet til den ønskede position. Hvis du lader armlænet falde ned af sig selv, kan dette medføre skader på armlænet.


 Efterlad **ALTID** armlænene oppe, når du forlader en bruger eller når HS Stolen Air Comfort er i bevægelse.

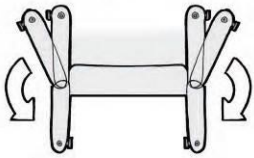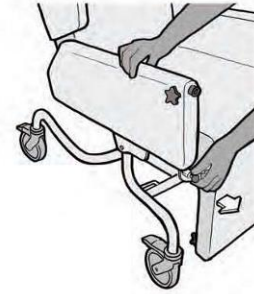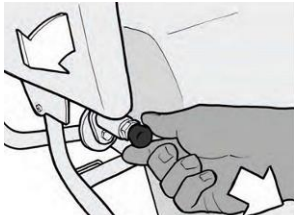
Armlænene på HS Stolen Air Comfort kan indstilles i 3 positioner.	
Træk ud i den sorte positionslås.	 
Vip armlænet som vist på illustration til den ønskede position og giv slip på positionslåsen indtil du hører en "klik" som angiver at armlænet nu er fastlåst i positionen.	
Armlænet kan sænkes helt.	









3.1.4. Indstilling af ryglænsstøtte

 Brug altid den ene hånd til at trække positionslåsen og den anden hånd til at guide ryglænsstøtten til den ønskede position. Hvis du lader ryglænsstøtten falde ud af sig selv, kan dette medføre skader på ryglænsstøtten.

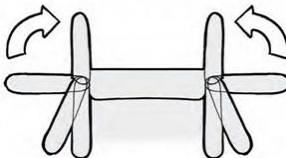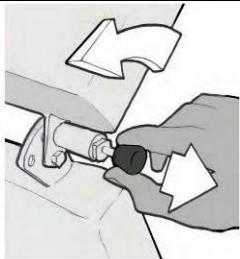 Efterlad **ALTID** ryglænsstøtterne oppe, når du forlader en bruger eller når HS Stolen Air Comfort er i bevægelse.

Ryglænsstøtterne på HS Stolen Air Comfort kan indstilles i 4 positioner.	
Træk ud i den sorte positionslås	
Vip ryglænsstøtten som vist på illustration til den ønskede position og giv slip på positionslåsen indtil du hører en "klik" som angiver at ryglænsstøtten nu er fastlåst i positionen.	
Ryglænsstøtten kan vippes helt om.	





3.1.5. Justering af benstøtte




Inden benstøtten justeres sikres, at alle 3 låsbare hjul er bremset

Benstøtten på HS Stolen Air Comfort kan indstilles fra 85 ° og låses i en vilkårlig position i dette interval.







For at justere benstøtten i den ønskede position, træk i håndtaget placeret på bagsiden af benstøtten på højre side og hæv/sænk benstøtten efter behov og slip derefter håndtaget.

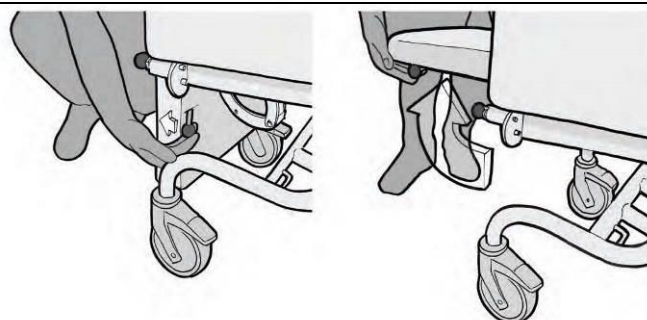



3.1.6. Skubbehåndtag

Skubbehåndtagene på HS Stolen Air Comfort er ergonomisk designet med flere forskellige håndtagspositioner, så plejepersonale af forskellig højde, får de mest optimale arbejdsforhold når HS Stolen Air Comfort og brugeren skal betjenes.

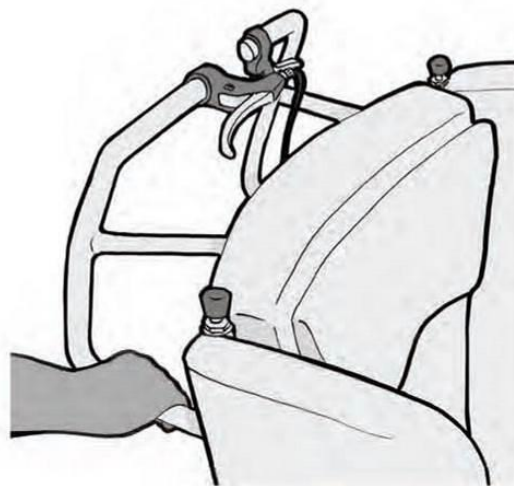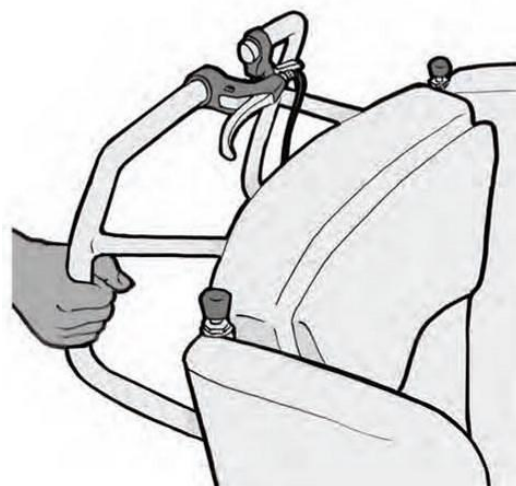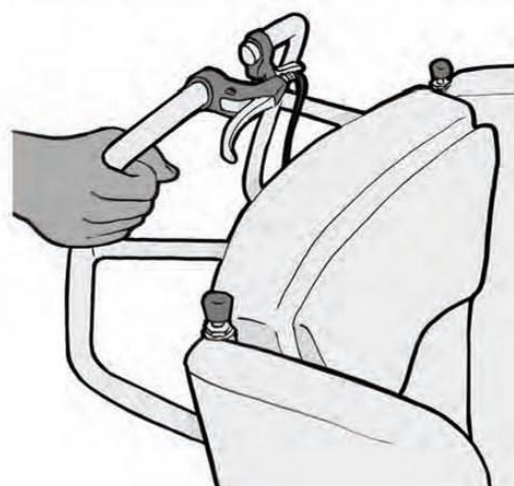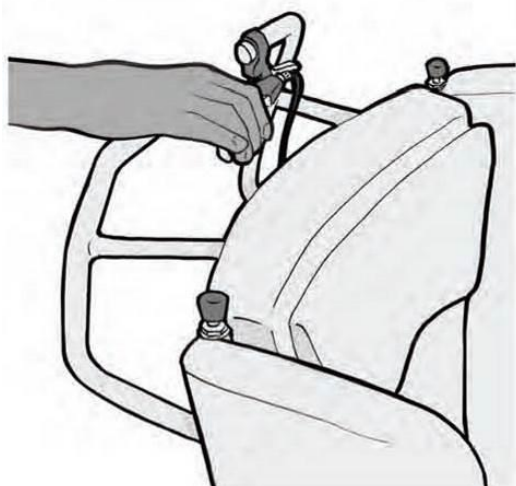



3.2. Luft System

HS Stolen Air Comfort er udstyret med det unikke Air Comfort i en rygstøttende luftpude-


Det er sjældent, at lufttrykket ikke passer til den individuelle bruger, men ønskes en justering af luftpuderne, kan nedenstående instruktion følges.



Bemærk venligst, at instruktionen forklarer, hvordan luftpuderne hver for sig nulstilles til oprindelige standard lufttryk.

For at regulere er det nødvendigt, at tømme hver luftpude for luft med mindre der skal mere luft i, så er det ikke nødvendigt at tømme luftpuden først.

3.2.1. Udtømning og oppustning af Luftpuder

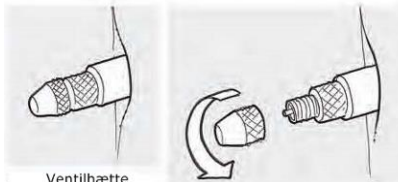Fjern ventilhætten.	 <p>Ventilhætte</p>
Til gradvis udtømning af luft, vend ventilhætten og brug spidsen til at trykke på ventilhanen .	
Pres samtidig med hånden indtil luftpuden er tømt for luft.	






3.2.2. Hurtig punktering af luftpude

Hvis du hurtigt vil punktere puden, kan du bruge medsendte værktøj, til at fjerne ventilen.



Pres samtidig med hånden indtil luftpuden er tømt for luft.

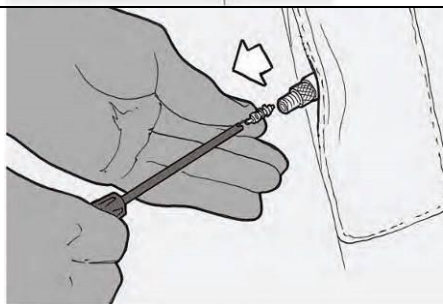

For at nulstille luftryksniveau til standard indstilling, skal du sikre dig at luftpuden først er helt udtømt for luft.


3.2.3. Luftpuder





3.3. Transport

HS Stolen Air Comfort har 2 standard fastholdelsespunkter på stolerammen.

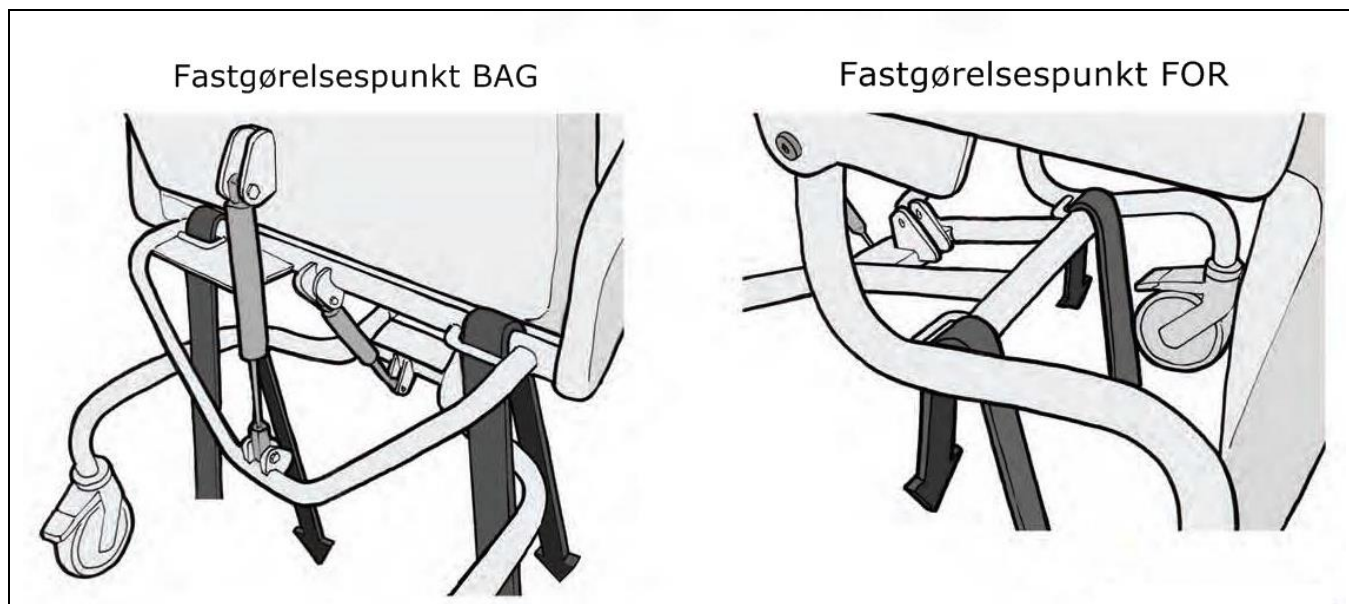

AS / NZS 10542,1: 2009 - kørestole fastholdelse og beboer-fastholdelsesordninger
AS / NZS 4535: 1999 - Ambulance fastholdelsesordninger



Fastgørelsesremme m.m. skal fjernes efter kørsel.





4. Vedligeholdelse

For at sikre, at HS Stolen Air Comfort fungerer sikkert og optimalt er det nødvendigt med løbende vedligeholdelse og rengøring.

4.1. Vedligehold

Ved normal daglig brug skal HS Stolen Air Comfort tjekkes som nedenfor angivet.


Dagligt:

HS Stolen Air Comfort skal dagligt inspiceres for skader.

Områder, der skal kontrolleres, omfatter:

- Polstring
- Håndtag
- Gasfjedre
- Skubbehåndtag
- Stolerammen
- Hjul

Alle bevægelige dele af HS Stolen Air Comfort skal frit kunne bevæge sig.

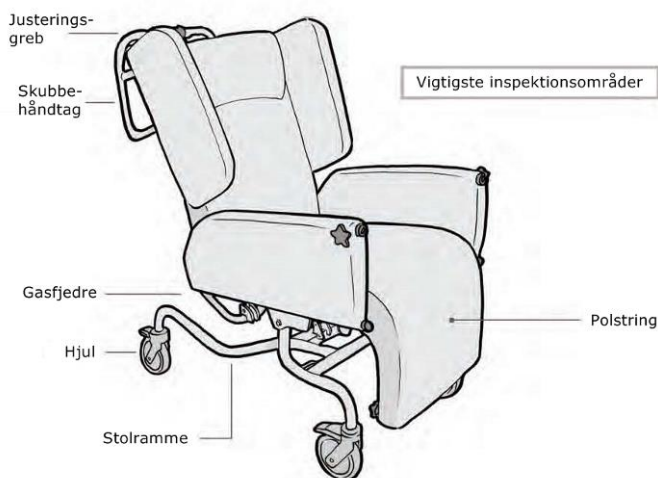

Halvårligt:

Eventuelle udsatte bolte (herunder hjul bolte) skal kontrolleres hver 6. måned og strammes, hvis det kræves.



Hvis der er opstået skader på HS Stolen Air Comfort frarådes det, at anvende stolen indtil den er repareret.

Hjulene kræver ikke vedligeholdelse, da de er en forseglet komponent.





4.2. Rengøring

HS Stolen Air Comfort skal vaskes jævnligt med mildt sæbevand.
Rengør pletter omgående for, at forhindre permanent farvning på polstret.

Hjulene skal aftørres med en mild sæbeopløsning og eftertørres med en tør klud.



Brug ikke skrappe kemikalier eller slibende rengøringsmidler.



Må ikke vandstråle rengøres.



Må ikke autoklaveres.

5. Fejlsøgning

Ingen

6. Reservedele

Ingen






7. Tilbehør



Beskrivelse:	HS Stolen Air Comfort Rygdel Sidestøtte, tilpasses efter behov
Vare nr.:	38 10 14
HMI nr.:	112 633

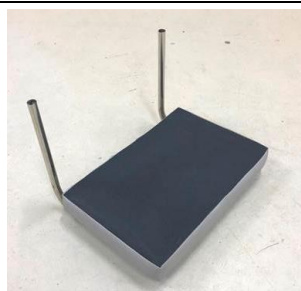

Beskrivelse:	HS Stolen Air Comfort Fodstøtte
Vare nr.:	38 10 24
HMI nr.:	105 799



Beskrivelse:	HS Stolen Air Comfort Bordplade
Vare nr.:	38 10 34
HMI nr.:	105 797





8. Tekniske data

Vægt: ca. 50 kg

Mål

Når HS Stolen Air Comfort er i en siddende stilling

Længde: 110 cm
Bredde: 70 cm
Højde: 132 cm (gulv til top af skubbehåndtag)

Brugervægt, max.	180 kg
Total højde	132 cm
Total bredde	70 cm
Total længde	110 cm
Sædedybde	50 cm
Sædebredde	47 cm
Afstand mellem armlæn	47 cm
Ryghøjde	70 cm
Armlæns højde	15 cm

Sædetilt & Rygkip

Sæde vinkel:	-5° til 10° relevant til gulv (15° interval)
Ryglæsvinkel:	20° til 60° relevant til sæde (40° interval)
Benstøtte vinkel interval:	-85° til 0° relevant til sæde (85° interval)

Hjul

TENTE gummi hjul:
3 x Ø150 mm Totalbremse - grå
1 x Ø150 mm Retningsbestemt lås - grøn

Materialer

Let stålkonstruktion
Epoxy overfladebehandlet
Høj- og lav skum tæthed
Carrflex ekstreme PU og Carr PVC tekstiler
TPU luftpuder





9. Bortskaffelse

Dette produkt stammer fra en miljøbevist producent, der overholder kravene i WEEE-direktivet 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk.

Vi opfordrer til miljøbevidsthed og til at genbruge dette produkt via nærmeste genbrugsstation, når dets levetid er opbrugt.

Produktet består af flere forskellige materialer som bortskaffes og genbruges på forskellig vis og produkt kan indeholde stoffer, som kan skade miljøet, hvis de bortskaffes på steder (lossepladser), der ikke overholder gældende lovgivning.

Bortskaffelse af affald skal altid ske i overensstemmelse, med den gældende lovgivning vedrørende håndtering af affald i det enkelte land.

10. Garanti

Garantien dækker:

- Alle materiale- og produktionsfejl i to år fra leveringsdatoen, forudsat at sådanne fejl fandtes før leveringen.
- Alle produktionsfejl- og mangler skal omgående indberettes.
- Jysk Handi kan vælge at reparere fejlen eller at udskifte komponenten. Den garanti, som Jysk Handi yder, dækker ikke yderligere omkostninger (transport, emballage, arbejdstid, diverse udgifter osv. er for kundens regning).

Garantien dækker ikke:

- Skader, der er opstået under transporten, som ikke anmeldes til speditøren straks ved leveringen.
- Reparationer udført af uautoriserede centre og personale.
- Dele, der udsættes for almindeligt slid.
- Forsætlig ødelæggelse eller skader, der forårsages af ukorrekt brug af produktet.

Jysk Handi forbeholder sig retten til, at ændre produktspecifikationer og tilbehør uden forudgående varsel.

