



Dansk vejledning til **MoJo elektronisk kikkert**



**Lys og lup ApS • Erhvervsvej 30 • 2610 Rødovre • Tlf. 43 451 451
www.lysoglup.dk • lysoglup@lysoglup.dk**

Tillykke med Deres MoJo elektroniske kikkert. For at få det fulde udbytte af MoJo, anbefales De at læse denne vejledning grundigt.

Indhold

Sikkerhedsforskrifter	2
Udpakning og ibrugtagning	3
Klargøring af opladningsstand	3
Opladning	3
Tænd, sluk og standby	4
Brug af MoJo og afstandslinsen	4
Juster forstørrelsen	5
Farvetilstande	5
Lysstyrke	5
Motivfinder-knapperne	6
Systemmenu	6
Fejlsøgning	7
MoJo vil ikke tænde	7
Ting ser tågede eller uskarpe ud gennem MoJo	7
Det man ser gennem MoJo er for lyst eller mørkt	7
Tekniske specifikationer	7

Sikkerhedsforskrifter

- Følg alle advarsler og anvisninger der er anført på produktet
- Pas på Deres MoJo når De bruger den udendørs: Apparatet bør **ikke** udsættes for stærk fugt, varme eller voldsomme skift i temperatur eller fugtighed.
- Undgå at anbringe MoJo i direkte sollys eller oven på en radiator.
- Undlad at skille MoJo ad – overlad reparation og service til et autoriseret værksted.
- MoJo er **ikke** vandtæt – undgå at udsætte apparatet for, eller anvende det tæt på, vand eller andre væsker.
- MoJo indeholder stærke magneter, og bør derfor ikke anvendes af personer med pacemaker.

Udpakning og ibrugtagning

Ud over nærværende vejledning finder De følgende i produktpakken – se illustrationen til højre:


1. MoJo elektronisk kikkert
2. Ekstern afstands-linse
3. Bærestrop
4. Etui
5. Lysnetadapter
6. Opladningsstand
7. Pudseklud
8. Opbevaringspose

Klargøring af opladningsstand

MoJo drives af et indbygget opladeligt batteri, som oplades med den medleverede opladningsstand og tilhørende lysnetadapter (hhv. nr. 6 og 5 på illustrationen til højre).



Indikator-lampe

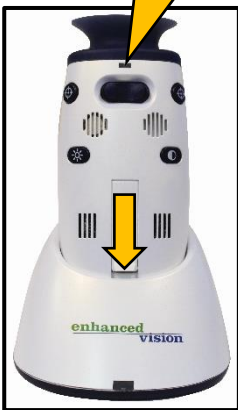

Anbring opladningsstanderen på et bord, og sæt stikket i lysnetadapterens frie ende i hullet på opladningsstanderens bagside som vist til venstre. Sæt derefter lysnetadapteren i en ledig stikkontakt.


Opladning

Når opladningsstanderen er klarlagt, oplades MoJo ved ganske enkelt at sætte den i standeren som vist til venstre.

Nær toppen af MoJo (når den står i opladningsstanderen) findes en lille indikatorlampe: Mens MoJo lader op, vil denne lampe blinke med et blått lys. Når MoJo er ladet *helt* op, holder lampen op med at blinke, og lyset i stedet med et fast, blått lys. En fuld opladning tager cirka tre timer.

Mens MoJo er i brug, vil indikatorlampen lyse grønt når der er strøm tilbage i batteriet, og skifte til rødt lys, når batteriet er tæt på at være tømt: Når dette sker, bør De lade MoJo op igen. På en fuld opladning holder batteriet til op til 2½ timers drift, afhængig af lysstyrke-indstillingen.

Under brug vises batteri-symboler som illustreret til højre, "inde" i kikkerten: De viser hvor meget strøm der er tilbage i batteriet. Når batteriet er tæt på at være tømt for strøm, vises symbolet med rødt "fyld" som vist nederst til højre; snart herefter vil MoJo slukke automatisk, og De bør lade apparatet op igen.

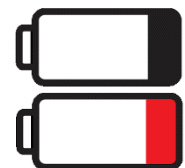

Tænd, sluk og standby

For at tænde for MoJo skal de trykke på den lille grønne knap på apparatets underside (vist på illustrationen til højre), og **holde den trykket ind** i godt og vel et sekund. Inde i kikkerten vises først et "navneskilt", hvorefter billedet viser, hvad der er foran kikkerten. Når MoJo er tændt, vil den på forrige side omtalte indikatorlampe lyse grønt.



For at slukke MoJo, skal De trykke på den grønne knap, og **holde den trykket ind** i godt og vel 5 sekunder. Når MoJo er slukket, vil den førromtalte indikatorlampe være slukket.

Mens MoJo er tændt, kan De sætte apparatet i standby-tilstand ved at trykke kortvarigt på den grønne knap: Herved forsvinder billedet inde i kikkerten, og den førromtalte indikatorlampe vil blinke med grønt lys. For at tænde MoJo når den er i standby-tilstand, skal De blot trykke kortvarigt på den grønne knap.

Bemærk, at hvis MoJo efterlades tændt, vil apparatet automatisk gå i standby-tilstand efter cirka 10 minutter; i så fald skal De blot trykke kortvarigt på den grønne knap, for at bruge apparatet igen.

Brug af MoJo og afstandslinsen

Når MoJo er tændt, bruges den ganske som en traditionel kikkert: Anbring det sorte, "tragtformede" okular mod Deres ene øje, og ret den modsatte ende mod det læsestof etc., De ønsker at se på, som vist på illustrationen til højre.



Afstands-
linse påsat

Hvis De vil se på genstande på længere afstand (længere end cirka 2½ meter), skal De påsætte den afstandslinse, der er hængt på MoJo's bærestrop: Linsen holdes på plads af en stærk magnet, lige så snart de holder den på plads ud for den "spidse" ende af MoJo. Når De vil "se tæt på" igen, fjerner De afstandslinsen ved blot at trække den fri af magnetens "greb".




Når linsen er påsat, vises en meddelelse herom på billedet inde i kikkerten. MoJo sørger selv for at stille skarpt, når De sætter linsen på.

Juster forstørrelsen


På oversiden af Deres MoJo, nær ved det sorte, "tragtformede" okular, findes en aflang knap med to fremspring: Ved at trykke på **venstre** ende af denne knap kan De **formindske** det billede, De ser i kikkerten. Trykker De på **højre** ende af knappen, forstørres billedet.

Med kortvarige tryk justeres billedstørrelsen ét trin langs en "skala" på i alt 16 forstørrelser. Ved at holde en af knapperne nede i lidt over et sekund, justeres billedstørrelsen trinløst – slip knappen, når De har den ønskede forstørrelse.

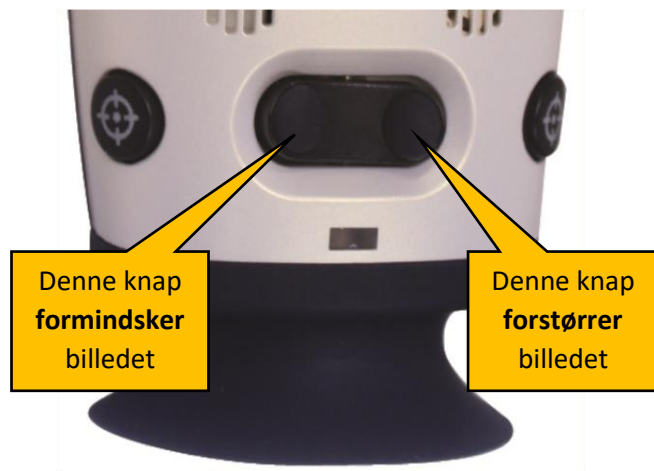

Farvetilstande


På MoJos overside findes en knap (se illustrationen til højre), som bruges til at vælge mellem 7 forskellige farvetilstande. For hvert tryk på knappen skiftes til næste farvetilstand efter følgende skema:

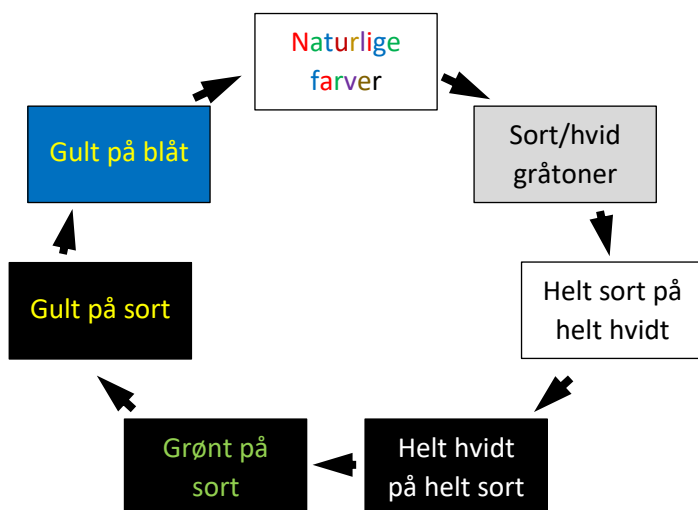

De kan hurtigt vende tilbage til billedet i naturlige farver, når MoJo er sat til en af de andre farvetilstande, ved at trykke på knappen og **holde den nede** i cirka 2 sekunder.

Lysstyrke

De kan justere lysstyrken på det billede De ser gennem MoJo, ved at trykke på lysstyrke-knappen på apparatets overside (se illustrationen til højre). På samme måde som med farvetilstands-knappen, vil hvert tryk på lysstyrke-knappen skifte mellem de tre tilgængelige lysstyrker:

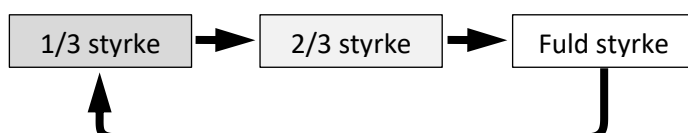


Bemærk: Hvis De trykker på lysstyrke-knappen og **holder den nede** i godt 7 sekunder, kaldes en indstillingsmenu frem – mere herom på næste side.



Motivfinder-knapperne

Når De bruger Deres MoJo ved kraftig forstørrelse, kan man let komme til at miste "motivet" af syne. Derfor har MoJo to knapper (se illustrationen til højre), som midlertidigt sætter forstørrelsen ned til sit minimum. Brug motivfinderknapperne sådan, når De har problemer med at finde Deres motiv:

1. Tryk en af motivfinder-knapperne ind, og **hold den inde**: Så længe De holder knappen inde, vises billedet med minimal forstørrelse
2. Peg MoJo i en retning, så det, De ønsker at se i stor forstørrelse optræder **i midten** af billedfeltet.
3. Slip motivfinder-knappen igen. Nu optræder det ønskede motiv i stor forstørrelse i kikkerten.

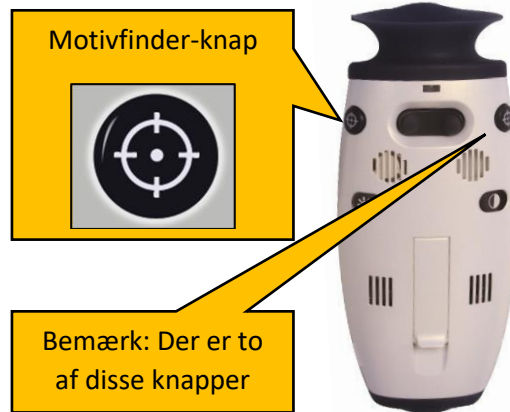

Systemmenu

MoJo har en indbygget systemmenu, hvorfra man kan indstille sproget på de meddelelser, der vises i apparatet, og få vist produktoplysninger.

For at kalde systemmenuen frem, skal De trykke på lysstyrke-knappen, og **holde den trykket inde** i godt og vel 7 sekunder. Herefter vises tre valgmuligheder:

- **Exit:** Forlader systemmenuen, så De kan bruge MoJo normalt igen.
- **Languages:** Vælg sprog for de meddelelser, der vises i MoJo.
- **Product Information:** Oplysninger om versionsnummer på softwaren i Deres MoJo. Hvis De kontakter Enhanced Vision for hjælp, kan De blive bedt om at oplyse dette nummer.

Brug forstørrelses-knapperne til at skifte valgmulighed

Lysstyrke-knap, som også bruges til at kalde systemmenuen frem



Et af de tre punkter vil være fremhævet: Denne fremhævelse kan flyttes mellem de tre valgmuligheder ved brug af de to knapper til forstørrelse. For at vælge den til enhver tid fremhævede valgmulighed, skal De trykke kortvarigt på lysstyrkeknappen.

Fejlsøgning

Hvis De oplever problemer med at bruge Deres MoJo, giver dette kapitel tips til hvordan fejlen kan afhjælpes.

MoJo vil ikke tænde

- Er MoJo ladet op? Under opladning skal indikatorlampen blinke blå. Når opladningen er tilendebragt, skal indikatorlampen lyse med et fast, blå lys.
- Er adapteren sat i en fungerende stikkontakt? Er den korrekt tilsluttet opladningsstanden?

Ting ser tågede eller uskarpe ud gennem MoJo

- Rengør kameralinsen og/eller okularet med den medfølgende pudseklud.
- Ændr afstanden mellem MoJo og det, De prøver at læse/se på.
- Prøv de forskellige farvetilstande.

Det man ser gennem MoJo er for lyst eller mørkt

- Skarpt, direkte sollys kan "overvælde" kameraet i MoJo – prøv at finde et lidt mere skyggefuldt sted.
- Ændr afstanden mellem MoJo og det, De prøver at læse/se på.
- Prøv de forskellige farvetilstande.
- Vælg en anden lysstyrke med lysstyrke-knappen.

Tekniske specifikationer

Egenskaber

- Letvægts-design velegnet til brug på farten.
- 7 forskellige farvetilstande
- 16 forskellige forstørrelsesgrader

Billedvisning

- Svarer til en 42-tommers skærm, set på ca. 2 meters afstand.
- Fast fokusering svarende til 2 meters afstand.
- Åbningsvinkel: Ca. 30 grader.

Kamera

- CMOS-sensor med 13 megapixel opløsning

Fysiske dimensioner

- 130mm lang, 55mm bred, og 36mm tyk

Forstørrelsesgrad

- Objekter ca. ½ meter fra MoJos kamera forstørres fra 3 til 50 gange.
- I bordstanderen (valgfrit tilbehør, der sælges separat) ydes fra 5 til 40 ganges forstørrelse.

Fabriksgaranti

- 2 års fabriksgaranti.

Temperaturforhold

- Bør anvendes ved temperaturer mellem 10 og 40 grader Celcius.
- Bør opbevares ved temperaturer mellem -20 og 60 grader Celcius.

Indbygget batteri

- 3,7V lithium-ion-batteri med en kapacitet på 3,1 amperetimer.

Omtrentlig opladningstid

- Cirka tre timer

Drifttid (ved fuldt opladet batteri)

- 2½ til 3 timer, afhængig af valg af lysstyrke
- Batteriet holder til mellem 500 og 1000 opladninger

Lysnetadapter

- Netspænding: mellem 100 og 240 volt vekselspænding ved 50 eller 60 Hz
- Udgangsspænding: 9V jævnspænding, maks. 2,66 ampere.