

# ATHLON SL

Montage- og brugervejledning



REHASENSE



*more than mobility*

## 1. Indledning

Kære kunde

Vi glæder os over, at De har købt et førsteklases Rehasense produkt. Denne brugervejledning indeholder en detaljeret produktbeskrivelse og væsentlige instrukser for korrekt brug af produktet. Derfor bedes De læse denne vejledning grundigt, før produktet tages i anvendelse. Venligst vær opmærksom på alle forholdsregler, især sikkerhedsanvisningerne, og overhold altid disse, så De opnår en sikker og langvarig anvendelse af produktet.

### Formålsbeskrivelse

Rollatoren er beregnet til personer, som pga. bevægelsesproblemer har brug for støtte ved gang men som selv er i stand til at bruge rollatoren uden at komme til skade eller øve skade på andre. Takket være sædet kan brugeren til enhver tid sætte sig for at få en pause. Rollatoren må kun bruges til at komme frem med og til kortvarigt at sidde på.

### NB

Rollatoren må kun bruges af personer, der pga. deres sundhedstilstand har brug for stabil støtte ved gang.

Rollatoren bør ikke bruges af personer med eksempelvis balanceproblemer eller svækket muskelkraft, og som derfor ikke kan bruge rollatoren uden selv at komme til skade eller skade andre.

Ved spørgsmål til produktet bedes De henvende Dem til forhandleren eller direkte til

### Rehasense Sp. z o.o.

Sulejowska 45  
97-300 Piotrków Trybunalski  
Poland

E-Mail: [info@rehasense.com](mailto:info@rehasense.com)

## 2. Sikkerhedsanvisninger

- Benyt kun produktet i fejlfri tilstand.
- Hvis der opdages mangler eller fejl på produktet, skal der øjeblikkeligt rettes henvendelse til forhandleren.
- Vær opmærksom på oplysningerne på typeskiltet.
- Benyt kun produktet til det oplyste formål.
- Der må ikke laves konstruktionsændringer på produktet uden producentens skriftlige tilladelse.
- Pas på ikke at få fingrene i klemme eller få andre skader ved alle rollatorens samlinger samt i forbindelse med justeringer, sammenklapning m.m.
- Check at begge bremsere fungerer inden ibrugtagning
- Benyt kun rollatoren, når den er fuldt udklappet og med låsemekanismen helt fastlåst
- Produktet må kun anvendes på et plant og stabilt underlag indendørs og udendørs
- Alle hjul skal til hver en tid være i kontakt med underlaget. Dette sikrer, at rollatoren er i balance og derved undgår evt. uheld.
- Når rollatoren anvendes til at sidde på, SKAL bremsere blokeres.
- Begge bremsehåndtag skal aktiveres og blokeres på én gang
- Efterlad aldrig en rollator ulåst i bremsefunktion
- Produktet må aldrig udsættes for større belastning end i alt 150 kg,
- Indkøbstaken kan max. bære 5 kg og må IKKE belastes mere end det.


### 3. Beskrivelse

#### Produktbeskrivelse

"ATHLON SL" rollatoren har en Super Let ramme af kulfiber og er udstyret med 4 hjul. Letvægts-kulfiberrammen gør det let at folde rollatoren sammen, samt opbevare og transportere den fx i bilen. Den er let at manøvrere og er tilstrækkelig stabil. Skubbehåndtagene kan indstilles i højden. Rollatoren er fra fabrikken af udstyret med et monteret sæde og en indkøbstaske.

#### Leverancen omfatter

- ✓ 1 rollator, sammenklappet, inkl. sæde og taske
- ✓ 1 stokkeholder sæt
- ✓ 1 brugervejledning

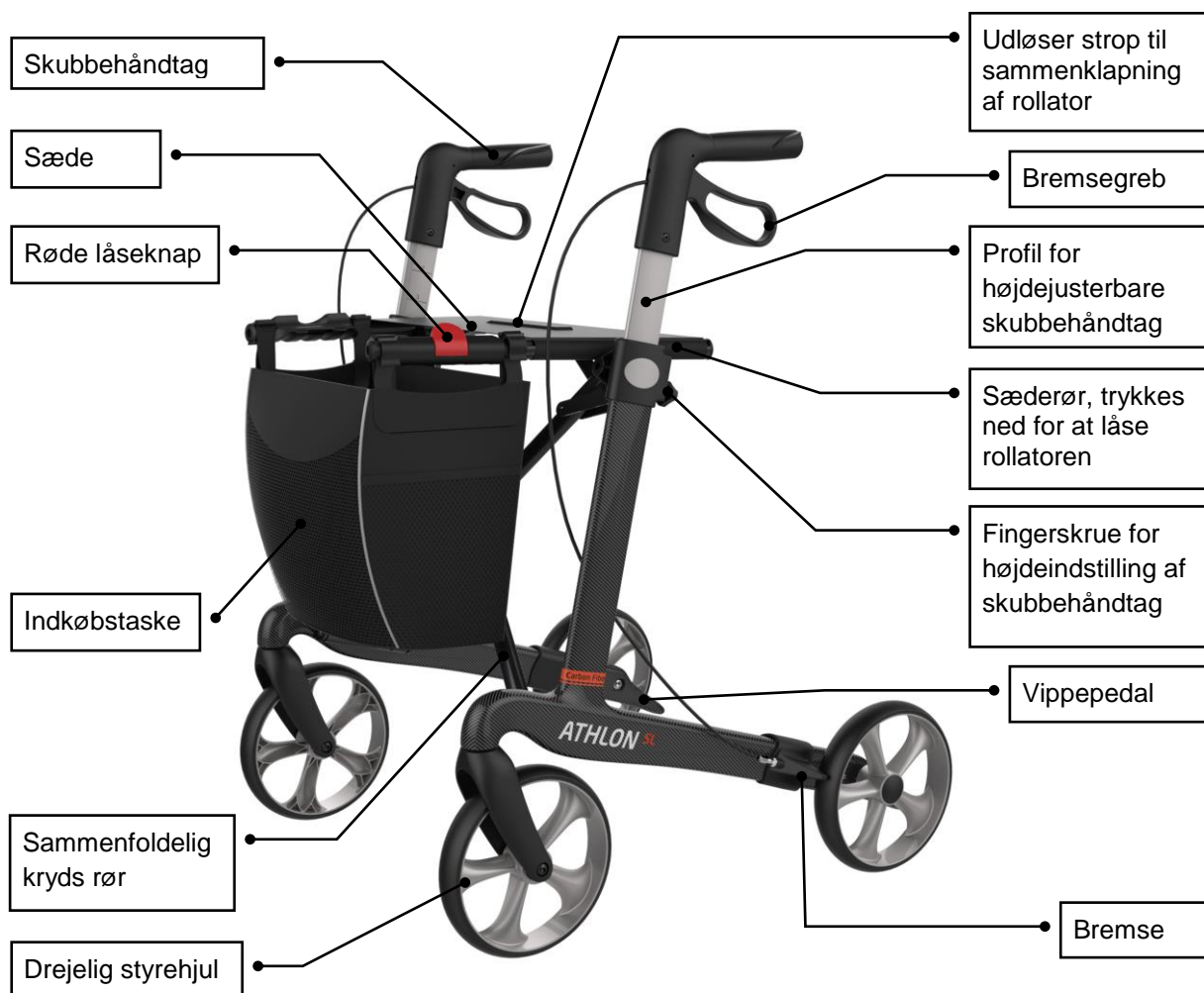

#### Kontrol ved modtagelsen

Efter at De har pakket rollatoren ud, skal De først kontrollere, om noget mangler, og om alle delene, der er vist på tegningen, er der. Hvis De konstaterer, at der mangler nogle dele, skal De straks kontakte forhandleren.

## Klargøring

- Sæt rollatoren med hjulene på gulvet. Tryk på den røde knap og tag fat om rørene ved sædet. Tryk disse nedad, indtil der høres et klik i låsemekanismen. Nu er rollatoren foldet ud og sikret mod at falde sammen.
- Kontroller inden brug at boltene, der fastgør hjulene, er korrekt fastgjorte, og at rollatoren er stabil, således at ingen dele kan bevæges.
- Kontroller endvidere bremsens funktion, før rollatoren anvendes.



## Sammenfoldning af rollator

- For at folde rollatoren sammen skal der trækkes opad i stroppen midt på sædet.
- Derefter udløses låsemekanismen, og rollatoren kan foldes sammen.

## Højdeindstilling af skubbehåndtag

- For at indstille højden på skubbehåndtagene løsnes fingerskruen.
- Derefter indstilles håndtagene i den ønskede højde, hvorefter skruen igen fastspændes.



Vær opmærksom på at begge håndtag skal være indstillet i samme højde. Korrekt indstillede håndtag bør ca. være i brugerens albuehøjde, når denne står med løst hængende arme.

## Tilbehør

Der findes forskelligt tilbehør til rollatoren (fx rygstøtte, bord, slæbebremse, enhåndsbremse m.v.). Kontakt Deres forhandler for yderligere informationer.

## Håndtering under transport

Det anbefales at transportere rollatoren i sammenfoldet stand. Dens konstruktion gør det muligt på en let måde at folde den ud og folde den sammen. Man bør sikre sig, at rollatoren befinder sig i en stabil position under transporten, så den ikke bliver skæv.

## Anvendelse


Stil Dem midt bag ved baghjulene, tag fat om håndtagene og udløs bremserne. Bremserne er specialudviklet, således at kun en lille kraftanstrengelse er nødvendig.

## 4. Teknisk data

ATHLON SL	
Totalbredde åben / sammenfoldet	61 cm / 22,5 cm
Sædebredde	46 cm
Længde	68 cm
Sædehøjde	L/62 cm - M/55 cm - S/50 cm
Højde på skubbehåndtag (indstill.)	L/74-102 cm - M/66-86 cm - S/63-79 cm
Max. belastning	150 kg
Max. belastning af indkøbstaske	5 kg
Totalvægt uden taske	L/5.2 kg - M/5.1 kg - S/5 kg (+taske 370g)
Bremser	2 x håndbremsere med låsefunktion

## Produktlabel

Findes på indersiden af den vertikale sideramme:

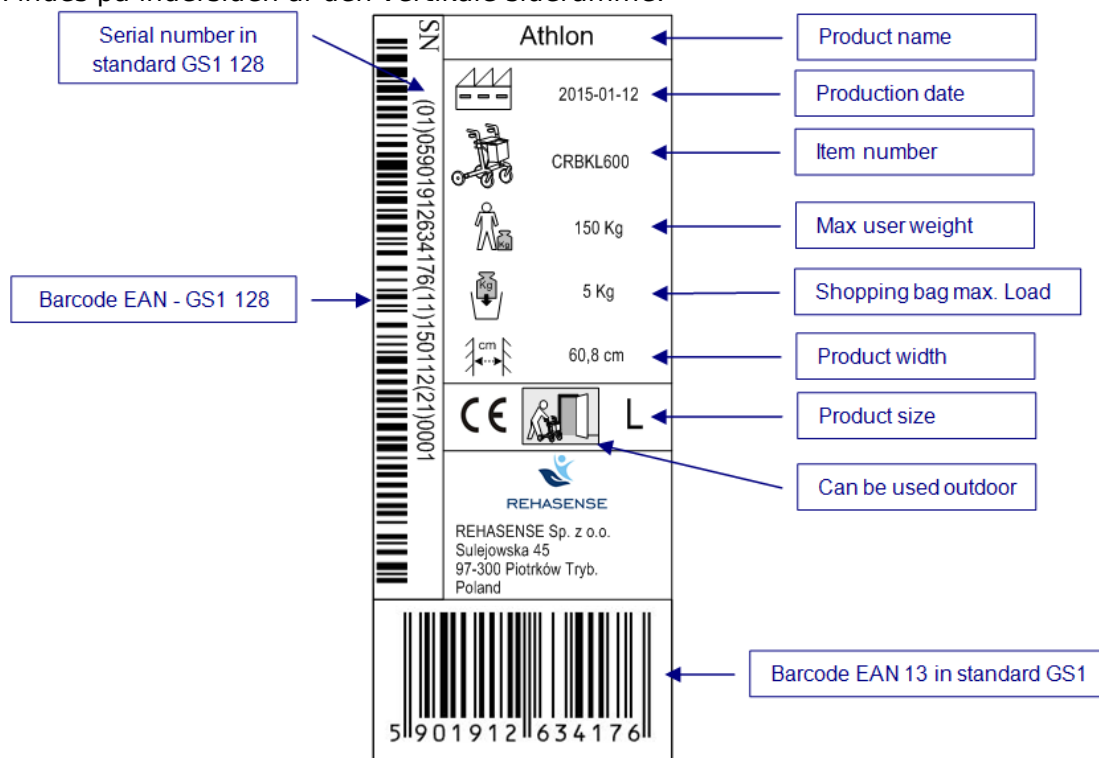

Eksempel på produktlabel

## 5. Vedligeholdelse

Normalt snavs på metal- og plastdele kan fjernes med gængse rengøringsmidler. Benyt kun milde sæbemidler, Der må ikke anvendes stærkt basiske rengøringsmidler, opløsningsmidler eller skuremidler, ej heller stive børster og skarpe genstande til rengøringen.

Trods den stabile konstruktion og brugen af modstandsdygtige og korrosionsbestandige materialer vil rollatoren blive udsat for et vist slid. Det anbefales derfor at få en fagmand til at checke den efter jævnlige (min. én gang årligt). Ved en sådan kontrol bør følgende checkes efter: Visuel kontrol af alle rammedele hvad angår skævheder, beskadigelser, slid og korrosion samt i særdeleshed kontrol af:

- Rollatorstellet
- Skubbehåndtag og greb
- Bremsegreb og bremsekabler
- Styregaffler og forhjul
- Baghjul med bremser
- Sæde og låseanordning
- Indkøbstaske
- Check efter om der mangler nogle montagedele (fx møtrikker, skruer, nitter...) og om de fungerer og er i god stand

### Rensning af hjulene

Det anbefales at rengøre hjulene med varmt vand og et mildt rengøringsmiddel. Foretag også smøring af lejer ved at spraye et smøremiddel på engang imellem eller når hjulene begynder at knirke.

## 6. Genanvendelse

Rollatoren er egnet til genanvendelse. Før genanvendelse skal den rengøres og desinficeres samt være kontrolleret i henhold til pkt. 5.



Vær opmærksom på at hvis rammen er bøjet eller brækket må dette ikke genanvendes, men hele rammen/rollatoren skal udskiftes.

## 7. Generel problemløsning

<i>Problembeskrivelse</i>	<i>Mulige årsager</i>	<i>Løsning</i>
Rollatoren kan kun med besvær skubbes eller styres	Der er skidt mellem hjulene og gaflerne	Rengør mellem hjul og gaffel. Aftag evt. hjulet. Smør de bevægelige dele med smøreolie
Bremserne virker ikke som de skal eller én af bremserne virker bedre end den anden.	Bremseskoene er slidte eller bremserne er ikke justeret korrekt.	Forsøg at justere bremsekablet eller udskift bremseskoene. Hvis dette ikke afhjælper problemet kontaktes forhandleren.
Sædet låser ikke i korrekt position.	Kontroller om låsemekanismen går i indgreb eller om den er defekt. Se om der evt. sidder noget i vejen eller om noget ikke er fastspændt.	Kontroller eller udskift låsemekanismen. Hvis dette ikke afhjælper problemet kontaktes forhandleren.

## 8. Bortskaffelse af produktet

Dette produkt skal, når det ikke længere kan anvendes, afleveres på en kommunal genbrugsplads.

## 9. Garanti

Rehasense Sp. z o.o. yder garanti på alle solgte produkter mod materiale- og produktionsfejl i den garantiperiode, det pågældende lands lovgivning foreskriver. Rehasense Sp. Z o.o. er ikke ansvarlig for skader, der er opstået som følge af u hensigtsmæssig eller forkert montage og/eller reparation, forsømmelse og slid samt ændring af komponenter foretaget af bruger eller trediemand. I sådanne tilfælde bortfalder CE-mærket og produktansvaret.

Garantien dækker ikke dele, som pga. normal brug er blevet slidt.

Garantien dækker ikke transportudgifter samt krav om skadeserstatning i forbindelse med at produktet ikke kan benyttes i reparationsperioden. Endvidere er der ingen garanti mod skader, der opstår som følge af manglende overholdelse eller misforståelse af denne brugervejledning.

I tilfælde af materiale- eller produktionsfejl bedes De straks tage kontakt til forhandleren eller direkte til Rehasense Sp. z o.o.

## 10. Konformitetserklæring (CE)

Rehasense Sp. z o.o., Sulejowska 45, 97-300 Piotrków Trybunalski, Poland, erklærer hermed, at

### **Rehasense Sp. z o.o rollator model "ATHLON SL"**

er designet og produceret i overensstemmelse med den tekniske dokumentation og i henhold til de grundlæggende krav i:

**Direktiv 93/42/EF for medicinalprodukter, Del I af 14. juni 1993**

**Forhandler stempel:**

## Rehasense® Europe

### Manufacturer

**Rehasense Sp. z o.o.**

Sulejowska 45  
97-300 Piotrków Trybunalski  
Poland

### Rehasense Deutschland

Briener Strasse 25  
47533 Kleve  
Deutschland



**REHASENSE**

[www.rehasense.com](http://www.rehasense.com)

[info@rehasense.com](mailto:info@rehasense.com)