

Sådan påsættes Dale® -abdominalbæltet


Dale-abdominalbæltet fås i en række størrelser. To bæltet kan sættes sammen, så de passer til en meget stor patient.

1. Anbring bæltet under patienten og stræk den ene ende ud. Et korrekt stræk giver den nødvendige kompression.
2. Stræk bæltet over patientens mave og hold i det med den ene hånd. Bæltet kan anbringes lige eller i en vinkel, hvis yderligere tryk er nødvendigt på øvre eller nedre abdomen.
3. Stræk den anden ende hen over i den ønskede vinkel.
4. Tryk bæltet ind, så det lukker, mens du strækker det.


Sørg for at strække bæltet tilstrækkeligt. Husk, at en god tilpasning ikke begrænser vejtrækningen; strækningen og kompressionen gør faktisk en dyb vejtrækning nemmere.

Sådan anvendes drænslinger

Der kan skæres et hul i Dale-abdominalbæltet til f.eks. at rumme drænslinger og ernæringssonder. Anbring bæltet på patienten, således at der kun er en enkelt tykkelse over drænstedet. Skriv et X på stoffet, hvor hullet skal laves, fold stoffet og klip et ellipseformet hul i materialet (se illustrationen). Når stoffet strækkes, vil det ellipseformede hul blive rundt og kunne rumme drænet. Hullets diameter vil være lig med den klippede længde.

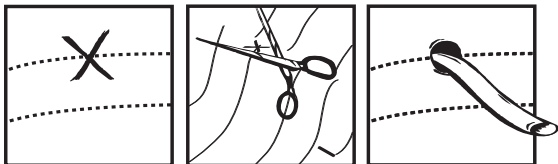


† Påsættelse af EasyGrip™-båndet

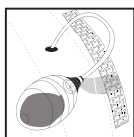

1. Tag EasyGrip™-båndet af bæltet.
 2. Ved anvendelse med drænbold føres EasyGrip™-båndet ind gennem drænboldens strop; og det fastgøres på bæltet igen.
- † Følg altid bedste praksisstandarder til drænanordninger.

Påsættelse ved egen hjælp

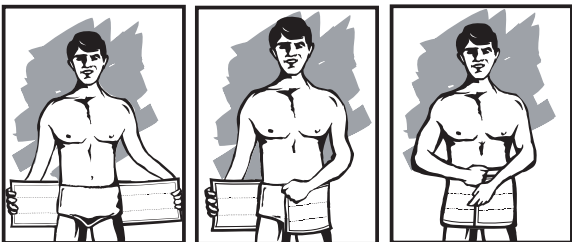

1. Anbring øverste kant lige under navlen og stræk ud til siden.
2. Svøb det om dig.
3. Tryk bæltet ind, så det lukker forsvarligt.

Vask og pleje



Maskinsvaskes KOLD



Eller vaskes i hånden



Må ikke bleges



Tørres på snor

Maskin- eller håndvaskes i koldt vand med mildt vaskemiddel. Før vask skal du sikre dig, at velcrooverfladerne er forsvarligt fastgjort for at forhindre, at der skal samle sig frug på dem, som kan interferere med Velcro®-fibre og svække deres lukkeegenskaber. Hænges til tørre.

Bestilling

Dale-abdominalbæltet fås hos forhandlere af hospitals-/medicinsk udstyr, pakket ét per kasse.

For at finde størrelsen måles kvindens hofter; mandens talje.

H84104101	3 panel	9" (23 cm) strækkes til størrelsen 30-45"	76-114 cm
H84104111	3 panel	9" (23 cm) strækkes til størrelsen 46-62"	117-157 cm
H84104181	3 panel	9" (23 cm) strækkes til størrelsen 60-75"	152-191 cm
H84108101	4 panel	12" (30 cm) strækkes til størrelsen 30-45"	76-114 cm
H84108111	4 panel	12" (30 cm) strækkes til størrelsen 46-62"	117-157 cm
H48108181	4 panel	12" (30 cm) strækkes til størrelsen 60-75"	152-191 cm
H48108201	4 panel	12" (30 cm) strækkes til størrelsen 82-94"	208-239 cm
H48109201	5 panel	15" (38 cm) strækkes til størrelsen 82-94"	208-239 cm

Dale-abdominalbælte

medekslusivt strækmateriale

Dale-abdominalbæltet støtter abdominalmusklerne, mens mobiliteten og genoptræningen af musklerne fremmes.

Bæltet er udelukkende fremstillet af Dales eksklusive strækmateriale, som muliggør velcrolukning et hvilket som helst sted for en mere præcis og komfortabel tilpasning. Jævnt fordelt kompression fremmer hosten og dyb vejtrækning. Patienter kan gå mere behageligt, hvilket reducerer muligheden for sedentære komplikationer såsom atelektase, pneumoni og flebitis.

Anvendelse

Dale-abdominalbæltet yder støtte og komfort efter indgreb såsom:

- Kejsersnit
- Fedtsugning
- Abdominalplastik
- Hysterektomi
- Gastroplastik
- Fødsel

Nøglefunktioner

- Latexfri. Eliminerer bekymringer om patientens eller plejerens overfølsomhed over for latex.
- Ny, innovativ sammenbøjningssøm. Syning uden mellemrum giver større patientkomfort.
- Jævnt fordelt kompression. Dales eksklusive strækmateriale fordeler kompression jævnt rundt om kroppen uden at skride, danne folder eller at være begrænsende.
- Længere produktlevetid. Materialet kan tages af og på uendeligt mange gange. Der kan opstå nogen loddenhed, men dette forbedrer faktisk støtteevnen.
- Velcrolukning. Bæltet åbnes og lukkes hurtigt og nemt ved forbindings- og såreftersyn. Kan fastgøres til et hvilket som helst sted på bæltets omkreds for en præcis tilpasning.
- EasyGrip™-bånd. Holder op til fire drænbolde på plads uden på abdominalbæltet.