

Yderligere praktiske anbefalinger:

- For at beskytte materialet, skal du kun bruge Oliz® produktet indendørs.
- Det anbefales, at bruge begge hænder når produktet skal flyttes.
- Hvis du transporterer produktet i et køretøj, skal produktet fastgøres for, at forhindre det i at flyve rundt og skade nogen.
- Hvis der er hul i produktet, skal dette fjernes fra personen. Oliz® produktet skal kontrolleres jævnligt for skader, da indholdet kan være farligt for børn under 3 år.

Vedrørende miljøbeskyttelse:

Hjælp miljøet ved ikke at bortskaffe dit produkt i husholdningsaffaldet. Klip produktet i stykker og fordel de enkelte komponenter, som plast, stof og metal efter lokale bestemmelser - i de relevante genanvendingsystemer.

Garanti: Ved produktionsfejl giver Oliz® to års garanti. Denne garanti er kun gyldig, hvis produktet anvendes som beregnet. Skader forårsaget af ukorrekt eller uhensigtsmæssig brug er udelukket fra garantien.

For yderligere spørgsmål om anvendelsen af Oliz produktet, er du velkommen til at kontakte os.

Ordre:                      År:                      Produkt: Albert lille



Godkendt ved EN71-1-71-2-71-3 og EN12182  
Dansk Design - er produceret i EU - [www.oliz.dk](http://www.oliz.dk)  
Oliz - Bornholmsvej 10 - 7400 Herning -DK -tlf +45 20 78 79 54

# Oliz®

Oliz® producerer hjælpemidler, for at styrke den sensorisk integration. Målet er, at fokusere på personer, der har brug for vedvarende støtte til, at styrke deres selvbevidsthed.

Oliz® Knæpuden er specielt designet til personer, der ofte oplever fysisk spænding, rastløshed eller stress i benene. Knæpuden hjælper med til, at give afslapning og lindring i hverdagen.


Den effektiv funktionalitet som Albert giver, er med til at give tillid og tryghed og kan tjene, som et vigtigt kommunikations middel mellem børn og voksne.

Knæpuden Albert kan transporteres i en taske.

Ved korrekt brug får du et produkt, der holder længe.

Sørg for at gemme dette informationsark til senere brug.

# Produkt: Knæpude "Albert lille"

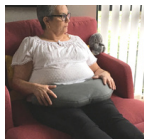

Vigtige instruktioner for brugen af Oliz® produktet:

Oliz® knæpuden "Albert" ser ikke kun sjov ud, men giver også fred og ro via sin tyngde. Albert er ideel som støtte til undervisningsbrug eller i hvileperioder.

Oliz® knæpuden "Albert" er designet til personer fra +2 år

Størrelse: Længde 560 mm - Bredde 270 mm – Højde 60mm Vægt: 3 kg

Materiale stof: 100% Imiteret læder/PU

Materiale indvendig: 100% Polyethylene

Oliz® bruger kun kvaliteter, der ikke indeholder kræftfremkaldende stoffer. Derfor er der ikke brugt flammehæmmende midler på produktet.

Pleje instruktioner:

- Må ikke vaskes
- Må ikke bleges.
- Må ikke stryges.
- Ikke egnet til tørretumbler.
- Må ikke renses.



Rengør Oliz® produktet med en blød klud og brug et egnet rengøringsmiddel eller desinfektionsmiddel til kropskontakt. Skal efter tørres med rent vand for at undgå skader på stoffet.

Vigtige anvisninger:

- Oliz® knæpuden Albert kan bruges ved, at placere puden på personens ben og hjælper personen med, at føle tryghed og mærker sig selv bedre.
- Det er vigtigt, at overvåge personer under brug, da produktet har godt med tyngde, der kan påvirke personer fysisk.
- Et Oliz® produkt bør kun bruges med personens eget samtykke. Hvis personen føler ubehag og udviser modstand ved brug af produktet, skal det fjernes fra personen. Start med at bruge produktet i korte tidsintervaller. Bliver der fortsat udvist modstand, så vil vi anbefale, at produktet ikke bliver brugt til denne person.
- Vær opmærksom på, at personen ikke bliver for vant til produktet så virkningen fortager sig. Produktet skal ses, som et terapeutisk hjælpemiddel.
- Når den ønskede effekt er opnået, skal produktet fjernes fra personen med forsigtighed. Der må ikke kastes med produktet, da tyngden i produktet kan forårsage skade både på produktet, men også på personer i nærheden af produktet.

Advarsler:

- Hvis personen er stærkt begrænset af motoriske og / eller fysiske forhold, skal Oliz® produktet bruges med særlig forsigtighed.
- Vi anbefaler generelt, at personer der bruger et Oliz® produkt overvåges under brug.
- Hold luftvejene frie, når produktet anvendes, da det ikke er et åndbart produkt.
- Et Oliz® produkt bør ikke bruges nær vand, da det kan give anledning til drukne fare.

Opbevaring:

- Af sikkerhedsmæssige årsager anbefaler vi, at Oliz® produktet opbevares utilgængeligt for personer, der kræver tilsyn.
- Hold Oliz® produktet væk fra skarpe/ varme genstande og åben ild.