

Yderligere praktiske anbefalinger:

- For at beskytte materialet, skal du kun bruge Oliz® produktet indendørs.
- Det anbefales, at bruge begge hænder når produktet skal flyttes.
- Hvis du transporterer produktet i et køretøj, skal produktet fastgøres for, at forhindre det i at flyve rundt og skade nogen.
- Hvis der er hul i produktet, skal dette fjernes fra barnet. Oliz® produktet skal kontrolleres jævnligt for skader, da indholdet kan være farligt for børn under 3 år.

Vedrørende miljøbeskyttelse:

Hjælp miljøet ved ikke at bortskaffe dit produkt i husholdningsaffaldet. Klip produktet i stykker og fordel de enkelte komponenter, som plast, stof og metal efter lokale bestemmelser - i de relevante genanvendingsystemer.

Garanti: Ved produktionsfejl giver Oliz® to års garanti. Denne garanti er kun gyldig, hvis produktet anvendes som beregnet. Skader forårsaget af ukorrekt eller uhensigtsmæssig brug er udelukket fra garantien.

For yderligere spørgsmål om anvendelsen af Oliz produktet, er du velkommen til at kontakte os.

Ordre: År: Produkt: Petra lille



Godkendt ved EN71-1-71-2-71-3 og EN12182
Dansk Design - er produceret i EU - www.oliz.dk
Oliz - Bornholmsvej 10 - 7400 Herning -DK -tlf +45 20 78 79 54



Oliz® producerer hjælpemidler, for at styrke den sensorisk integration. Målet er, at fokusere på børn, der har brug for vedvarende støtte til, at styrke deres egen selvbevidsthed.

Hvordan virker Kæle giraffen Petra? Placér Petras hals på barnets skuldre og Petras krop på barnets ben og lad barnet mærke tyngden. Den kan være en erstatning for de hænder fra en voksen, der trykker barnet let på skuldrene, når barnet har brug for ro. Målet er at hjælpe barnet, til at føle sig afslappet og tryk. Petra kan bruges af børn, der har et behov, for at mærke sig selv.

Den venlige kæle giraf Petra hjælper med, at bringe afslapning og tryghed ind i hverdagen, samt skaber tillid, tryghed og kan tjene, som et vigtigt kommunikationsmiddel mellem børn og voksne.

Produktet kan transporteres i en taske. Ved korrekt brug får du et produkt der holder længe.

Sørg for at gemme dette informationsark til senere brug.

Produkt: Kæle giraf "Petra lille"



Vigtige instruktioner for brugen af Oliz® produktet:

Oliz® kæle giraffen "Petra", er en giraf der er et terapeutisk produkt til børn. Den hjælper børn med, at mærke sig selv og slappe af i stressede situationer. Den giver tryk på skulder og ben når barnet sidder med den.

Oliz® kæle giraf "Petra" er designet til børn i alderen fra 2-5 år.
Størrelse: Højde 140mm-længde 610-bredde 300mm vægt 2,8 kg.

Materiale stof: 100% Imiteret læder/PU

Materiale indvendig: 65% Polyethylen
35% Metal kugler
100% Polyester

Oliz® bruger kun kvaliteter, der ikke indeholder kræftfremkaldende stoffer. Derfor er der ikke brugt flammehæmmende midler på produktet.

Pleje instruktioner:

- Må ikke vaskes
- Må ikke bleges.
- Må ikke stryges.
- Ikke egnet til tørretumbler.
- Må ikke renses.



Rengør Oliz® produktet med en blød klud og brug et egnet rengøringsmiddel eller desinfektionsmiddel egnet til kropskontakt. Skal eftertørres med rent vand for at undgå skader på stoffet.

Vigtige anvisninger:

- Oliz® kæle giraffen "Petra" skal placeret med halsen på barnets skuldre og kroppen hvilende på barnets ben.
- Det er vigtigt at overvåge barnet under brug, da produktet har godt med tyngde, der kan påvirke barnet.
- Et Oliz® produkt bør kun bruges med barnets samtykke. Hvis barnet føler ubehag ved brug af produktet, skal det fjernes fra barnet.
- Vær opmærksom på, at barnet ikke bliver for vant til produktet så virkningen fortager sig. Produktet skal ses, som et terapeutisk hjælpemiddel og bruges i begrænsede tidsintervaller.
- Når den ønskede effekt er opnået, skal produktet fjernes fra barnet med forsigtighed. Læg giraffens hals ovenpå giraffens krop og løft med begge hænder rundt om kroppen. Løft ikke produkter i halsen, da tyngden kan forårsage skader på produkter, som ikke dækkes af garantien. Der må ikke kastes med produktet, da tyngden i produktet kan forårsage skade både på produktet, men også på personer i nærheden af produktet.

Advarsler:

- Hvis barnet er stærkt begrænset af motoriske og / eller fysiske forhold, skal Oliz® produktet bruges med særlig forsigtighed.
- Vi anbefaler generelt, at børn der bruger et Oliz® produkt overvåges under brug.
- Hold luftvejene frie når produktet anvendes.
- Et Oliz® produkt bør ikke bruges nær vand, da det kan give anledning til drukne fare.
- Hvis barnet har en pacemaker, skal dette produkt have særlig opmærksomhed. Hvis barnet føler sig utilpas, kan dette være en indikation af virkningen af vores produkt. I dette tilfælde skal du straks fjerne produktet. Metallene i produktet er dog ikke magnetisk.

Opbevaring:

- Af sikkerhedsmæssige årsager anbefaler vi, at Oliz® produktet opbevares utilgængeligt for et barn, der kræver tilsyn.
- Hold Oliz® produktet væk fra skarpe/ varme genstande og åben ild.