



**PEGASUS-SPORTSTER A/S**  
*- FRIHED TIL DIG*

---

# Manual Q12

---

Pegasus-Mobility A/S

---

Nørregade 7  
5450 Otterup  
Telefon 70 27 27 18

---



Serienummer: Salgsdato/garantidato:
--

# INDHOLDSFORTEGNELSE

## Indhold

---

INDHOLDSFORTEGNELSE.....	2
INTRO TIL MANUAL.....	3
TEKNISK SPECIFIKATION.....	4
SIKKER BRUG AF Q12 TRÆKKER.....	5
GARANTIBETINGELSER.....	6
Undtagelser.....	6
Batterier.....	6
Serviceeftersyn.....	6
SÅDAN VIRKER DIN KØRESTOLSTRÆKKER - KONTROLPANEL.....	7
BATTERIER, VEDLIGEHOLD OG OPLADNING.....	8
Vedligehold og brug af batterier.....	8
Sikker opladning af batteri.....	8
KØRSEL.....	9
SAMMENFOLDNING OG JUSTERING AF RAT/STYR.....	10
Sammenfoldning.....	10
Indstilling af højde på ratstamme.....	10
Justering af vinkel på ratstamme.....	11
VEDLIGEHOLD.....	12

## INTRO TIL MANUAL

---

Venligst læs og følg alle instruktioner i manualen, før du begynder at anvende din el-scooter.


Hvis der er noget som du ikke forstår i manualen, eller hvis du har brug for yderligere assistance, da venligst kontakt din lokale Pegasus forhandler.

Du skal i egen interesse læse manualen grundigt og følge og rette dig efter alle instruktioner, advarsler, og forbehold. Dette skal du særlig gøre for, at behandle din el-scooter på den korrekte måde men også for, at du har en driftssikker og stabil el-scooter i hverdagen.

Din egen sunde vurdering er også af stor betydning i den daglig brug af din el-scooter, ligesom råd og henstillinger fra eventuelle sociale myndigheder og din Pegasus forhandler er af betydning

Pegasus-Mobility kan ikke drages til ansvar for skader og uheld opstået på grund af brugers mangel på at følge advarsler, forbehold og instruktioner eller som skyldes brugers manglende vurderingsevne og sunde fornuft.

## TEKNISK SPECIFIKATION

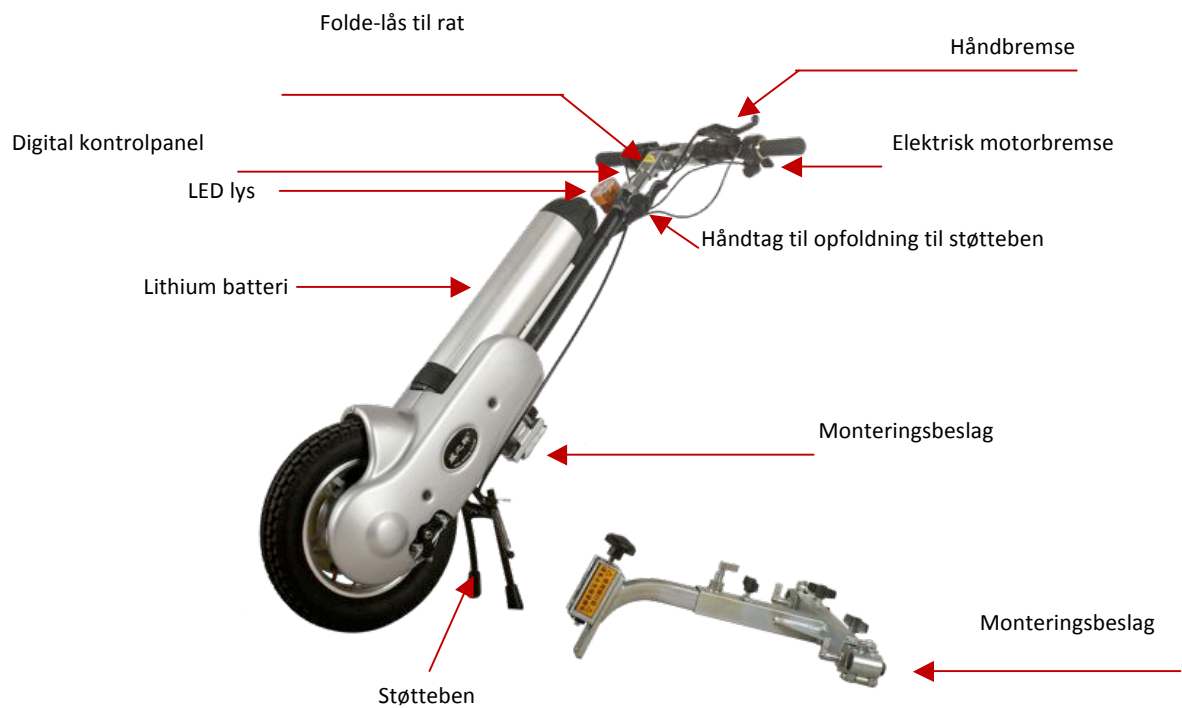

Hjul	12 tomme/ 10 tomme	Batteri	36V/12AH lithium
Max. hastighed	20 km/t	Rækkevidde	30±5KM
Motor	400W	Vægt	14KG

## SIKKER BRUG AF Q12 TRÆKKER

---

- Kør ikke med din trækker før du har læst manualen
  - Tjek at batteriet er opladet nok til dagens forventede forbrug
  - Tjek dæk for luft
  - Overskrid ikke den maksimale stigning som er 10 %.
  - Start altid i lav fart
  - Kør ikke din trækker op over kraftig ujævne kanter eller overflader, vær forsigtig i kurver.
  - Kør ikke din trækker ind i smalle passager, uden at have sat hastigheden til lav.
  - Drej ikke pludseligt i høj hastighed, og især ikke på ujævnt underlag.
  - Kør ikke på dybt terræn, højt blødt græs og våde områder
  - Kør ikke under alkohol- og medicinpåvirkning.
  - Stop altid helt op før end du ændrer køreretning (frem/tilbage).
  - Hold altid dine fødder på kørestolens fodpanel under kørsel.
  - Kør altid forsigtigt frem, når du skal ned ad bakke eller en rampe.
  - Kør ikke din el-scooter gennem dybt vand, og gør ikke din el-scooter ren med højtryksrensere eller haveslange. Brug en blød børste med vand og tør efter med klud.
-

## GARANTIBETINGELSER

---

- 36 måneders garanti på stel, stålkonstruktion og cover som skyldes revner og brud ved produktionsfejl.
- 24 måneders reklamationsret på alle fejl og mangler.
- 12 måneders garanti på alle fejl og mangler der skyldes produktionsfejl.
- 6 måneder på batteriet.

For garantidækning der strækker længere end det dansk lovgivning foreskriver, skal løbende årsservice og reparationer være foretaget af Pegasus Mobility A/S eller en anvist reparatør.

### Undtagelser

---

Denne garanti dækker ikke dele der går til ved almindelig slid, herunder:

Dæk, lyspære, sikringer, batterier, slanger, polstring, fodmåtte eller skade på produktet opstået af forkert brug eller uheld, som Pegasus-Mobility ikke kan gøres ansvarlig for.

Denne garanti dækker ikke, såfremt din el-scooter bærer præg af overdrevent slid, forkert brug, skade og/eller misbrug, eller er blevet omforandret af andre end Pegasus-Mobility.

### Batterier

---

Næsten alle batterifejl vil opstå indenfor de første måneder.

Hvis der opstår fejl på batteriet indenfor garantiperioden, og dette skyldes en fabrikations- eller materialefejl, ombyttes batteriet uden beregning, såfremt batteriet ikke har været udsat for beskadigelser, misligholdelse eller ekstrem hård anvendelse.

Vær opmærksom på, at ved ekstrem brug slides batteriet hurtigere, og at dette ikke er omfattet af garantien. Overopladning eller sulfatering ødelægger batteriet hurtigere og er ikke omfattet af garantien.

### Serviceeftersyn

---

Som med alle andre elektriske køretøjer, skal din Pegasus-Mobility el-scooter regelmæssigt inspiceres og serviceres for at være optimal driftssikker. Hvor ofte du skal gøre dette afhænger af hvor meget du benytter din trækker.

Pegasus-Mobility anbefaler som et minimum et serviceeftersyn en gang om året.

Det er dit ansvar, at dette bliver bestilt, så hvis vi ved en fejl ikke skulle have kontaktet dig for en serviceaftale, så skal du i egen interesse kontakte Pegasus-Mobility.

Hvis din el-scooter, på grund af fejl, skader eller andet, har behov for eftersyn og service uden for disse årlige services, så kontakt omgående Pegasus-Mobility for en serviceaftale.

Dele af garantiene på din el scooter kan bortfalde, såfremt du ikke overholder de vedligeholdelses procedure, som beskrives i afsnittet om vedligehold.

## SÅDAN VIRKER DIN KØRESTOLSTRÆKKER - KONTROLPANEL

Kontrolpanelet sidder på styret og her er alle de forskellige funktionsknapper placeret.



- (1) Håndbremse
- (2) Motobremse
- (3) Horn
- (4) Frem- og tilbage knap
- (5) Speeder
- (6) Display



## BATTERIER, VEDLIGEHOOLD OG OPLADNING

### Vedligehold og brug af batterier

Lithium batteriet på din el-scooter har samme funktion som benzinen på en bil. Der er ikke nogen vedligehold med påfyldning af væsker på dit batteri. Bruger du trækkeren dagligt, så oplad efter hver tur. Hold det altid fuldt opladet

Vær opmærksom på, at i kolde perioder nedsættes kapaciteten på batteriet med op til 50 %. Tag batteriet med ind ved længere pauser, så undgår du tyveri af batteri. Sluk på den røde knap ved længere pauser. Husk at tænde batteriet på den røde knap inden du sætter på trækkeren.

### Sikker opladning af batteri

1. Brug batteri-nøgle til at slukke batteriet og frigøre det fra trækkeren
2. Fjern batteriet og tag det med til opladning f. eks. inde
3. Sæt det et-benede ladestik i batteriet
4. Sæt stikket i vægkontakten og tænd. En diode på lader lyser rødt under opladning og skifter til grøn, når den er fuldt opladet. Er batteriet næsten afladet tager det ca. 8 timer.
5. Når batteriet er fuldt opladet lyser alle tre dioder grønnt på batteriet. Tryk på den lille sorte knap, og du kan se om der er lys i alle tre. Når det er fuldt opladet, så sluk på dørkontakt og tag ledning fra. Du kan også lade uden at tage batteriet af. Blot isæt ladestik direkte i batteriet.





## KØRSEL

---

Det er vigtigt, at du øver dig i kørsel i ikke befærdede områder, inden du begiver dig ud i trafikken. Helt basalt skal du øve dig i, at sætte trækkeren i gang og starte kørslen blidt op, hvorefter du kan regulere hastigheden.

At styre trækkeren er nemt. Du skal alene dreje styret, som på en cykel i den retning du ønsker at køre.

Når du skal gennem en small passage, som f.eks. en dør eller rundt om et hjørne, så stop op og drej styret i den ønskede retning og derefter kør langsomt frem. På denne måde kan du få el-scooteren til at dreje skarpt. Du bør øve dette flere gange til du er stabil i udførslen.

Når du skal bakke, skal du ligeledes sikre dig, at gøre det i langsom fart.


Du vil helt sikkert møde nogle små forhindringer, som kræver lidt øvelse, når du starter med at køre med din trækker.

## SAMMENFOLDNING OG JUSTERING AF RAT/STYR

---

### Sammenfoldning

---

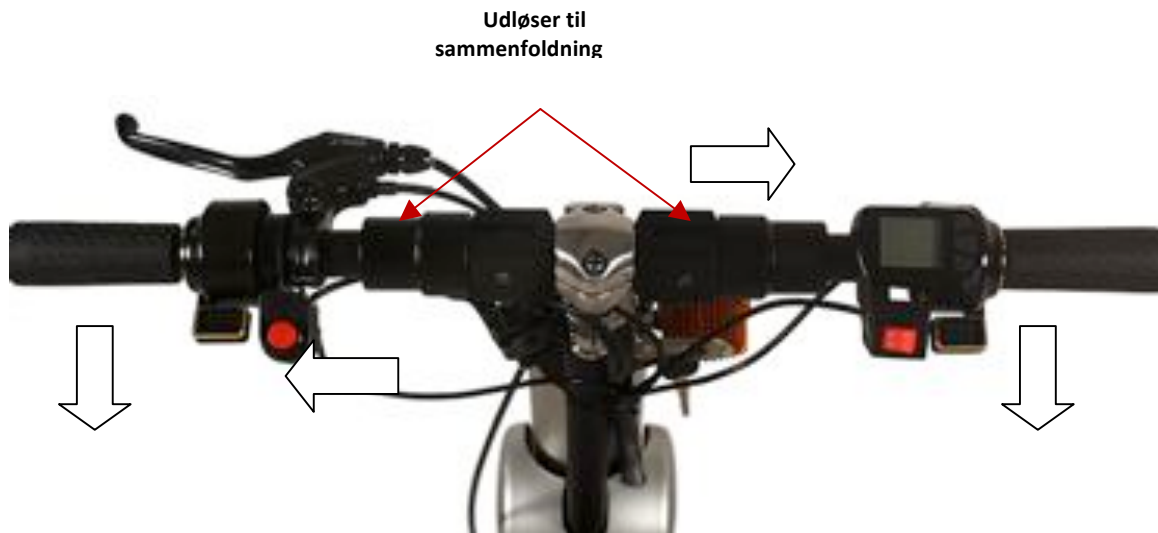

Træk udløsseringen til venstre og fold håndtag ned. Det same i højre side.

Efter sammenfoldning

### Indstilling af højde på ratstamme

---



1. Løsn fingerskruerne
2. Træk eller sænk ratstammen til den ønskede højde
3. Stram fingerskruerne.

## Justering af vinkel på ratstamme

---



1. Løsn skruen
2. Vip til den ønskede position
3. Stram til igen.

## VEDLIGEHOLD

---

1. Har du kørt i regn, så tør trækkeren efter brug med en klud. Stil den et tørst sted, så ikke synligt vand kan fordampe.
2. Hold trækkeren ren
3. Tag batteriet med ind, så det ikke udsættes for ekstremt vejr som regn og frost.
4. Stilles din trækker væk for længere tid, så tag batteriet af og sluk for det (den røde knap på batteriet).