

Brugsanvisning til TabTime Super 8

Introduktion:

Denne pille-alarm kan indstilles med op til 8 alarmer pr. dag på de præcise tidspunkter, som passer brugeren.

Når alarmerne går i gang lyser en rød lampe og der kommer Bip-lyde, som fortsætter indtil Pille-æskens låg åbnes.

Alarmerne styres af 3 knapper:

Tryk på "MODE" 1 gang : Her indsættes tiden/uret.

TRYK på " MODE" 2-3-4-5-6-7-8-9 gange for at indstille de 8 alarmtidspunkter

Indstilling af uret på Pille-alarmerne:

Fjern beskyttelsesplastikken for at montere batteriet

Pres på "MODE" – knappen og hold den inde indtil displayet blinker.

Indstil du tiden med timer og minutter

For at bekræfte tiden tryk på MODE – knappen

Indstilling af de 8 alarmer:

1) Tryk på "MODE" knappen indtil displayet blinker. TRYK så 2 gange på MODE-knappen, så "nummer 1 med en klokke" kommer frem øverst på skærmen.

2) Tryk MODE knappen og hold den nede indtil displayet blinker og indstil tiden på den første alarm.

3) Tryk på MODE knappen for at bekræfte Alarm nr. 1.

Indstilling af alarm nr. 2 – gentag processen 2 og 3.

Når de ønskede alarmer er sat ind – så lukkes pilleæskens låg.

Slette en alarm

For at slette en alarm, så gå til den alarm som du ønsker at slette. Tryk på MODE knappen og tryk på MINUTE knappen for at slette alarmerne,

Kontakt os gerne på:

Danish Care Supply, telefonnr. 2211 8616, mail: dcs@danishcaresupply.dk