

En sengegalge kan anvendes af personer med nedsat bevægelighed i kroppen og man har brug for at løfte sig fra madrassen eller hvis man glider ned i sengen og vil løfte sig op med hovedet igen. Løftebuen monteres uden værktøj. Den er fremstillet af epoxybelagte stålrør. Den højdejusterbare trapez er låst for at forhindre den i at glide ud. Sengegalgen har to ben som kan indstilles på bredden og længden. Løftebuens løftestang kan drejes cirka 30 grader i begge retninger. Løftebeslaget rengøres bedst med de rengøringsmidler, der almindeligvis findes på markedet. Ved rengøring skal du sørge for, at løftebeslaget tørrer ordentligt, udvendigt såvel som indvendigt!



Varenr.	310001
Navn	Sengegavle
HMI nr.	48387
Antal produkter	1 st
Vikt per produkt	14 kg
Højde	200 cm
Justerbare ben i bredden	100-114 cm
Justerbare ben i længden	90-97 cm
Max brugervægt	120 kg
Materiale	epoxybelagte stålrør
Rengøring	Vand og standard rengøringsmidler. Sørg for, at løftestangen tørrer ordentligt efter vask
Renovation	Metalaffald, sorteret efter lokale anvisninger
Opbevarings	Ved stuetemperatur
Øvrige informationer	


Anvendelse

Placer løftebeslaget bag sengegavlen på en plan overflade.

Monter benene i den ønskede længde, så løftebeslaget står solidt, og spænd derefter stopskruerne for at fastgøre benene.

Træk forlængerrøret ind i foden og placer derefter løftebeslaget i røret.


Kontroller, at løftebeslaget er stabilt, og at alle skruer er stramme.

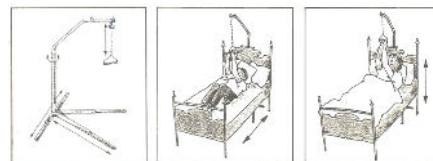

Monteringsanvisning

Kan skilles ad i 8 dele. Løftebeslaget samles uden værktøj.

Den højdejusterbare trapez er låst for at forhindre den i at glide ud. Sengegalgen har to ben som er justerbar i bredden (100-114 cm) og to som er justerbar i længden (90-97 cm). Løftebuens løftestangsarm kan drejes cirka 30 grader i begge retninger. Håndtaget har en vinkelgrad på 137mm x 19,29mm i den nederste og 137mm x 10,36mm i den øvre vinkel. Der er 130 cm mellem gulv og svingarm/bøjning.

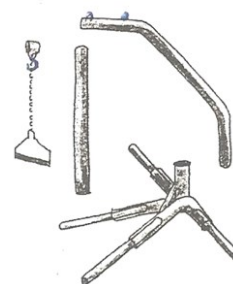

Symboler:



Ingen PVC eller Latex



Produkten følger (EU) MDR 2017/745 og 2007/47/EG for medicintekniske produkter.



Varenr. 310001



Læs monteringsvejledningen/brugsanvisningen inden montering!

Kontroller altid løftebeslaget efter montering og før brug, at løftebeslaget er stabilt, og at der ikke er risiko for, at det vælter! Sørg for, at der er plads til at svinge håndtaget. Sørg altid for, at benene er forlænget efter brugsanvisningen og at den står solidt på jorden - risiko for skader, hvis de ikke er monteret korrekt. I tilfælde af alvorlige produktfejl/ulykker kontaktes Danish CARE Supply



SRN SE-MF-000033314



Swereco AB
Vagnvågen 4
364 42 Lenhovda