

Ankel- og fod-ortose og trykaflastning i ét: Heelift AFO



PRODUKTET:

Heelift AFO er det nyeste produkt i rækken af trykaflastninger fra Heelift.

Heelift AFO ortosen yder optimal støtte af ankel og fod uden risiko for tryk på det modsatte ben.

Heelift AFO fjerner samtidig trykket fra hælområdet og fordeler trykket jævnt fra underbenet.

Den hænger ikke i underlaget pga. den glatte bagside og tillader derfor patienten at være mobil i seng og stol.

Heelift AFO tillader at man i begrænset omfang kan træde ned på den f.eks i forbindelse med forflytninger fra seng til stol mm. Undersiden er desuden forsynet med en skridsikker belægning.

Heelift AFO tilpasses individuelt ved hjælp af den medfølgende skumblok, f.eks for at modvirke udadrotation.

ANVENDELSE:

- Behandling og forebyggelse af dropfod
- Behandling af smerter under foden pga inflammation ved senehæftet (plantar fasciitis)
- Behandling og forebyggelse af kontraktur af fodsålen efter f.eks. apopleksi o.a.
- Behandling og forebyggelse af tryksår
- Behandling af Achillesene betændelse

VASKEANVISNING:

- Luk velcro stropperne
- Læg Heelift AFO i en vaskepose
- 60° C maskinvask
- må ikke tørretumbles og må ikke lægges på direkte varme

STERILISERING:

Autoklaveres ved 121°C. Efterfølgende køles Heelift AFO et par timer, til den er helt tør.

SORTIMENT HEELIFT AFO:

Beskriv.	Str.	Art.nr.
Original (æggebakke)	one size	DM-HL-AFO
Glat	one size	DM-HLS-AFO

Produktbestilling



Heelift AFO med "æggebakke" inderside er specielt udviklet til trykudsatte patienter med henblik på at sikre god luftcirkulation. Samtidig yder skinnen optimal støtte af ankel og fod.



Heelift AFO med glat inderside er specielt udviklet til patienter med ødematøse ben og meget sart hud med behov for støtte til ankel og fod. Den glatte inderside anbefales til særligt trykudsatte ben, som ikke tåler den lidt ujævne "æggebakke" inderside.

Produkterne bestilles hos:
Axel Madsen Health Care AS
Gøngehusvej 252
2950 Vedbæk
Tlf.nr: 4589 0225
Fax: 45 89 02 29
Email: info@dk.LRmed.com
www.axel-madsen.dk



Højnæsgaard Gøngehusvej 252 2950 Vedbæk Tlf.: 4589 0225
www.axel-madsen.dk