

Mobilex “Jaguar” rollator

Varenr. 312410 and 312411

Montage- og brugervejledning



CE

MOBILEX A/S
Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg
Danmark
www.mobilex.dk

1. Generel information

Kære kunde

Denne brugervejledning indeholder en beskrivelse, og vigtig vejledning for at sikre korrekt og sikker brug af produktet. Det er vigtigt, at De læse denne vejledning omhyggeligt, før De tager produktet i brug. Det er især vigtigt at læse sikkerhedskravene og følge disse.

Vi udvikler løbende vores produkter, og vi forbeholder os ret til uden yderligere varsel at ændre specifikationer og funktioner af produkter.

Formålsbeskrivelse

Denne Mobilex rollator er beregnet til personer, som pga. bevægelsesproblemer har brug for støtte ved gang, men som selv er i stand til at bruge rollatoren uden at komme til skade eller øve skade på andre.

NB

Rollatoren må kun bruges af personer, der pga. deres sundhedstilstand har brug for stabil støtte ved gang. Rollatoren bør ikke bruges af personer med eksempelvis balanceproblemer eller svækket muskelkraft, og som derfor ikke kan bruge rollatoren uden selv at komme til skade eller skade andre. Den endelige beslutning om at vælge den rigtige type hjælpemiddel afhænger af tilstanden af den enkelte patient, og skal altid tages af en professionel f.eks. læge eller fysioterapeut.

Hvis du har spørgsmål, bedes du tage kontakt til din forhandler eller direkte til

Mobilex A/S

Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg
Danmark

Telefon +45 87 93 22 20
Telefax +45 87 93 17 77
E-Mail: info@mobilex.dk

2. Sikkerhedsanvisninger

- Benyt kun produktet i fejlfri tilstand.
- Hvis der opdages mangler eller fejl på produktet, skal der øjeblikkeligt rettes henvendelse til forhandleren.
- Vær opmærksom på oplysningerne på typeskiltet.
- Benyt kun produktet til det oplyste formål.
- Der må ikke laves konstruktionsændringer på produktet uden producentens skriftlige tilladelse.
- Pas på ikke at få fingrene i klemme eller få andre skader ved alle rollatorens samlinger samt i forbindelse med justeringer, sammenklapning m.m.
- Tjek at bremsen fungerer inden ibrugtagning
- Benyt kun rollatoren, når den er fuldt udklappet og med låsemekanismen helt fastlåst
- Produktet må kun anvendes på et plant og stabilt underlag og kun indendørs
- Alle hjul skal til hver en tid være i kontakt med underlaget. Dette sikrer, at rollatoren er i balance, og derved undgås evt. uheld.
- Når bremsehåndtaget aktiveres, skal begge hjul blokeres på én gang
- Efterlad aldrig en rollator ulåst i bremsefunktionen
- Produktet må ikke anvendes af brugere med en vægt over 100 kg. Kurven kan max. bære 5 kg.

3. Beskrivelse

Mobilex "Jaguar" rollatoren har en aluminiumsramme og er udstyret med 4 hjul. Aluminiumsrammen gør det let at folde rollatoren sammen samt opbevare og transportere den. Den er let at manøvrere og er tilstrækkelig stabil. Skubbehåndtagene kan indstilles i højden. Rollatoren er fra fabrikken af udstyret med en taske og en bakke.

Rollatoren er leveret i et karton som indeholder følgende:

- ✓ 1 aluminiumsramme med hjul, taske med lynlås samt bakke
- ✓ 1 skubbehåndtag med bremsehåndtag
- ✓ 1 brugervejledning



Samlevejledning

- Tag rollatoren ud af kartonen og stil den på gulvet.
- Sammenlign med listen ovenfor. Hvis der skulle mangle noget, bør De ikke fortsætte med montering, men straks kontakte deres leverandør.
- Støt håndtaget med den ene hånd og med den anden hånd tag fat i den bagerste rammedel og træk den forsigtigt bagud.
- Pres forsigtig håndtaget ned indtil rammen er fuldt udfoldet
- Rollatoren er først udfoldet når låsemekanismen er klikket ud.
- Stil den udfoldede ramme på en plan overflade. Alle 4 hjul skal røre underlaget.
- Kontroller altid at rollatoren er stabil og låst, når rollatoren er udfoldet
- Juster håndtaget til samme højde i begge sider (se også funktionsbeskrivelse).
- Sikre at de røde låseknapper er forsvarligt sikret, og at håndtaget ikke kan bevæge sig når de belastes.
- Kontroller altid at rollatoren og skubbehåndtaget er forsvarligt låst, FØR De tager produktet i brug
- Manglende overholdelse af disse advarsler kan resultere i personskade.

Funktionsbeskrivelse

- Juster højden af skubbehåndtaget, så håndtagets højde er ud for håndledet, når brugeren står med hånden ned langs siden. Juster højden ved at løsne de røde trykknapper placeret øverst på rammen Derefter juster håndtaget til den ønskede højde og luk låseknappen sikkert.
- Sikre at alle justeringer er sikret, og at hjul og bevægelige dele er i god stand før brug.

Bremse

- For at bremse rollatoren skal De blot trække opad i bremsestangen, og holde den så længe De ønsker hjulene bremset. For at udløse bremsen skal De blot slippe bremsestangen.
- For at låse bremserne i "parkeret" position i længere periode skub bremsehåndtaget op og lås det med den røde C-clip. Når den skal frigøres igen trækkes der op i håndtaget, og den røde clip frigøres ved at skubbe den frem.
- Når rollatoren anvendes i stationær position, skal bremsen være aktiv.

Sammenfoldning

- Fjern bakken på rollatoren
- Tryk på knappen for sammenfoldning, og pres forsigtigt den bagerste rammedel imod den forreste, for at folde rollatoren sammen.

Transport anbefaling

- Rollatoren er let at folde sammen for bekvem transport. Hvis det er nødvendigt at transportere den, anbefaler vi at folde den, som det er skrevet i beskrivelsen ovenfor. Rollatoren skal transporteres på en måde, som er stabil og uden risiko for uønsket udfoldning.

Tilbehør


Der leveres ikke yderligere tilbehør til denne Mobilex rollator.

4. Tekniske data

Mobilex Rollator Jaguar	Orange Varenr. 312410	Lyseblå Varenr. 312411
Højde af skubbehåndtag (justérbar)	83,5 - 94,5 cm	
Mål af foldet rollator (H x W x D)	83,5 x 54,5 x 27 cm	
Total bredde	54,5 cm	
Længde (dybde) åben / sammenfoldet	66 cm / 27 cm	
Vægt	6,3 kg	
Max. belastning (rollator / taske)	100 kg / 5 kg	
Bremser	2 låsbare med parkeringsfunktion	
Hjul	Forhjul og baghjul: 7" (175 x 27 mm)	

Produktlabel

Findes på den nederste rammedel

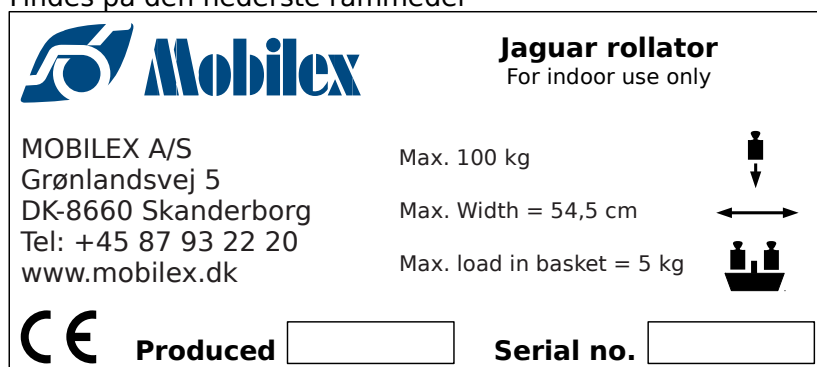

Billede af produktlabel (eksempel)

5. Vedligeholdelse

Normalt snavs på metal- og plastdele kan fjernes med gængse rengøringsmidler. Benyt kun milde sæbemidler, Der må ikke anvendes stærkt basiske rengøringsmidler, opløsningsmidler eller skuremidler, ej heller stive børster og skarpe genstande til rengøringen. Trods den stabile konstruktion og brugen af modstandsdygtige og korrosionsbestandige materialer vil rollatoren blive udsat for et vist slid. Det anbefales derfor at få en fagmand til at tjekke den efter jævnlige (min. én gang årligt). Ved en sådan kontrol bør følgende tjekkes:

- ✓ Rollatorstellet
- ✓ Skubbehåndtaget og grebet
- ✓ Bremsegreb og bremsekabler

- ✓ Styregafler og forhjul
- ✓ Baghjul med bremses
- ✓ Alle låseanordninger
- ✓ Indkøbstasken
- ✓ Check efter om der mangler nogle montagedele (fx møtrikker, skruer, nitter...) og om de fungerer og er i god stand

6. Generel problemløsning

Problembeskrivelse	Mulige årsager	Løsning
Rollatoren kan kun med besvær skubbes eller styres	Der er skidt mellem hjulene og gafflerne	Rengør mellem hjul og gaffel. Aftag evt. hjulet. Smør de bevægelige dele med smøreolie
Bremserne virker ikke som de skal eller én af bremsene virker bedre end den anden.	Bremseskoene er slidte eller bremsene er ikke justeret korrekt.	Forsøg at justere bremsekablet eller udskift bremseskoene. Hvis dette ikke afhjælper problemet kontaktes forhandleren.

7. Bortskaffelse af produktet

Dette produkt skal, når det ikke længere kan anvendes, afleveres på en kommunal genbrugsplads.

8. Garanti

Mobilex A/S yder en garanti på 2 år mod materiale- og produktionsfejl. Vi accepterer ikke ansvar for skader, der skyldes dårlig vedligeholdelse af produktet, skader som følge af forkert udførte reparationer eller skader, der skyldes normalt slid. Hvis der foretages konstruktionsmæssige ændringer på produktet uden vores skriftlige accept, bortfalder CE-mærkningen og vores produktansvar. Hvis der konstateres materiale- eller produktionsfejl, skal De straks tage kontakt til forhandleren af produktet eller til Mobilex A/S direkte. Garantien dækker ikke transportomkostninger og omfatter ikke erstatning for personskader eller manglende benyttelse af produktet under reparation. Der ydes ikke erstatning for skader, der skyldes at denne brugervejledning ikke følges.

9. Konformitetserklæring (CE)

Mobilex A/S, Grønlandsvej 5, 8660 Skanderborg, Danmark, erklærer hermed, at

Mobilex rollator "JAGUAR" med varenr. 312410 og 312411

er designet og produceret i overensstemmelse med den tekniske dokumentation og i henhold til de grundlæggende krav i:

Direktiv 93/42/EEC for medicinalprodukter

Lars Nygaard
Managing Director
Mobilex A/S

Skanderborg, the 2016-10-01


.....
signature