

ListenTalk Education

Brugervejledning

OPLADNING

Opladekuffert:

ListenTalk Ladekuffert kan oplade 16 enheder samtidig. Ladekufferten har strømning på kuffertens yderside og der medfølgende oplader, som isættes almindelig stikkontakt.

Der er ligeledes USB stik på kuffertens yderside til brug ved programmering (kun tekniker).

Ladekufferten har tillige opbevaringsplads til halsslynger, hovedtelefoner, diverse audiostik, bælteklips samt røde "leader clip" til montering på lærermikrofoner.

Ladekufferten har magnetiske ladestik for nem og fejlfri opladning.

Enhederne slukker og tænder selv i forbindelse med ladning:

Når ListenTalk Education enhederne oplades, isættes de direkte i kufferten. Enhederne skal ikke slukkes først, men slukker automatisk selv, når de sættes til opladning. Ligeledes skal de heller ikke tændes før brug. Så snart de tages op af kufferten, tænder de selv og er klar til brug.

Ladning via separat kabel:

ListenTalk Education enhederne kan naturligvis også oplades enkeltvis via standard mikro USB ladestik tilsluttet PC eller stikkontakt.

ListenTalk Education – SENDER OG MODTAGER I SAMME ENHED

Fleksibilitet er kodeordet for ListenTalk Education Kommunikationssystemet. ListenTalk Education enhederne er alle identiske, men har flere funktioner:

ListenTalk som Elevmodtager

Når ListenTalk enheden tilføres ListenTalk halsteleslyngen fungerer den som en elevmodtager. Enheden modtager lyden fra de andre ListenTalk sendere og sender lyden via halsteleslyngen til elevens høreapparat/CI. Eleven skal have telespole i høreapparater/CI for at modtage lyden.

ListenTalk enhederne kan også anvendes med hovedtelefoner. Hovedtelefonerne tilsluttes fysisk en af enhederne og lyden fra lærermikrofonen samt de øvrige tryk og tal-enheder modtages af den enhed, der er påført en hovedtelefon.

Da alle enhederne både fungerer som modtagere og sendere, kan der i princippet tilsluttes halssteleslynger eller hovedtelefoner til samtlige enheder. Dette er en fordel i klasser med flere hørehæmmede elever, eller hvor der også er elever med APD og andre koncentrationsvanskeligheder i klassen.

ListenTalk som lærermikrofon

Klik den røde medfølgende "Leader Clip" på en hvilken som helst af ListenTalk enhederne. Enheden får nu masterfunktion og fungerer som lærersender. Enhedens tryk-og tal knap skifter ligeledes funktion, når enheden får tilført den røde "Leader Clip". Knappen kan nu i stedet anvendes som "mute" knap, når læreren ikke ønsker, at mikrofonen skal videresende lyden, fx i pauser og lignende.

Lærermikrofonen kan også anvendes med knaphulsmikrofon eller boom-mikrofon.

ListenTalk som elevmikrofon

Alle ListenTalk enheder har en "tryk og tal" knap og fungerer således som elevmikrofoner. Der kan anvendes lige så mange elevmikrofoner, som der er behov for i klassen.

Elevmikrofonen viser i display med timeglas, hvis den er optaget, fordi en anden elev har trykket sig ind og taler.

PARRING AF NYE GRUPPER – HOLDDDELING OG GRUPPEARBEJDE

Ved holdddeling eller gruppearbejde kan man med fordel parre nogle af enhederne sammen i en ny gruppe, som man kan tage med til et andet lokale.

ListenTalk enhederne kan parres på 2 måder:

- 1) Den røde "Leader Clip" påsættes en af enhederne og det antal enheder (halslyngemodtager og elevmikrofoner), man ønsker at parre sammen med mastermikrofonen sættes i opladekufferten. Ved et enkelt tryk på parringsknappen i ladekufferten parres enhederne sammen.
- 2) Tryk på "parringsknappen" på lærermikrofonens front i højre side og afvent parringssymbol i display. Når symbolet blinker holdes resten af enhederne en ad gangen op mod bagsiden af lærermikrofonen i ca. 1 sekund for hver enhed. Når enheden er parret lyder et bekræftende "bib" og den næste enhed holdes op mod bagsiden af lærermikrofonen. Når alle enheder er parret med lærermikrofonen trykkes "parringsknappen" afslutningsvist igen en enkelt gang for at afslutte parringstilstanden.

Når holdarbejdet/gruppearbejdet er færdigt kan mikrofonerne ligeså nemt og hurtigt parres tilbage til klassens lærermikrofon – enten via parring i kuffert eller via parring af enhederne "bagside mod bagside".

TILSLUTNING TIL EKSTERNE MEDIER OG HØJTALER

Tilslutning til eksterne medier

Enhederne tilsluttes via medfølgende audiokabel til PC, smartboard eller lignende.

Tilslutning til Højtaler

Undervisningssystemet kan nemt tilsluttes højttalere. Man tilslutter en af ListenTalk enhederne fysisk via audiokabel til højttaleren, og den fungerer som modtager for alle de øvrige enheder, og sender den talte lyd ud gennem højttalerne.

BATTERI: ListenTalk Education bruger et genopladeligt Lithium-ion NP60 batteri. Batteriet oplades via medfølgende USB opladestik eller via opladekuffert.

BATTERISKIFT: Brugeren kan selv skifte batteri og derfor er der ikke behov for teknikerbesøg.

BATTERIKAPACITET: 18 timer

RÆKKEVIDDE: 150 m indendørs og 300 meter udendørs

TEKNOLOGI: 1,9 GHz

MIKROFONENS FREKVENSSOMRÅDE: 20 Hz -20.000 Hz