

Connect 12 Tastatur

Kommandoer

Dette dokument indeholder en oversigt over tastaturkommandoer som du kan benytte når det eksterne Connect 12 Tastatur er tilsluttet din Connect 12 enhed.

Knap	Handling
ESCAPE	Android Hjem Knap
F1	Lysstyrke Ned
F2	Lysstyrke Op
F3	Åben seneste applikationer
F4	Åben alle applikationer
F5	Åben Indstillinger (Kontekstspecifik)
F6	Start Forstørrelse
F7	Nedsæt Læsehastighed
F8	Tag billede eller Påbegynd læsning
F9	Forøg Læsehastighed
F10	Lydløs
F11	Nedsæt Lydstyrke
F12	Forøg Lydstyrke
Tænd / Sluk	Standby / Vågn op
Højre Kommando Knap (HOME)	Connect 12 Hjem
Venstre Kommando Knap (BACK)	Tilbage
Pil Op	Rul op eller Rul side op
Pil Ned	Rul ned eller Rul side ned
Pil Højre	Rul højre eller Fremad eller Næste side

Pil Venstre	Rul venstre eller Tilbage eller Førrige side
Plus	Zoom Ind eller Forøg tekststørrelse
Minus	Zoom Ud eller Nedsæt tekststørrelse
Højre Alt	
Venstre Alt	
CTRL	
Enter	Aktiver element
Tryk og hold Enter	Åben Kontekst Menu
CTRL + Q	Gå til Android
CTRL + B	Vis / Fjern Nederste bånd
CTRL + C	Indholdsfortegnelse
CTRL + S	Download eller Gem
CTRL + L	Tænd / Sluk for Lys
TAB	Ændre venstre del til Videnskabelig i Lommeregner

Instrulog A/S

Bjerringbrovej 116

DK-2610 Rødovre

E-mail: info@instrulog.dk

Web: instrulog.dk

Telefon: +45 44 97 94 77

Skype: Instrulog.dk