

BUZZ 1,2,3,5,11

HMI-NR 25178, 27054, 109630, 49822 og 109634

BRUGSVEJLEDNING

WWW.DANREHAB.DK



Læs brugsvejledningen nøje igennem, før du anvender produktet.
Vær opmærksom på alle anvisninger og følg dem.

Max belastning: 150 kg.

Brugsvejledning fodhviler model 01051


Et fodhvilerpar består af to højdeindstillelige fodhvilere (én til højre og én til venstre fod).

1. Anbring fodhvileren i beslaget (A), som er svejset på stolens forben. I hver side af beslaget er en slid, som fodhvilerens "knopper" glider ned i og derved låser fodhvileren for sidedrej. Disse slidser kan have skarpe kanter, som man kan rive sig på ved et uheld, når fodhvilerne ikke er monteret på en stol.
2. Ønskes fodhvileren svinget ud til siden, løftes fodhvileren godt 1 cm lodret - nemmest i krumningen (B): Herved glider fodhvilerens "knopper" op af slidserne, og fodhvileren kan nu drejes til siden.

3. Fodhvileren kan indstilles i længden ved at fjerne dens låsecлип (C) og derefter trække eller skubbe fodhvilerens inderrør til den ønskede længde. HUSK: Fodhvilerens låsecлип sættes på plads igen efter indstillingen.

4. Fodhvilerne kan forsynes med et lægbånd (model 01052) eller ankelpæspændinger (model 01052-A) fremstillet i skal (med velcro-lukning til at stramme eller slække) samt en udelst polstrøet fodplade (model 01055-PL) til (med velcro-tape) at fastgøre oven på de to plast fodplader. Fodhvilerne kan efter ønske leveres længere eller kortere, hvis brugeren har ekstraordinært lange eller korte ben.

Under indstillingen skal man tage hensyn til den klemrisiko, der altid er til stede.

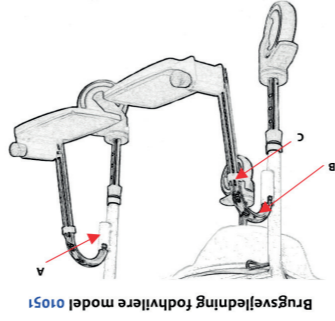

Brugsvejledning fodhviler model 01051

- VED IND- OG UDSSTIGNING: Alle hjul SKAL låses, inden brugeren sætter sig. Sørg for, at forhjulenes bremsespedaler (C) IKKE "peget" ind under stolen, og at drivhjulenes bremseser er aktiveret. (Stolen leveres med to 125 mm forhjul med bremse.)

• VED SIDELÆNS FORFLYTNING: Slå stolens armlæn (A) op for at lette forflytningen. Lås alle hjul - husk også at låse håndbremserne (B), inden brugeren sætter sig!

Armlænet kan forsynes med en lås, så det ikke slås op utilsigtet (af fx urolige brugere).



• VED TOILETBØRUG: Placer stolen over toiletkummen, og lås alle hjul. Hvis stolen af forskellige årsager ikke kan køres ind over et toilet, kan en toiletspand anvendes.

• VED BADEBØRUG: Stolen kan evt. udstyres med et sædelåg, som passer ! toiletåbningen ELLER et polstrøet oversæde, som lægges over PUR-toiletsædet. Herved kan brugeren sidde mere oprejst og behageligt under badning.

VED BRUGERS IND- OG UDSSTIGNING MÅ SÆRLIG OPMÆRKSOMHED VISES TIL Evt. TIPNINGSFARE. STÅ DERFOR ALDRIG PÅ FODHVILERNES FODPLADER!

Hvis brugeren læner sig kraftigt fremad, kan der opstå tipningsfare, hvis forhjulene ikke er låst, og hvis forhjulenes bremsespedaler ikke peget fremad.

VI GØR OPMÆRKSOM PÅ, AT MAN IKKE MÅ LÆGGE FULD KROPSVÆGT PÅ ARMLÆNERNE.

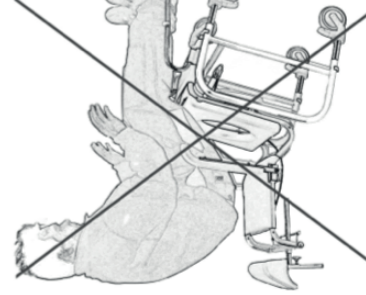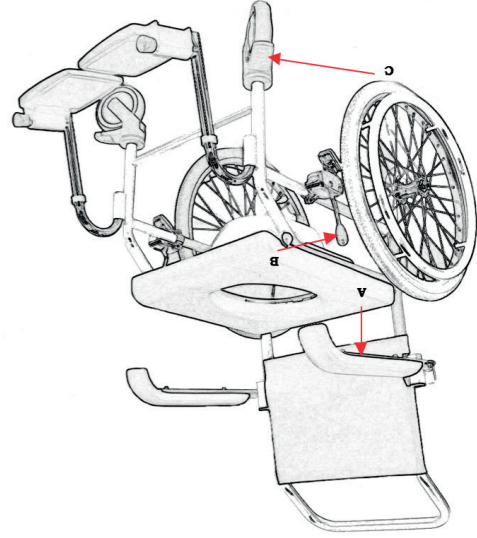

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring foretages med almindelige ikke-ætsende rengøringsmidler, hvorefter stolen spules. Den efterfølgende aftørring sker bedst med en blød klud.

Efterse jævnligt armlænen, ryglænen og bremsen. Hjulene efterses med jævne mellemrum - efterspændes eventuelt - og skal holdes fri for bl.a. hår for at beholde den optimale køreevne.

Husk, at bremseeffekten er afhængig af et korrekt dækttryk (angivet på siden af dækket).

Undersøg jævnligt for rustangreb (: i tilfælde af, at stolens rustbe-skyttelse er blevet beskadiget.