

PowerTel2700



Brugervejledning



Introduktion

Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning.
Herved får du det største udbytte af forstærkertelefonens funktioner.

Æsken indeholder

- 1 stk. Base
- 1 stk. Trådløst håndsæt med indbygget telespole
- 1 stk. Batteridæksel
- 1 stk. Strømforsyning
- 1 stk. Telefonkabel
- 1 stk. Telefonstik
- 3 stk. Genopladeligt batteri AAA, 1,2V, 750 mAh, NiMH
- 1 stk. Dansk brugervejledning

Vigtigt: Anvend kun den medfølgende strømforsyning, telefon ledning og batterier, da produktet ellers ikke med sikkerhed vil fungere.


Funktionstaster

- 1 = Lys for indgående opkald
- 2 = Lyser, mens telefonen bliver opladet
- 3 = Telefonbog
- 4 = Genopkald
- 5 = Opkaldstast
- 6 = Søg efter kontakt før opkald
- 7 = Mikrofon
- 8 = Lydløs
- 9 = Boosttast
- 10 = Afbrydertast
- 11 = Menu
- 12 = Lydstyrke – op/ned

PowerTel 2700 Trådløst håndset og base



Tilslutning af basen

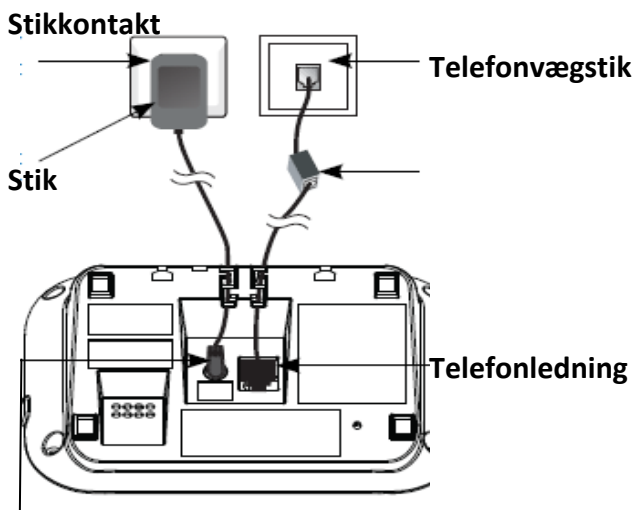

Strømforsyning

Forbind strømforsyningen til kontakten bag på basen og sæt strømforsyningen i stikkontakten. Tænd for stikkontakten.

Forbind telefonstikket til kontakten bag på basen. Sæt ikke den anden ende i telefonstikket endnu.

Isæt batterier

Sæt batterierne i håndsættet. Vend dem som vist i batterikammeret.
Sæt batteridækslet på.

Oplad håndsættet


For fuld opladning placér håndsættet i basen i mindst 16 timer.

(Kontrollér, at der er tændt for stikkontakten.)

Vigtigt: Anvend kun de medleverede batterier. Ved senere udskiftning skal tilsvarende genopladelige batterier anvendes. Brug **aldrig** Alkaline batterier.


Tilslut telefonkabel

Når håndsættet er fuldt opladet, forbind telefonledningen til telefonstikket via adpateren.

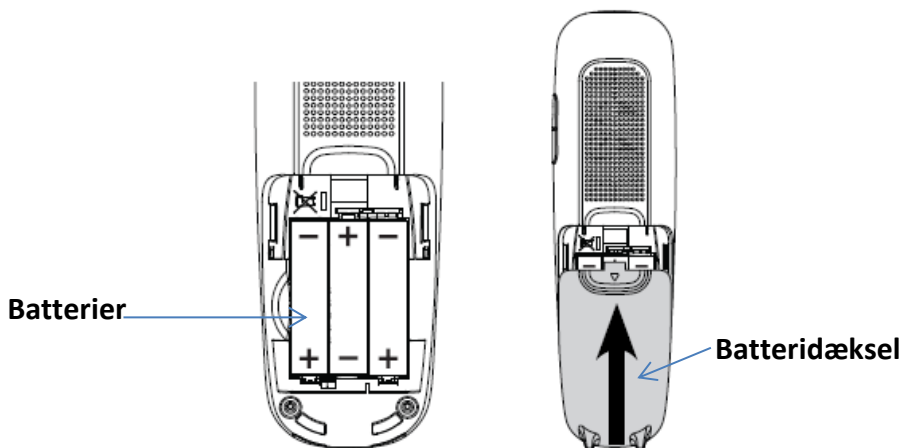

Din PowerTel 2700 er nu klar til brug.

Basen

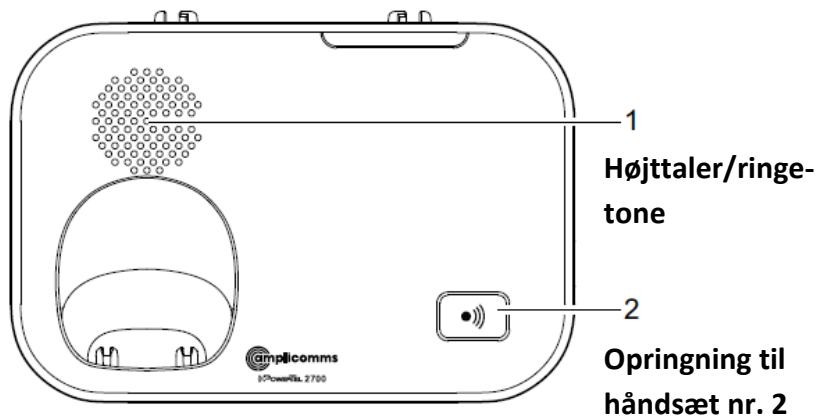

Skærmikoner



Lavt batteriniveau

Batteri fuldt opladet

2/3 batteriniveau

1/3 batteriniveau

Telefonens medhør er aktiveret


Lydløs

Ny besked på telefonsvareren

Sæt tidsformat

Vælg menu 


Vælg TIME FORMAT og tryk 

Vælg 12-HR eller 24-HR og tryk 

Sæt datoformat

Vælg menu 

Vælg DATE FORMAT og tryk 


Vælg MM/DD/YY eller DD/MM/YY og tryk 

Vælg skærmsprog

Vælg menu 

Vælg SETTINGS og tryk 

Vælg LCD LANGAUGE og tryk 

Vælg det ønskede sprog og tryk 

For at bekræfte tryk 

Ringetoner

Vælg menu 


Vælg RINGERS og tryk 

Vælg RINGER VOLUME og tryk 

Juster lydstyrken og bekræft med 

eller


Vælg RINGER TONE og tryk 

Vælg en melodi og tryk 

Sæt dato og klokken

Vælg menu 

Vælg SET DATE/TIME og tryk 

Indtast dag, måned og år og tryk 

Indtast timer og minutter og tryk 

Foretag et opkald

Tast det ønskede nummer på tastaturet.

Ring nummeret op ved at trykke på det grønne rør

Afslut opkaldet ved at trykke på det røde rør

Modtag et opkald

Når telefonen ringer trykkes på det grønne rør

Afslut opkaldet ved at trykke på det røde rør

Boost

Når denne funktion er slået til vil boost (forstærkning) altid være aktiveret.



Ikonet til boostfunktionen ser sådan ud :

Telefonbog

Telefonbogen kan indeholde op til 100 kontakter.

Håndfri funktion

Anvend håndfri funktionen, hvis du ikke ønsker at holde håndsættet, eller hvis du ønsker andre i nærheden skal overvære samtalen.

Håndfri samtale

Aktiver håndfri funktionen ved at trykke funktionstast nr. 7

Afslut håndfri funktionen ved at trykke funktionstast nr. 7

For at justere håndfri lydstyrke, brug + og – på højre side af håndsættet.

Anvendelse

Uautoriserede ændringer eller rekonstruktioner er ikke tilladt. Adskil ikke telefonen og udfør under ingen omstændigheder selv reparationer.

Placering af telefonen

Udsæt ikke telefonen for røg, støv, vibrationer, kemikalier, fugt, kraftig varme eller direkte sollys.

Strømforsyning

Telefonen kan ikke bruges ved strømafbrud. Der medfølger en strøm-
besparende strømforsyning. Brug udelukkende denne sammen med telefonen.

Bortskaffelse

Destruktion af udtjente elektriske produkter skal ske efter de gældende regler for affaldssortering i Danmark.

Du kan få de lokalt gældende regler hos din kommunes tekniske forvaltning.

Teknisk data

Rækkevidde indendørs op til 50 meter. Udendørs ca. 300 meter.

Max taletid på en fuldt opladet håndsat er ca. 10 timer.

Vedligeholdelse

PT2700 kan aftørres med en let fugtig klud. Anvend ingen former for stærke, opløsende eller slibende rengøringsmidler.

Garanti

AMPLICOMMS udstyr er produceret og testet i henhold til den seneste produktion metoder. Gennemførelsen af nøje udvalgte materialer og stærkt udviklede teknologier sikrer problemfri funktion og lang levetid.

Garantien er 2 år, gælder ikke for de genopladelige batterier eller strømforsyninger til produkterne. Skader forårsaget som følge af forkert håndtering, drift, ukorrekt anvendelse eller opbevaring, forkert tilslutning eller installation, er force majeure eller anden ydre påvirkning er ikke omfattet af betingelser for garanti. I tilfælde af reklamation, forbeholder vi os ret til at reparere eller udskifte defekte dele eller give en erstatningsenhed. Indsend dit Amplicomms udstyr sammen med købsfaktura.



Scantone A/S, Stestrupvej 86 B, 4360 Kr. Eskilstrup

Tlf. 46 19 51 00 – info@scantone.dk – www.scantone.dk