



# Brugermanual

## Indholdsfortegnelse

Pakkens indhold .....	1
Funktionsknapper .....	2-3
Opladning af batteriet .....	4-5
Tænd / Sluk .....	6
Justering af forstørrelse .....	7
Vælg farvetilstand .....	8
Fastfrysning af billede .....	11
Skrivefunktion .....	12
Tænd / Sluk for Lyd.....	13
Tænd / Sluk for LED lys.....	13
Justering af lysstyrke på skærmen .....	15
Tilslutning til TV/monitor .....	15
Strømbesparende funktion .....	167

---


<b>Deaktivere strømbesparende funktion.....</b>	<b>167</b>
<b>Indstilling af hukommelsesfunktion.....</b>	<b>17</b>
<b>Tæt / Afstand funktion .....</b>	<b>19</b>
<b>Problemløsning .....</b>	<b>20</b>
<b>Sikkerhed .....</b>	<b>21</b>
<b>Tekniske specifikationer.....</b>	<b>22-23</b>


## **Pakkens indhold**

**De vil finde følgende i Snow 7 HD pakken:**

- 1. Snow 7 HD elektronisk lup**
- 2. Stofpose / etui**
- 3. Brugermanual**
- 4. HDMI Kabel**
- 5. Strømforsyning / adapter**
- 6. Rengøringsklud**

## Funktionsknapper

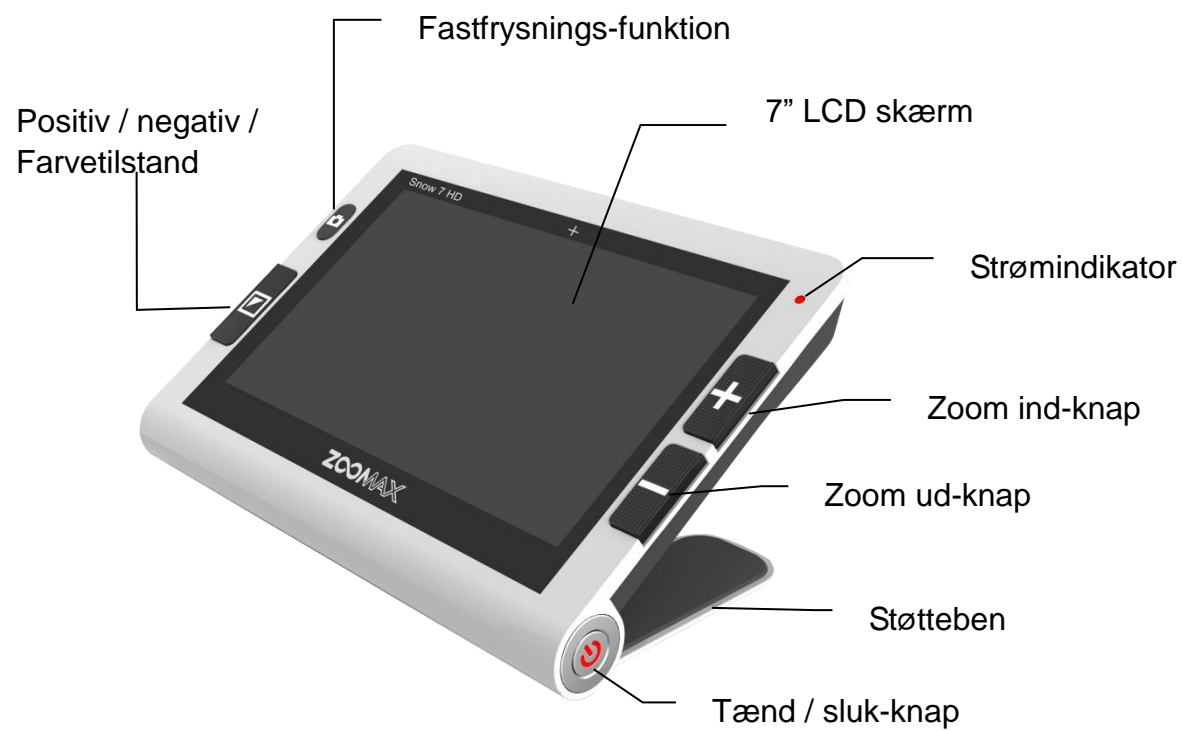

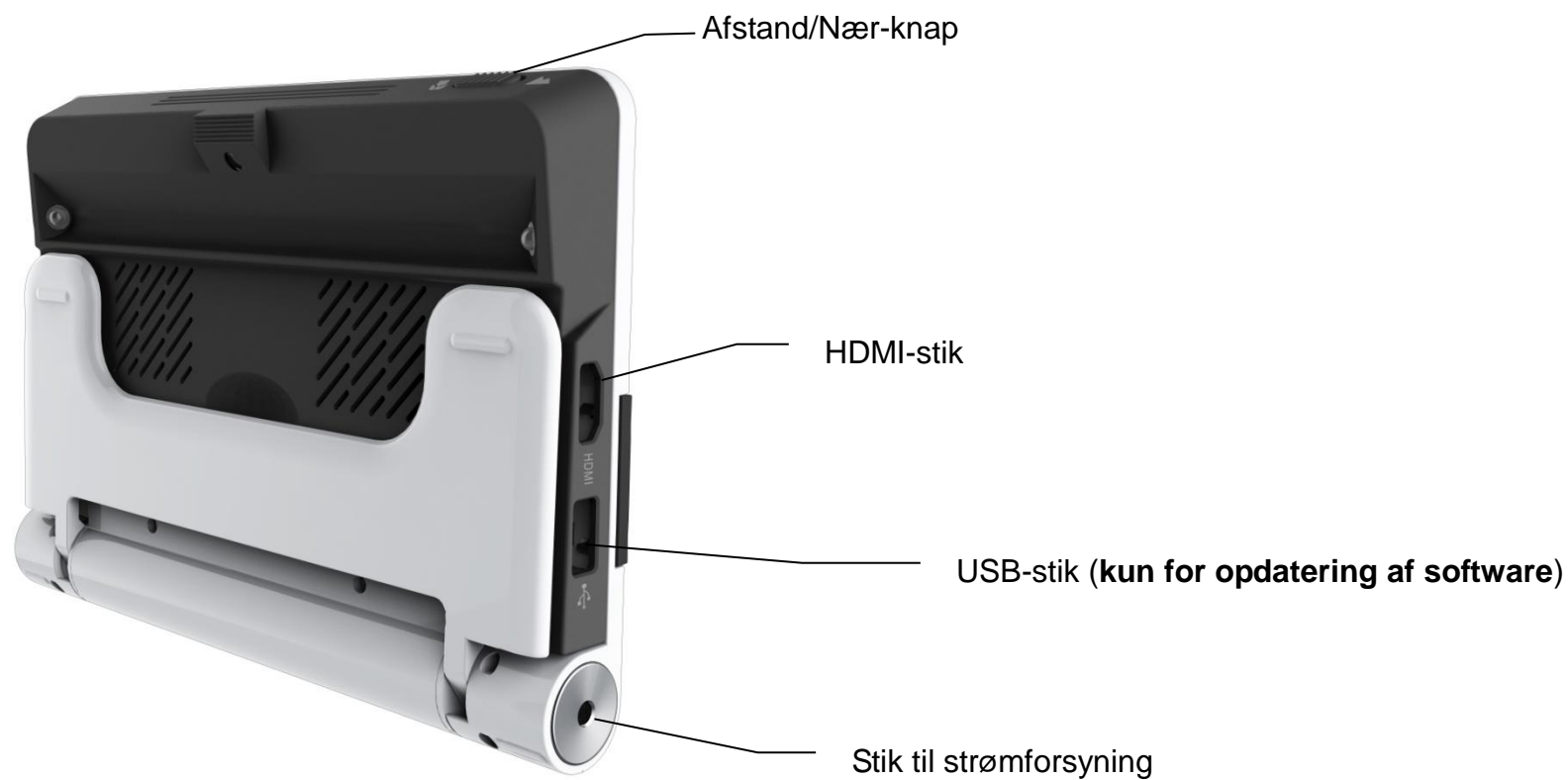

## Betjening

### Opladning af batteriet



- batteriet **SKAL** være fuldt opladet inden Snow 7 HD tages i brug første gang.
- tilslut den medfølgende strømforsyning / adapter strømforsynings-stikket, og den anden ende i en stikkontakt. **Strømindikatoren lyser RØDT med Snow 7 HD oplader.**
- Når batteriet er fuldt opladet, vil strømindikatoren slukkes.
- Hvis batteriindikatoren på skærmen blinker og er tom (ingen striber i batteri-symbolet),

betyder det, at batteriet er næsten tomt og skal oplades.

- Opladning af batteriet tager ca. 4 ~ 5 timer. Snow 7 HD kan anvendes op til 5 timer efter fuld opladning.

**Bemærk:**

1. Når batteriet er ved at være tømt, vil batterisymbolet i nederste venstre hjørne af skærmen blinke med intervaller på 5 sekunder. Hvis batteriet er næsten helt tomt, vil "Batteri Lav "Ikonet" blive ved med at blinke i midten af skærmen, indtil Snow 7 HD slukkes automatisk.
2. For at sikre og opretholde levetiden for batteriet, skal du oplade batteriet, når symbolet for tomt batteri vises på skærmen, samt sørge for at batteriet er fuldt opladet og afladet hver gang.




## Tænd / Sluk




- Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i 2 sekunder, indtil strømindikatoren bliver grøn, og du hører en biplyd. Slip herefter knappen. Efter ca. 8 sekunder kommer ZooMax logoet frem på skærmen, efterfulgt af et billede af Snow 7 HD.
- Når du skal slukke for SNOW 7 HD, skal du trykke og holde tænd/sluk-knappen nede i 2 sekunder, indtil strømindikatoren slukker.
- For at spare strøm, slukker SNOW 7 HD automatisk efter 3 minutter, hvis den ikke er i brug.

## Justering af forstørrelse

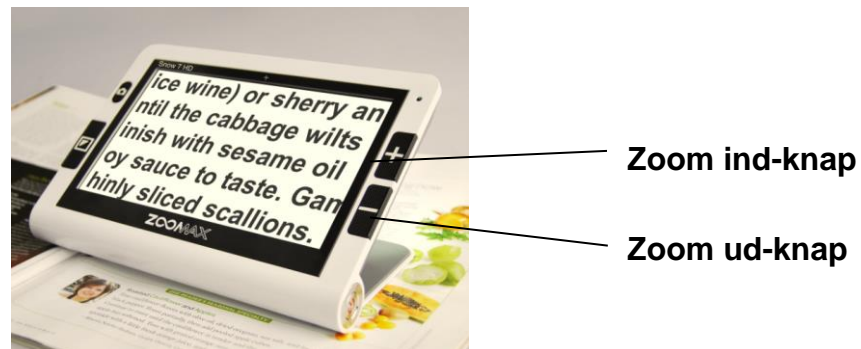

- Tryk på knappen "+" for at zoome ind, og tryk på "-"-knappen for at zoome ud.
  - Når du holder SNOW 7 HD fladt på læsestof (se figur 1), er forstørrelses forholdet 2,2 – 16 gange.
  - Hvis Snow 7 HD løftes et stykke op fra læsestoffet, mindskes forstørrelsen.
- Tilslut apparatet til TV-skærmen for at øge forstørrelsen.

## Vælg farvetilstand

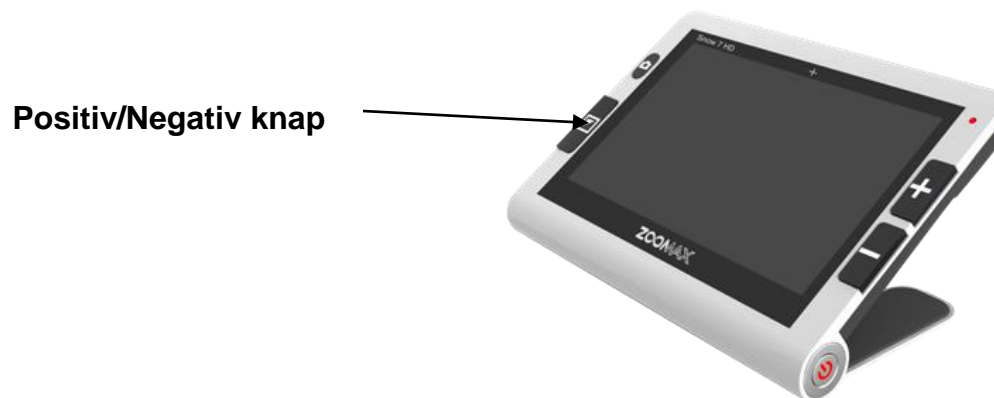

### 1. Normal tilstand

Tryk på Positiv/Negativ knappen mens den er i "normal tilstand". 12 forskellige kontrastfunktioner kan herefter vælges:

- Naturlig favegengivelse

- **Gråtone-gengivelse (som gammeldags sort/hvid tv)**
- **Negativ gengivelse (Hvid tekst på sort baggrund)**
- **Positiv (Sort tekst på hvid baggrund)**
- **Hvid tekst på blå baggrund**
- **Blå tekst på hvid baggrund**
- **gul tekst på sort baggrund**
- **Sort tekst på gul baggrund**
- **Blå tekst på gul baggrund**
- **Gul tekst på blå baggrund**
- **Grøn tekst på sort baggrund**
- **Sort tekst på grøn baggrund**

## **2. Favorit tilstand**

- **Vælg en kontrast/farvetilstand andet end naturlig farvegengivelse eller gråtone-gengivelse.**

**Hold Positiv / Negativ knappen nede i 2 sekunder, indtil du hører et bip. Du har nu valgt din Favorit tilstand. Det giver tre valgmuligheder i Favorit-tilstand: Det er fuld farve og den foretrukne kontrast farve, du vælger, samt dens omvendte farvetilstand (vælges f.eks. blå tekst på hvid baggrund, vil de tre favorittilstande være fuld farve, blå på hvid, og hvid på blå).**

- For at forlade Favorit-tilstand, skal du trykke og holde knappen Farvetilstand nede i 2 sekunder, indtil du hører et bip.**

## Fastfrysning af billede

Knap til fastfrysning-  
funktion



- Placer din Snow 7 HD over det materiale (tekst, billeder) du vil fastholde.
- Tryk på fastfrysning-knappen: Nu fastholdes materialet, som på et fotografi.
- Nu kan du løfte din Snow 7 HD tættere på dine øjne for at se billedet, zomme ind eller ud eller skifte farvetilstand på samme måde som beskrevet tidligere.
- Når du er færdig med at studere det "fastfrosne" billede, skal du trykke på fastfrysning-knappen igen.

## Skrivefunktion



- Fold støttebenet ud.
- Skriv under kameraet som vist ovenfor til højre

## Tænd / Sluk for lyd




**Tryk og hold  
Zoom ud knappen**

- **Som standard er lyd for tastetryk slået fra men Bip lyd er altid TÆNDT.**
- For at tænde for lyd til tastetryk, skal du sørge for din SNOW 7 HD er i den laveste forstørrelse. Tryk og hold "—" knappen i 7 sekunder, indtil du hører et bip.
- For at slukke for lyd til tastetryk, skal du sørge for din SNOW 7 HD i den laveste forstørrelse indstilling. Tryk og hold "—" knappen i 7 sekunder, indtil du hører to bip.

## Tænd / Sluk for LED lys



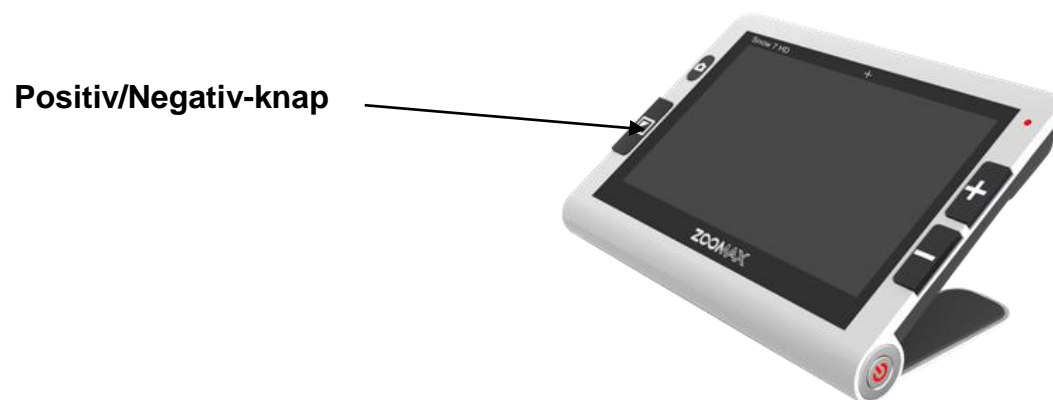

- Som standard er LED lys tændt når Snow 7 HD er i Nær mode og slukket når Snow 7 HD bruges i afstandsmode.

- Under Normal tilstand:

1. Når du bruger kontrast farverne (undtagen med fuld farve og grå farve), skal du trykke på og holde positiv/negativ-knappen nede i 5 sekunder, indtil du hører to bip for at tænde / slukke LED lyset.

2. Når du er i fuld farve eller grå farve, skal du trykke på og holde positiv/negativ-knappen

nede i 5 sekunder, indtil du hører et bip for at tænde / slukke LED lyset.

**- Under Favorit tilstand:**

Tryk på og hold positiv/negativ-knappen nede i 5 sekunder, indtil du hører to bip for at tænde / slukke LED lyset.

### **Justering af skærmens lysstyrke**

- Tryk på fastfrysning-knappen og "+" knappen samtidigt, indtil baren lysstyrke vises. Tryk derefter på "+" for at øge lysstyrken; Tryk på "—" for at reducere lysstyrken.
- Tryk på positiv/negativ-knappen for at bekræfte passende lysstyrke og afslut.

### **Tilslutning til TV/monitor**




- Sæt HDMI-kabel i din Snow 7 HD og TV. Derefter slukker Snow 7HD´skærm automatisk og skifter til HDMI Output.

### Strømbesparende funktion

- Som standard vil Snow 7 HD automatisk slukke hvis den ikke er i brug i 3 minutter.


### **Deaktivere strømbesparende funktion**

- hvis du foretrækker at deaktivere den strømbesparende funktion skal du trykke og holde knappen for positiv/negativ/farvevalg, og derefter trykke kortvarigt på fastfrysning-knappen for at komme ind i DEMO mode. Et lille ikon  vil komme til syne i den nederste venstre del af skærmen. Hvis din Snow 7 HD er i DEMO mode vil den altid forblive tændt indtil du slukker den.
- Hvis du ønsker at aktivere strømbesparende funktion skal du trykke og holde på knappen for positiv/negativ/farvevalg og derefter trykke kortvarigt på fastfrysning-knappen for at aktivere den.


### **Indstilling af hukommelsesfunktion**

- Når du slukker din Snow 7 HD, vil de seneste indstillinger gemmes automatisk (f.eks farvetilstand, forstørrelse, video output format, knap bipper, lysstyrke, foretrukne tilstand normal mode) Så du lettere kan anvende de lagrede indstillinger næste gang du tænder din Snow 7 HD.
- Kun en enkelt undtagelse skal bemærkes: indstilling af LED-lys VIL IKKE huskes hele tiden. Som standard indstilling er LED-lys altid tændt under Nærvisningsfunktion og altid Slukket under afstandsfunktionen. Hvis du foretrækker at slukke LED lys under nærvisningsfunktionen eller tænde for LED lyset under afstandsfunktionen, skal du tænde / slukke manuelt.

## Nær/Afstandsfunktion

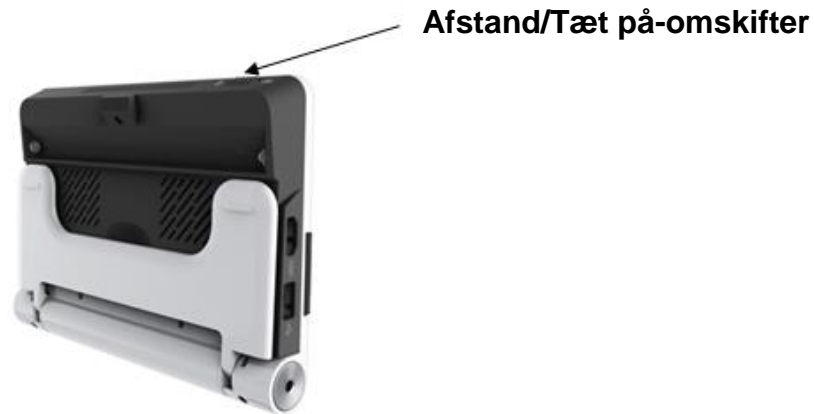

(Figur 1)

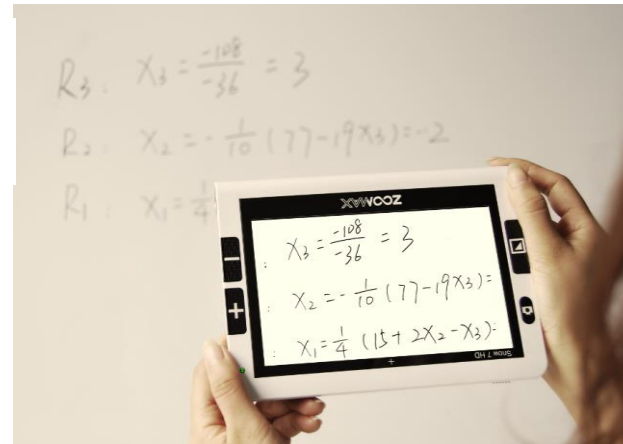

(Figur 2)

- Afstand/tæt på-omskifteren sidder i toppen af Snow 7 HD. (Se Figur 1)
  - Skub knappen til højre for at bruge Snow 7 HD i nær funktion (tæt på).
  - Skub knappen til venstre for at bruge Snow 7 HD i afstandsfunktion.
  - Vend evt. Snow 7 HD på hovedet for at bruge den mere komfortabelt når der ses på afstand.
- (Se Figur 2)

## Fejlfinding

Problem	Løsning
Sort Skærm	Sørg for at Snow 7 HD er tændt Oplad batteriet Reducer forstørrelsen
Enheden vil ikke tænde	Oplad batteriet
Billedet på skærmen er for mørkt eller forvrænget	Sørg for at Snow 7 HD ligger fladt på det ønskede materiale.
Strømforsyningen er tilsluttet, men batteriet oplades ikke.	Sørg for, at stikkontakten er tændt, og at stikket er sat helt ind i strømstikket.
Udtværing eller pletter på skærmen.	Rengør kamera og skærm med en blød klud.
Tekst er for lille til at læse.	Juster forstørrelsen til et passende niveau. Tilslut til TV med det medfølgende kabel.
Tekst er for stor til at læse	Juster forstørrelse ned til et passende niveau. Løft / flyt enheden lidt op over læsestoffet.
Enheden er tilsluttet et TV, men intet billede vises på Tv-skærmen.	Sørg for, at tv'et er tændt. Kontroller at output og tilslutning korrekt til TV.

<b>Skærmen er frosset eller forvrænget eller andre problemer som ikke er nævnt i denne vejledning.</b>	<b>Hold Positiv/negativ/farvevalgs- og tænd/sluk-knapperne inde på samme tid for at genstarte enheden.</b>
--	--

**Hvis dit problem ikke er angivet ovenfor, kontakt din leverandør.**

## **Sikkerhed**

**For at holde din video lup i en god stand, bedes du læse følgende sikkerhedsanvisninger omhyggeligt:**

- Brug ikke din video lup i direkte sollys, for at undgå risikoen for brand.**
- Hold din video lup væk fra våde områder, regn, væsker og kemikalier.**
- Brug ikke din video lup i nærheden af afskærmet medicinsk udstyr.**
- Brug altid din video lup i et miljø, hvor temperaturen er mellem 10 °C og 40 °C**
- Forsøg ikke at reparere din video lup eller åbne den, da garantien i såfald vil bortfalde. Hvis det**



er nødvendigt, skal du kontakte din leverandør for service.

- Tag altid stikket ud før rengøring. Brug kun en fugtig, blød, fnugfri klud. Brug ikke opløsningsmidler eller andre rengøringsmidler.

- Brug kun den medfølgende adapter til at oplade batteriet – Andre adaptere kan beskadige enheden.

## Tekniske specifikationer

1. Forstørrelse: 2.2X ~ 16X

2. Farvefunktioner: 12 muligheder (3 favorit indstillinger)

- |                               |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| - Alm. Farve                  | - Grå tilstand                | - Hvid tekst på sort baggrund |
| - Sort tekst på hvid baggrund | - Hvid tekst på blå baggrund  | - Blå tekst på hvid baggrund  |
| - Gul tekst på sort Baggrund  | - Sort tekst på gul baggrund  | - Blå tekst på gul Baggrund   |
| - Gul tekst på blå baggrund   | - Grøn tekst på sort baggrund | - Sort tekst på grøn baggrund |

3. **Skærm: 7" TFT**
4. **kamera: Auto fokus: 5M pixels**
5. **kontinuerlig forstørrelse: Vælg den passende forstørrelse**
6. **Afstand: 6.5cm ~ 500cm**
7. **Funktioner: Freeze billede, skift positiv/negativ, Farver, Zoom in/ud**
8. **Indstillinger gemmes når Snow 7 HD slukkes**
9. **Energisparefunktion: Snow 7 HD slukker automatisk efter 3 minutter, hvis den ikke er i brug.**
10. **Tilslutning til TV/Monitor**
11. **Strømforsyning: Input: 110—240V, Output: 5V/2.5A, Power: 2.5A**
12. **Kontinuerlig brug: maksimalt 5 timer**
13. **Opladningstid: 4~5 timer (Brug kun ZooMax Batteri)**
14. **Vægt: < 500g**
15. **Dimension: 195mm x 139.5mm x 25mm**