


CareSlope®

Sikkerhedsinstruktion



CARESLOPE® RAMPER

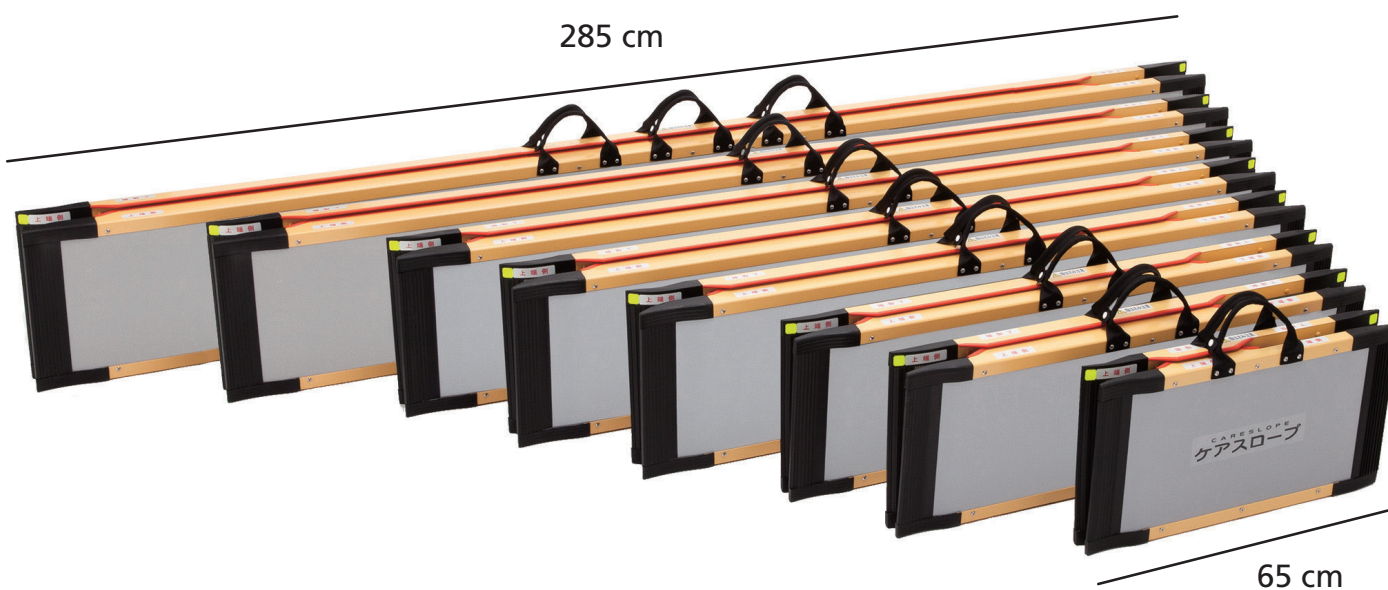


Vejledende tabel over CareSlope rampers trindhøjder:

Total længde	Vare nr.	Stigningsvinkel: 8°	Stigningsvinkel: 10°	Stigningsvinkel: 15°
		Trindhøjde i cm	Trindhøjde i cm	Trindhøjde i cm
		Lidt hjælp	Moderat hjælp	Meget hjælp
65 cm	CS-65	9 cm	11 cm	15 cm
100 cm	CS-100	13 cm	17 cm	24 cm
120 cm	CS-120	16 cm	20 cm	30 cm
150 cm	CS-150	20 cm	25 cm	37 cm
175 cm	CS-175	24 cm	30 cm	43 cm
200 cm	CS-200	27 cm	34 cm	50 cm
240 cm	CS-240 C	33 cm	41 cm	60 cm
285 cm	CS-285 C	39 cm	49 cm	73 cm

Brug venligst en længde på rampen, der er 4 gange den samlede trindhøjde.


INSTRUKTION

1

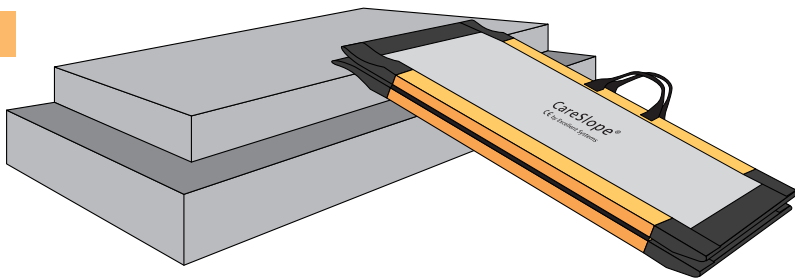


Placér rampen på trinnet.

2

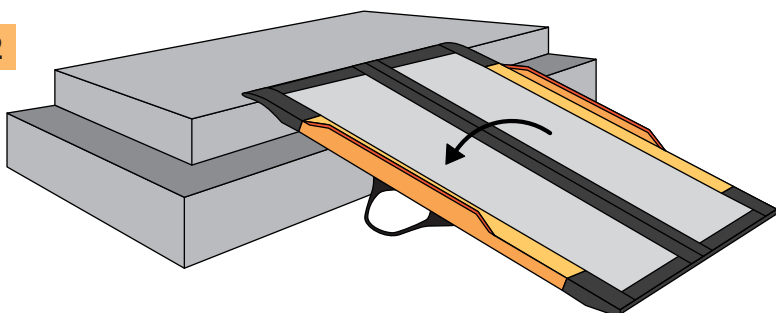


Fold rampen ud.


3

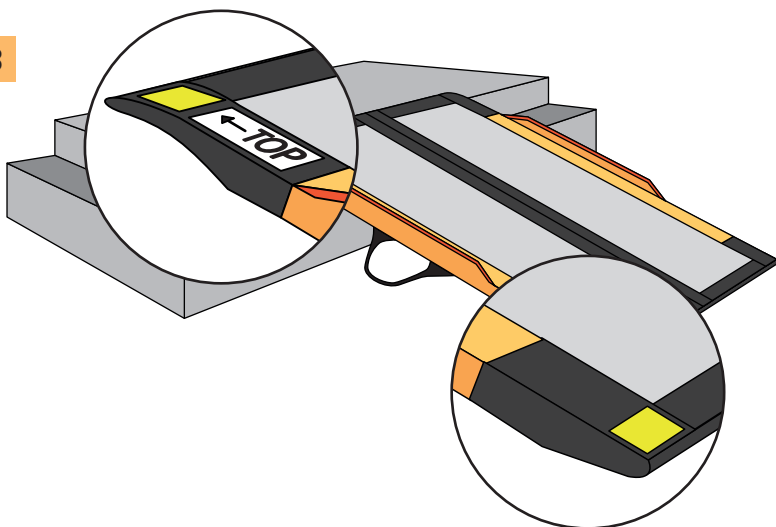

Tjek på rampens form og markeingen "Top", at rampen vender rigtigt.

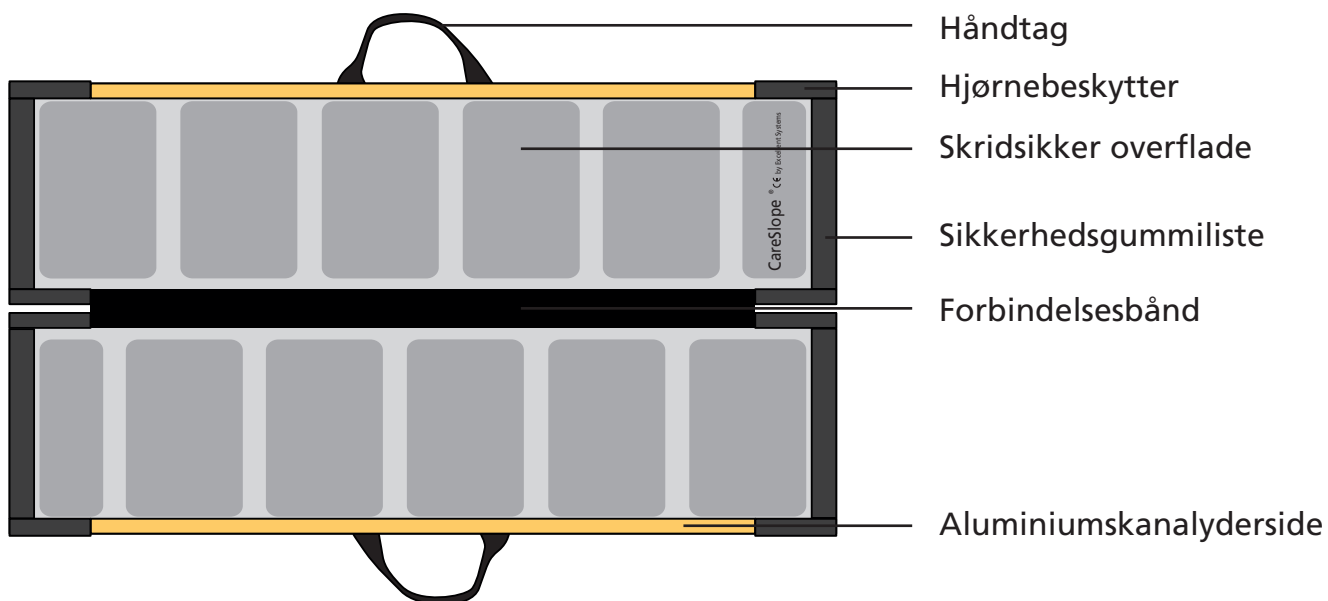

CARESLOPE® MELLEMLREPOS

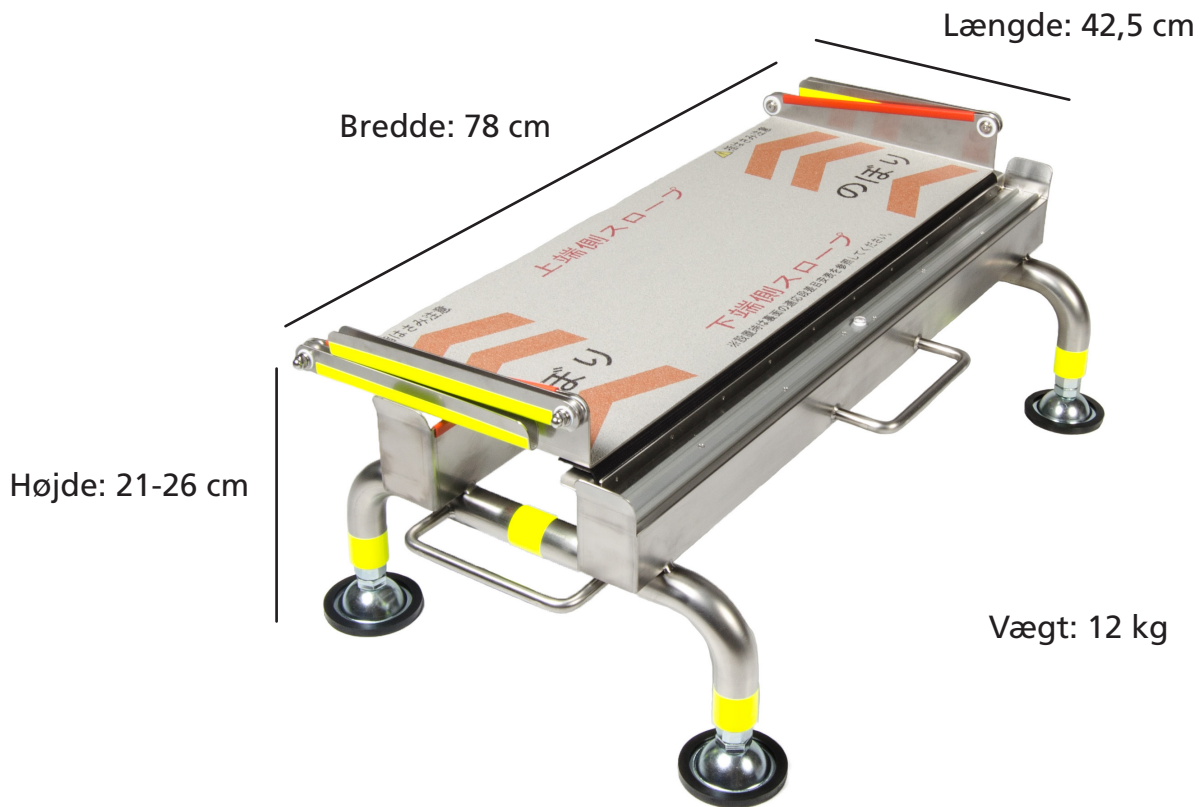



Vejledende tabel over CareSlope rampers trindhøjder og mellemrepos højder:

Overdel tilpasset trindhøjde Underdel tilpasset trindhøjde		CS-150	CS-175	CS-200	CS-240 C	CS-285 C
		38 cm (8°) ~ 53 cm (12°)	41 cm (8°) ~ 58 cm (12°)	44 cm (8°) ~ 63 cm (12°)	50 cm (8°) ~ 71 cm (12°)	56 cm (8°) ~ 81 cm (12°)
CS-150	21 cm (8°) ~ 26 cm (10°)	CSM-300	CSM-325	CSM-350	CSM-390	CSM-435
CS-175	21 cm (7°) ~ 26 cm (9°)	CSM-325	CSM-350W	CSM-375	CSM-415	CSM-460
CS-200	21 cm (6°) ~ 26 cm (8°)	CSM-350	CSM-375	CSM-400	CSM-440	CSM-485
CS-240 C	21 cm (5°) ~ 26 cm (6°)	CSM-390	CSM-415	CSM-440	CSM-480	CSM-525
CS-285 C	21 cm (4°) ~ 26 cm (5°)	CSM-435	CSM-460	CSM-485	CSM-525	CSM-570



CS-150 til CS-285 C kan kombineres valgfrit.
Benyt altid **KUN** CareSlope ramper sammen med mellemreposit.

INSTRUKTION



1

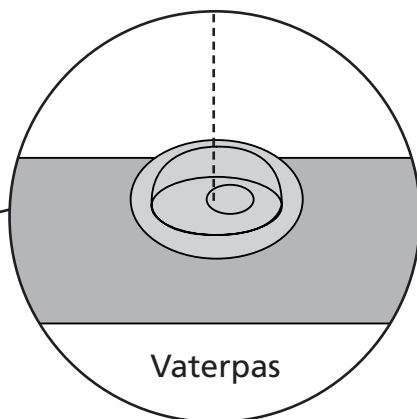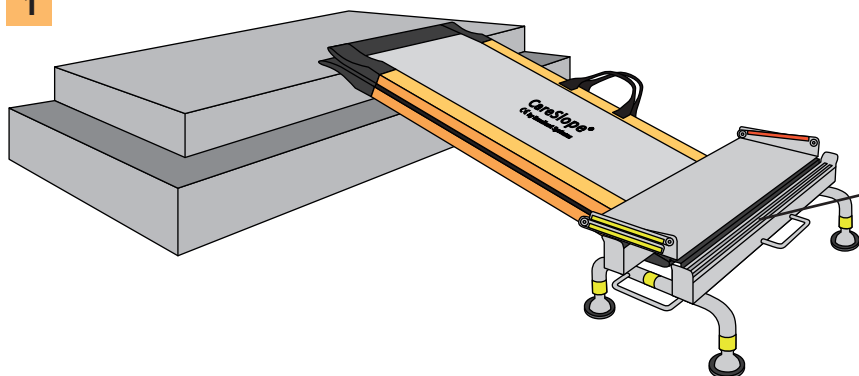


2

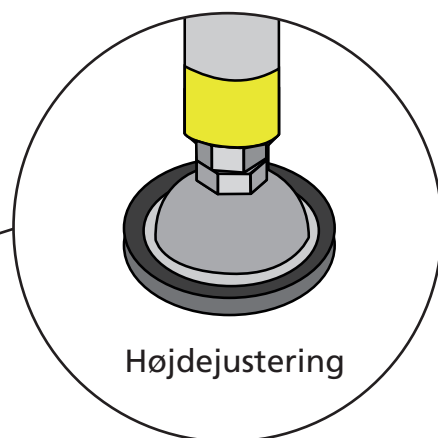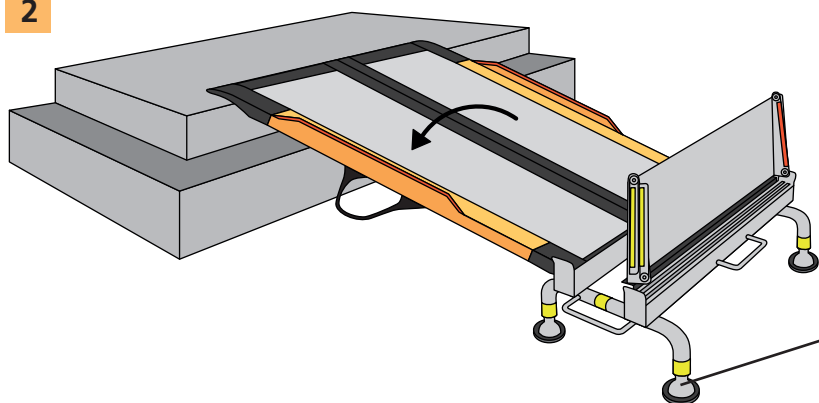

3

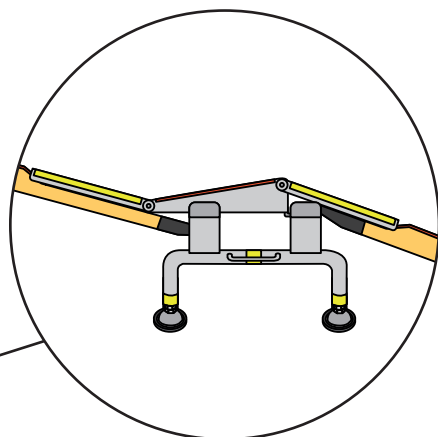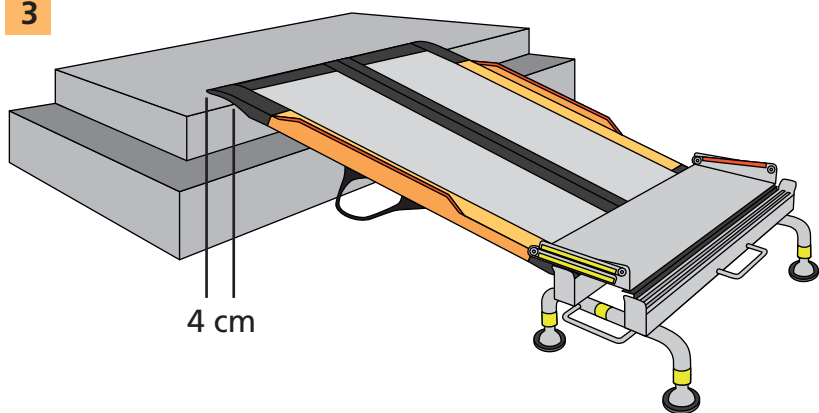

4

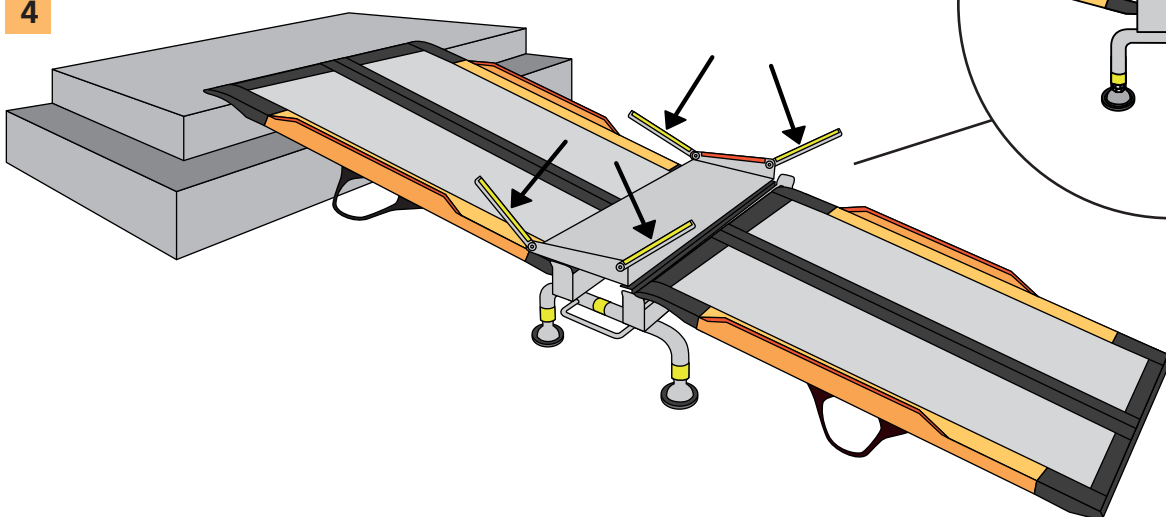

CARESLOPE® OG MELLEMLREPOS SIKKERHEDSINSTRUKTION

Belastning: Max 300 kg.

Vi anbefaler **KUN** brug af manuelle kørestole med hjælper, på ramperne.
Brug **IKKE** CareSlope til andet formål end flytning af personer.

Materialer: Ramper: glasfiber og aluminium. CS-240 C og CS-285 C er forstærket med kulfiber.
Mellemrepos: rustifrit stål, aluminium.
Både ramper og mellemrepos har skridhæmmende overflade.

Synlighed: Der er reflekstape på alle hjørner for optimal synlighed.
Undgå dog at anvende CareSlope mørke steder.

Tilpasning: Brug ikke CareSlope ved højere trin end anbefalet. Se side 2.
Mellemrepos kan tilpasses max 80 cm trindhøjde.

Vær opmærksom på altid at følge de lokale sikkerhedsreglementer.

Installation: CareSlope produkter kan bruges både inde og ude.
CareSlope ramper og mellem-repos placeres altid på jævnt underlag uden sand, sne, is eller lignende glat eller usikkert underlag.

Kontrollér produktet jævnligt, så fejl eller slid opdages.
Kontroller at rampen vender rigtigt. "Top" skal vende opad.
Kontrollér at overdelen af ramperne ligger min. 4 cm ind over kontaktfladen på trinnet og at rampen på mellemrepos eller underlag ligger fast.

Anvendelse: Af hensyn til sikkerheden kontrolleres alle dele før brug.
Brug håndtagene til at bære rampen.


Hjælperens sko skal have skridsikre sål. Undgå spidse sko eller genstande på rampe og mellemrepos, da overfladen nemt kan beskadiges.

Kør forhjulene lige ind på rampen, og kontroller om rampen er monteret stabilt. Kontroller også højre og venstre sider. Der må ikke køres skævt ind på rampen, da kørestolens hjul kan aspores, eller medføre, at kørestolen vælter. Kørestolen skal køres baglæns ned med en hjælper forrest. Hjælperen skal placeres på et lavere sted end kørestolen, da hjælperen således kan holde kørestolen bedre.

Pas på ikke at klemme fingrene når rampen foldes ud og ind.



- Opbevaring:** Opbevar rampen indendørs. Rampen må ikke placeres udendørs over længere tid, da rampen kan blive snavset af sand eller blive for varm i sollys (må ikke opbevares steder med over 70°C da kvaliteten af gummilister eller bløde materialer kan blive forringet).
- Må ikke opbevares steder med hårdt klima, eller ved høj luftfugtighed, da kvaliteten af håndtagene eller forbindelsesbåndene kan forringes eller mugne.
- Efterlad ikke rampen oprejst efter brug.
- Rengøring:** For let rengøring: Skyl med vand og brug en blød børste. For grundig rengøring: Anvend almindelige neutrale vaskemidler. Der må ikke anvendes stærke syrer, alkaliske vaskemidler, Ozon sterilisering eller dampvask. Metaldele kan ruste og de bløde dele kan forringes.
- Garanti:** Hvis produktet går i stykker som følge af korrekt brug (ifølge brugsanvisningen og advarselsmærkater), kan vi reparere under garantien under omkostninger. Garantien gælder 2 år efter købsdato. Kontakt forhandleren, hvor du har købt produktet, ang. garantireparation. Medbring garantibeviset.
(Laver vi et garantibevis, ligesom de gør i Japan?)
- Flere dele kan man nemt udskifte selv. Kontakt os for mere information.
- Bortskaffelse:** Rampen bortskaffes som industriaffald eller stort affald. Tag eventuelt kontakt til kommunen for yderligere information.
(Skal vi have dette med?)

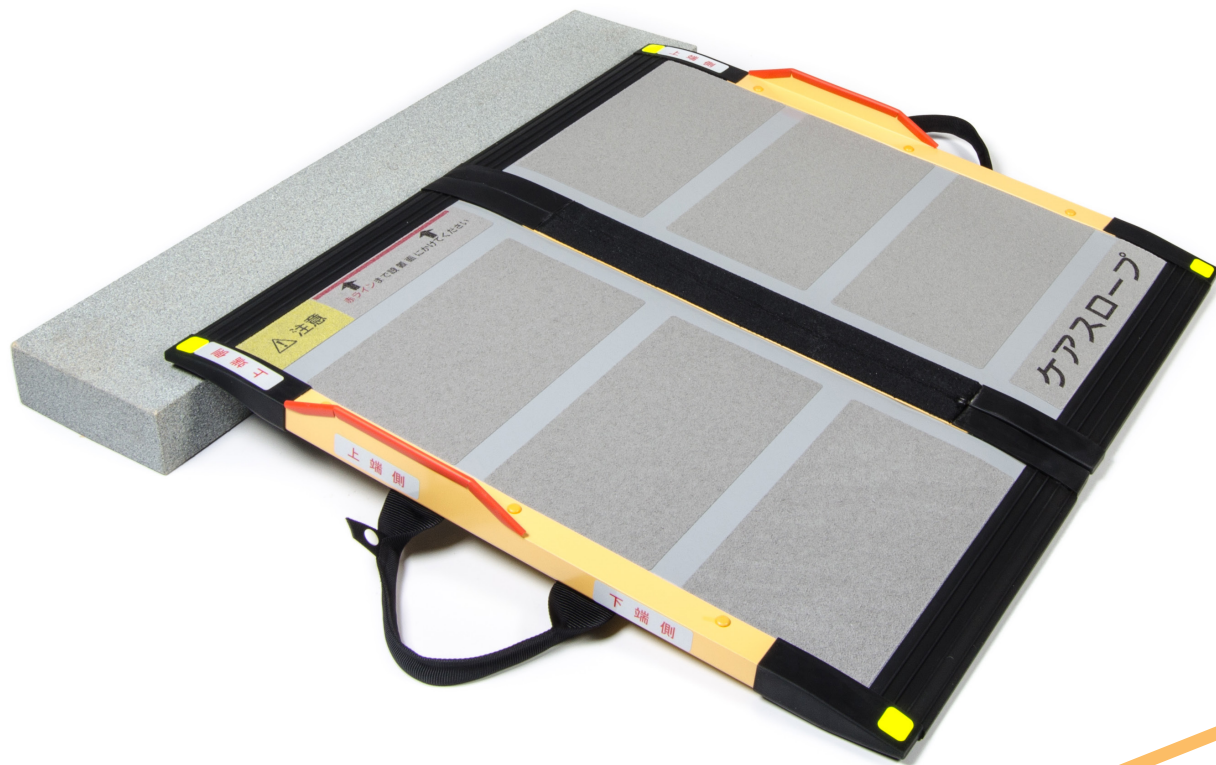

www.ex-as.com



info@ex-as.com



Møllevvej 2 - 8544 Mørke - DK



+45 86377133

Produkter designet, patenteret og produceret i Japan af Care-Medic
Distribueret af Excellent Systems A/S