

Brugsanvisning af Demenstasken

Tasken åbnes med lynlåsen som kører hele vejen rundt i kanten af tasken. Når tasken er åben kan man se forskellige lommer i plastic og i stof. Deri kan lægges billeder og remedier.

Helt øverst inde i tasken sidder der et bånd tværs over, hvorpå der til højre er tre karabinhager og til venstre er tre ruskindshanke. Begge dele kan bruges til at sætte noget fast i. Nedenunder båndet er der påsyet fire lommer i henholdsvis plastic og stof, hvor der kan lægges billeder og remedier i. Der er mulighed for at sætte en ekstra lomme fast med knapper. Nederst til højre sidder der en pung fast med velcro som kan tages af og på. Denne pung kan også åbnes og lukkes.

På den lukkede taske sidder der en lynlås på hver side, der bruges til opbevaring af ekstra billeder og remedier. Der er derudover en lille plastic lomme til evt navnekort eller billede af personen der ejer/bruger tasken.

Tilbehør til demenstasken

Ruskindsnor med træterninger: Dette remedie kan bruges til at føle på og skubbe terningerne frem og tilbage på snoren. Snoren sættes fast på tasken med karabinhagen øverst i snoren.

Trækugle m/knopper: Denne kugle ligger løs i tasken og bruges i hænderne til at mærke knoppernes form og ujævnhed. Den kan trilles med på tasken og give let håndmassage ved at gnubbe den mellem hænderne.

Duftpose: Stofpose med forskellige dufte. Posens forside er lavet af en net der giver mulighed for ikke kun at dufte, men også se indholdet. Posens indhold er en blanding af naturlige ingredienser. Der kan duftes kanelstænger, appelsinskaller, stjerne anis og nelliker som alle skærper sanserne.

Dame pung: Lille pung lavet i sribet stof, lukkes med en knap. Pungen sidder fast på tasken med velcro. Taksen kan åbnes og lukkes for at gemme remedier og småting.

Ekstra lomme: En større lomme lavet af blå stof med knaphuller i hver side, så den kan sættes fast på tasken med knapper øverst i venstre hjørne. Lommen er lavet så der forest også er en plastic lomme til at beskytte billedernes overflade.

Ekstra stofstykke: Gråt stof stykke som kan lægges ovenpå den indvendige side af tasken for at afskærme indtryk og minimere sansestimuli i tasken. Stofstykket kan knappes på øvest på tasken og dække helt ned til bunden af tasken.