

Brugervejledning

2019-09-09

CuroCell S.A.M.[®] Switch

Statisk antidecubitus-madras

Brugervejledningens varenummer: 95-001355



Indholdsfortegnelse

Vigtige sikkerhedsforskrifter	3
Indledning	4
Produktbeskrivelse	5
Installation og opstart	6
Rengøring og klargøring	9
Opbevaring	10
Vedligeholdelse	11
Fejlfinding	11
Teknisk beskrivelse	12
Reservedele	14
Ekstraudstyr og tilbehør	15
Garanti	16
Øvrige oplysninger	17
Egne noter	18

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER

Læs alle instruktioner før brug.

ADVARSEL! Minimer risikoen for brand, elektrisk stød eller personskade:

1. Dette produkt må kun anvendes til det tiltænkte formål som beskrevet i denne vejledning. Produktet må ikke kombineres, samles eller repareres med andre dele (f.eks. pumpe og madras), tilbehør eller reservedele end det, der er beskrevet i denne vejledning eller i anden dokumentation fra Care of Sweden eller din leverandør.
2. Anvend ikke pumpen i vådrum eller på steder, hvor der er risiko for, at pumpen kommer i kontakt med vand eller anden væske. Brug aldrig en pumpe, der har været i kontakt med vand/væske. Træk stikket ud af kontakten med det samme, og send produktet til service hos en autoriseret servicetekniker.
3. **PRODUKTET MÅ IKKE ANVENDES** i nærheden af eller i forbindelse med brandkilder/varme overflader som f.eks. ild, brændende cigaretter eller varme lamper. Selvom produktet er brandtestet, kan det beskadiges, hvis det kommer i kontakt med brandkilder.
4. Produktet skal placeres og anvendes på en måde, så det ikke kan blive klemt eller beskadiget. **BEMÆRK!** Vær særlig opmærksom på risikoen for, at produktet kan komme i klemme ved brug af sengeheste.
5. Brug aldrig produktet, hvis elledningen eller stikket til pumpen er defekt, hvis pumpehuset er beskadiget, eller hvis det ikke virker korrekt. Kontakt en servicetekniker for at få produktet undersøgt og repareret.
6. Kontrollér regelmæssigt produktets funktion med hænderne (se punkt 3.4). Kontrollér også, at komfortindstillingen er korrekt angivet på tabellen på pumpen.
7. Hvis produktet anvendes til personer, der kræver særligt opsyn, f.eks. børn, skal det overvåges kontinuerligt.
8. Madrassen er beskyttet af et hygiejnebetræk. Undgå at bruge flere hygiejnebetræk samtidigt til denne madras. Dette er for at undgå risikoen for, at fugtgennemtrængeligheden ødelægges.
9. Hygiejnebetrækket er væskebestandigt og lufttæt, men er gennemtrængeligt for fugt. Sørg for, at patienten placeres korrekt, så risiko for kvælning undgås.
10. Undgå skarpe genstande, der kan beskadige hygiejnebetrækket.
11. Hvis betrækket har håndtag på langsiderne, må disse håndtag kun benyttes til at løfte og flytte selve madrassen. Al anden brug er på eget ansvar og dækkes ikke af produktgarantien.

1. Indledning

CuroCell S.A.M.® Switch er en statisk luftmadras, som kan anvendes i alle slags plejemiljøer. Den er meget funktionel og omkostningseffektiv.



Læs altid brugervejledningen før brug.

1.1 Generelle oplysninger

Denne CuroCell®-madras er medicinsk udstyr i henhold til direktiv nr. 93/42/EEC om medicinsk udstyr. I henhold til myndighedernes bestemmelser vedrørende medicinsk udstyr er det producentens pligt at indberette ulykker og hændelser, som involverer deres produkter. Vi beder derfor om, at alle oplysninger om eventuelle ulykker og hændelser, som vedrører vores produkter, omgående indberettes til Care of Sweden. Dette system er blevet testet og godkendt i overensstemmelse med følgende standarder: EN 60601-1, SS 876 00 04, SS-EN ISO 12182, SS-EN ISO 14971, SS-EN ISO 10993, EN 597-1, EN 597-2, EN 14126.

1.2 Tilsigtet anvendelse

CuroCell S.A.M.® Switch kan anvendes i alle slags medicinske miljøer og er beregnet til at understøtte forebyggelse og behandling af tryksår. Den anbefalede maksimale brugervægt er 200 kg. Madrassen kan anvendes til brugere med mellem til høj risiko for at udvikle tryksår.

Madrassen fås som en topmadras (CuroCell S.A.M.® Switch + CuroCell S.A.M.® Switch CF10), som skal placeres oven på en eksisterende madras, eller som en erstatningsmadras (CuroCell S.A.M.® Switch CF16)

Det anbefales, at brugeren får skiftet stilling regelmæssigt. Tidsintervallet skal vurderes af det ansvarlige personale alt efter brugeres status, diagnose og almene tilstand.

Madrassen skal altid rengøres mellem hver ny patient.

BEMÆRK!

- Hvis madrassen bruges sammen med positioneringspuder, skal brugervejledningen til puderne læses omhyggeligt igennem for at sikre, at patienten positioneres korrekt.
- Hvis dette produkt bruges sammen med et evakueringslag, er det personalets ansvar at kontrollere, at det kan bruges til evakuering.
- Vær forsigtig ved brug af sengeheste eller anden beskyttelse på sengen, så madrassen ikke kommer i klemme eller beskadiges.
- Madrassen må ikke løftes, når en person ligger på den, og den må ikke anvendes til andre former for transport end en eventuel evakuering ved brug af et evakueringslag.
- Denne madras er uegnet til røntgenundersøgelser på grund af risikoen for utydelige billeder eller artefakter, som kan føre til diagnosticeringsfejl.

1.3 Andre oplysninger

Plan for behandling af tryksår

For at opnå det bedste mulige resultat med dette produkt anbefales det at benytte et velplanlagt og velstruktureret arbejdsmiljø. I vores retningslinjer med overskriften "Plan for behandling af tryksår" er der eksempler på, hvordan vores produkter bruges.

Madrasguide

I denne praktiske guide får plejeren hjælp til at vælge den korrekte madras fra Care of Swedens sortiment. CuroCell S.A.M.® Switch er en madras i funktionsgruppe B. Disse oplysninger er tilgængelige på vores website www.careofsweden.com. Du kan også bestille et eksemplar fra vores kundeserviceafdeling ved at sende dine kontaktoplysninger til info@careofsweden.se.

2. Produktbeskrivelse

2.1 Pumpe

1. Betjeningspanel



To slangetilslutninger


Bagside

1. Ophængningsbøjler

2. Afbryderkontakt (i siden)

Til tænding/slukning af pumpen.
Et grønt lys viser, at pumpen kører.

3. Elledning

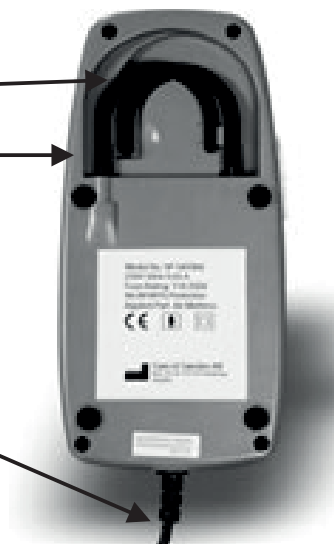

2.2 Betjeningspanel

Komfortindstillinger


Komfortindstillingen regulerer lufttrykket i madrassen. Når drejeknappen drejes med uret, øges lufttilførslen til og trykket i madrassen. Når drejeknappen drejes mod uret, reduceres lufttilførslen til og trykket i madrassen.



Det rette lufttryk indstilles til mellem 1 og 8. Tabellen på pumpen giver vejledning herom.

2.3 Madras

1. Celler/luftblære
2. Slanger
3. Slangeholder
4. Tilslutninger med afspærringsventiler
5. Luft-/tilslutningslanger

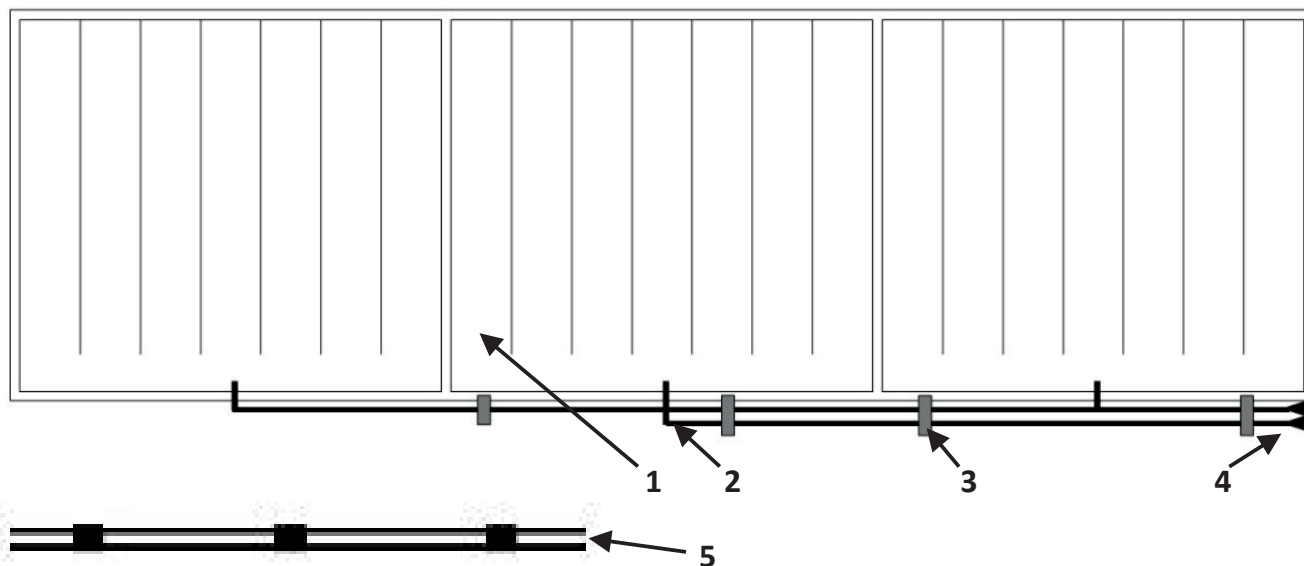

2.4 Andre dele

Hygiejnebetræk

Indvendigt betræk Soft (tilbehør til CuroCell S.A.M.® Switch)

Transport- og opbevaringstaske (tilbehør)

Pumpetaske (tilbehør)

Integreret skumkerne (kun CuroCell S.A.M.® Switch CF16)

3. Installation og opstart

3.1 Installation

Ved udpakning af madrassen skal det kontrolleres, at ingen af delene er beskadigede. Hvis der opdages skader, skal du kontakte din leverandør inden du bruger produktet.

1. Placer madrassen oven på den eksisterende madras. Om muligt skal den fastgøres ved at trække elastikbåndene i bunden ned over hjørnerne på den underliggende madras.

Bemærk! Hvis madrassen har en integreret skumkerne (CuroCell S.A.M.® Switch CF16), skal madrassen placeres direkte på sengebunden. Brug remmene på betrækket til at fastgøre madrassen til sengebunden.

2. Slut tilslutningsslangerne til madrassen. Disse skal tilsluttes i madrassens fodende og kan findes ved at åbne hygiejnebetækket. Når de er tilsluttet, skal lynlåsen lukkes.

3. Hæng pumpen i sengens fodende, eller anbring den på en plan og robust overflade. Placer elledningen således, at der ikke er risiko for at snuble over den, eller at den bliver kørt over af sengens hjul eller kommer i klemme, når sengen hæves eller sænkes.



BEMÆRK!

Der fås også en pumpetaske som tilbehør.

4. Sæt luftslangerne fra madrassen fast i siden af pumpen.

5. Sørg for, at effekten er indstillet til "0" (fra). Sæt elledningen ind i en godkendt stikkontakt (220 V).



BEMÆRK! Red sengen med lagener for at gøre det mere behageligt for brugeren.

3.2 Opstart og indstillinger



BEMÆRK! Læs altid brugervejledningen før brug.



1. Start pumpen ved at trykke på "1" (til) på siden af pumpen. Det grønne lys lyser.
2. Pumpen begynder at fylde madrassen med luft.
3. Dette tager ca. 15-20 minutter.
4. Det hensigtsmæssige lufttryk indstilles med komfortknappen (1-8). I tabellen på pumpen er der retningslinjer baseret på brugerens vægt. Trykket skal indstilles, mens patienten ligger på sengen.
5. Kontrollér det indstillede tryk med hånden, og juster det om nødvendigt.
6. Når trykket er indstillet i henhold til præferencerne, er der to valgmuligheder:
 - a) Frakobl luft-/tilslutningsslangerne fra madrassen, og sluk for pumpen. Madrassen er udstyret med afspærringsventiler, som forhindrer luften i at sive ud af madrassen, så det indstillede tryk bevares.
 - b) Lad pumpen være tilsluttet, og lad den køre.

BEMÆRK!

- Madrassen og pumpen skal kontrolleres regelmæssigt. Kontrollér madrassen med hånden (se punkt 3.4). Tilslut om nødvendigt pumpen igen, og juster trykket med pumpen.
- Hvis pumpen ikke hele tiden er tilsluttet til madrassen, anbefales det, at pumpen tilsluttes en gang om ugen, og at trin 5 og 6 i punkt 3.2 gentages.

3.3 Komfortindstillinger

Lufttrykket i madrassen kan indstilles i henhold til patientens ønske om komfort. Konsulter altid den ansvarlige sundhedsperson eller andet autoriseret personale for at få oplyst den korrekte indstilling.

kg		
0-20	1	2
30-50	2	3
60-70	3	4
80-90	4	5
100-120	5	6
130-150	6	7
160-180	7	8
190-200	8	8

BEMÆRK!

- Når sengens hovedende er løftet, skal trykket øges med ét trin (1).
- I forbindelse med amputerede brugere, hvor kun en del af madrassen er belastet, skal trykket øges (med 1-2 trin).
- Den anbefalede maksimale brugervægt er 200 kg.

3.4 Håndkontrol

En kontrol med hånden foretages for at sikre, at lufttrykket i madrassen er korrekt. Kontrollen skal udføres regelmæssigt, dvs. én gang pr. vagt, efter ændring af patientens stilling i sengen eller ved ændring af komfortindstillingerne.

Åbn betrækket. Placer en flad hånd under luftcellerne direkte under brugeres bækken, og kontrollér, at brugeren ikke ligger direkte på den underliggende madras. Der skal være et mellemrum på ca. 1-2 fingre.



Hvis du kan mærke, at brugerens krop hviler på din hånd, skal du øge komfortindstillingerne til næste højere trin. Vent 10 minutter, og foretag en ny kontrol med hånden.

3.5 Udlukning af luften (CPR)

I forbindelse med CPR (hjertestopbehandling) lukkes luften ud af madrassen ved at slutte luftslangerne til madrassen, uden at de er sluttet til pumpen. Samme fremgangsmåde anvendes efter brug.



3.6 Lavt tryk

Hvis der er et unormalt lavt lufttryk, henvises til punkt 7 om fejlfinding.

ADVARSEL!

Hvis lufttrykket forbliver lavt, skal du lede efter skader på madrassen og slangerne. Reparer den/dem om nødvendigt, eller kontakt leverandøren.

4. Rengøring og klargøring

Det er vigtigt at følge nedenstående anvisninger, før produktet anvendes igen af en ny bruger. Spørg den hygiejneansvarlige, eller bed leverandøren om hjælp og anvisninger, hvis du er i tvivl.

4.1 Rengøring

PUMPE

ADVARSEL!

Pumpehuset må ikke åbnes, da der er risiko for elektrisk stød. Service og vedligeholdelse skal udføres af autoriserede teknikere. Pumpen må ikke blive våd og må ikke nedsænkes i væske.




Tør pumpen af med en fugtig klud og en mild rengøringsopløsning til formålet, f.eks. alkohol med eller uden tensider, isopropanol 70 %, en oxiderende opløsning eller maks. 1 % klorin. Ved brug af et andet rengøringsmiddel skal du vælge et, der ikke påvirker pumpehusets plast.

MADRASBETRÆK



Betrækket kan tørres af med en mild rengøringsopløsning til formålet, f.eks. alkohol med eller uden tensider, isopropanol 70 %, en oxiderende opløsning eller maks. 1 % klorin. Afførings- og blodpletter skal straks fjernes med koldt vand. Følg de lokale retningslinjer og brugsanvisningen til rengøringsmidlet nøje.

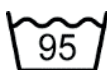


Betræk med flere lag skal adskilles før vask. Skal vaskes med lignende farver.



Klor- og fenolbaserede rengøringsmidler kan have en negativ indvirkning på PU-overfladen og bør undgås. Hvis der anvendes klor, anbefales en blanding med maks. 1 %.

INDVENDIGT BETRÆK SOFT (tilbehør)

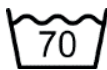

Rengør det snavsede område med en mild rengøringsopløsning til formålet, f.eks. alkohol med eller uden tensider, isopropanol 70 %, en oxiderende opløsning eller maks. 1 % klor.

4.2 Klargøring

PUMPE

Se anvisningerne i punkt 4.1.

MADRAS

1. Frakobl slangerne, og luk luften ud. Åbn også CPR-ventilen.
2. Fjern betrækket. Se anvisningerne i punkt 4.1 vedrørende rengøring af betræk. Hvis produktet er udstyret med en skumkerne, skal denne fjernes og rengøres separat.
3. Flyt madrassen til et rent område, som er velegnet til rengøring.
4. Tør luftcellerne, alle slangerne og CPR-ventilen af med en mild rengøringsopløsning til formålet, f.eks. alkohol med eller uden tensider, isopropanol 70 %, en oxiderende opløsning eller maks. 1 % klor.
5. Tør alle overfladerne af, og desinficer dem med et alkoholbaseret rengøringsmiddel til formålet.
6. Saml madrassen igen. Hvis nogle celler af en eller anden årsag har løsnet sig fra slangerne, skal disse sættes på igen som vist på tegningen i punkt 2.3.

SKUMKERNE (CuroCell S.A.M.® Switch CF16)



Rengør det berørte område med en mild rengøringsopløsning til formålet, f.eks. alkohol med eller uden tensider, isopropanol 70 %, en oxiderende opløsning eller maks. 1 % klor.

Pres forsigtigt vandet ud. Lad skumkernen tørre et varmt, ventileret sted, hvor den ikke udsættes for direkte sollys. Skumkernen skal være fuldstændig tør, inden den bruges igen.

BEMÆRK!

Kontrollér hygiejnebetrækket, hver gang produktet rengøres. Hvis det er beskadiget, skal det udskiftes eller repareres. Kontrollér også pumpen, slangekoblingerne og elledningen under rengøringen. Beskadigede dele skal udskiftes eller repareres.

5. Opbevaring og nedpakning

Det anbefales at opbevare madrassen og pumpen i produkttasken (tilbehør). Det nedpakkede produkt skal håndteres forsigtigt. Der må ikke placeres tunge genstande oven på produktet.

6. Vedligeholdelse

1. Kontrollér, at elledningen og stikket er fri for skader og ridser.
2. Kontrollér madrasmembrækket for at sikre, at det er ubeskadiget, og at membrækket og luftcellerne er korrekt monteret.
3. Kontrollér, at der kommer luft ud af udtagene i siden af pumpen.
4. Kontrollér, at der ikke er beskadigede eller klemte slanger og koblinger.

Kontakt din leverandør hvis du skal bruge reservedele.

7. Fejlfinding

Problem	Løsning
Pumpen starter ikke	Kontrollér, at elledningen er sat i en godkendt stikkontakt. Kontrollér, at alle sikringerne er intakte.
Brugeren ligger direkte på sengen	Trykket kan være forkert indstillet. Justér det i henhold til væggtabellen, og vent et par minutter. Kontrollér igen trykket med hånden. Se punkt 3.4. BEMÆRK! Støttepumpen skal først være tilsluttet.
Madrassen bevæger sig rundt	Kontrollér, at madrassen er fastgjort med elastikbåndene til den underliggende madras. Hvis madrassen har en integreret skumkerne (CuroCell S.A.M.® Switch CF16), skal den fastgøres med remmene på membrækket for at fastgøre madrassen til sengebunden.
Pumpen støjer eller vibrerer	Kontrollér, hvordan pumpen hænger på sengen. Fjern pumpen, og hør, om dette gør en forskel. Problemet kan løses ved at placere pumpen på en flad, robust flade eller ved at placere et håndklæde mellem pumpen og sengen. Pumpetasken (tilbehør) kan også anvendes.

Hvis dine spørgsmål ikke besvares med ovenstående oplysninger, bedes du kontakte din leverandør for at få yderligere hjælp.

8. Teknisk beskrivelse

8.1 Tekniske specifikationer

PUMPE		SPECIFIKATIONER
Model		CuroCell S.A.M.®
Spænding		220 V-240 V, 50 Hz
Strømforbrug		0,05 A
Sikringstype		T1AL, 250 V
Mål (L x B x H)		25 x 12,5 x 8,5 cm
Vægt		1,4 kg
Omgivelser	Temperatur	Drift: 10° C - 40° C
		Opbevaring: -15° C - 50° C
		Transport: -15° C - 70° C
	Luftfugtighed	Drift: 10 % - 90 % ikke-kondenserende
		Opbevaring: 10 % - 90 % ikke-kondenserende
	Atmosfærisk tryk	700 hPa - 1013,25 hPa
Klassificering		Klasse II, type BF, IP21
MADRAS		SPECIFIKATIONER
Model		CuroCell S.A.M.® Switch / CuroCell S.A.M.® Switch CF10 / CuroCell S.A.M.® Switch CF16
Mål (B x L x H)		80/85/90/105/120 x 200/210 x 10/16 cm
Vægt		2,7 kg

BEMÆRK! Producenten kan når som helst ændre specifikationerne for produktet.

ADVARSEL!

Følg anvisningerne vedrørende drift og vedligeholdelse nøje for at undgå personskade og skader på produktet eller andet udstyr.

8.2 Mærkning

Madrasen er mærket med produktnavn, produktionsdato, varenummer, størrelse, pleje- og vaskeanvisninger, EAN-stregkode og har plads til påsætning af egen mærkat. På produktet er også angivet, hvilken side der er op/ned samt hoved-/fodende.

8.3 Symbolforklaring



Varenummer



Producent

XXXX-XX-XX

År-måned-dag



Fodplacering



Læs brugervejledningen



Funktionsgruppe



CE-mærket iht. direktiv nr. 93/42/EEC om medicinsk udstyr



Genvinding



Må ikke bortskaffes som husholdningsaffald. Følg instruktionerne om genvinding.



Anbefalet brugervægt



Patientinformation – kategori



Direkte på sengebunden



Placeres oven på eksisterende madras



Modvirkning af forskydningskraft




Hælfunktion



Må ikke vaskes



Maskinvaskes ved 70° C

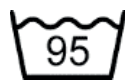

Maskinvaskes ved 95° C



<1% Klorin



Tørretumbling



Må ikke tørretumbles



Dryptørring



Må ikke stryges



Tåler ikke kemisk rensning



Aftørring



Udstyr i klasse II (dobbeltisoleret)



Type BF



IP-klasse (kapslingsklasse)



Temperaturområde



Personer bør kun ligge på madrassen i længderetningen

9. Reservedele

Betræk, Curocell S.A.M.® Switch og CuroCell S.A.M.® Switch CF10

Betræk Steel, blå

Varenummer	Størrelse
294-080200	80x200 cm
294-080210	80x210 cm
294-085200	85x200 cm
294-085210	85x210 cm
294-090200	90x200 cm
294-090210	90x210 cm
294-105200	105x200 cm
294-105210	105x210 cm
294-120200	120x200 cm
294-120210	120x210 cm

CuroCell S.A.M.® Switch CF16

Overdel Olivia, gråt

Varenummer	Størrelse
431-080200	80x200 cm
431-080210	80x210 cm
431-085200	85x200 cm
431-085210	85x210 cm
431-090200	90x200 cm
431-090210	90x210 cm
431-105200	105x200 cm
431-105210	105x210 cm
431-120200	120x200 cm
431-120210	120x210 cm

Underdel CuroCell

Varenummer	Størrelse
CC-905610	80x200 cm
CC-905611	80x210 cm
CC-905612	85x200 cm
CC-905613	85x210 cm
CC-905614	90x200 cm
CC-905615	90x210 cm
CC-905616	105x200 cm
CC-905617	105x210 cm
CC-905618	120x200 cm
CC-905620	120x210 cm

Luftceller inkl. slangesæt, afspærringsventil med lynkobling

Varenummer	Størrelse
CC-250510	80x200x10 cm
CC-250511	80x210x10 cm
CC-250513	85x200x10 cm
CC-250514	85x210x10 cm
CC-250516	90x200x10 cm
CC-250517	90x210x10 cm
CC-250518	105x200x10 cm
CC-250519	120x200x10 cm

Varenummer Beskrivelse

CC-250101-E3	CuroCell S.A.M.®, pumpe uden lynkobling
CC-908034	Slangesæt inkl. lynkobling

Er der behov for andre reservedele, bedes du kontakte din leverandør for at få yderligere hjælp.

10. Ekstraudstyr og tilbehør

10.1 Ekstraudstyr

Indvendigt betræk Soft

Giver yderligere komfort og kan også anvendes til meget følsomme brugere. Dette er inkluderet ved køb af CuroCell S.A.M.® Switch CF10 og CuroCell S.A.M.® Switch CF16. Placer luftcellerne inde i betrækket med den bløde skumside opad.

Robust transporttaske

Transport- og opbevaringstaske.

Betræk

Med svejsede sømme.

10.2 Tilbehør

Betræk, Curocell S.A.M.® Switch og CuroCell S.A.M.® Switch CF10

Indvendigt betræk Soft

Varenummer	Størrelse
------------	-----------

CC-928040	80 x 200 cm
CC-928041	80 x 210 cm
CC-928043	85 x 200 cm
CC-928044	85 x 210 cm
CC-928046	90 x 200 cm
CC-928047	90 x 210 cm
CC-928048	105 x 200 cm
CC-928050	105 x 210 cm
CC-928049	120 x 200 cm
CC-928051	120 x 210 cm

CuroCell S.A.M.® Switch CF16

Indvendigt betræk Soft med skumlomme

Varenummer	Størrelse
------------	-----------

CC-928060	80 x 200 cm
CC-928061	80 x 210 cm
CC-928063	85 x 200 cm
CC-928064	85 x 210 cm
CC-928066	90 x 200 cm
CC-928067	90 x 210 cm
CC-928068	105 x 200 cm
CC-928070	105 x 210 cm
CC-928069	120 x 200 cm
CC-928071	120 x 210 cm

Varenummer	Beskrivelse
------------	-------------

CC-9091	Transport- og opbevaringstaske til CuroCell S.A.M.® Switch
CC-9093	Transport- og opbevaringstaske til CuroCell S.A.M.® Switch CF10
58-900909	Transport- og opbevaringstaske til CuroCell S.A.M.® Switch CF16
CC-9098	Pumpetaske, sort

10.3 Andet tilbehør

For at opnå den bedst mulige komfort anbefales det at bruge tilbehør fra din leverandør, eftersom vores produkter er designet til at fungere godt sammen. Kontakt din leverandør, hvis du har brug for flere oplysninger om vores produkter.

11. Garanti

11.1 Omfang

Dette CuroCell®-system er dækket af en 2-årig garanti mod produktionsfejl. Garantien gælder ikke almindeligt slid eller skader, der er opstået som følge af uagtsomhed eller forkert håndtering/pleje.

11.2 Service og reparationer

Service og vedligeholdelse CuroCell®-madrasserne er medicinske produkter iht. EU-direktivet 93/42/EEC om medicinsk udstyr, der skal anvendes forebyggende og som et hjælpemiddel ved behandling af tryksår. Derfor anbefales det, at produktet regelmæssigt sendes til eftersyn og kontrol, så dets funktion og ydeevne opretholdes. Som med alt teknisk udstyr fungerer en vedligeholdt pumpe bedre og holder i længere tid.

I produktets forventede levetid vil visse sliddele i pumpen skulle efterses af en autoriseret servicetekniker for at opretholde god funktion og ydeevne. Omfang og interval afhænger af, hvor meget produktet bruges.

Service og vedligeholdelse skal altid udføres af din leverandør eller af en af virksomheden godkendt tekniker. Brug kun reservedele, der er godkendt af din leverandør. Ved brug af ikke-godkendte reservedele bortfalder garantien.

Der skal indsendes et reklamationskrav til din leverandør, inden produktet returneres.

Kontakt din leverandør, hvis du har spørgsmål vedrørende garanti og service.

11.3 Forventet levetid

Produktets forventede levetid vurderes at være 5 år.

12. Andre oplysninger

12.1 Demontering og genvinding

Med undtagelse af visse dele i pumpen er energigenvinding mulig for næsten alt materiale i CuroCell®-produkter gennem forbrænding i affaldsforbrændingsanlæg.

Pumpe:

En brugt CuroCell®-pumpe må ikke skilles ad. Den skal i stedet indleveres på en genbrugsstation og sorteres som elektronisk affald.

Madras:

En brugt CuroCell®-madras skal indleveres på en genbrugsstation og sorteres som brandbart affald.

Kontakt Care of Sweden eller nærmeste forhandler for at få flere oplysninger.

12.2 Returneringer og reklamationer

Reklamationer skal sendes til leverandøren. Returnering af et produkt skal ske i henhold til leverandørens anvisninger og kan først finde sted, når reklamationen er indberettet. Skader, der opstår under transport, skal indberettes til transportfirmaet.



Fremstillet af



E-mail: export@careofsweden.se
Internet: www.careofsweden.com

Adresse:

Care of Sweden AB
P.O. Box 146
SE-514 23 Tranemo
SVERIGE

Besøgsadresse:

Fabriksgatan 5A
SE-514 33 Tranemo
SVERIGE

Leveringsadresse:

Byns väg 4A
SE-514 33 Tranemo
SVERIGE

Forhandles af



E-mail: info@wolturnus.dk
Internet: www.wolturnus.dk
Telefon: +45 96717170

Adresse:

Wolturnus A/S
Skalhuse 31
9240 Nibe
DANMARK