


Molift Raiser Pro

molift[®]
by Etac

DK - Brugsvejledning

BM43099 Rev. F 2023-09-07

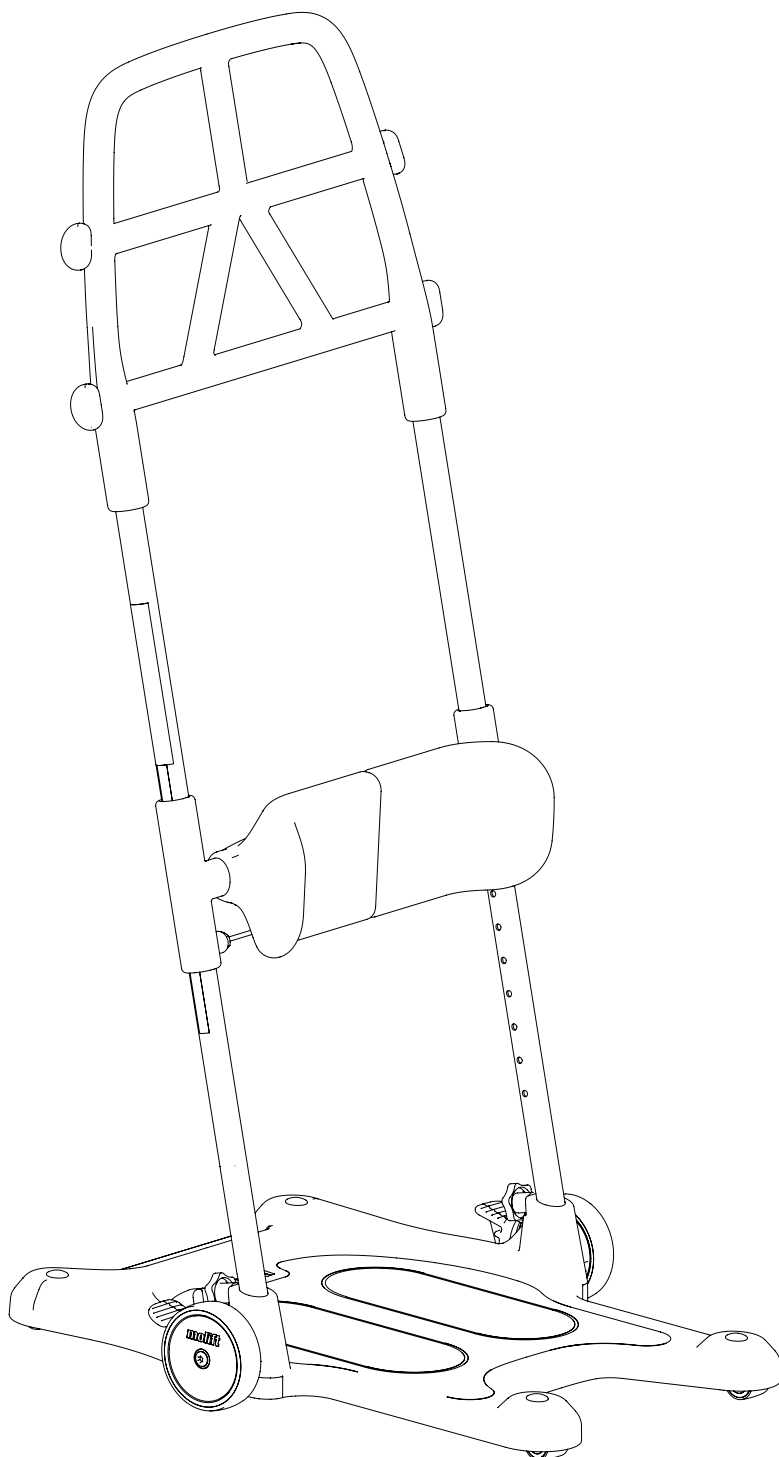

Generelt

CE-erklæring

Produktet og det relaterede tilbehør, der er beskrevet i denne brugervejledning, er i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/745 af 5. april 2017 - som medicinsk udstyr, risikoklasse I.

Produktet er fremstillet og testet i henhold til EN 12182:2012 og udvalgte dele af EN/ISO 10535:2006.

Alle alvorlige hændelser, der opstår i forbindelse med udstyret, skal indberettes til producenten og den kompetente myndighed i brugerens og/eller patientens medlemsstat.



Betingelser for anvendelse:

Der er altid en vis risiko ved forflytning af en person. Det er kun uddannet personale, som bør anvende det udstyr, der er beskrevet i denne brugervejledning.

Garanti

To års garanti på fabrikations- og materialefejl på vores produkter.

Se www.etac.com for vilkår og betingelser. Besøg www.etac.com for at downloade den nyeste version af vores dokumentation.

Vigtigt

Læs brugervejledningen inden brug!

Det er vigtigt, at du fuldt ud forstår indholdet i brugervejledningen, før du forsøger at bruge udstyret. Denne brugervejledning indeholder vigtige sikkerhedsinstruktioner og oplysninger vedrørende anvendelse af Molift Raiser Pro. For instruktioner/oplysninger om tilbehør henvises der til den særskilte brugervejledning. I denne vejledning er brugeren den person, der bliver forflyttet. Hjælperen er den person, der betjener Molift Raiser Pro.

Modifikationer og anvendelse af komponenter fra andre producenter:

Vi anbefaler, at der udelukkende anvendes komponenter og reservedele fra Etac. Overensstemmelseserklæringen vil ikke længere være gyldig, og Etacs garantiforpligtelse bortfalder, hvis der foretages nogen form for modifikationer på produktet. Etac er ikke ansvarlig for fejl eller uheld, som måtte opstå ved brug af komponenter fra andre producenter.

Risikovurdering

Det er vigtigt, at Molift Raiser Pro er blevet afprøvet på den enkelte bruger og til den tilsigtede forflytningssituation. Vurder risiciene, og tag notater. Vurder brugerens evne til at benytte produktet, og brug om nødvendigt passende tilbehør til Molift Raiser Pro. Som plejegyver er du ansvarlig for brugerens sikkerhed.



Reparationer må kun udføres af teknisk personale.

Molift Raiser Pro er et hjælpemiddel til anvendelse ved indendørs forflytning fra siddende til stående stilling. Den skal anvendes på plane overflader og til korte forflytninger fra én siddende stilling til en anden. Forflytning mellem kørestol og seng/toilet eller stol. Den kan også benyttes til at rykke en bruger længere tilbage i kørestolen. Brugeren skal være aktiv, være i stand til at gribe fat og trække sig op via egen kropsvægt. Raiser Pro er udformet med henblik på nem manøvrering og kan fint bruges i snævre områder.

Mærkater og symboler

Produktmærkat:

Mærkatet viser varenummer og serienummer (stregkoder). EAN-koden indeholder:

(01) (EAN-nr.): xxxxxxxxxxxxxx

(11) (Batch): ÅÅMMDD


(21) (Serienummer): xxxxx




Symboler:



Kort brugervejledning:

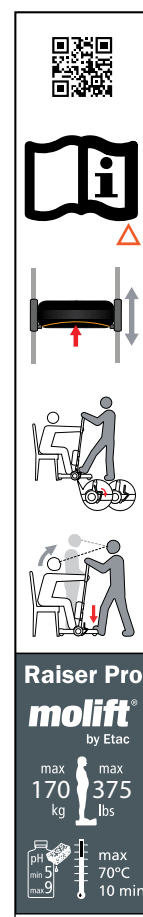

Molift Raiser Pro

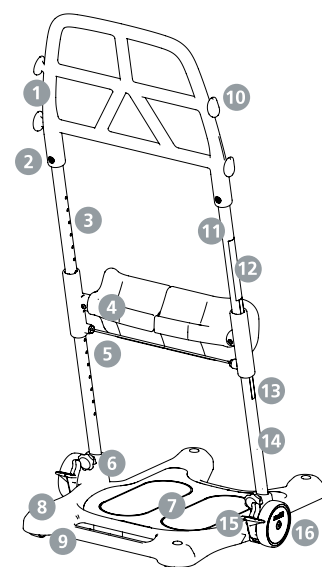

1. Håndtag
2. Skrue
3. Venstre rør
4. Benstøtte
5. Udløserkabel
6. Greb
7. Fodplade
8. Bundplade
9. Styrehjul Ø35
10. Fastgørelse af tilbehør (to højder)
11. Højre rør
12. Kort brugervejledning
13. Højdemærkat
14. Produktmærkat
15. Bremsepedal
16. Hjul Ø100

Tekniske data

Sikker arbejdsbelastning (SWL):

170 kg (375 lb)

Enhedens vægt:

10 kg

Mål:


Højde (A): 1,2 m
 Højde (B): 0,3-0,51 m
 Dybde (C): 0,63 m
 Bredder (D): 0,54 m
 Bredder (E): 0,37 m
 Trindhøjde (F): 0,035 m
 Frigang (G): 0,057 m

Materiale:


Pulverlakeret aluminium, plast, stål.

Forventet levetid:


Molift Raiser Pro har en forventet levetid på fem år eller 15.000 forflytningscykluser.

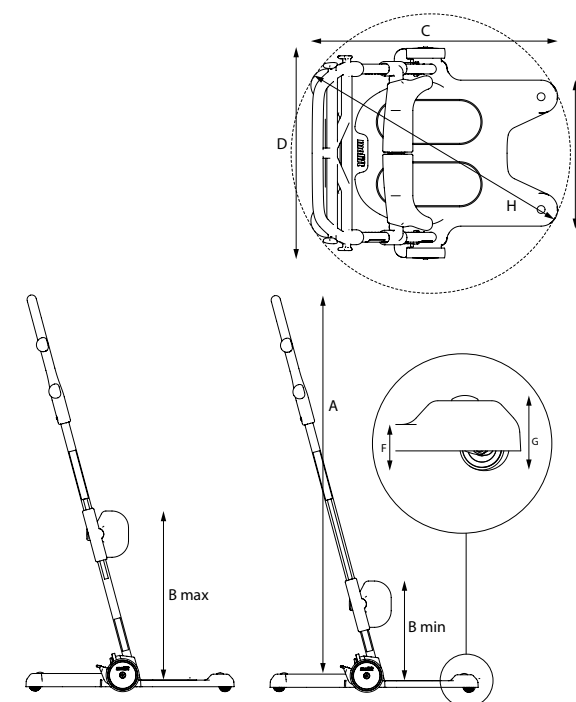


Leverede dele

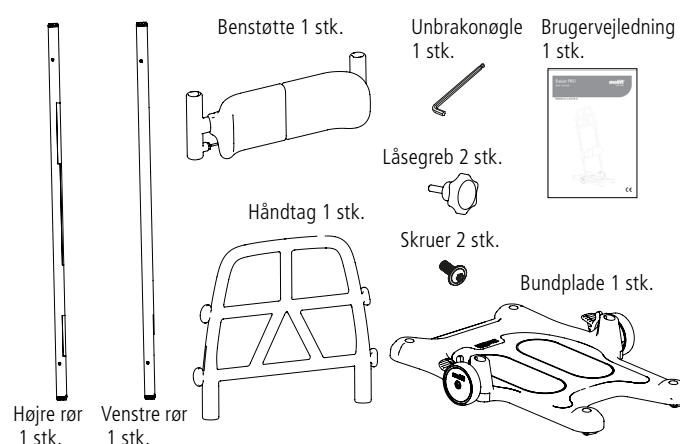

Montering af rør på bundplade

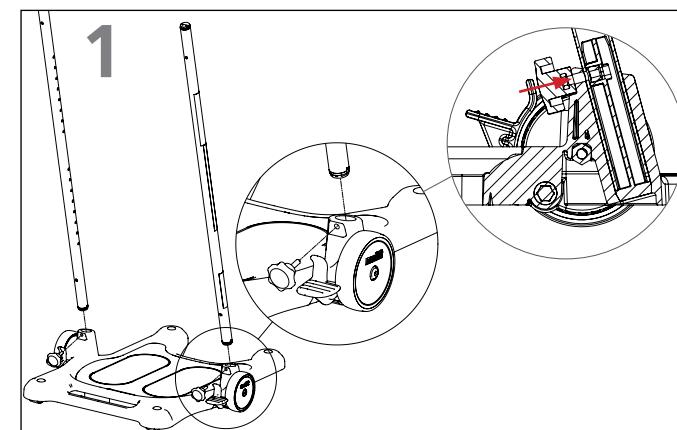

1. Anbring bundpladen på en jævn overflade, og lås bremserne. Isæt røret med hullerne vendt ind mod pladen. Røret med mærkatet skal være til højre set fra hjælperens synsvinkel. Grebet monteres vinkelret på røret og vinklet lidt opad i forhold til vandret.

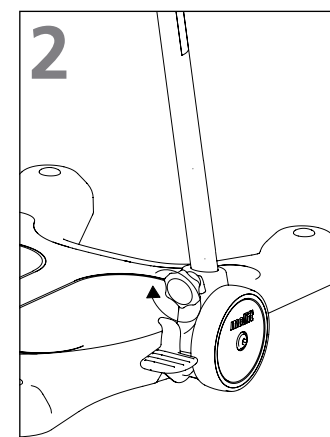


2. Spænd grebet godt ved at dreje det med uret.




Sørg for, at grebet er korrekt fastgjort. Løse greb kan gøre rørene ustabile, så Molift Raiser Pro ikke længere er sikker at bruge.

Montering af benstøtte

Knæpuderne kan indstilles individuelt. Benstøtten kan indstilles i syv forskellige trin fra 0,3 til 0,51 meter. Følg disse to trin, når benstøtten monteres:

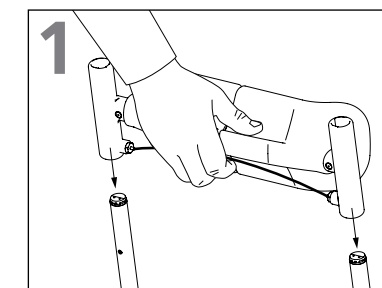


1. Træk i udløserkablet, og glid benstøtten over rørene. Puden skal vende mod brugeren.

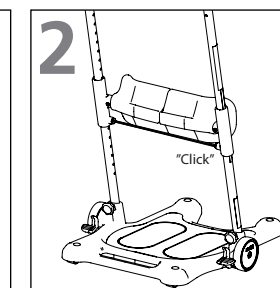

2. Udløs kablet, og lad benstøtten glide til den ønskede position.

Montering af håndtag

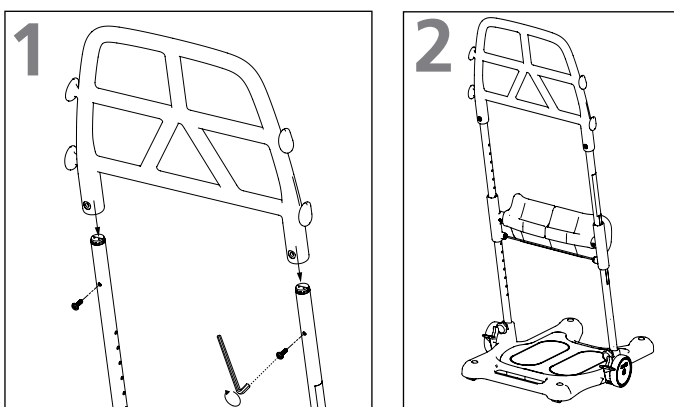

1. Glid håndtaget over rørene, så hullerne i rørene passer med hullerne i håndtaget. Isæt unbrakoskruer, og spænd med unbrakonøglen.
2. Sørg for, at unbrakoskruerne vender ud mod hjælperen.


Tjekliste efter samling

! Når du har samlet Molift Raiser Pro, må du ikke begynde at anvende den, før du har afsluttet kontrollen i henhold til tjeklisten.

Brug denne tjekliste til at bekræfte, at Molift Raiser Pro er korrekt monteret og kan betjenes korrekt og sikkert, før den tages i brug. Se samlevejledningen på foregående side for at få flere oplysninger.

- Sørg for, at benstøtten er monteret korrekt.
- Sørg for, at grebene mellem de udvendige rør og bundpladen er monteret korrekt og spændt godt til.
- Sørg for, at håndtaget er monteret korrekt.
- Sørg for, at Molift Raiser Pro kan bevæge sig frit.
- Sørg for, at bremserne virker.


Justering af benstøttens højde

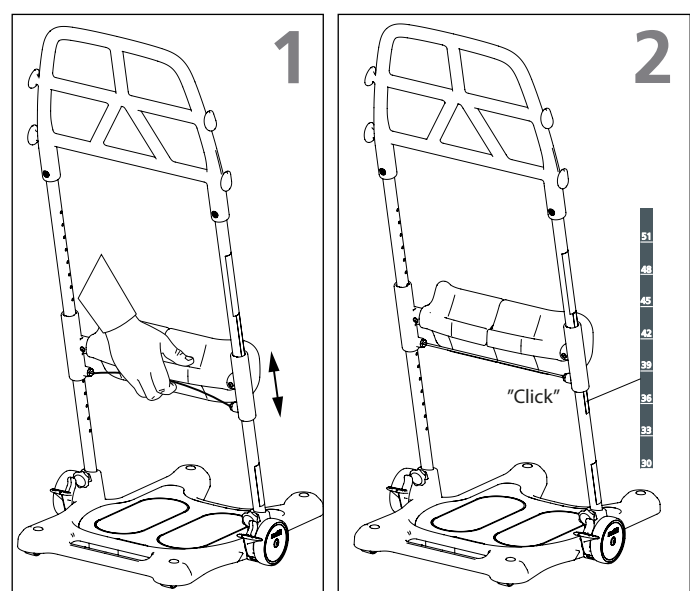

1. Træk i kablet bag på puden. Flyt benstøtten op eller ned til den ønskede højde.
2. Når den korrekte knæstøtkehøjde er opnået, skal du udløse kablet og lade benstøtten glide til den ønskede højde. Benstøtten vil "klikke" på plads, og det røde kabel er spændt. Knæstøtkehøjden kan aflæses på skalaen på røret. Tallet over benstøttebeslaget refererer til den korrekte højde.


! Sørg for, at begge sider er korrekt anbragt. Skub op eller ned, indtil du hører et "klik". En benstøtte, der ikke er sat ordentligt fast, kan forårsage, at knæstøtten glider ned, så Molift Raiser Pro ikke længere er sikker at bruge.

Placering af Molift Raiser Pro

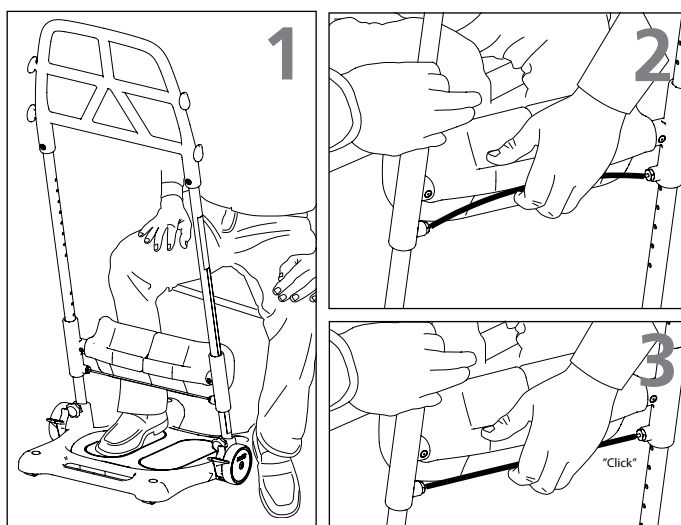


1. Brugerens fødder placeres på fodpladen.
2. Tilpas højden på benstøtten, så toppen af støtten er under brugerens knæ.
3. Når den ønskede højde er nået, skal benstøtten "klikke" på plads.

Forflytning af brugeren

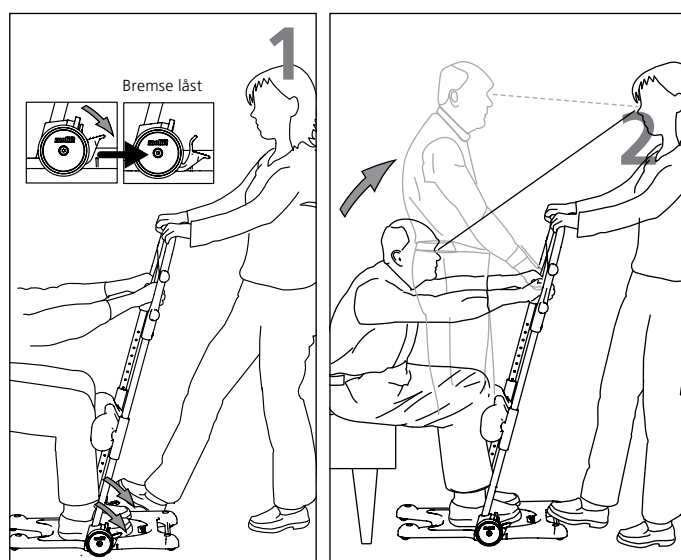

1. Lås begge hjul ved at trykke ned på bremsen i en af siderne. Begge hjul låses, uanset i hvilken side hjælperen træder på bremsen. Anbring den ene fod på kanten af bundpladen. Vælg et greb på håndtaget, der er behageligt for både bruger og hjælper.
2. Derefter opfordrer du brugeren til at rejse sig, samtidig med at du afbalancerer brugerens vægt ved hjælp af en fod og dine hænder (brug din kropsvægt ved at læne dig bagover).

! Hjulene skal altid være låst, når brugeren står op og sætter sig ned.

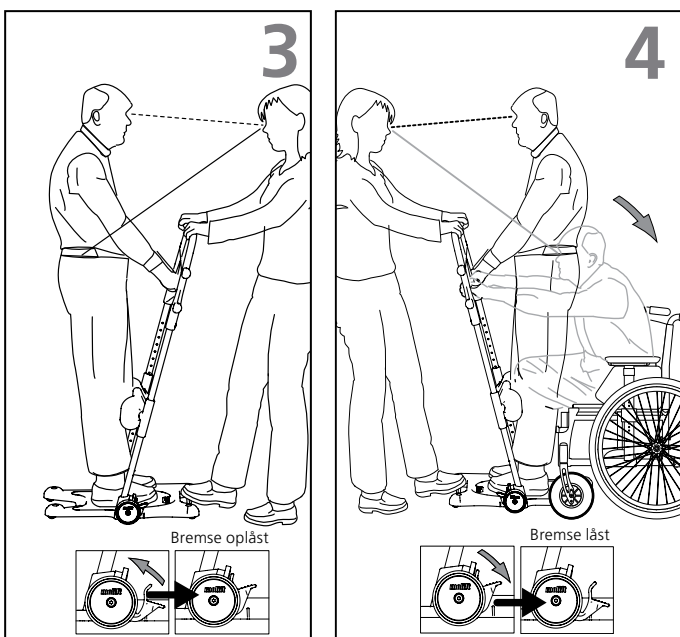


3. Oplås bremsen med den ene fod. Træk Molift Raiser Pro bagud, og styr den hen mod det nye sted, hvor brugeren skal sidde. Sørg for, at eventuelle hjul er låst ved det nye siddested. Forflytningen foretages bedst, når brugeren vender i bevægelsesretningen.
4. Lås begge hjul. Anbring en fod på kanten af fodpladen, før brugeren sætter sig ned. Hold modvægt, mens brugeren sætter sig ned. Hold øjenkontakt med brugeren under hele forflytningsprocessen.

! Plejgiveren skal altid afbalancere brugerens vægt, når brugeren står op eller sætter sig ned.


Transport og opbevaring

Molift Raiser Pro kan opbevares og transporteres ved temperaturer mellem -25 og 70 °C og ved en relativ luftfugtighed på 15-93 %. Anvend ikke Molift Raiser Pro til at transportere ting.

Bruger/hjælper

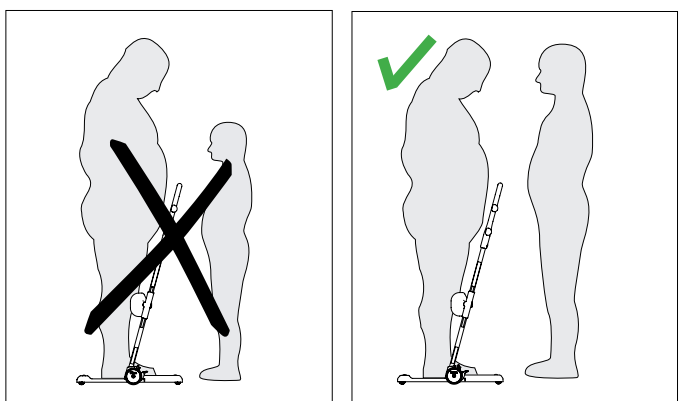


Hjælperen skal være i stand til at håndtere brugerens vægt.

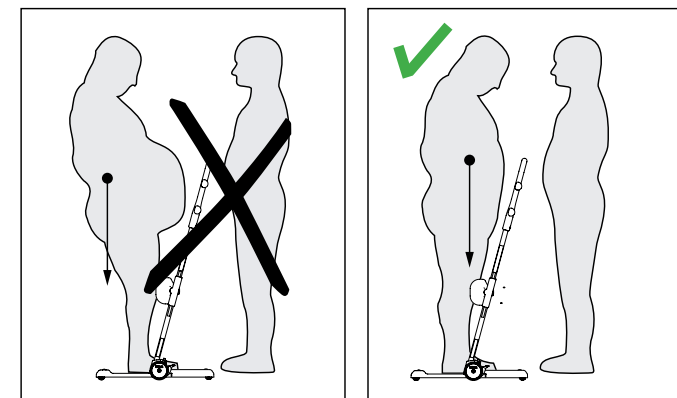

Sørg for, at brugerens vægt befinder sig tæt ved bundpladens midte.

Tilbehør

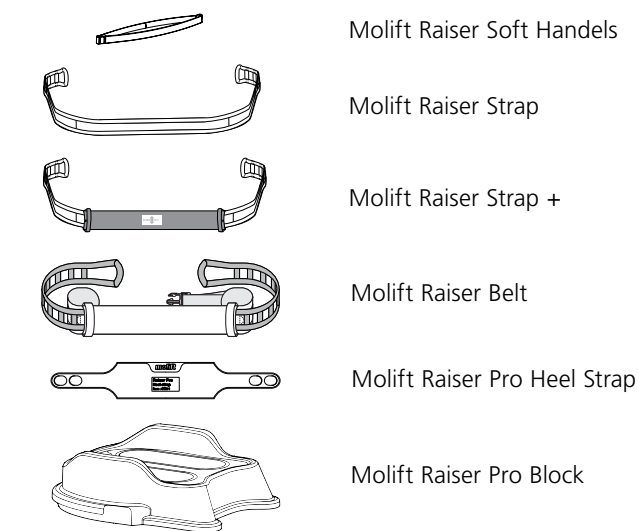

Rengøring og desinfektion

Rengør regelmæssigt. Rengør overfladerne med en fugtig klud med et pH-neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke opløsningsmidler eller stærke væsker, da det kan ødelægge Molift Raisers overflader. Til desinficering, når det er nødvendigt: Brug isopropylalkohol eller lignende midler. Undgå slibende rengøringsprodukter. Fjern hår og luv fra hjulene, og kontrollér, at hjulene roterer frit, og at bremserne fungerer korrekt. Kontrollér, at du ikke beskadiger eller fjerner mærkater under rengøringen.

Istandsættelse

Følg proceduren for rengøring og samling. Særskilt istandsættelsesdokument er tilgængeligt på Etac.com.

Genbrug

Molift Raiser Pro kan bortskaffes som metal- og plastaffald. Genbrugsinstruktioner er tilgængelige på Etac.com.

Reserve dele

Reservedelsliste er tilgængelig på Etac.com.



Etac A/S
Parallevej 3
DK-8751 Gedved
www.etac.com

molift[®]
by Etac