

Yderligere praktiske anbefalinger:

- For at beskytte materialet, skal du kun bruge Oliz® produktet indendørs.
- Det anbefales, at bruge begge hænder når produktet skal flyttes.
- Hvis du transporterer produktet i et køretøj, skal produktet fastgøres for, at forhindre det i at flyve rundt og skade nogen.
- Hvis der er hul i produktet, skal dette fjernes fra barnet. Oliz® produktet skal kontrolleres jævnligt for skader, da indholdet kan være farligt for børn under 3 år.

Vedrørende miljøbeskyttelse:

Hjælp miljøet ved ikke at bortskaffe dit produkt i husholdningsaffaldet. Klip produktet i stykker og fordel de enkelte komponenter, som plast, stof og metal efter lokale bestemmelser - i de relevante genanvendingsystemer.

Garanti: Ved produktionsfejl giver Oliz® to års garanti. Denne garanti er kun gyldig, hvis produktet anvendes som beregnet. Skader forårsaget af ukorrekt eller uhensigtsmæssig brug er udelukket fra garantien.

For yderligere spørgsmål om anvendelsen af Oliz produktet, er du velkommen til at kontakte os.

Ordre: År: Produkt: Sara



Godkendt ved EN71-1-71-2-71-3 og EN12182

Dansk Design - er produceret i EU - www.oliz.dk

Oliz - Bornholmsvej 10 - 7400 Herning -DK -tlf +45 20 78 79 54

Oliz® producerer hjælpemidler, for at styrke den sensorisk integration. Målet er, at fokusere på personer, der har brug for vedvarende støtte til, at styrke deres egen selvbevidsthed.

Oliz® Knæpuden er specielt designet til personer, der sidder i kørestol, som ofte oplever fysisk spænding, rastløshed eller stress i benene.

Knæpuden hjælper med til, at give afslapning og lindring i hverdagen.

Den effektiv funktionalitet som Sara giver, er med til at give tillid og tryghed og kan tjene, som et vigtigt kommunikations middel mellem børn og voksne.

Knæpuden Sara kan transporteres i en taske.

Ved korrekt brug får du et produkt, der holder længe.

Sørg for at gemme dette informationsark til senere brug.

Produkt: Knæpude "Sara"



Vigtige instruktioner for brugen af Oliz® produktet:

Oliz® knæpuden "Sara" ser ikke kun sjov ud, men giver også fred og ro via sin tyngde. Sara er ideel som støtte til børn i kørestol, som har uro i benene.

Oliz® knæpuden "Sara" er designet til børn i alderen fra +3 år

Størrelse: Længde 270 mm - Bredde 170 mm – Højde 30mm Vægt: 2,2 kg

Materiale stof: 100% Imiteret læder/PU

Materiale indvendig: 70% Polyethylene
30% metalkugler

Oliz® bruger kun kvaliteter, der ikke indeholder kræftfremkaldende stoffer. Derfor er der ikke brugt flammehæmmende midler på produktet.

Pleje instruktioner:

- Må ikke vaskes
- Må ikke bleges.
- Må ikke stryges.
- Ikke egnet til tørretumbler.
- Må ikke renses.



Rengør Oliz® produktet med en blød klud og brug et egnet rengøringsmiddel eller desinfektionsmiddel til kropskontakt. Skal efter tørres med rent vand for at undgå skader på stoffet.

Vigtige anvisninger:

- Oliz® knæpuden Sara kan bruges ved, at placere puden på barnets ben og hjælper barnet med, at føle tryk og mærker sig selv bedre.
- Det er vigtigt, at overvåge barnet under brug, da produktet har godt med tyngde, der kan påvirke barnet fysisk.
- Et Oliz® produkt bør kun bruges med barnets eget samtykke. Hvis barnet føler ubehag og udviser modstand ved brug af produktet, skal det fjernes fra barnet. Start med at bruge produktet i korte tidsintervaller. Bliver der fortsat udvist modstand, så vil vi anbefale, at produktet ikke bliver brugt til dette barn.
- Vær opmærksom på, at barnet ikke bliver for vant til produktet så virkningen fortag sig. Produktet skal ses, som et terapeutisk hjælpemiddel.
- Når den ønskede effekt er opnået, skal produktet fjernes fra barnet med forsigtighed. Brug begge hænder når produktet fjernes. Løft ikke i gevir eller ører, da det kan forårsage skader på produktet, som ikke dækkes af garantien. Der må ikke kastes med produktet, da tyngden i produktet kan forårsage skade både på produktet, men også på personer i nærheden af produktet.

Advarsler:

- Hvis barnet er stærkt begrænset af motoriske og / eller fysiske forhold, skal Oliz® produktet bruges med særlig forsigtighed.
- Vi anbefaler generelt, at personer der bruger et Oliz® produkt overvåges under brug.
- Hold luftvejene frie, når produktet anvendes, da det ikke er et åndbart produkt.
- Et Oliz® produkt bør ikke bruges nær vand, da det kan give anledning til drukne fare.

Opbevaring:

- Af sikkerhedsmæssige årsager anbefaler vi, at Oliz® produktet opbevares utilgængeligt for børn, der kræver tilsyn.
- Hold Oliz® produktet væk fra skarpe/ varme genstande og åben ild.