

Indhold:

Hvad er ZiboCup?.....	s 3
ZiboCup-serien.....	s 4-5
Den elektroniske bund.....	s 6-7
Opsætning.	s 8-9
Tænd ZiboCup [®] til /fra.....	s 10-11
Batteriskifte.....	s 12-13
Juster lyden.....	s 14-15
Juster intervaller imellem beskeder.....	s 16-17
Juster påmindelses lys	s 18-19
Slå natlys system til/fra	s 20-21
Lyt til påmindelsesbeskeder.....	s 22-23
Optag en ny påmindelsesbesked.	s 24-27
Gendan fabriksindspillet besked.....	s 28-29
Rengøring.....	s 30
Advarsler	s 31

Hvad er ZiboCup ?

ZiboCup er det intelligente hydrerings system, som opfordrer folk til at drikke mere. Det er udviklet for at reducere folks risiko for dehydrering, især på hospitaler, plejehjem og i hjemmet.

Systemet kan opfordre borgeren/patienten til at drikke indenfor en givet tidsramme, samt gøre plejepersonalet opmærksomme på, hvis tidsgrænsen for indtagelse af væske overskrides.

ZiboCups elektroniske bund kan nemt fastgøres under ZiboCup kruset eller ZiboCup koppen.

ZiboCup Serien




ZiboCup Kruset

Et letvægts Tritan krus med en bred, stabil base. Med det tykke åbne håndtag kan folk nemt få et let og fast greb i håndtaget med den ene eller begge hænder.

Funktioner: Diskrete målelinjer på 100ml og 200ml.

Rengøres i en opvaskemaskine.

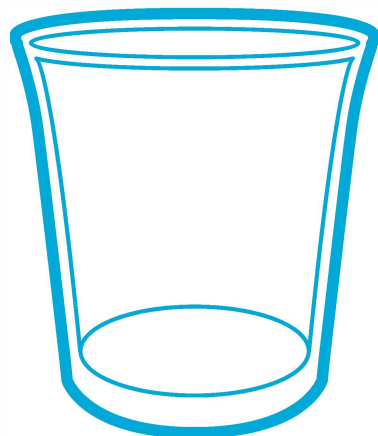


ZiboCup Koppen

En letvægts Tritan kop med en bred stabil base. Koppen har en blå og klar farvetone, som får vandet til at se friskt og køligt ud.

Funktioner: Diskrete målelinjer på 100ml og 200ml

Rengøres i en opvaskemaskine

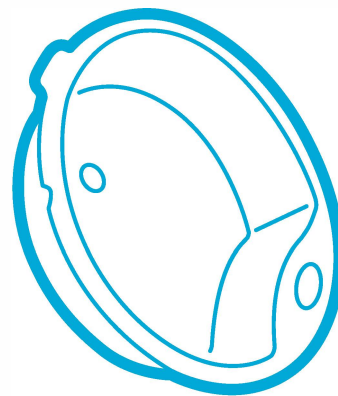


ZiboCup Låget

Det transperante Tritan låg, med diskret forsænket tud, kan kontrollere vækseflowet.

Det er let at tage af og på.

Hullet I midten af låget kan bruges til sugerør.

Låget er nemt at rengøre, og tåler opvaskemaskine

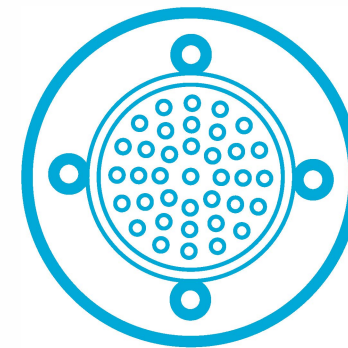

Elektronisk bund

Den elektroniske bund er ideel til folk, der skal opfordres til at drikke. Det kan nemt tilsluttes enten koppen eller kruset.

Den har 3 funktioner: Påmindelsesmeddelser, advarselslys, nattelys.

Den elektroniske bund

De 3 funktioner:

•Påmindelsesmeddelelser:


Basen har 3 forudindtalte meddelelser designet til at opfordre brugeren til at drikke. De kan erstattes med op til 3 personlige meddelelser, som du eller en pårørende selv kan optage. Hvis brugeren ikke drikker i løbet af den valgte tid på enten 20, 40 eller 60 minutter vil de blive mindet om at drikke ved en af de 3 beskeder, der afspilles i rotation. Hvis brugeren har drukket, vil meddelelserne ikke blive afspillet. Denne funktion genstarter efter hver tår.

•Advarselslys:

Basen indeholder en serie på 8 blå lys. Hvis brugeren ikke drikker inden for den valgte tid på enten 20, 40 eller 60 minutter, vil basen blinke for at minde brugeren om at drikke og advare plejepersonalet. Hvis brugeren har drukket, blinker lysene ikke. Denne funktion genstarter efter hver tår.

•Natlys:

Når basen registrerer mørke i mere end 30 sekunder, skifter den automatisk til nattilstand. Røde lys i bunden lyser for at hjælpe brugeren med at finde koppen om natten. Både påmindelsesbeskeder og advarselslamper slukker, når koppen er i nattilstand. De aktiveres igen når koppen registrerer dagslys i mere en 30 sekunder.

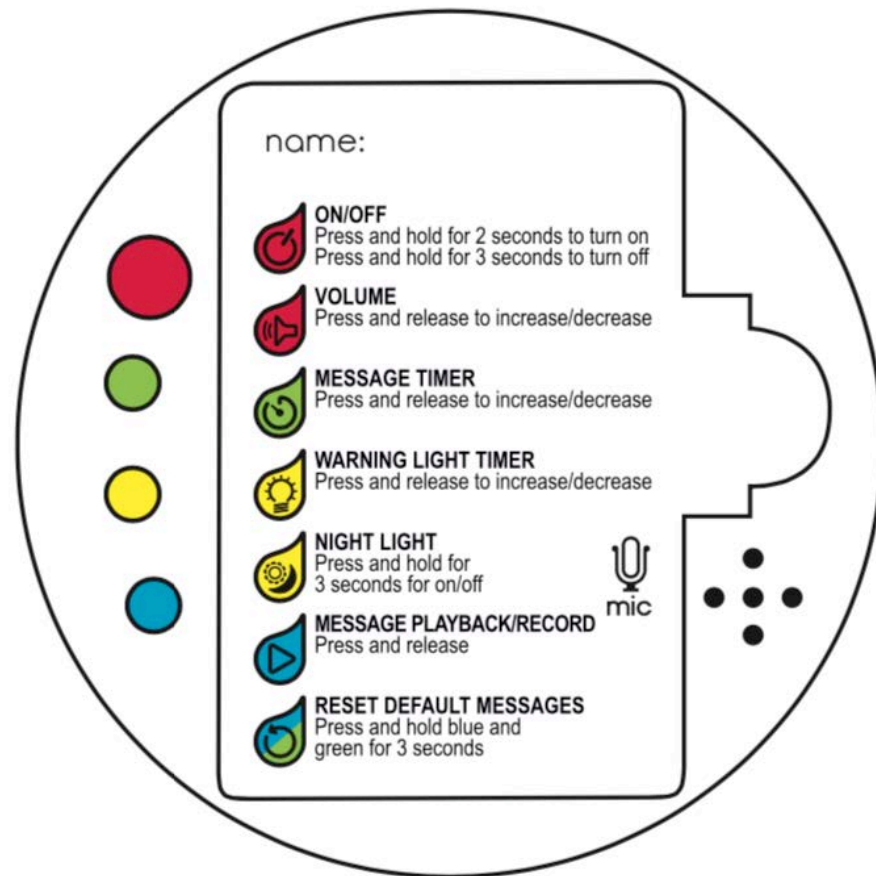

Opsætning

•Basen kræver 3 x AAA 1.5V batterier.


Du skal blot åbne batterirummet, indsætte 3 x AAA 1.5V batterierne i den rigtige polaritet og lukke rummet.


Bemærk: Genopladelige batterier er ikke egnede.

•ZiboCup er meget nem at bruge. Når ZiboCup er tændt, vil den tale dig gennem de nuværende indstillinger. Hvis du vil ændre nogen af indstillingerne, skal du først trykke på den relevante funktionsknap, og det vil snakke dig igennem processen, trin for trin.

•ZiboCup taler engelsk, men du kan nemt indtale danske påmindelser.

- **Besked lydstyrke (Side 15)**
- **Besked tidsinterval (Side 17)**
- **Advarselslys tidsinterval (side 19)**
- **Natlys system (side 21)**
- **Optag din egen besked (side 25)**

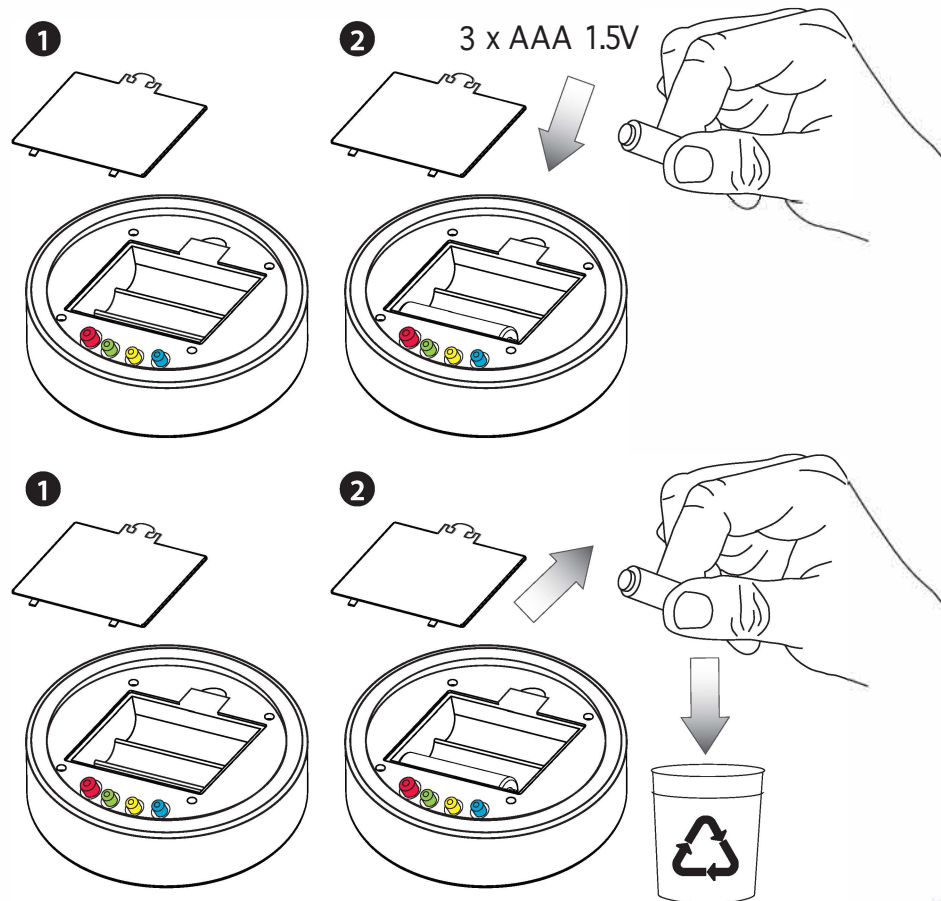

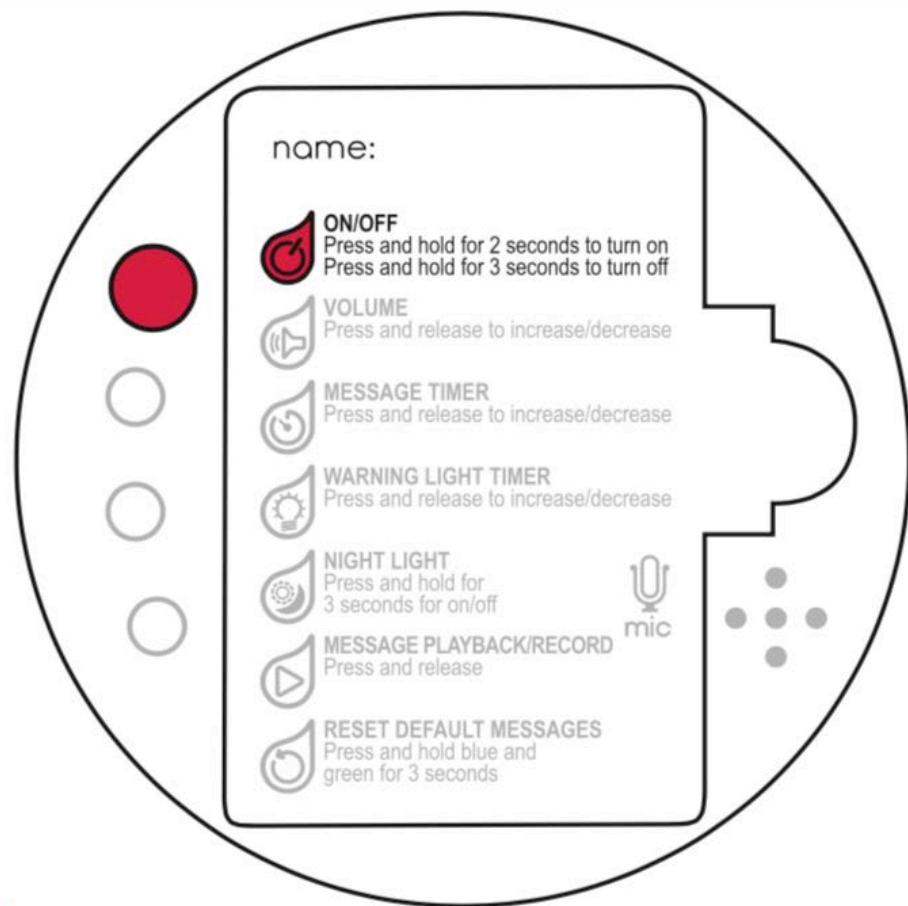

Tænd ZiboCup

Tænd ZiboCup ved at holde den røde knap nede I 2 sekunder
Derefter vil du hører "Droplet On"

Herefter vil du få fortalt:

Besked-lydstyrkens volume.

Besked-tidsintervalget.

Om advarsels lyset er slået til.


Om natlyset er slået til.

Dine indstillinger vil blive gemt, selvom du slukker for ZiboCup.
Hvis 2 røde lys blinker I basen indikere dette at ZiboCup er tændt

Sluk ZiboCup

•Sluk for ZiboCup, ved at holde den røde knap nede I 3 sek.


•Derefter vil du hører "Droplet Off" og det røde lys I basen vil forsvinde.

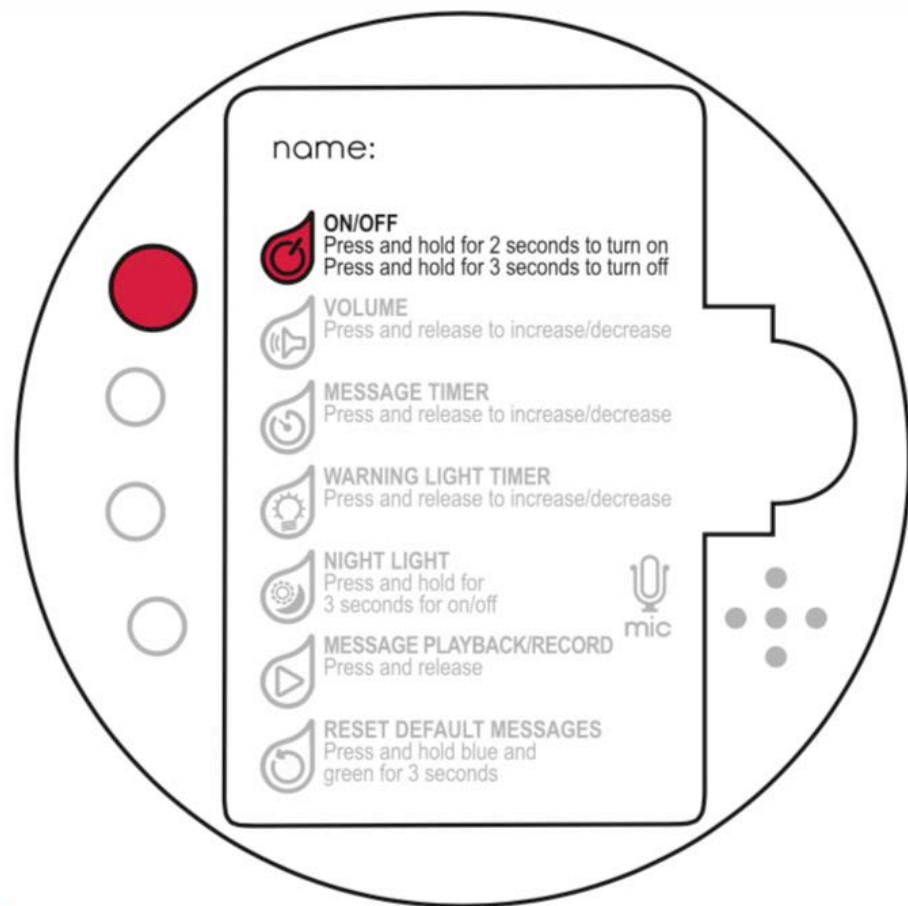

Påmindelse om udskiftning af batteri:

ZiboCup vil indikere at batteriet skal udskiftets ved enten:

- Det blå lys vil pulsere svagere I basen/Når Basen tændes vil meddelseren "Batteries low, please replace batteries" høres.
- ZiboCup vil ikke fungere optimalt før batterierne er blevet udskiftet.

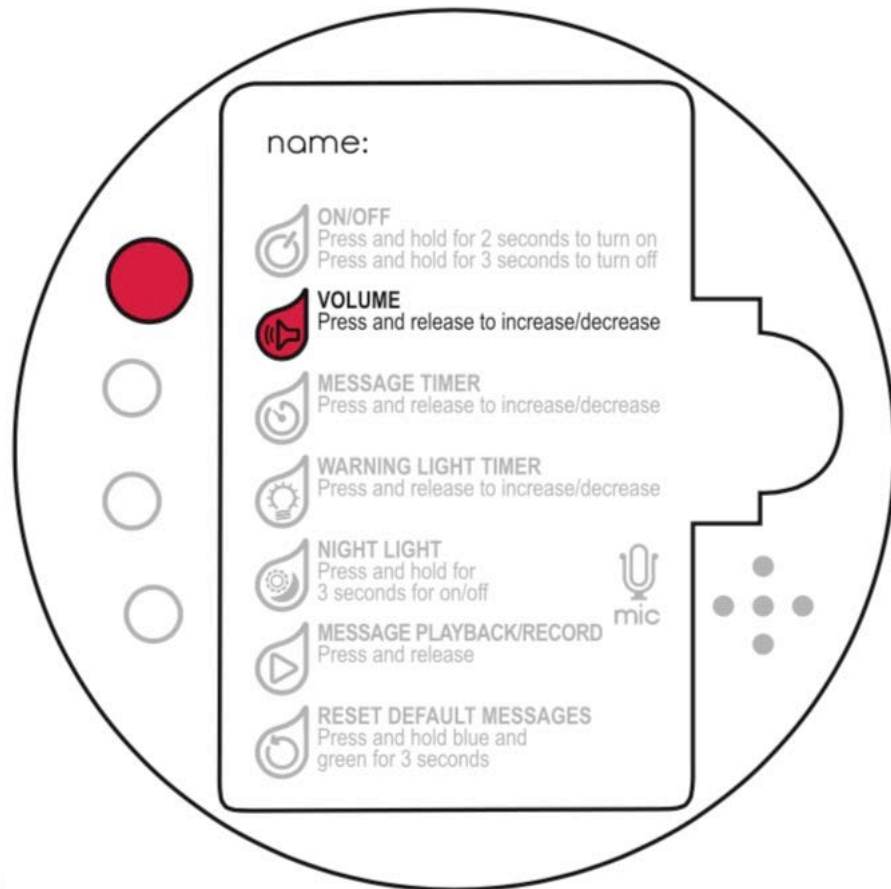


Juster Lydstyrken

- 4 forskellige lydstyrkeniveauer (1 minimum - 4 maksimum).
- For at tjekke nuværende lydstyrke niveau tryk på den røde knap, herefter vil ZiboCup fortælle nuværende lydstyrke niveau.
- For at ændre lydstyrkeniveauet, tryk igen på den røde knap, ZiboCup vil igen fortælle det nye niveau.
- Gentag dette indtil det ønskede lydniveau er opnået. (1, 2, 3, 4).

Juster Tidsinterval


- Påmidelelses beskeden kan blive sat til at afspille hvert 20, 40 eller 60. Minut.
- Påmidelelses beskeden kan frakobles.
- For at tjekke den nuværende tidsinterval, tryk på den grønne knap. ZiboCup vil herefter fortælle dig den nuværende indstilling.
- For at ændre tidsintervallet tryk igen på den grønne knap, ZiboCup vil igen fortælle dig det nye tidsinterval.
- Gentag dette indtil det ønsket tidsinterval er opnået.



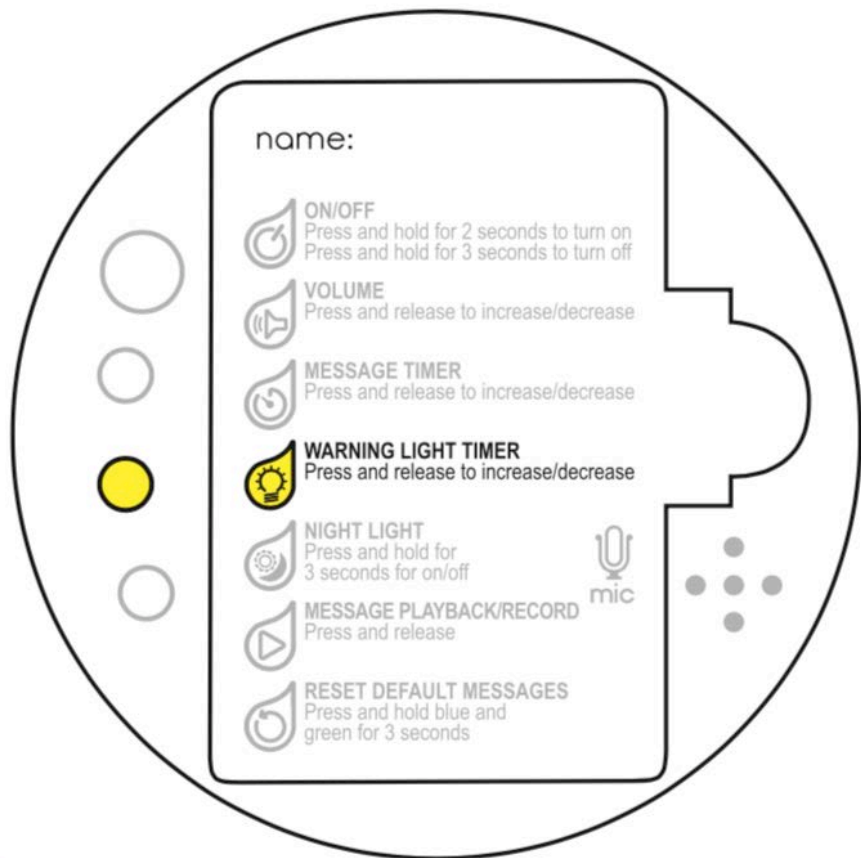

Juster Påmindelseslys

- Påmindelses lyset kan blive sat til at afspille hvert 20, 40 eller 60 minut, hvis der ikke bliver drukket af koppen.
- Påmindelses lyset kan frakobles.
- For at tjekke den nuværende indstilling af påmindelses lyset tryk en enkelt gang på den gule knap. ZiboCup vil herefter fortælle dig den nuværende indstilling.
- For at ændre indstillingen tryk igen på den gule knap, ZiboCup vil igen fortælle dig om den nye indstilling.
- Gentag dette indtil det ønsket tidsinterval er opnået.

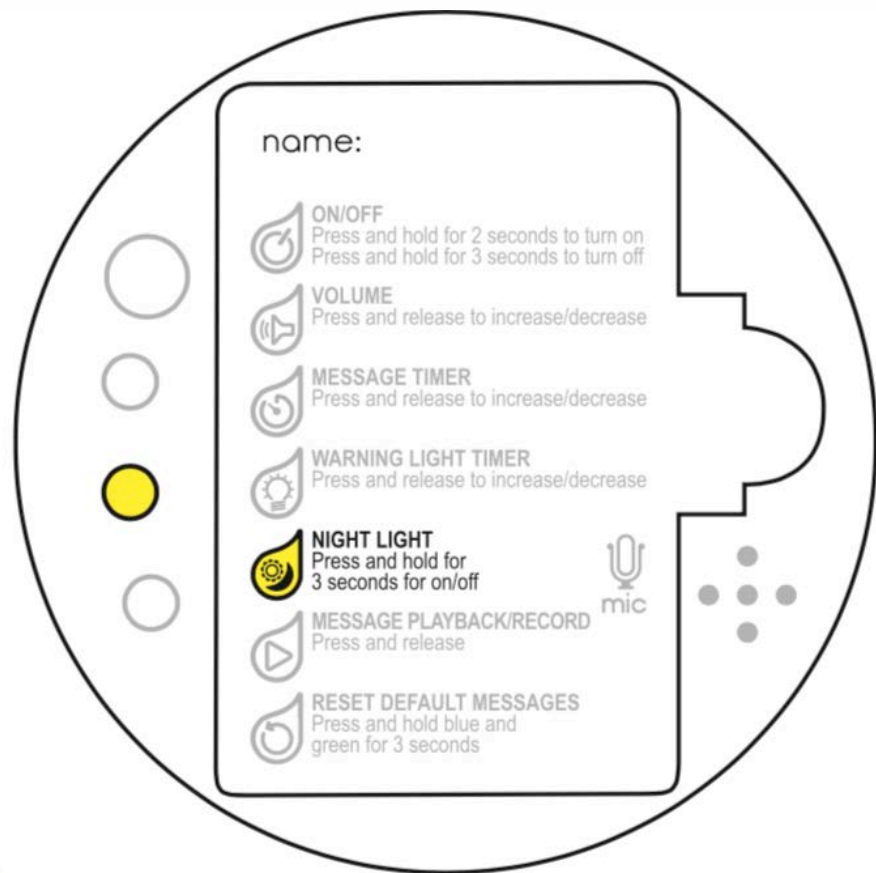



Slå Natlys til/fra

- Natlys system bliver aktiveret hvis der er mørkt I rummet I mere end 30 sekunder.
- Koppen vil automatisk deaktivere lys og lyd. Et rødt lys vil tænde så brugeren lettere kan finde koppen i mørket.
- For at deaktivere nat lys systemet, hold den gule knap nede I 3 sekunder. ZiboCup vil herefter sige:
 - "Night light system off."
- Deaktiveres Natlys systemet vil påmindelsesbeskeder og lys blive ved med at forsætte natten igennem.
- Slå natlys systemet til igen ved at holde den gule knap nede i 3 sekunder.

Lyt til påmindelses beskederne

- Koppen har 3 engelsk programmeret beskeder. Det anbefales at disse slettes og at indspille sine egne.
- For at lytte til påmindelses beskeden tryk på den blå knap. ZiboCup vil herefter afspille den nuværende besked. Herefter vil koppen spørge om du vil beholde denne besked eller indspille en ny.
- For at gemme den nuværende besked og springe videre til næste påmindelses besked tryk på den blå knap.
- ZiboCup vil nu afspille den næste påmindelses besked, og ZiboCup vil igen spørge om man vil gemme den nuværende påmindelses besked eller indspille en ny.

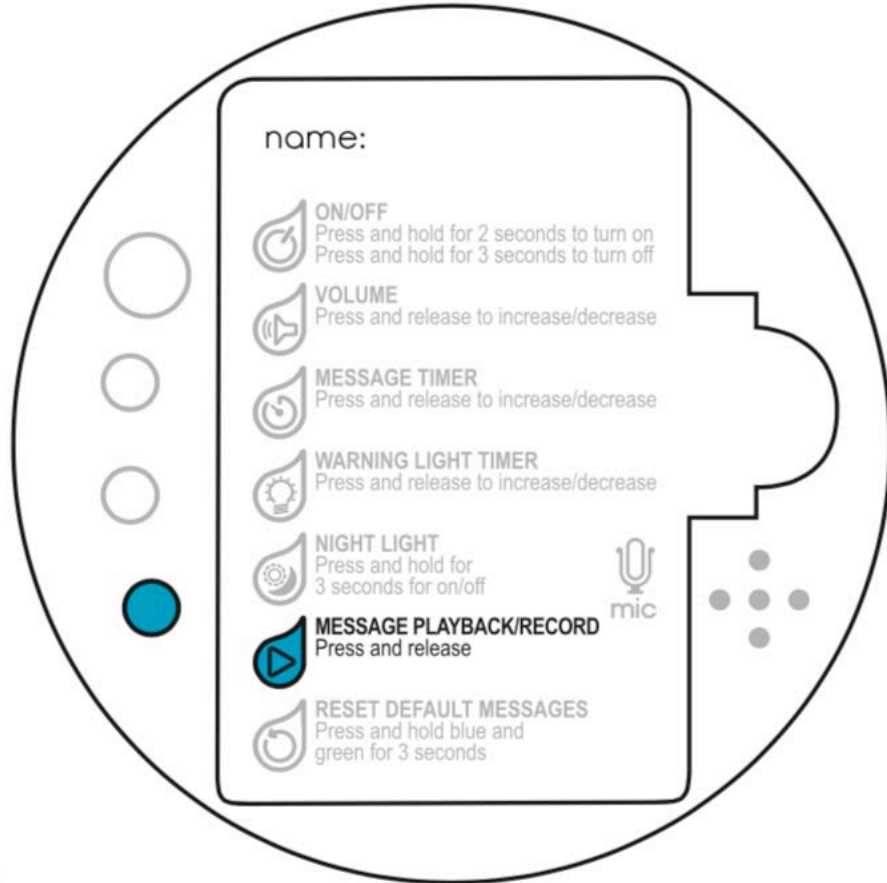


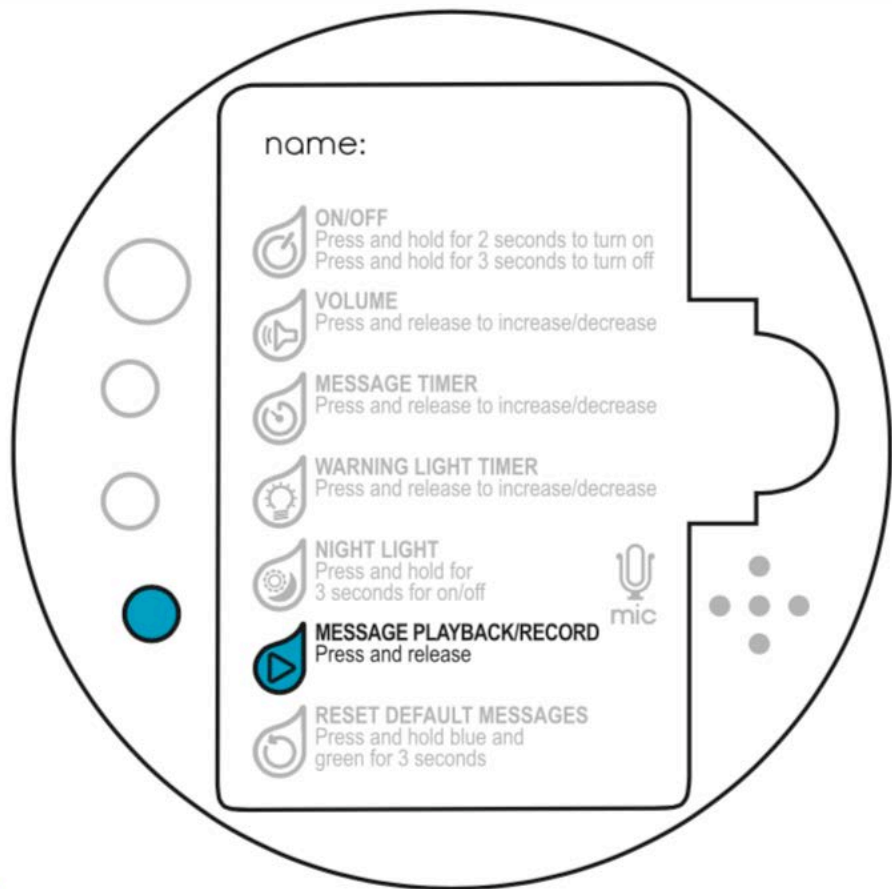

Optag ny påmindelses besked:




- For at indspille din egen besked, skal du holde den blå knap nede, indtil ZiboCup giver et bip. Bliv ved med at holde den blå knap nede mens du indtaler din besked. Når du er færdig med at indtale beskeden slipper du den blå knap. Beskeden kan højst være 15 sekunder lang.
- Når du har indtalt din besked, og har besluttet at beholde den, kan du trykke på den blå knap for at hører den næste besked.
- Skulle du have lyst til at ændre denne, påbegyndes produceren forfra.
- For at slette alle beskeder se side 29.

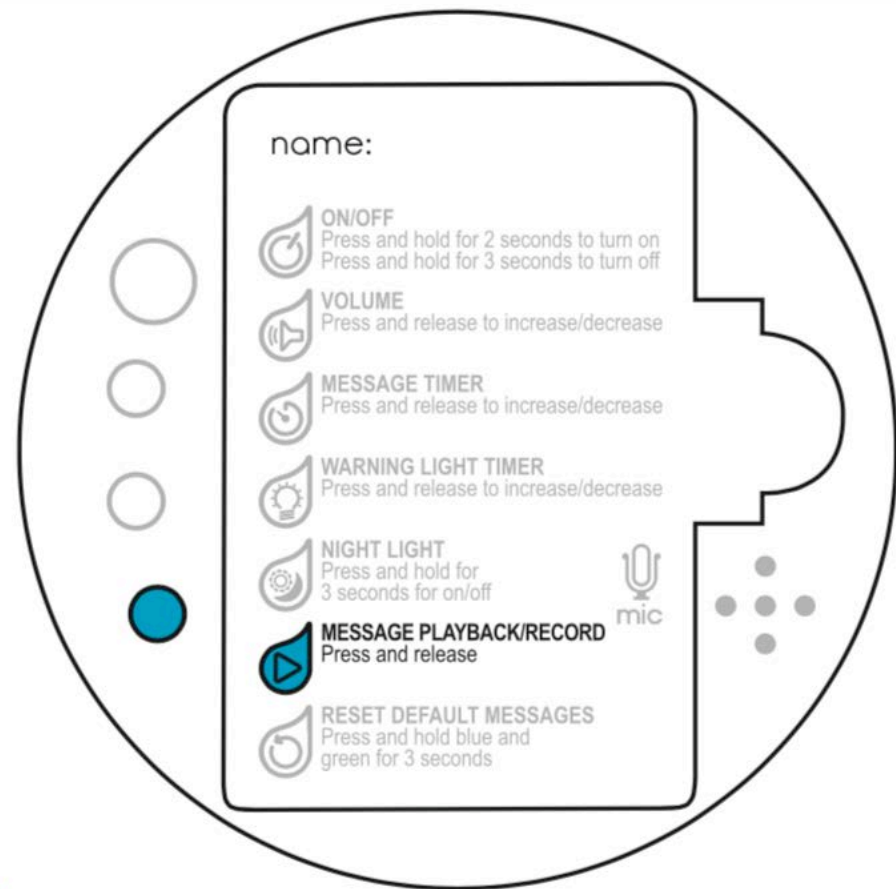

Forslag til påmindelses beskeder:

- Hver påmindelses besked kan vare op til 15 sekunder. For at hjælpe dig, er her et forslag til hvordan en motiverende og opmuntrende besked kan lyde
- < Navn> det er et stykke tid siden du har drukket sidst. Tag en slurk vand af din kop.
- <Navn> Du føler dig måske ikke tørstig, men det er vigtigt at drikke regelmæssigt for at holde dig sund og rask. Tag en slurk vand fra din kop.
- Hver slurk tæller <Navn>! Prøv at drikke lidt og ofte, det er godt for dit helbred.

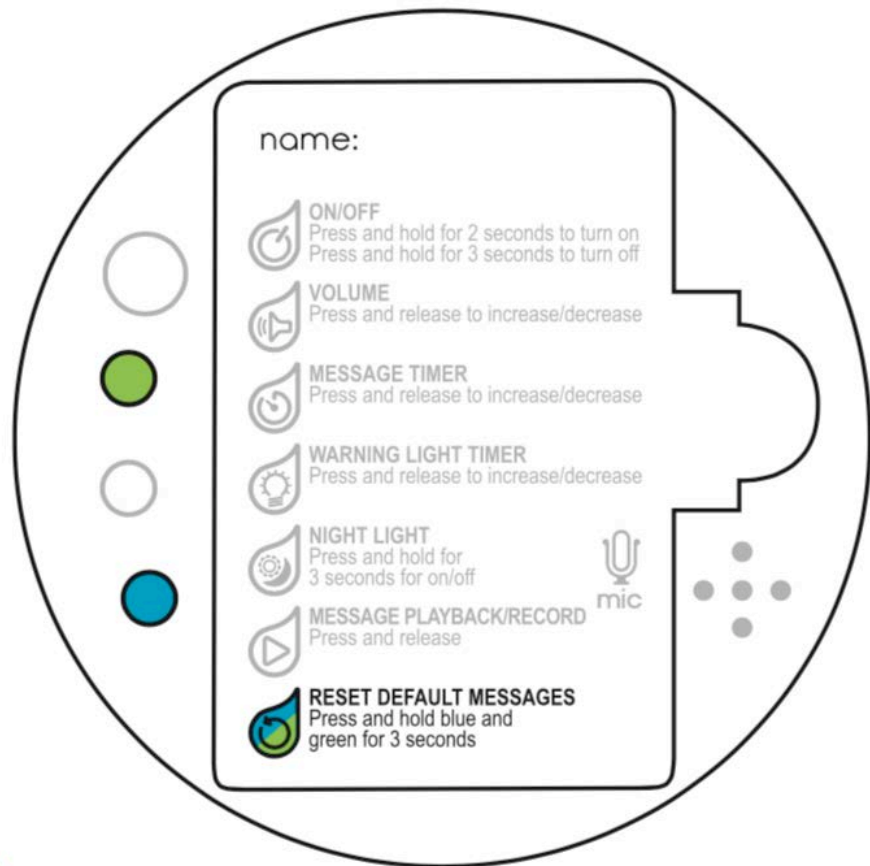

Gendan fabriksindspillede beskeder:

- Du kan kun slette dine optagede meddelelser og vende tilbage til standardbeskeder, når du har gennemgået "Lyt til påmindelses beskederne" proces på side 23. Ved afslutningen af afspilningen af alle meddelelser vil ZiboCup angive:
"All messages recorded. To delete all messages and return to default messages press blue and green buttons together for three seconds."
- Tryk nu på den blå knap og den grønne knap samtidig i 3 sekunder. ZiboCup vil nu sige: "messages deleted, default messages on."
- Du kan bladere hurtigt gennem alle meddelelser uden at skulle lytte til dem individuelt ved at trykke på den blå knap 4 gange for at nå frem til : "All messages recorded. To delete all messages and return to default messages press blue and green buttons together for three seconds."
- Bemærk: Alle optagne meddelelser slettes samtidig. De kan ikke slettes individuelt.

Rengøring af den elektroniske bund

- Fordi denne bund indeholder elektriske komponenter, må den IKKE sættes i vand eller i opvaskemaskine.
- Rengør forsigtigt ved brug af en blød fugtig klud eller antibakteriel aftørring.
- Hvis bunden ved en fejl er sat i opvaskemaskinen sammen med kop eller krus, begynder den at blinke. Dette for at minde dig om at fjerne basen inden opvaskemaskinen startes.

Advarsler!

Behold venligst al information for fremtidig reference.
LED'erne i produktet kan ikke udskiftes, når en LED når slutningen af levetiden, skal hele produktet udskiftes.

ADVARSEL! Ikke egnet til børn under 36 måneder. Små dele kan være en kvælningfare.
Basen er IKKE egnet til brug i mikrobølgeovnen
Retningslinjer for brug af batterier og batteridrevne genstande.
For at undgå lækage, fjern batterierne, når de er flade for strøm, hvis produktet ikke vil komme i brug over længere tid, fjern batterierne Forkort aldrig tilsyn til batterierne.
Bland aldrig nye og gamle batterier.
Batterier skal indsættes med den rigtige polaritet. Bland ikke batterier af forskellige typer. F.EKS. zink carbon batterier med alkaliske batterier. Genopladelige batterier er ikke egnede.

VIGTIGT

Vær opmærksom på miljøet ved at bortskaffe brugte batterier ansvarligt ved hjælp af lokale myndigheders faciliteter. Opbevar IKKE opbrugte batterier- kassér straks



Made in China for Spearmark International PE19 SGA, UK



Tritan® is a trademark of Eastman Chemical Company.

