



LivetSomSenior

Hjælpemidler til en lettere hverdag

Brugervejledning til foldbar stok

Fjern stokken fra emballagen eller clipsen. Klik leddene sammen imens du holder fast i stokkens øverste del. På de fleste foldbare stokke vil leddene automatisk klikke på plads.

Indstil højden ved kliklåsen under håndtaget til den ønskede højde.

Når du ikke har brug for stokken mere kan stokken foldes sammen igen. Træk i leddene for at løsne dem, og brug derefter en taske eller en clips til at holde stokken sammen.

Kliklås

