

► Samling og brugsanvisning

⚠ **Sikkerhedshinweise:**

► Sikkerhedsanvisninger:

- Brugerens kropsvægt må ikke overstige 125 kg!
- Brug kun rollatoren, når den er helt udfoldet, og klaplåsen er forsvarligt fastgjort!
- Før hver brug skal du kontrollere, at låsehåndtagene er strammet godt til, og at håndtagene peger nedad.
- Rollatoren er ikke egnet til at overvinde forhindringer som f.eks. trapper, trin, skråninger eller stigninger.
- Brug kun rollatoren på fast og jævnt underlag. Der er risiko for, at hjulene sidder fast i skinner, mandehulledæksler, riste og beskadigede vejbelægnin-ger. Så køør uden om sådanne forhindringer.
- Rollatoren må heller ikke bruges som støtte, når man rejser sig fra en siddende eller siddende stilling eller til transport af personer.
- En ubrugt eller parkeret rollator skal altid sikres mod at rulle væk ved at låse bremsene.
- Bremsene virker direkte på dækoverfladen, og bremseeffekten afhænger derfor af dækkenes tilstand. Dækets tilstand skal kontrolleres før hver brug! Hvis du ikke er sikker, skal du kontakte din forhandler.
- På fugtigt, vådt eller is-/sneeglatt underlag har du ingen eller kun begrænset bremseeffekt, og der er også risiko for at glide. Tilpas din kørsels- og gangadfærd til disse farer.
- Indkøbskurven kan bære højst 10 kg bagage.
- Hvis dele af rollatoren er bøjet eller deformeret, må du ikke bruge den!
- En gang om måneden skal du kontrollere, at alle skrueer til fastgørelse er strammet.
- Efterlad ikke børn uden opsyn med rollatoren!
- Hæng ikke tasker eller lignende op i håndtagene!
- I tilfælde af alvorlige hændelser i forbindelse med dette produkt skal du informere producenten eller den kompetente myndighed.
- Der må kun anvendes originale reservedele

Garanti: I henhold til de lovmæssige garantibestemmelser. Garantien omfatter ikke: Skader forårsaget af formålsstridig brug, normal slitage og brug samt mangler, der kun påvirker produktets værdi eller funktionalitet i ubetydelig grad. Ved tekniske ændringer eller formålsstridig vedligeholdelse bortfalder garantien. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer med henblik på tekniske forbedringer

Rollator

Varenr. 31 000 sølv

Varenr. 31 002 blå

Varenr. 31 004 rød



Sundo Homecare GmbH,
Bahnhofstraße 13, DE-30916 Isernhagen, www.sundo-homecare.de



Valentine International Ltd., 8th Floor, No. 149, Sec 2, Ta Tung Road,
221 Hsichih District, New Taipei City, Taiwan R.O.C.

Y.Sung Handelsvertretung, Toulouser Allee 9, DE-40211 Düsseldorf



sundo
HOMECARE



sundo
HOMECARE

► Rollator

Anvendelsesformål:

Rollatoren er et medicinsk udstyr og fungerer som et mobilt ganghjælpemiddel. Sædebrættet giver dig mulighed for at sidde ned og hvile dig, mens bremserne er aktiveret og låst.

Indikation:

Begrænset gangfunktion, gangsvaghed

Kontraindikation:

Svimmelhed, nedsat balancefornemmelse, utilstrækkelig grebsevne, utilstrækkelig fysisk eller mental evne til at bruge hjælpemidlet.

Versioner:

Der findes forskellige ganghjælpemidler, og valget bør træffes efter samråd med lægen og det specialiserede personale. Udvalgelse, montering og instruktion i brug må kun foretages af autoriseret og uddannet fagpersonale. Prøv først at bruge rollatoren. Modellen må kun komme i kontakt med intakt, uskadt hud og må ikke anvendes på tværs af patienter. Enhver anden anvendelse end den ovenfor angivne er ikke i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse. Sundo GmbH er ikke ansvarlig for eventuelle skader, der måtte opstå som følge heraf; risikoen bæres udelukkende af brugeren.

Før første brug / vedligeholdelse:

Montering, første inspektion og instruktion i brug må kun udføres af autoriseret, uddannet fagpersonale. Din specialforhandler skal sammen med dig tilpasse rollatoren til dine individuelle mål og behov. Kun ubeskadigede og komplette produkter må anvendes. Læs først denne brugsanvisning grundigt igennem og opbevar den sammen med emballagen, indtil produktets levetid er udløbet. Kontroller, at produktet er ubeskadiget før første brug og efter hver brug. Hvis der er tegn på skader eller slitage, må rollatoren ikke (længere) anvendes. Der er ikke behov for yderligere vedligeholdelse, hvis sikkerhedsforskrifterne overholdes. Enhver anden brug eller brug ud over den ovenfor nævnte er ikke tilsigtet. SUNDO GmbH eller producenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader, risikoen bæres udelukkende af brugeren. Alle alvorlige hændelser i forbindelse med dette produkt skal straks indberettes til producenten eller den kompetente myndighed.

Øversigt:

- 1 Styrbare forhjul (dæk med fuld PU-skum)
- 2 Stive baghjul (dæk af fuld PU-skum)
- 3 Bagagebærer
- 4 1. Tværstang med krog til indkøbskurven, Slots til tabletholderen og sædepladen
- 5 Foldesikring
- 6 2. Tværstang
- 7 Låsehåndtag til de højdejusterbare håndtag
- 8 Rød knap til låsning af håndtagets positionering
- 9 Holder til vandrestave



Samling:

Læs først denne brugsanvisning omhyggeligt og opbevar den, indtil produktets levetid udløber. Hvis du har modtaget rollatoren i pakket stand, skal du samle den som følger:

- Fold rollatoren ud som beskrevet til højre.
- Placer rollatoren foran dig, så de styrbare hjul vender fremad.
- Sæt de medfølgende skruer fra indersiden og ud gennem hullerne i rørenderne.
- Der er en lille flig på skruetoppen, og sørg for, at denne flig griber ind i den tilsvarende fordybning i klemmen.
- Skru nu låsehåndtagene på den udstående gevind uden at stramme dem.
- Sæt håndtagene ind i rørenderne, så håndtagene vender bagud.
- Juster håndtagshøjden ved at skubbe ind eller trække ud, og spænd låsehåndtagene ved at dreje til højre.
- **Opmærksomhed:** Bemærk, at mindst 9 cm (det markerede område) af håndtaget skal forblive i røret!
- Juster låsehåndtagene, så de peger nedad. For at gøre dette skal du trække låsehåndtagene udad mens den drejes til en nedadvendt stilling. Håndtagets låsevirkning påvirkes ikke af dette.

Udfolde

- For at folde rollatoren ud, skal du først trække de to bageste hjulstænger bagtil.
- Skub derefter den 1. tværstang så langt ned som muligt, indtil det rødt markerede sikkerhedshåndtag til klappning hørbart og synligt går i indgreb.

Fold:

- For at folde rollatoren skal du først fjerne indkøbskurven og bakken.
- Skub derefter klapsikkerhedshåndtaget op.
- Herefter kan du flytte rollatoren ved at trække den 1. fold tværstangen op.

Højdejustering af håndtagene:

- Løsn låsehåndtagene ved at dreje dem til venstre.
- Derefter kan håndtagene skubbes længere ind eller trækkes ud. Når du trækker den ud, skal du sørge for, at der er mindst 9 cm (det markerede område på håndtaget) tilbage i rollatorens rør.
- Ved at dreje til højre spændes låsehåndtagene igen.
- Efter tilspænding skal håndtagene justeres, således at de peger nedad. For at gøre dette trækker de i låsehåndtagene udad, mens den drejes til en nedadvendt position.

Betjening af loopbremsen:

- For at bremse skal du trække bremsegrebet langsomt opad for at bremse.
- Bremserne kan låses ved at trykke bremsegrebet ned.
- For at frigøre låsen skal du blot trække bremsegrebet lidt opad for at frigøre låsen.

Bakken:

- For at montere skal du sætte bakken ind i hullerne i Sæt sædepladen i.
- **Opmærksomhed!** Bakken er ikke egnet til transport af varme eller skarptskårne genstande.

Indkøbskurven:

- Indkøbskurven hænges på kroge til venstre og højre under sædepladen.

Sædepladen :

- Sædepladen er designet til at give dig mulighed for at at, at hvile kortvarigt eller at aflaste benene i kort tid.
- Sædepladen er ikke en erstatning for en stol. Før du sætter dig ned, skal du fjerne -bakken.
- Sæt derefter bremsen, og kontrollér, at rollatoren er sikker og skridsikker.
- Sæt dig langsomt og lige ned på sædepladen.
- Læn dig ikke skråt eller for langt tilbage mod rollatoren, risiko for at tippe og falde!

Tekniske data:

Art.-Nr. 31 000-004 Rollator			
Materiale:	Ramme af stålør	Samlet længde:	70 cm
Farve:	sølv, blå, rød	Samlet bredde:	60 cm
Sædehøjde:	ca. 61 cm	Håndtagshøjde justerbar:	ca. 78 - 100 cm
Sædebredde:	ca. 38 cm	Mål i sammenfoldettilstand:	ca. 60 x 30 x 90 cm
Levetid:	5 år	max. Nyttelast (bagage):	10 kg
		max. Samlet belastning:	125 kg

Vedligeholdelse og pleje:

- Rollatoren bør regelmæssigt, mindst hver 6. måned, kontrolleres af din forhandler, som kan opdage skader og slitage på et tidligt tidspunkt og træffe de nødvendige foranstaltninger.
- Som bruger vil vi gerne bede dig om regelmæssigt at kontrollere dækkenes slidbane og bremsernes effektivitet, Hvis du konstaterer fejl, skal du straks kontakte din forhandler.
- Kontroller regelmæssigt, at skruer, låsehåndtag og bolte er ubrudt og stærke.
- Rollatoren kan rengøres med en fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel, idet du skal sørge for, at der ikke kommer vand ind i rørene. Ved lettere tilsmudsning kan der også anvendes et rengøringsmiddel til glatte overflader (f.eks. glasrens). Brug aldrig rengøringsmidler, der indeholder olie eller opløsningsmidler!
- Rollatoren kan behandles med et kommercielt, klorfrit desinfektionsmiddel ved hjælp af tørre-desinfektionsmetoden.

Opmærksomhed, sørg for at følge producentens brugsanvisning!



Foldelås



Låsehåndtag



ergonomisk Håndtag

Bremsehåndtag



Holder til vandrestave