

## WIDEX ZPOWER UDSKIFTNING AF BATTERIDÆKSEL

1. Placer høreapparatet med Widex-logoet nedad og batteridækslet helt lukket.
2. Centrér batteridækslets hængselstift over centerhullet i det grå stabilitetsstykke.
3. Før forsigtigt værktøjet til fjernelse af stiftene **LIGE** ind i hængselstiften for at skubbe den ud i det grå stabilitetsstykke.  
**Hvis du føler modstand, juster værktøjet så det flugter med hængselstiften.**
4. Fjern batteridækslet ved at trække det lige ud fra høreapparatet.
5. Placer et batteri i ZPower-batteridækslet for at øge stabiliteten og gøre det lidt lettere at indsætte stiftene.
6. Isæt ZPower-batteridækslet med batteridækslet stifthuller langs høreapparatets kabinet for at sikre fri bane for hængselstiften.
7. Juster batteridækslets hængselstift, så den er vinkelret på høreapparatet.
8. Brug den flade side af værktøjet til fjernelse af batteridækslets stift til forsigtigt at skubbe hængselstiften tilbage på plads.
9. Sørg for at hængselstiften flugter fuldstændigt med høreapparatets kabinet.



En video, der viser udskiftningen af batteridækslet, kan ses her:

[DA.WIDEX.PRO/ZPOWER](https://da.widex.pro/zpower)