


Brugervejledning for Carilex® Dualflex Madrassen

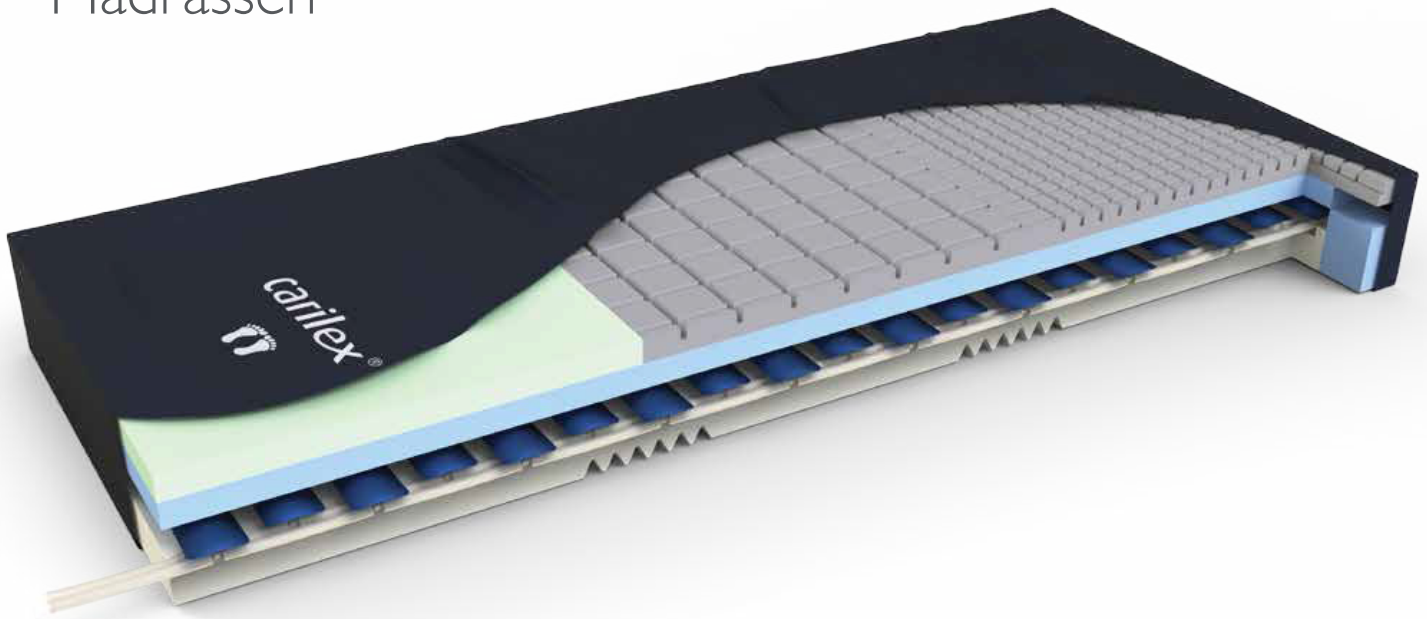

Dualflex er et dynamisk hybrid madrassystem, der kan bruges med pumpe og uden pumpe. Pumpen tages i brug ved patienter med særligt behov.

Dualflex har automatisk indstilling med mulighed for at justere patient komfort.


Madrassystemet placeres i en standard hospitalsseng og kan kombineres med sengens øvrige funktioner.

Dualflex kan håndtere patienter op til 250 kg.


Har du spørgsmål til Dualflex så kontakt hotline på 7640 1984. Hotline er døgnbemandet alle årets dage.

Madrassens opbygning:

- Madrassens åndbare overtræk kan lynes af og udskiftes. ————
- Madrassen er bygget op i tre lag:
 - Øverst: Geltex skummadras ————
 - I midten: 19 luftlameller ————
 - Nederst: Skummadras ————

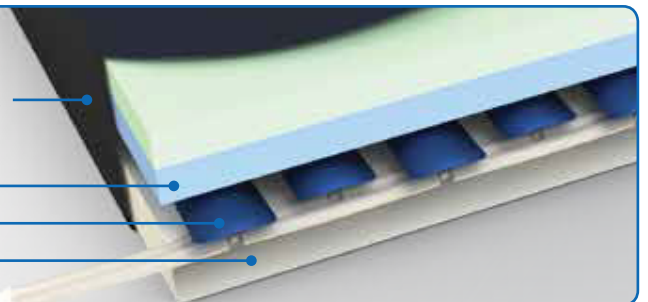

Brugervejledning for Carilex® Dualflex Styreenheden

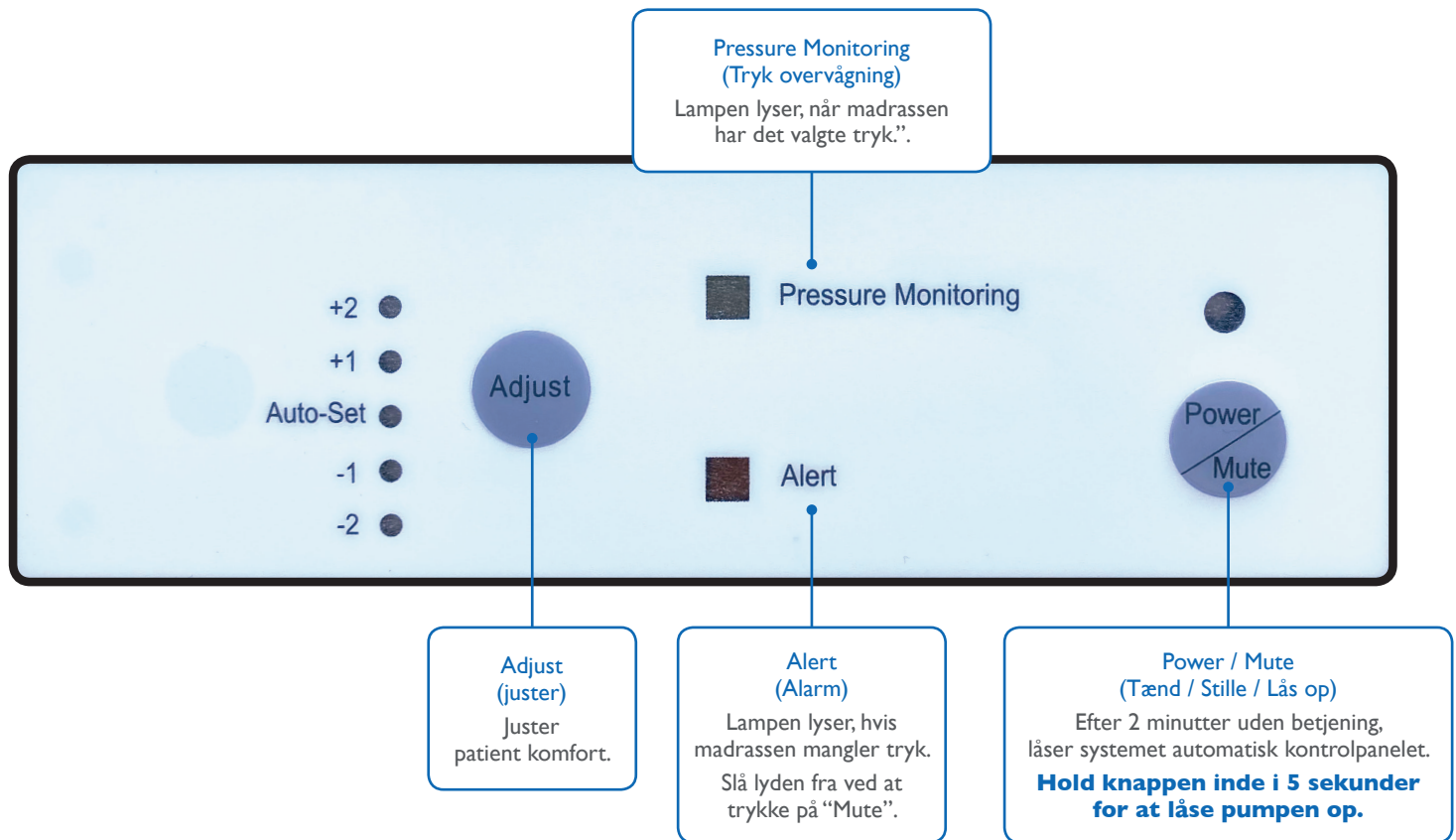

Opsætning af madrassen

Madrassen placeres i en tom seng og er klar til brug.

Hvis der er behov for pumpe:

1. Madrassens to slanger kobles til styreenheden på styreenhedens venstre side.
2. Ledningen tilsluttes styreenheden på venstre side og sættes i stikkontakten.
Hovedafbryderen på styreenhedens venstre side aktiveres.
3. Madrassens stropper fastgøres til den bevægelige del af sengebunden.
OBS: Ledningen kan med fordel føres langs madrassen og fikseres med madrassens stropper.
4. Du aktiverer nu styreenhedens "Power / Mute" (Tænd / Stille / Lås op) knap.
Pumpen starter.

Indstilling – "Adjust" (juster)

Patienten kan ligge i madrassen, mens madrassen fyldes.

Automatisk indstilling med mulighed for at justere patient komfort.

Vælg mellem: +2, +1, Auto-Set, -1 eller -2.
Træffes der ikke et aktivt valg, vælges "Auto-Set" automatisk.

Transport

Før:

- Ved transport tager du stikket ud af stikkontakten.
- "Alert" (Alarm) vil lyse ind til stikket sættes i stikkontakten igen.
- Du kan frakoble alarmen ved at trykke på "Power / Mute" (Tændt / Stille).

Efter:

- Efter transport sættes stikket i stikkontakten og madrassen husker tidligere indstillinger.