



Brugsanvisning

SureGrip


Danish **CARE** Supply
- fremtidens hjælpemidler

1. Anvendelse

Med den regulerbare stoleforhøjer Sure Grip, kan du nemt indstille højden på dine møbler, så den passer præcist til dit behov. Hvis du har nedsatte kræfter i arme og ben kan det gøre en stor forskel for dig i hverdagen.

2. Sikkerhedsforanstaltninger

Pas på dig selv når du bruger stoleforhøjer. Spørg om hjælp hvis møblet er for tungt eller stort.

3. Udpakning


Se om der er skader på produktet.

4. Sådan gør du

- Juster højden ved at dreje i bunden.
- Placer 2 SureGrip forhøjere ved de eksisterende møbelben.
- Sænk møblet forsigtigt ned i forhøjer, og sørg for at møbelbenet er centreret i forhøjer.
- Gentag dette for de modsatte møbelben.
- Test stabiliteten før anvendelse.
- Hvis møblet flyttes efterfølgende, skal der kontrolleres om SureGrip sidder korrekt.

5. Rengøring

Rengør jævnligt med en fugtig klud for at fjerne støv og skidt.

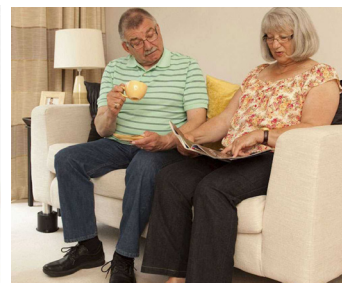

6. Skån dit gulv

Hvis møblet står på hårdt gulv, bør man anvende de medfølgende gummifødder, for at undgå skader.

7. Hvis møblet ikke har ben

Hvis møblet ikke har ben, kan man skrue eller klistre selve SureGrip forhøjer til møblet.

Specifikationer:

Maks ben diameter: 7cm

Bundens bredde: 13,1cm

Højde ved runde ben: 3,8-10cm

Højde ved firkantede ben: 10-16,3cm

Højde ved møbler med hjul: 7,5-13,8cm

Vægt: 1,5 kg

Maks belastning: 700 kg