



Danish **CARE** Supply

- fremtidens hjælpemidler

Brugsanvisning

Stoleforhøjer - Bambus

1. Anvendelse

Med disse forhøjer-klodser har du et effektivt hjælpemiddel, når du har behov for at hæve stolen, sofa, borde eller sengen.

Forhøjerne henvendes sig således til dig, som har nedsatte funktionsevner og kræfter i kroppen. En stoleforhøjer nedsætter behovet for kræfter i benet og knæene, når du skal op at stå.

De er lette at montere og har forskellige diametre, så de kan anvendes til flere forskellige bredder på benene på møblet. De er let at indstille, idet du bare vender klodserne og anvender den hulstørrelse, som du har brug for.

2. Sikkerhedsforanstaltninger

Pas på dig selv når du bruger stoleforhøjeren. Spørg om hjælp hvis møblet er for tungt eller stort.

3. Udpakning

Se om der er skader på produktet.

4. Sådan gør du

Løft det ene hjørne af møblet og læg forhøjerklodsen ind under. Fortsæt sådan ved alle 4 møbelben.

5. Rengøring

Rengør jævnlgt med en fugtig klud for at fjerne støv og skidt.

6. Bortskaffelse af produktet

Produktet er fremstillet i FSC godkendt bambustræ og skal bortskaffes på lossepladser og lingende.



Specifikationer:

Højde: 10 cm

Fordybningsdiametre: 2,5 cm – 5 cm – 7,5 cm

Vægt: 1,7 kg

Maks vægt: 380 kg

Disse forhøjerklodser er fremstillet i hårdt træ for at styrke deres holdbarhed.

Varenr.: 380150

HMI nr.: 120992