



Pill Popper



Danish CARE Supply

- fremtidens hjælpemidler

Produktbeskrivning

- Pres let tabletter ud af blisterpakninger
- Ergonomisk design
- Justeres til forskellige tabletstørrelser med den drejelige del
- Hygiejnisk håndtering
- Rengøres i maskinfatet, tåler alkoholvask

Mange mennesker har svært ved at få tabletter ud af blisterpakninger. Det kan være vanskeligt at dosere ned i en doseringsboks. Pill Popper er et værktøj til at lette håndteringen af piller.

Pres let tabletter ud af blisterpakninger, og kontroller, at pillen falder ned i det angivne doseringsrum via det gennemsigtige, aftagelige rør. Hygiejnisk og tidsbesparende håndtering.

Godkendt af Rheumatic Society som et produkt, der er let at bruge.

Ingen skruer eller skarpe kanter.

Anvendelsestips

- Rengør alternativt med lunkent vand og vaskemiddel. maskinvask (maks. 84 °C) før første brug.
- Hvis en Pille går i stykker, skal du bortskaffe den.
- Schine Pill Popper passer til de fleste pakker. Hvis der opstår problemer, hvor folien er sej, eller ved håndtering af meget store og meget små tabletter, anbefaler vi manuel håndtering.
- Leverandøren er ikke ansvarlig for forkert brug af Schine Pill Popper eller for forkert dosering af medicin

Specifikationer

Farve: Hvid med sort håndtag og røde detaljer.

Materiale: Genbrugeligt plastikmateriale.

Rengøring: Kan maskinopvaskes op til 84°C.

Længde: 20 cm

Højde: 12 cm

Bredde: 2 cm

Vægt: 90 g

