

Brugsanvisning

2019-09-11

Curera® sædehynde

Varenummer brugsanvisning: 95-001379



7 331345 044927



Indholdsfortegnelse

Vigtige sikkerhedsforskrifter	3
Indledning	3
Produktbeskrivelse og ydelse	4
Håndtering	5
Rengøring	6
Øvrige oplysninger	6
Tilbehør	8

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER

Læs alle instruktioner inden brug

ADVARSEL!

1. Curera® sædehynde er et hjælpemiddel og skal som alle hjælpemidler dagligt kontrolleres og inspiceres.
2. Produktet må kun anvendes til det formål, som det er beregnet til i henhold til beskrivelsen i denne brugsanvisning. Produktet må heller ikke kombineres, monteres eller repareres med andre dele, andet tilbehør eller andre reservedele end dem, der er beskrevet i denne brugsanvisning eller anden dokumentation fra Care of Sweden.
3. Må ikke anvendes i nærheden af eller i forbindelse med brandkilder/varme overflader, såsom ild, tændte cigaretter eller varme lamper. Produktet er brandtestet, men kan beskadiges, hvis det kommer i kontakt med brandkilder.
4. Produktet skal placeres og anvendes således, at det ikke bliver klemt eller beskadiget.
5. Hvis hynden har været udsat for høje temperaturer, eksempelvis opbevaret i direkte sollys, skal det inden brug kontrolleres, at den ikke er for varm at sidde på.
6. Kontrollér altid, at hynden har en passende størrelse.
7. Inden brug skal det altid kontrolleres, at hynden ikke er beskadiget.
8. Hvis hynden er beskyttet med et hygiejnebetræk, må der ikke anvendes anden heldækkende, plastbetrukken beskyttelse i kombination hermed. Dette kan påvirke betrækkets fugtgennemtrængelighed.
9. Undgå skarpe genstande, der kan beskadige hygiejnebetrækket.
10. Langvarig siddende øger risikoen for DVT (dybtliggende venetrombose)
11. Kontrollér regelmæssigt huden for rødmen. Hold straks op med at anvende hynden, hvis der opstår rødmen, og kontakt den person, der har ordineret hynden.
12. Hynden er primært beregnet til brug på et plant sæde. Er det et hængende sæde med større "hæng" end ca. 25 mm, anbefales en stabiliserende plade.

1 Introduktion



Læs altid brugsanvisningen inden brug.

1.1 Generelle oplysninger

Curera® sædehynde er medicinsk udstyr og er CE-mærket i henhold til Rådets direktiv nr. 93/42/EEC om medicinsk udstyr. Ifølge Lægemiddelstyrelsens forskrifter om medicinsk udstyr er det producentens pligt at indberette ulykker og hændelser. Vi beder derfor om, at alle oplysninger om eventuelle ulykker og hændelser, som vedrører vores produkter, omgående indberettes til din leverandør. Produktet opfylder de relevante dele i følgende standarder: SS 876 00 01, SS-EN ISO 12182, SS-EN ISO 14971, SS-EN ISO 10993-1, SS-EN ISO 12952, EN 14126.

Curera® sædehynde er fremstillet uden CFC, og skumkernen er fremstillet af allergivenlig polyether.

1.2 Tilsigtet anvendelse

Curera® sædehynde er en smidig, behagelig og holdbar sædehynde, som er beregnet til brug i en kørestol, men den kan naturligvis også anvendes i/på møbler. Hynden er konstrueret til at give en god trykfordeling og siddestabilitet. Curera®-hynden er velegnet til brug, når der ønskes en høj grad af komfort. Curera® sædehynde anbefales til personer med en vægt på op til 120 kg.

BEMÆRK! Curera® sædehynde anbefales ikke som underlag ved et opstået tryksår. I så fald skal der anvendes en specialhynde. Hvis brugeren føler smerte, eller hvis der bemærkes vedvarende rød hud, skal du omgående kontakte den ansvarlige for at få råd og hjælp.

1.3 Øvrige oplysninger

Plan for behandling af tryksår

For at opnå det bedst mulige resultat ved brug af dette produkt anbefales det at benytte en velstruktureret og veltilrettelagt arbejdsmetode. I vores retningslinjer med overskriften "Plan for behandling af tryksår" er der eksempler på, hvordan produkterne bruges.

Madrasguide

I denne guide får plejepersonalet hjælp til valg af madrasser fra Care of Sweden. Denne information kan hentes på vores hjemmeside www.careofsweden.se eller bestilles via vores kundeservice. Kontaktoplysningerne findes på sidste side.

1.4 Udpakning

Ved udpakning skal det kontrolleres, at ingen dele er beskadiget. Hvis der opdages skader, skal du kontakte din leverandør, inden produktet tages i brug.

2 Produktbeskrivelse og ydelse

2.1 Forklaring af betrækket

Betrækket af polyurethanbelagt polyester er nemt at håndtere og beskytte og kan klare de høje krav til rengøring og hygiejne. Se punkt 4 vedrørende information om rengøring.

Hygiejnebetrækket er væsketæt og nemt at håndtere og pleje. Betrækket er elastisk og smidigt med antiglid på undersiden og kan tages af, fordi der er lynlås i bagkanten.

2.2 Beskrivelse af produktet

Curera® sædehynde har en høj grad af komfort og en god funktionalitet og er nem at rengøre. Mærkningen på hynden gør det nemt at placere den korrekt.

Klassificering: ISO-kode 18 10 06 - Trykfordelende

Materiale i hynden: 100 % flammehæmmende polyesterskum

Højde: 6 cm

Garanti: 1 år

Brand: ISO 7176-16


Oplysninger om varenumre for Curera® sædehynde inkl. hygiejnebetræk.

Varenr.	Størrelse (B x D x H)	Anbefalet maks. brugervægt i kilo
52-035035	35 x 35 x 6 cm	120
52-035041	35 x 41 x 6 cm	120
52-040041	40 x 41 x 6 cm	120
52-040046	40 x 46 x 6 cm	120
52-040050	40 x 50 x 6 cm	120
52-045041	45 x 41 x 6 cm	120
52-045046	45 x 46 x 6 cm	120
52-045050	45 x 50 x 6 cm	120
52-050046	50 x 46 x 6 cm	120
52-050050	50 x 50 x 6 cm	120

3 Håndtering

Ved udpakning skal det kontrolleres, at ingen dele er beskadiget. Hvis der opdages skader, skal du kontakte din leverandør, inden produktet tages i brug.


- Hynden placeres i kørestolen med "firkanterne" opad (mærk med hånden) og den fasede kant fremad.

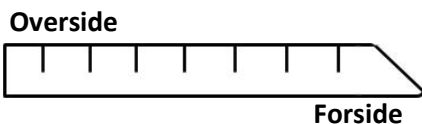

- Hynden er primært beregnet til brug på et plant sæde. Er det et hængende sæde med større "hæng" (h) end ca. 25 mm, anbefales en stabiliserende plade.



- Tag betrækket af og på som vist på nedenstående billeder. Så minimerer du risikoen for, at det går i stykker.

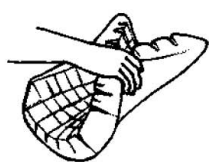

Bemærk!

Ved behov kan Curera® sædehynde beskæres, så den passer til alle stole. Betrækket kan også syes efter mål.

4 Rengøring

Det er vigtigt at følge nedenstående anvisninger, inden produktet anvendes igen til en ny bruger. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte den hygiejneansvarlige eller din leverandør for at få hjælp og vejledning.

BEMÆRK!

Følg de lokale retningslinjer og rengøringsmidlets brugsanvisning nøje.

Hvis bæreevnen stadig er god, og der ikke er nogen smittefare, kan hynden efter nedenstående rengøringsprocedure genanvendes til en ny person.

HYGIEJNEBETRÆK



Betrækket kan tørres af med et mildt rengøringsmiddel (f.eks. opvaskemiddel) og vand eller med et desinfektions- og/eller rengøringsmiddel, såsom DAX overfladedesinfektionsmiddel eller lignende. Virkon, Perform eller Desisoft kan også anvendes. Afførings- og blodpletter skal straks fjernes med koldt vand. Følg de lokale retningslinjer og brugsanvisningen til rengøringsmidlet nøje.



Betrækket kan maskinvaskes ved højst 95 °C, tørretumbles eller dryptørres.



Rengøringsmidler, som indeholder klor og fenoler, kan påvirke PU-overfladen negativt og bør undgås. Hvis der anvendes klor, anbefales en blanding med maks. 1 %.

SKUMKERNE



Punktrengøring med et mildt rengøringsmiddel (f.eks. opvaskemiddel) og vand eller med et desinfektions- og/eller rengøringsmiddel, som er beregnet til formålet, eksempelvis DAX overfladedesinfektionsmiddel eller lignende. Virkon, Perform eller Desisoft kan også anvendes.

Pres forsigtigt eventuelt vand ud. BEMÆRK! Du må ikke vride eller rulle hynden for at få vandet ud. Lad hynden tørre på et varmt, ventileret sted (ikke i sollys). Den skal være helt tør, inden den tages i brug igen.

5 Øvrige oplysninger

5.1 Opbevaring

Opbevaring skal ske i et tørt rum med stuetemperatur. Sørg for, at hynden er helt tør, inden den lægges til opbevaring. Undgå at udsætte hynden for direkte sollys.

5.2 Mærkning

Produktet er mærket med produktnavn, fremstillingsdato, varenummer, størrelse, pleje- og vaskeanvisninger samt EAN-nummer. Der er også et felt til egen mærkning (eksempelvis afdelingsnummer og navn). På hynden er også mærket, hvordan den skal placeres i stolen.

5.3 Garanti

Garantiperioden for dette produkt er angivet under punkt 2.2.

Garantien gælder produktionsfejl. Garantien gælder ikke almindeligt slid eller forringelse af produktet. Den gælder heller ikke skader, der opstår på grund af uagtsom eller forkert håndtering eller pleje.

5.4 Service og vedligeholdelse

Produktet kræver ingen anden service eller vedligeholdelse end rengøring i henhold til denne brugsanvisning.

5.5 Levetid

Produktets forventede levetid er 2 år.

5.6 Demontering og kildesortering

Produktet er helt genanvendeligt og skal sorteres som "brændbart affald". Ingen demontering er nødvendig.

5.7 Returnering og reklamationer

Reklamationer skal indberettes til din leverandør. Returnering af et produkt skal ske i henhold til vores instruktioner og må først ske, efter at reklamationen er indberettet til din leverandør. Transportskader skal indberettes til fragtfirmaet.

5.8 Symbolforklaring



Varenummer



Producent

XXXX-XX-XX

År-Måned-Dag



Læs brugsanvisningen



CE-mærket iht. Rådets direktiv nr. 93/42/EEC om medicinsk udstyr



Genvinding



Maskinvaskes ved 95° C



Klor



Tørretumbling



Dryptørring



Må ikke stryges



Tåler ikke kemisk rensning



Aftørring

6 Tilbehør

Til Curera® sædehynde fås også tilbehør i form af separate hygiejnebetræk.

Hygiejnebetræk, Curera® sædehynde

Varenr.	Størrelse (B x D x H)	Varenr.	Størrelse (B x D x H)
521-035035	35 x 35 x 6 cm	521-045041	45 x 41 x 6 cm
521-035041	35 x 41 x 6 cm	521-045046	45 x 46 x 6 cm
521-040041	40 x 41 x 6 cm	521-045050	45 x 50 x 6 cm
521-040046	40 x 46 x 6 cm	521-050046	50 x 46 x 6 cm
521-040050	40 x 50 x 6 cm	521-050050	50 x 50 x 6 cm

Hvis du ønsker nærmere oplysninger om vores produkter, bedes du kontakte din leverandør.



Producent/fremstillet af

 care of sweden

SUPPORTING LIFE

Kontakt:

Telefon: +46 (0)771 106 600

Fax: +46 (0)325 128 40

E-mail: export@careofsweden.se

Internet: www.careofsweden.com

Postadresse:

Care of Sweden AB
Box 146
SE-514 23 Tranemo

Besøgsadresse:

Fabriksgatan 5A
SE-514 33 Tranemo

Leveringsadresse:

Byns väg 4A
SE-514 33 Tranemo