

Vor supportserie er CE-mærket.



Sørg for, at der er plads nok rundt om halsen.

Selen skal anvendes i kombination med et hoftebælte!

Produktet skal monteres og justeres af relevant kompetent personale.



Tri-slide metoden (enkel)

**Anatomic brystbælte** er et positioneringshjælpemiddel for funktionshæmmede og bør bruges sammen med et hoftebælte. Bæltet anvendes til at positionere overkroppen. Gennemlæs hele brugsanvisningen inden anvendelse.

#### Montering på siddesystem eller kørestol:

- Se vores *Monteringsguide Support* for flere eksempler på forskellige monteringer på vores hjemmeside.
- Se også hjemmesiden under *Fæster & Beslag* for forskelligt monterings-tilbehør.
- Monter først hoftebæltet, f.eks. Sittbelt, (i henhold til den separate brugsanvisning) at placere og muligvis korrigerer brugerens bækken optimalt.

#### Montering på kørestol med blød ryg:

- Hvis kørestolens bagrør er synlig, kan brystbæltet let fastgøres ved at fastgøre stropperne rundt om disse bagrør. Hvis bagrør i passende højde monter ved hjælp af et Tri-glidespænde (se fig ovenfor), alternativt brug monteringsbeslag **varenr.: 371918 Støttebeslag 40 mm**.
- Hvis bagrørene ikke er synlige men dækket af rygbeklædningen, kan du muligvis bruge skrueene, der holder polstringen, til at fastgøre beslagene til brystbæltet (brug f.eks. **vare nr.: 387 Universalbeslag hoftebælte 40mm, M6 hul (2 stk.)**) Bor, hvis ingen eksisterende kan bruges. Brug et tri-slide spænde (se fig ovenfor).

#### Montering på kørestols- / sædesystem med hårdt ryglæn:

- Mål på bagsiden af kørestols- / sædesystemets ryg, hvor det er passende at placere det universelle beslag for brystbæltet for at nå den rigtige højde. (Sørg for, at de ikke er i vejen for noget, og brug skrueforbindelser). Ellers skal du vælge det passende sted til nye skruehuller. Fastgør spændet 340 bagpå ryglænet med selvskærende skrue alternativt andre skrue og islagsmøtrikker, der kan modstå mindst 90 kg i trækstyrke. Før stropperne gennem spænderne.

#### Justering af Anatomic brystbælte:

- 1) Justér stroppen for at overkroppen for at stabiliseres. Ved små justeringer skal du bruge stropperne på siden af spændet.
- 2) Juster højden så bæltet ikke sidder for højt eller for lavt.



371918 Supportbeslag



387 Universalbeslag



Spænde 340

Dette produkt er beregnet til at blive brugt til at positionere en bruger sikkert. Produktet må ikke bruges som sikkerhedssele under transport, som en fastholdningsanordning for en person eller på anden måde, der kan forårsage personskade.

OBS! Den der bevilliger hjælpemidlet eller en person med tilsvarende kompetencer og viden om brugeren og enheden skal altid udføre en risikoanalyse inden brug. Hvis denne analyse viser, at der kan være en risiko for alvorlig personskade, bør patienten aldrig efterlades uden opsyn, når han bruger enheden.

#### Efterkontrol - kontroller ved hvert tilfælde, hvordan brugeren sidder i stolen:

- trækretning • tryk eller skav af stropperne/selen

#### Vask/vedligeholdelse

60°, finvask. Ej tørretumbling. Tørreskab ved lav temperatur. Vi anbefaler hængetørring. For længre holdbarhed vask i vaskeposetvættpåse. Supportserien kan med fordel dagligt tørres af med en fugtig klud.

#### Garanti

2 års reklamationsret ifølge købeloven. Anvend kun reservedele bestilt fra Anatomic SITT A/S.

#### Kontrolrutine

Kontroller brugeren efter hver anvendelse for at opdage eksempelvis hudrødme. Hvis dette opstår, ophør da med anvendelse af hjælpemidlet. Kontroller stropperne regelmæssigt, især på fastgørelsespunkterne for at opdage slid eller om noget er gået i stykker.

#### Sikkerhed

Visuel revision af sømme, stropper og spænder, så de er komplette og funktionelle. Kontrollering af eventuelt slid af stropper og spænder skal udføres for at sikre, at enheden fungerer trygt og sikkert inden brug. Hvis du føler dig usikker, er du altid velkommen til at kontakte Anatomic SITT A/S.

#### Tilladelige tilpasninger inden for rammerne af CE-mærkning.

- Kapning af bånd, (brænd enderne for at forhindre, at båndet trævler). En tilpasning er en ændring, som gøres inden for rammerne for produktets CE-mærke. Alt andet er specialtilpasning. At produktet er CE-mærket indebærer at den opfylder alle relevante europæiske sikkerhedskrav.
- En tilpasning er en ændring, som gøres inden for rammerne for produktets CE-mærke. Alt andet er specialtilpasning. At produktet er CE-mærket indebærer at den opfylder alle relevante europæiske sikkerhedskrav.

#### Placeringsanvisning/Genplacering

Produktet er mærket med Anatomic SITT i tekst, der skal være læselig forfra. Vasketrådets etikette er placeret på bagsiden, som ikke skal ses, når selen bruges. For at forenkle og lette genmontering, f.eks. Ved vask, tag et billede af den rigtige indstilling under affprøvning eller lav en markering med en tekstilpen.

#### Genbrug

En brugt del eller et produkt adskilles og genanvendes i henhold til den gældende standard for genbrug.

Produkten er fremstillet af Anatomic SITT AB



Anatomic SITT AB  
Terminalgatan 1, 603 61 Norrköping  
Tel: +46 (0)11 16 18 00  
www.anatomicsitt.com



Anatomic SITT A/S  
Viengevej 4, DK-8240 RISSKOV  
Tel: +45 86 17 01 74  
www.anatomicsitt.com