

## Produktbeskrivelse

CARFLEX er en madras, der både fungerer profylaktisk og som et led i den lindrende og behandlende del af brugerens decubitus-problematik op til og med kategori 2.

Madrassen består af en enkeltlags PU-skumkerne med en vaffelskåret skumstruktur på liggefladen. Undersiden har et tværsnit, hvilket understøtter en ubesværet indstilling af patientsengen.

Skummadrassen er dækket af et shear-forebyggende trikotlag samt et brandhæmmende og beskyttende inkontinensbetræk.

Ved brug af senge med en længde på 220 cm skal den tilhørende madrasforlænger anvendes.

## Indikation

CARFLEX-madrassen er velegnet til både tryksårsprofylakse og tryksårsbehandling.

Den bløde tryksårsaflastende madras bidrager til forbedring af patienttilfredshed gennem gode ligge/sove komfortegenskaber og er velegnet til smertefølsomme patienter.

## Funktion / Anvendelsesformål

Liggefladen med vaffelstruktur muliggør en god tilpasningsevne til patientens anatomiske kropskonturer, idet kontaktrykket fordeles over et meget større område. Dette forbedrer blodgennemstrømningen til vævsområderne og minimerer risikoen for tryksår.

Madrassens inkontinensbetræk KOMFORT er kendetegnet ved stabilitet og lang holdbarhed. Det bi-elastiske beskyttelsesbetræk tilpasser sig konturerne i kroppen og er modstandsdygtig for bl.a. virus og bakterier.

En høj vanddamppermeabilitet og dermed åndbarhed sikrer et behageligt soveklima.

## Husk:

- Kontrollér madrassen før og under brug for mulige skader og defekter. Sørg for, at der ikke er opstået nogen skade eller mangler under opbevaring eller transport af madrassen. En beskadiget eller defekt madras må ikke bruges.
- Kontrollér om sengen er egnet til brug af CARFLEX-madrassen (er det den rigtige størrelse? etc.).
- Placér madrassen så den vaffelskårede liggeflade vender opad i sengen.
- Inkontinensbetrækket er påsat madrassen ved levering.

## Anvendelsesområde

CARFLEX er velegnet til brug i hjemmet, plejecentret, sygehuse og klinikker.

Madrassen kan anvendes i enhver type seng – både faste og indstillelige. Sengen skal være stabil og have en jævn liggeflade, der matcher de ydre kanter af madrassen. Sengen må ikke have nogen skarpe hjørner eller kanter, der kan beskadige madrassen. Det er vigtigt, at sengerammen forhindrer, at CARFLEX-madrassen kan glide ud af sengen. Den optimale trykaflastning opnås, når madrassen er plan. Madrassen må kun anvendes med det medfølgende betræk samt et lagen, der passer optimalt til madrassens mål, så der ikke opstår folder.

Hvis den tilhørende madrasforlænger skal anvendes, skal denne placeres i fodenden af sengen, og med samme fokuspunkter som beskrevet ovenfor ved selve madrassen.

CARFLEX velegnet til patienter, der vejer 40 kg til højst 130 kg.

### Anvendelsesrisici / kontraindikation

VIGTIGT! CARFLEX og madrasforlænger må ikke anvendes til brugere, som har skumallergi.

Bruger/personale skal have den rette ekspertise til at kontrollere produktets egnethed og for at vurdere eksisterende risici. Vær opmærksom på vægtbegrænsningerne for denne madras.

Undgå at bruger ligger direkte på eksisterende sår.

Ved brug i en seng med sengehest, skal det kontrolleres og sikres, at der ingen risiko er for, at patienten kan komme i klemme/til skade eller falde ud. **Husk**, at der skal være en frihøjde på mindst 22 cm målt fra liggeflade på madras og til toppen af sengehestene.

Beskyt madras/madrasforlænger mod åben ild (f.eks. fra cigaretter, stearinlys o.lign.). Der er risiko for brand, selv om begge er brandhæmmende.


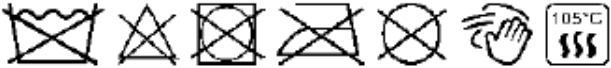




### Materiale / Pleje og rengøring

CARFLEX og madrasforlænger består af en enkeltlags åbenporret Polyurethan skumkerne, der kan rengøres/tørres af med alm. husholdningsrengøringsmidler eller ved at tørre af med et desinfektionsmiddel, som er på en klud. CARFLEX kan ligeledes autoklaveres ved op til 105 °.

Inkontinensbetrækket på både madras og madrasforlænger er aftageligt og kan åbnes ved hjælp af en skjult 3-vejs lynlås. Det kan vaskes i vaskemaskinen ved 60 ° - 95 ° C. Kan autoklaveres ved op til 105 °.

Betrækket kan desinficeres. Aftørring med desinfektionsmiddel er muligt med kommercielt tilgængelige desinfektionsmidler, men der bør kun anvendes klorfri midler. Brugervejledningen til brug af rengøringsmidler og desinfektionsmidler skal følges, ligesom den angivne vaskeanvisning skal følges.

### Teknisk data

Madras Materiale / Tæthed / Kompres.hårdhed	Elastisk Polyurethanskum – 37 kg/m <sup>3</sup> , 3,5 kPa
Madrasforlænger	Polyurethanskum
Inkontinensbetræk	PES-stof med Polyurethan belægning
Brandhæmmende	BS 7175 (CRIB 5)
Rengøring / vedligeholdelse	
Skumkerne	 
Skumkerne	 
PU-inkontinensbetræk	 

### Bemærk

Fremstillingen af CARFLEX og madrasforlænger er underlagt de højeste kvalitetsstandarder. For eventuelle spørgsmål, henvises til vores hjemmeside.

Madrasen skal anvendes i overensstemmelse med brugervejledningen, og denne skal følge madrasen. Dette for at sikre korrekt brug.

Der tages forbehold for fejl og mangler i oversættelsen af brugervejledningen.

### Mål

Varenr.	HMI-nr.	Mål	Vægt	Tilladt brugervægt
CARFLEX8320014	124607	83 x 200 x 14 cm	8,5 kg	40 – 130 kg
CARFLEX8520014	124613	85 x 200 x 14 cm	9,0 kg	40 – 130 kg
CARFLEX9020014	124619	90 x 200 x 14 cm	9,8 kg	40 – 130 kg
CARFLEX10020014	124625	100 x 200 x 14 cm	10,1 kg	40 – 130 kg

HMI-basen's produktserie QR-kode

QRickit



Serie 68785 fra hmi-basen.dk

