

Produktbeskrivelse

PU-inkontinensbetrækket har en skridsikker underside.

Kombinationsbetrækket af PU med en siddeflade af Air-Mesh materiale og en skridsikker underside.

Begge har et bærehåndtag på forsiden af puden, hvilket gør det lettere at håndtere og transportere puden.

Betrækket kan nemt trækkes af puden via en skjult 3-vejs lynlås.

Funktion / Anvendelsesformål

Begge inkontinensbetræk er velegnet til siddepuderne CUBE GEL, CUBE VISCO og CUBE FLEXI.

Husk:

- Kontrollér puden og pudens betræk før og under brug for mulige skader og defekter. Sørg for, at der ikke er opstået nogen skade eller mangler under opbevaring eller transport. En beskadiget eller defekt pude/betræk må ikke bruges.
- Placér puden så den skridsikre underside er placeret ned mod sædet (på kørestol, stol o.lign.).
- Tjek om bærehåndtaget på puden er placeret foran ved stolens/sædets forkant.
- Betrækket er påsat puden ved levering.

Anvendelsesområde

Begge inkontinensbetræk bør kun anvendes til siddepuderne CUBE GEL, CUBE VISCO og CUBE FLEXI.

Betrækket er beregnet til brug i kombination med siddepuderne CUBE GEL, CUBE VISCO og CUBE FLEXI i sædet på en kørestol eller stol. Sædet skal være stabilt og have en plan overflade, der matcher de ydre kanter af puden. Sædet må ikke have nogen skarpe hjørner eller kanter, der kan beskadige puden.

Anvendelsesrisici / kontraindikation

Undgå at bruger sidder direkte på eksisterende sår, når du placerer patienten.

Beskyt puden og betræk mod åben ild (f.eks. fra cigaretter, stearinlys o.lign.). Der er risiko for brand, selv om puden er brandhæmmende.

Materiale / Pleje og rengøring


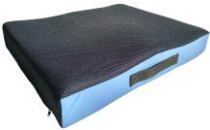


Begge betræk er aftagelige og kan åbnes ved at åbne den skjulte 3-vejs lynlåsen.

Det blå PU-inkontinensbetræk kan vaskes ved maks. 95 ° C. Kan autoklaveres ved op til 105 °.

Kombinationsbetrækket kan vaskes i vaskemaskinen ved 60 ° C. Kan autoklaveres ved op til 105 °.

Begge betræk kan desinficeres. Aftørring med desinfektionsmiddel er muligt med kommercielt tilgængelige desinfektionsmidler, men der bør kun anvendes klorfri midler. Brugervejledningen til brug af rengøringsmidler og desinfektionsmidler skal følges, ligesom den angivne vaskeanvisning skal følges.

Teknisk data

| | |
|--|--|
| PU-inkontinensbetræk | 58 % Polyurethan, 42 % Polyester |
| Brandhæmmende | BS 7175 (CRIB 5) |
| Kombinationsbetræk Skridsikker bund | 65 % Polyurethan, 35 % Polyester 57 % Polyurethan, 43 % Polyester |
| Brandhæmmende | DIN EN 597 I+II |
| Rengøring / vedligeholdelse | |
| 1. PU-inkontinensbetræk |  |
| 2. Kombinationsbetræk |  |
| |   |

Bemærk

Fremstillingen af begge betræk er underlagt de højeste kvalitetsstandarder. For eventuelle spørgsmål, henvises til vores hjemmeside.

Betrækkene skal anvendes i overensstemmelse med brugervejledningen, og denne skal følge betrækket. Dette for at sikre korrekt brug.

Der tages forbehold for fejl og mangler i oversættelsen af brugervejledningen.

| Mål | Varenr. - 1 | HMI-nr. | Varenr. - 2 | HMI-nr. |
|----------------|-------------|---------|-------------|---------|
| 38 x 38 x 8 cm | PUCOV3838 | 124934 | KOMCOV3838 | 124891 |
| 38 x 42 x 8 cm | PUCOV3842 | 124937 | KOMCOV3842 | 124894 |
| 40 x 40 x 8 cm | PUCOV4040 | 124940 | KOMCOV4040 | 124897 |
| 40 x 42 x 8 cm | PUCOV4042 | 124943 | KOMCOV4042 | 124900 |
| 42 x 42 x 8 cm | PUCOV4242 | 124946 | KOMCOV4242 | 124903 |
| 42 x 45 x 8 cm | PUCOV4245 | 124949 | KOMCOV4245 | 124906 |
| 45 x 42 x 8 cm | PUCOV4542 | 124952 | KOMCOV4542 | 124909 |
| 45 x 45 x 8 cm | PUCOV4545 | 124956 | KOMCOV4545 | 124912 |
| 48 x 43 x 8 cm | PUCOV4843 | 124959 | KOMCOV4843 | 124915 |
| 48 x 45 x 8 cm | PUCOV4845 | 124962 | KOMCOV4845 | 124918 |
| 51 x 43 x 8 cm | PUCOV5143 | 124965 | KOMCOV5143 | 124921 |
| 51 x 45 x 8 cm | PUCOV5145 | 124968 | KOMCOV5145 | 124924 |
| 51 x 51 x 8 cm | PUCOV5151 | 124971 | KOMCOV5151 | 124927 |
| 55 x 43 x 8 cm | PUCOV5543 | 124974 | KOMCOV5543 | 124930 |
| 55 x 45 x 8 cm | PUCOV5545 | 124977 | KOMCOV5545 | 124933 |

HMI-basen's produktserie QR-kode:

PU-betrækket:

QRickit



Serie 69792 fra hmi-basen.dk

Kombinationsbetrækket:

QRickit



Serie 69791 fra hmi-basen.dk

