

Produktbeskrivelse

WDS Skumunderlag med en højde på 5 cm bør anvendes som madraserunderlag til vækselftryksmadrasser.

Skummadrassen er dækket af et shear-forebyggende trikotlag samt et brandhæmmende og beskyttende inkontinensbetræk.

Indikation

WDS Skumunderlag er velegnet som madraserunderlag til vækselftryksmadrasser til behandling af både tryksårspylakse og tryksår.

WDS Skumunderlag er i kombination med en vækselfrykmadras beregnet til brugere/patienter, der på grund af sygdom, handicap eller alder har brug for længerevarende eller permanent sengeleje, og derved har risiko for tryksår. Madrassen er velegnet til smertefølsomme og kakektiske patienter.

Funktion / Anvendelsesformål

Det bløde Polyurethanskum i kombination med en vækselfrykmadras muliggør en god tilpasningsevne til patientens anatomiske kropskonturer, idet kontaktrykket fordeles over et meget større område. Dette forbedrer blodgennemstrømningen til vævsområderne og minimerer risikoen for tryksår.

Skumunderlagets inkontinensbetræk ECO er kendetegnet ved stabilitet og lang holdbarhed. Betrækket er modstandsdygtig for bl.a. virus og bakterier.

En høj vanddamppermeabilitet og dermed åndbarhed sikrer et behageligt soveklima.

Husk:

- Kontrollér madrassen før og under brug for mulige skader og defekter. Sørg for, at der ikke er opstået nogen skade eller mangler under opbevaring eller transport af madrassen. En beskadiget eller defekt madras må ikke bruges.
- Kontrollér om sengen er egnet til brug af WDS Skumunderlag (er det den rigtige størrelse? etc.).
- Inkontinensbetrækket er påsat madrassen ved levering.

Anvendelsesområde

WDS Skumunderlag er velegnet til brug i hjemmet, plejecentret, sygehuse og klinikker.

Skumunderlaget kan anvendes i enhver type seng – både faste og indstillelige. Sengen skal være stabil og have en jævn liggeflade, der matcher de ydre kanter af madrassen. Sengen må ikke have nogen skarpe hjørner eller kanter, der kan beskadige madrassen. Det er vigtigt, at sengerammen forhindrer, at WDS Skumunderlag kan glide ud af sengen. Den optimale trykaflastning opnås, når madrassen er plan.

Skumunderlaget må kun anvendes i kombination med en vækselfrykmadras, og den brugervejledning, der følger med en sådan madras.

WDS Skumunderlag velegnet til patienter, der vejer 40 kg til højst 130 kg.

Anvendelsesrisici / kontraindikation

VIGTIGT! WDS Skumunderlag må ikke anvendes til brugere/patienter, som har skumallergi.

Bruger/personale skal have den rette ekspertise til at kontrollere produktets egnethed og for at vurdere eksisterende risici.

Undgå at bruger ligger direkte på eksisterende sår.

Ved brug i en seng med sengehest, skal det kontrolleres og sikres, at der ingen risiko er for, at patienten kan komme i klemme/til skade eller falde ud. **Husk**, at der skal være en frihøjde på mindst 22 cm målt fra liggeflade på madras og til toppen af sengehestene.

Beskyt skumunderlaget mod åben ild (f.eks. fra cigaretter, stearinlys o.lign.). Der er risiko for brand, selv om madrassens ECO betræk er brandhæmmende.



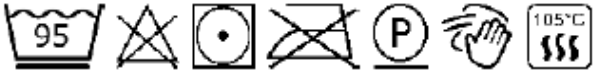
Materiale / Pleje og rengøring

WDS Skumunderlag er et madrasunderlag bestående af Polyurethanskum. Skumunderlagets dækkende trikotland kan rengøres/tørres af med sæbe, og aftørres med et desinfektionsmiddel, som er på en klud. Kan vaskes ved op til 40 ° C.

Inkontinensbetrækket ECO er aftageligt og kan åbnes ved at åbne lynlåsen. Det kan vaskes i vaskemaskinen ved 60 ° - 95 ° C. Kan autoklaveres ved op til 105 ° C.

Betrækket kan desinficeres. Aftørring med desinfektionsmiddel er muligt med kommercielt tilgængelige desinfektionsmidler, men der bør kun anvendes klorfri midler. Brugervejledningen til brug af rengøringsmidler og desinfektionsmidler skal følges, ligesom den angivne vaskeanvisning skal følges.

Teknisk data

Materiale / Tæthed / Kompressionshårdhed	Polyurethanskum	
Inkontinensbetræk	PES-stof med Polyurethan belægning Overflade/vægt: 120 g/m ²	
Brandhæmmende	BS 7175 (Crib 5)	
Rengøring / vedligeholdelse	Kan rengøres med sæbe, aftørres med desinfektionsmiddel, og vaskes ved op til 40° C m/trikotlandet.	
Skumkerne		
Inkontinensbetræk		
		

Bemærk

Fremstillingen af WDS Skumunderlag er underlagt de højeste kvalitetsstandarder. For eventuelle spørgsmål, henvises til vores hjemmeside.

Skumunderlaget skal anvendes i overensstemmelse med brugervejledningen, og denne skal følge madrassen. Dette for at sikre korrekt brug.

Der tages forbehold for fejl og mangler i oversættelsen af brugervejledningen.

Varenr.	HMI-nr.	Mål/cm	Vægt/kg	Varenr.	HMI-nr.	Mål/cm	Vægt/kg
WDSSKUM832005	125319	83x200x5	3	WDSSKUM852005	125322	85x200x5	3

HMI-basen's produktserie QR-kode

QRickit



Serie 70865 fra hmi-basen.dk

