

Brugsanvisning HYBRID sædepude (rev 2024-10)

Dette udstyr efter mål er fremstillet i overensstemmelse med Forordningen for Medicinsk Udstyr, 2017/745, herunder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Schou Rasmussen leverer denne sædepude efter mål med en forventning om, at der fra kundens side afsættes ressourcer til at følge op på brugeren af puden de første 14 dage efter den er taget i brug, mhp. at evaluere om puden opfylder det forventede formål.

Forhandler: Denne brugsanvisning skal udleveres til kunden. Kontrollér, at brugeren af **HYBRID** sædepuden forstår produktoplysningerne.

Kunde: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt for at få den optimale brug af **HYBRID** sædepude. Anvend puden under vejledning fra fagprofessionelle. Opbevar denne brugsanvisning til fremtidigt brug af **HYBRID** sædepude.

Leverancens indhold

1 **HYBRID** sædepude

1 aftageligt standardbetræk

1 pumpe

1 brugsanvisning

1 handske

1 sæt lappegrej

Produktbeskrivelse

HYBRID sædepude er opbygget af en 55 kg brandhæmmende koldskumsbase med en brønd til ROHO-indlæg. Pudens har et let sidestyr og har afslutningsvis et stykke 20 mm trykaflastende Latex W8S over siddefladerne. Pudens har en skrå forkant for at opnå bedst mulig understøttelse.

Puden fås også med et stort integreret sidestyr i aluminium med polstring for at modvirke frøstilling.

HYBRID sædepude yder maksimal trykaflastning af tuber og trochanter. Skummet og brønden til ROHO-indlægget er med til at skabe stabilitet i siddestillingen samt at forhindre bagudkipning af bækkenet.

ROHO-indlægget i **HYBRID** sædepude har to kamre og dermed to ventiler – én i højre side af pudens og én i venstre.

Puden leveres med aftageligt og vaskbart betræk med mulighed for inkontinensbetræk.

Puden leveres desuden i faste breddemål på hhv. 40 cm, 45 cm og 50 cm. Dybden på puden tilpasses den enkelte bruger.

Husk at sikre, at du har valgt den rette størrelse pude til den stol, brugeren anvender puden i. Målene anvendes også til at bestille ekstra betræk til puden.

Pudens erklærede formål er at give brugeren en stabil siddestilling og sikre en trykfordeling, som forebygger trykskader på kroppen.


**Hvis du ønsker yderligere information om HYBRID sædepude kontakt venligst fabrikanten:
SCHOU RASMUSSEN A/S, Lyngager 8, DK-2605 Brøndby,
Tlf. 44531727, e-mail: flemming@sr-v.dk**

Enhver alvorlig hændelse, der er indtruffet i forbindelse med puden, bør indberettes til:
Schou Rasmussen A/S og Lægemiddelstyrelsen

Brugsanvisning

- Maksimum brugervægt: 180 kg.
- Fjern al emballage før brug.
- Anbring puden på en stol eller kørestol med mærkatet "Bag/Back" og lynlås placeret bagud. Den formede overflade skal vende opad, mens ROHO-indlæggets to ventiler skal pege udad (se billede).
- Puden må ikke komme i nærheden af skarpe genstande, da der er risiko for punktering.
- Det er vigtigt, at man udelukkende benytter medfølgende pumpe, betræk og lappegrej.
- Betrækket er åndbart og strækbart i flere retninger, hvilket sikrer brugerens komfort og maksimerer skummets effektivitet.
- Undgå at anvende yderligere lag eller polstring mellem person og pude, da dette kan reducere pudens effektivitet.
- Det indvendige skum bør inspiceres regelmæssigt. Hvis betrækket beskadiges, må puden ikke anvendes før der er monteret et nyt betræk.
- Ved montering af betrækket skal det sikres, at alle skummets hjørner er korrekt monteret i betrækket. Det skal desuden sikres, at den formede overflade vender op mod brugeren, og at mærkatet "Bag/Back" og lynlåsen er placeret bagud og nedad.
- Skummet tåler ikke vand og væsker.
- Skummet kan ikke vaskes.

- Skridsikring på undersiden: Der er påsyet 2 stk. 5 cm bred Astrakan (Velcro)
- Kontrollér, at puden sidder fast på bunden efter placering.
- Puden skal monteres som anvist på nedenstående billede:

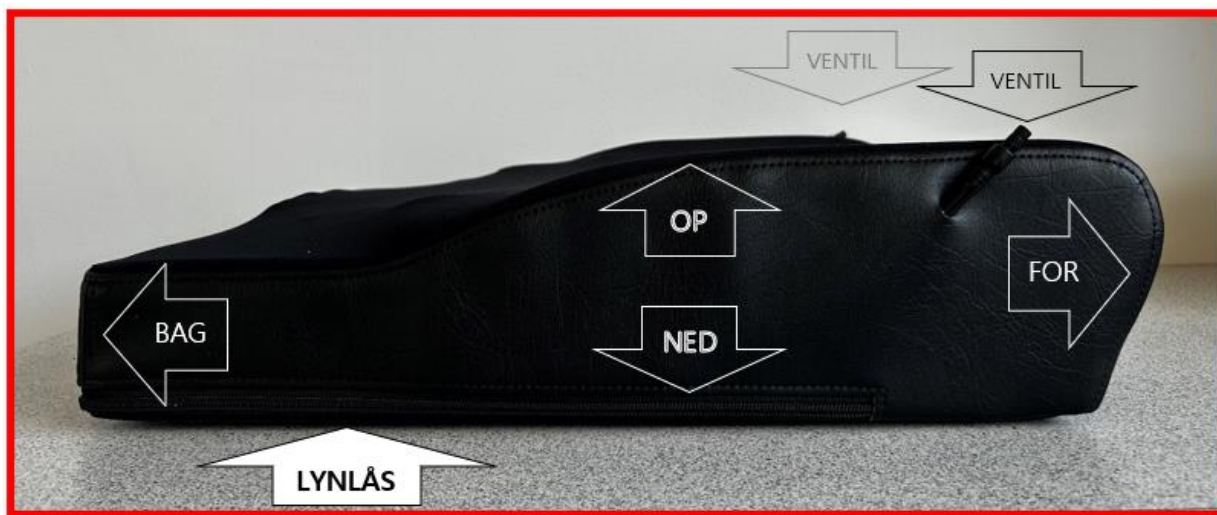

Korrekt indstilling af HYBRID pude med ROHO-indlæg

Det er **yderst vigtigt**, at denne instruktion følges ved **hver** indstilling af **HYBRID**-puden.

OBS! Brugeren må ikke være placeret i puden ved gennemførelse af punkt 1-3.

1. Åben de to ventiler på hver side af puden (drej i retning mod uret). Pump luft i begge med den medfølgende pumpe – indlægget skal fyldes helt med luft.
2. Fjern pumpen og lad ventilerne stå åben i ca. 1 min., så der opstår atmosfærisk tryk (det gennemsnitlige lufttryk af jordens atmosfære ved havets overflade).
3. Luk ventilerne (drej i retning med uret).
4. Placer brugeren på puden.
5. Åben den ene ventil og lad en smule luft sive ud. Luk straks ventilen igen. Dette gentages med den anden ventil.
6. Udfør et håndtjek:
Læg hånden mellem puden og brugerens dybeste knoglefremspring og kontrollér, at brugeren ikke sidder igennem. Der skal kunne være 2 fingre (ca. 2,5cm) mellem knoglefremspringet og pudens bund.
 - a. Hvis der er plads til **mere** end 2 fingre (ca. 2,5 cm) gentages punkt 5 og 6.
 - b. Hvis der **ikke** er plads til 2 fingre, er der lukket for meget luft ud, og punkt 1-6 skal gentages.

Rengøring og pleje

Betrækket er vaskbart og kan rengøres med en opløsning af neutralt vaskemiddel og varmt vand påført med engangsklud eller maskinvaskes ved 60°C med vaskemiddelopløsning.

Vi anbefaler ikke at vaske betrækket i vaskemaskinen ofte.

Luk lynlåsen på betrækket før vaks. Det anbefales at bruge et vaskenet for at skåne betrækket og andet, det vaskes sammen med. Vaskes med lignende farver. Brug ikke blegemiddel, blødgøringsmiddel eller kemiske rensmidler! Betrækket skal lufttørre efter vask.

OBS! Betrækket tåler ikke tørretumbler – skal lufttørre!

Betrækkets underside og kanter bagtil samt højre og venstre side er monteret med sort PVC.


PVC-materialet rengøres bedst ved aftørring med fugtig klud påført opvaskemiddel. Stærkt tilsmudsede områder rengøres med f.eks. Maxi 3 eller andet alkalisk rengøringsmiddel. Prøv altid først på et ikke-synligt sted ved benyttelse af stærkt koncentrerede rengøringsmidler. Brug ingen opløsningsmidler, renseservietter, blegemidler, voks eller lignende.

Brandsikkerhed er efter EU klasse B1.

Holdbarhed

Forventet levetid er 12-18 måneder ved daglig brug. Brugsværdien kan øges ved at beskytte puden mod fugt og direkte sollys samt at stille sædepuden på højkant, så den kan ventileres, når den ikke benyttes. Når skummet er dødt – dvs. ikke rejser sig helt igen efter at have været presset sammen, nedsættes pudens effekt og bør skiftes snarest muligt. Kontrollér derfor jævnligt puden – især efter 1 års anvendelse.

Pudens forventede holdbarhed er gældende fra den tages i brug. Derfor anbefaler vi, at man benytter sig af afkrydsningsskemaerne, der er placeret på hhv. pudens skum og betræk. På betrækket er afkrydsningsskemaet på symærket med vaskeanvisning. Billedet nedenfor viser, hvor afkrydsningsskema for ibrugtagning er placeret på pudens skum:

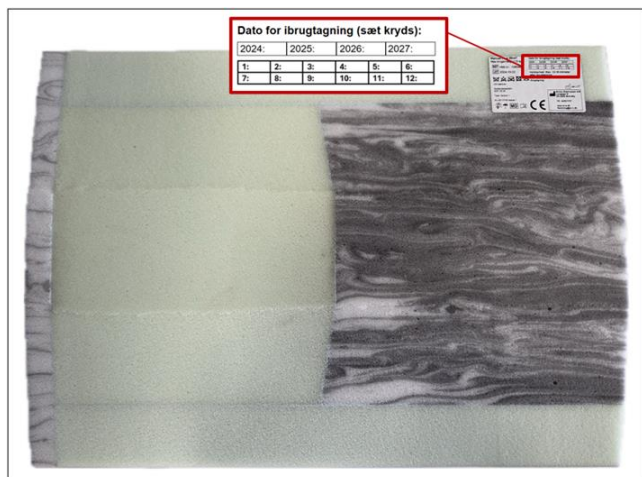

Billede: Pude uden betræk. Afkrydsningsskema er placeret i bunden af puden. Kryds af hvilket år samt hvilken måned (1-12), puden er taget i brug. Din pude kan se anderledes ud end denne.

Bortskaffelse

Brugeren skal sørge for en aftale med kommunen om bortskaffelse eller tilbagelevering.

Tilkøb af betræk

Af hygiejniske årsager kan det være praktisk med ekstra betræk til puden.

Ved behov for hyppig vask af betræk kan supplerende betræk magen til standardbetrækket på **HYBRID** sædepude tilkøbes. Der kan yderligere tilkøbes et inkontinensbadehættebetræk der monteres under standardbetrækket, for ekstra beskyttelse af skumpuden i tilfælde af hyppig/daglig disponering for væsker. Betræk kan tilkøbes hos Schou Rasmussen.

Tekniske data

Tekniske data omkring anvendte materialer kan rekvireres hos fabrikanten.

Risikoanalyse

I henhold til gældende europæisk lovgivning om medicinsk udstyr er der udarbejdet en risikoanalyse af hver **HYBRID** sædepude.

Garanti

HYBRID sædepude produceres og forhandles i henhold til gældende europæisk lovgivning om medicinsk udstyr. Fabrikantens forpligtelser i tilfælde af fejl og mangler betinges af, at tredjemand ikke har foretaget indgreb i produktet.

Fabrikant

SCHOU RASMUSSEN A/S - Lyngager 8 - 2605 Brøndby - Danmark

Telefon: 44531727 / www.sr-s.dk / flemming@sr-v.dk