



DA Brugsanvisning..... 2



FIND RO OG BALANCE MED RELOAD KRAVEN

Tillykke med din Reload sansekrave.

Reload sansekraven er et kvalitetsprodukt fra ZiboCare. Den er udviklet i et lækkert design og materiale - med stærk baggrund i vores mange års erfaring inden for sundhedssektoren og sansestimulerende hjælpemidler - og i tæt samarbejde med brugere, sundhedspersonale og designer.

ZiboCares sanseprodukter er udviklet på baggrund af internationale anerkendte teorier om sanseintegration og er veldokumenteret i forskning, dokumentation, afprøvning og cases.



Læs altid hele brugsanvisningen inden brug.

VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER OG KONTRAINDIKATIONER

Læs alle instruktioner inden brug.



Reload kraven må kun anvendes til det tiltænkte formål som beskrevet i denne vejledning. Produktet må ikke kombineres, samles eller repareres med andre dele, andet tilbehør eller andet end det, der er beskrevet i denne vejledning, eller i anden dokumentation fra ZiboCare.



Kontroller altid, at produktet er intakt før anvendelse. Er der brud på stoffet, må kraven ikke anvendes eller vaskes.



Reload kraven må kun bruges under opsyn til brugere med dårlig balance, psykisk handicappede eller brugere, der ikke kan kommunikere deres oplevelser med Reload kraven. Vær opmærksom på brugerens reaktion på kraven.



Reload kraven må ikke anvendes i nærheden af eller i forbindelse med brandkilder/varme overflader som fx ild eller brændende cigaretter. Rygning frarådes under brug af Reload kraven.



Reload kraven må ikke bruges til at ligge ned og sove med. Placer ikke kraven over halsen i liggende stilling.



Reload kraven må ikke anvendes til børn under 3 år, da den indeholder små partikler.



Reload kraven må ikke varmes i mikroovn eller anden varmekilde.



Vær opmærksom på ikke at snuble over Reload kraven, hvis den ligger på gulvet.



Vær opmærksom på at krave og betræk inden vask kan indeholde overskudsfarve, og ved kontakt med varme, sved og fugt kan lettere afsmitning på lyse overflader forekomme.

SÅDAN VIRKER RELOAD KRAVEN

Formål og anvendelse

ZiboCare Reload kraven kan bruges til at hjælpe med at skabe ro og tryghed for brugeren. Kravens tryk kan være en hjælp til at give brugeren en bedre kropsfornemmelse og øget velvære.

Grundlaget for alle ZiboCares sanseprodukter, herunder Reload kraven, bygger på den internationalt anerkendte teori om sanseintegration. Denne teori er udviklet i 1970'erne af A. Jean Ayers, ergoterapeut og psykolog fra USA, og tager udgangspunkt i, hvordan hjernen bearbejder sanseindtryk, og hvordan man kan påvirke de forskellige sansestimuli via tyngde og tryk i berøringssansen i huden (taktilsansen) og bevægelsessansen i muskler og led (den proprioceptive sans).

Gennem kravens jævnt fordelte tyngde og uensartede overflade påvirker kraven disse sanser.

Anvendelsesmiljø

Reload kraven kan bruges alle steder; i hjemmet, skolen, SFO, institutioner, dagtilbud, hospitaler og arbejde.

Kraven kan med fordel bruges i undervisningssituationer, hvor barnet eller den unge har behov for at øge koncentrationen og samle sig om en opgave, eller f.eks. på den tid af dagen, hvor overskuddet er ved at være opbrugt.

Reload kraven kan bruges i opholdsrum og/eller spiserum i fritidsordning, på institutioner, plejehjem etc. ved behov for samling, ro og øget kropsfornemmelse.

I hjemmet kan Reload kraven f.eks. bruges ved lektielæsning, hvor der er behov for at samle sig om opgaverne, i spisesituationer eller ved behov for at gear ned; få skuldrene ned og lade roen indfinde sig efter en anstrengende dag i skole eller på arbejde.



HVEM HJÆLPER RELOAD KRAVEN

Reload kraven hjælper typisk brugere med udfordringer inden for følgende områder:

- Neuropsykiatriske diagnoser
- Fysisk og psykisk uro og/eller angst
- Demenstilstande
- Fysisk og psykisk nedsat funktionsevne efter hjerneskade
- Neurologiske lidelser
- Motorisk uro
- Spændingshovedpine
- Koncentrationsproblemer

Reload kraven kan bruges uanset alder (dog ikke af børn under 3 år) og af personer med eller uden diagnoser.

ANVENDELSE AF RELOAD KRAVEN

Reload kraven lægges over skuldrene, omkring nakken, med åbningen fremad på brystet. Bruges der betræk på kraven, skal åbningen på betrækket vende ind mod kroppen.

Kraven kan trækkes mere eller mindre op i nakken, og til omkring halsen alt efter individuelle ønsker og behov.

Kraven kan lægges på og bæres enten i siddende stilling eller i oprejst stilling. Kravens tyngde og balance sikrer, at den ligger stabilt - selv under lettere aktivitet.

Reload kraven kan også for mange med fordel kombineres med brug af Reload vesten, for herved at opnå stimuli af en større del af kroppen. Se mere på www.zibocare.dk.

Ved tvivl om brug af Reload kraven - evt. i kombination med Reload vesten, eller hvorvidt kraven vil egne sig til en speciel situation eller udfordring - ring til ZiboCare kundeservice, hvor sundhedsfagligt uddannet personale vil give professionel rådgivning og sparring.

Eksempler på brug af Reload kraven:





RELOAD STØRRELSE OG VÆGT VARIANTER

Variant	Vægt	REF. nr.	HMI nr.
Reload krave, voksen	2,5 kg	7000248003	127738
Reload krave, voksen	2,0 kg	7000248002	127735
Reload krave, junior	1,0 kg	7000248001	127732

TILBEHØR

Transport- og opbevaringstaske

Reload kraven leveres i en smart, praktisk og funktionel taske, som gør det nemt at tage kraven med overalt; i skolen og studier, på arbejde, på weekend, på ferie mm. Samtidig beskytter tasken kraven mod snavs og smuds.

Betræk

Der kan tilkøbes betræk til Reload kraven. Det påføres let kraven og skåner den mod snavs og smuds. Kraven kan også bruges uden betræk, men det anbefales at benytte betræk for at beskytte kraven og nedsætte frekvensen mellem vask af kraven - og dermed forlænge dens levetid.

Vaskepose

Med Reload kraven følger en vaskepose med lynlås, som skal bruges til at lægge kraven i under vask.

Tilbehør

Følgende artikler kan bestilles ekstra efter ønske og behov:

Artikel	REF. nr.
Betræk til Reload krave, junior	7000248004
Betræk til Reload krave, voksen	7000248005
Vaskepose	7000248006
Transport-/opbevaringstaske	7000248007

RENGØRING, VEDLIGEHOLD OG VASK

Vaskeanvisning

Reload kraven og betræk vaskes ilagt den medfølgende vaskepose i en almindelig vaskemaskine. Behov for vask afhænger af brug og anvendelse. Overgår kraven til en anden bruger, anbefales det, at kraven vaskes, og der skiftes til et rent betræk.

NB! Vaskes med lignende farver, da overskudsfarve kan forekomme. Overskudsfarven aftager med tiden, ligesom farven ændres og får patina efter gentagende vask.



- Kontroller altid at Reload kraven er intakt før vask, og at der ikke er skader eller brud på stof eller syninger.
- Er der brud på stof eller syninger, kan kraven ikke vaskes.
- Reload kraven skal vaskes ilagt en vaskepose.
- Reload betræk kræver ikke vask i vaskepose.
- Reload kraven og betræk vaskes på skåneprogram ved max 60°C og skal tørre liggende.

Vedligehold

Det anbefales at lufte kraven jævnligt.

Udover vask og vedligehold, som beskrevet ovenfor, kræver Reload kraven ingen rengøring eller vedligeholdelse.

GENERELLE OPLYSNINGER

Dette produkt er medicinsk udstyr og er CE-mærket i henhold til Medical Device Regulation 2017/745 om medicinsk udstyr.

Brugeren og/eller patienten bør indberette enhver alvorlig utilsigtet hændelse, der er indtruffet i forbindelse med udstyret, til fabrikanten og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten er etableret.

Opbevaring

For bedst beskyttelse af Reload kraven skal den opbevares i den medfølgende taske, som beskytter mod smuds og snavs. Reload kraven skal altid opbevares tørt. Sørg for at Reload kraven ikke ligger på gulvet, hvor man risikerer at snuble i den.

Mærkning

Reload kraven er mærket i henhold til EU-lovgivningen for medicinsk udstyr klasse 1, herunder med bl.a. produktnavn, produktionsdato, varenummer, størrelse/vægt og CE-mærkning. Etiketten med relevant information, herunder vaskeanvisning, er syet i kraven, så informationen altid er let tilgængelig.

Levetid

Produktet har en forventet levetid på 2 år baseret på korrekt brug, håndtering, vask og opbevaring som beskrevet i brugsanvisningen. Levetiden kan blive forkortet ved hyppig vask. Er der brud på stof eller syninger, bør kraven ikke genanvendes. Det er brugerens ansvar løbende at vurdere, om produktet kan anvendes ud over den anførte levetid.

Genanvendelse og bortskaffelse.

Vi tænker på miljøet og arbejder ud fra FN's verdensmål. Ved bortskaffelse kan Reload kraven opdeles i følgende enkeltdele, som kan genanvendes:

- Stof
- Plast granulat

Affald sorteres og bortskaffes efter lokale regler.

Garanti

Der ydes 2 års garanti på produktionsfejl.

Garantien bortfalder i følgende tilfælde:

- Manglende eller forkert vedligehold af Reload kraven
- Voldsom eller forket brug af Reload kraven
- Overbelastning af Reload kraven

Sporbarhed

Produktet er på etiketten mærket med produktionsmåned og -år, samt serienummer og strejkode.

Returering og reklamationer

Ved eventuel returering eller reklamation tages kontakt til der, hvor Re-load kraven er købt. Her vil de hjælpe med den videre håndtering af sagen i henhold til gældende forretningsbetingelser.

Symbolforklaring

	Advarsel, se under <i>vigtige sikkerhedsregler</i>		Max. vasketemperatur 60°C. Skånevask
	Referencenummer		Må ikke bleges
	Fabrikant		Må ikke stryges
	Produktionsdato som anført på kravens etiket		Må ikke tørretumbles
	Lotnr.		Tåler ikke kemisk rens
	Medicinsk udstyr		Må ikke opvarmes i f.eks. mikroovn
	Se brugsanvisning		Sansestimulerende
	CE-mærket iht. class 1, MDR 2017/745		

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Størrelse: Se produktvariationer

Fyldvægt: Se produktvariationer

Fyld: Plast beads

Tekstil krave, betræk og pose: 46% bomuld, 26% viskose, 26% polyester, 2% elastan, Oekotex 100.

Klasse: Medicinsk Udstyr klasse 1

Standarder: EU Medical Device Regulation MDR 2017-745



ZiboCare Denmark ApS
Præstemarksvej 67, Hatting
DK-8700 Horsens
Denmark
www.zibocaredenmark.com

Ver.: 2.00
11.2023



ZiboCare[®]
Denmark