

Yderligere praktiske anbefalinger:

- For at beskytte materialet, skal du kun bruge Oliz® produktet indendørs.
- Det anbefales, at bruge begge hænder når produktet skal flyttes. Skil evt. produktet ad når du skal flytte det rundt.
- Hvis du transporterer produktet i et køretøj, skal produktet fastgøres for, at forhindre det i at flyve rundt og skade nogen.
- Hvis der er hul i produktet, skal dette fjernes fra personen. Oliz® produktet skal kontrolleres jævnligt for skader, da indholdet kan være farligt for børn under 3 år, samt mennesker med demens.

Vedrørende miljøbeskyttelse:

Hjælp miljøet ved ikke at bortskaffe dit produkt i husholdningsaffaldet. Klip produktet i stykker og fordel de enkelte komponenter, som stof, plast og metal efter lokale bestemmelser - i de relevante genanvendingsystemer.

Garanti:

Ved produktionsfejl giver Oliz® to års garanti. Denne garanti er kun gyldig, hvis produktet anvendes som beregnet. Skader forårsaget af ukorrekt eller u hensigtsmæssig brug er udelukket fra garantien.

For yderligere spørgsmål om anvendelsen af Oliz® produktet, er du velkommen til at kontakte os.

Produktet kan transporteres i en taske. Ved korrekt brug får du et produkt der holder længe. **Sørg for at gemme dette informationsark til senere brug.**

Ordre:

År:

Produkt: Fuzz stor



Godkendt ved EN71-3 og EN12182

Dansk Design er produceret i EU - www.oliz.dk

Oliz - Bornholmsvej 10 - 7400 Herning -DK -tlf +45 20 78 79 54

Oliz®



Denne "sko" hjælper med, at bringe ro til urolige og rastløse fødder. Der er tyngde i toppen af skoen og gryn i sålen. Når skoen er på mærker personen et let tryk omkring fødderne og tæerne kan bore sig ned i sålen og derved opnå taktil stimuli. Kan bruges til både børn og voksne.

"sko" til ben/fødder med uro

Vigtige instruktioner før brugen af Oliz® produktet:

Oliz® Fuzz stor er et hjælpemiddel til personer, der har uro i kroppen. Åben skoen og stil fødderne på sålen og læg den tunge overdel hen over fødderne, lukkes med velcro. Giver stimuli ved et let tryk øverst på fødderne og er dejlig blød under fødderne. Kan bruges til højstol ved mindre børn, samt helt op til str. 42 i skostørrelse.

Oliz® Fuzz stor er designet til personer i alderen +3 år.
Størrelse: Højde 170 mm - længde 310 mm - bredde 350 mm Vægt: 4,8 kg.

Materiale stof:	100% Imiteret læder/PU
Materiale indvendig:	90% Plastic granulat 2% metal

Oliz® bruger kun kvaliteter, der ikke indeholder kræftfremkaldende stoffer. Derfor er der ikke brugt flammehæmmende midler på produktet.

Pløje instruktioner:

- Må ikke vaskes
- Må ikke bleges.
- Må ikke stryges.
- Ikke egnet til tørretumbler.
- Må ikke renses.



Rengør Oliz® produktet med en blød klud og brug et egnet rengøringsmiddel eller desinfektionsmiddel egnet til kropskontakt. Skal efter tørres med rent vand for at undgå skader på stoffet.

Opbevaring:

- Af sikkerhedsmæssige årsager anbefaler vi, at Oliz® produktet opbevares utilgængeligt for personer, der kræver tilsyn.
- Hold Oliz® produktet væk fra skarpe/ varme genstande og åben ild.

Vigtige anvisninger:

- Oliz® Fuzz har velcro lukning, så vær opmærksom på at velcroen kan kradså placér skoen forsigtigt ved personen.
- Binde båndet kan føres omkring en højstol så den ikke kan sparkes væk. Eller omkring benene på en almindelig stol.
- Har personen meget tynde ben kan midter stroppen føres gennem personens ben og hæftes på bagsiden af hælen. Derved får du en meget tætsiddende sko.
- Det er vigtigt, at overvåge personen under brug, da produktet har godt med tyngde, der kan påvirke personen under brug.
- Et Oliz® produkt bør kun bruges med samtykke fra personen. Hvis der er ubehag ved brug af produktet, skal det fjernes straks.
- Vær opmærksom på, at personen ikke bliver for vant til produktet så virkningen fortager sig. Produktet skal ses, som et hjælpemiddel mod uro og bruges i begrænsede tidsintervaller alt afhængig af hvilket behov der er.
- Når den ønskede effekt er opnået, skal produktet fjernes med forsigtighed. Der må ikke kastes med produktet, da tyngden i produktet kan forårsage skade både på produktet, men også på personer i nærheden af produktet.

Advarsler:

- Hvis personen er stærkt begrænset af motoriske og / eller fysiske forhold, skal Oliz® produktet bruges med særlig forsigtighed.
- Hvis personen har tendens til at vil vandre, kan der være fare for at personen kan falde hvis ikke fødderne er løsnet i skoen.
- Vi anbefaler generelt, at personer der bruger et Oliz® produkt overvåges under brug.
- Da der forefindes lange bånd på produktet må produktet aldrig være i nærheden af personer uden de er under opsyn, da båndet kan give anledning til kvælningfare.
- Hold luftvejene frie når produktet anvendes. Da stoffet ikke er åndbart.
- Et Oliz® produkt bør ikke bruges nær vand, da det kan give anledning til drukne fare.
- Produktet må ikke stå direkte på gulvet, da sand og urenheder kan give skader på stoffet. Stil den på et tæppe/ håndklæde.